

INFODENT®

www.infodent.it **MENSILE D'INFORMAZIONE MERCEOLOGICA DENTALE**

n. 3 • 2007 – anno XIX – CENTRO-SUD ITALIA

Il nuovo Sistema di Endoscopia Orale

Inside

Vi garantisce l'accesso ad un mondo in cui tutto è possibile:
Come entrare in un luogo buio...



...e accendere la luce.

FARO

FARO S.p.A.

via Faro, 15 - 20060 Orzago (Milano) ITALIA - Tel. +39 039 60780 - Fax +39 039 6010340

GET INSIDE THE FUTURE

IN QUESTO NUMERO A CONFRONTO:

ORTOPANTOMOGRAFI ANALOGICI

– Geometria e parametri

Pag 5

DISINFETTANTI PER MANI

– Mani pulite, ma non solo

Pag 23

TERMOFORMATRICI

– Per farne di tutte le forme

Pag 33

APPROFONDIMENTI

ORTOPANTOMOGRAFI ANALOGICI

– Primi nella storia, da sempre
all'avanguardia

– Sistemi Orthoralix 9200 a film

Pag 10

DISINFETTANTI PER MANI

– Igiene profonda nel rispetto
della pelle

– HD 410 – 430 e 435 per la
disinfezione e detersione delle mani


Pag 30

TERMOFORMATRICI

– Horiform: la piccola-grande
termostampatrice

– Termoformatrici "MinistarS" e
"Nuova Biostar"

Pag 37

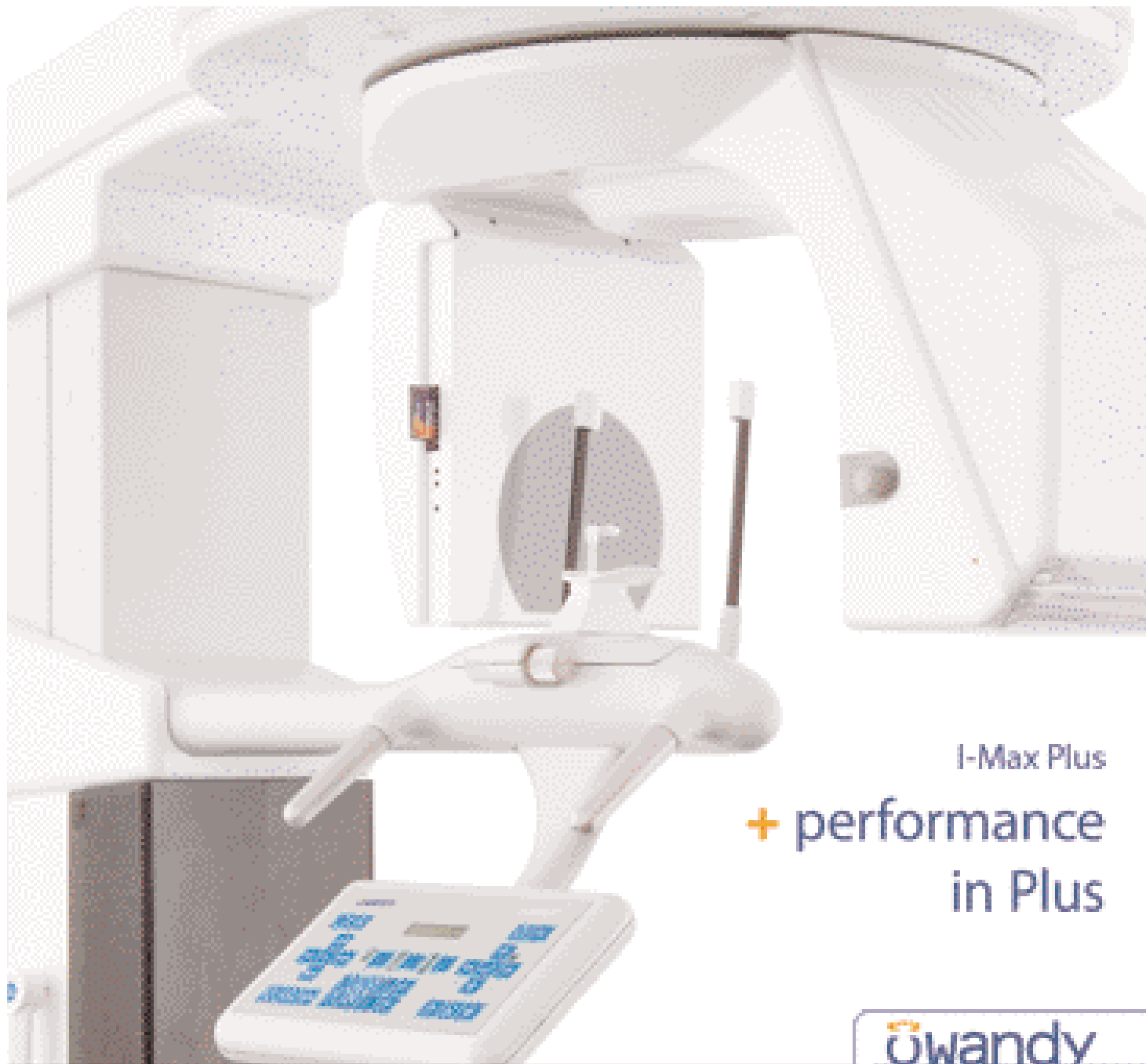


I-Max Plus
 + performance
 in Plus

owandy
 DIGITAL IMAGING, STORAGE & SOFTWARE

I-Max Plus
 Panoramico
 digitale Dual System

CCD alta definizione + forte riduzione di dose raggi + pannello di controllo virtuale vfo reale + 12 programmi d'esame + 18 programmi anatomici + posizionamento paziente face-to-face + Conversione USB2 immagine in tempo reale + Compact Flash acquisizione senza PC + programma gestione immagini QuickVision + estensione Caphi digitale.

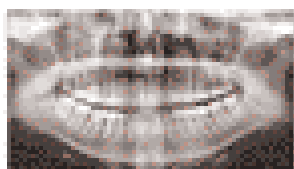

Per maggiori informazioni o per la vendita, contattate il vostro rivenditore autorizzato. Trovate la lista dei rivenditori presso www.owandy.com

Sensore digitale
 Crystal-8 8M1




Telecamera digitale
 Real 16-T



Radiografica HP
 Altra DC



Software
 QuickVision

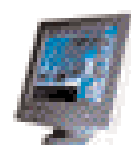

Owandy Radiologia Italia
 Via del Guelfo, 57
 20080 Desio (MI)
 Tel: 0362 62 11 06
 Fax: 0362 62 17 07
 Email: info@owandy.com
www.owandy.com

Direttore responsabile
Riccardo Chiarapini
Segreteria di redazione
Stefano Toticchi
Coordinamento
Diana Carbonetti
Direzione grafica
Gisella Benedetti
Consulenza scientifica e normativa
Alberto Emiliani
Collaboratore
Cristina Rodighiero
Impaginazione e grafica
B&C s.r.l. - divisione grafica
Marketing e Pubblicità
Gianluca Passeri tel. 0761.393306 - 335.1213136
Baldo Pipitone tel. 06.97277679 - 336.773328

Mensile d'informazione commerciale del dentale
ANNO XIX - n. 3 marzo 2007
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in A.P. - D.L.
353/2003 (conv. in L. 26/02/2004 n° 46) art. 1 comma
1 DCB VITERBO - Autorizzazione del Tribunale di
Viterbo n. 341 del 7/12/88

Editore B&C s.r.l.
Strada Teverina Km. 3,600 - 01100 VITERBO
Telefono 0761.393.1 - Fax 0761.393.222



Stampa - Graffietti Stampati snc
S.S. Umbro Casertinese Km. 4,500
Montefiascone (VT)

Testata volontariamente sottoposta a
certificazione di tiratura e diffusione in
conformità al Regolamento C.S.S.T.
Certificazione Stampa Specializzata Tecnica

Per il periodo 1/1/2006 - 31/12/2006
Tiratura media: 16.067
Diffusione media: 15.818
Certificato CSST n. 2006-1307 del 20.02.07
Società di Revisione: RSM Ria & Partners Spa
Tiratura del presente numero: (17.800)
una copia euro 0,77 - contiene I.P.
La redazione non restituisce il materiale utilizzato

SOMMARIO

5 **A CONFRONTO:** ORTOPANTOMOGRAFI ANALOGICI

Geometria e parametri

7 *Tabelle di comparazione*

10 **APPROFONDIMENTI:**

- Primi nella storia, da sempre all'avanguardia
- Sistemi Orthoralix 9200 a film

13 **AGENDA:**

Congressi e Fiere in Italia e all'estero
(Aprile/Maggio)

16 Calendario dei corsi
(Marzo/Aprile/Maggio)

23 **A CONFRONTO:**

DISINFETTANTI
PER MANI

Mani pulite, ma non solo

25 *Tabelle di comparazione*

30 **APPROFONDIMENTI:**

- Igiene profonda nel rispetto della pelle
- HD 410 - 430 e 435 per la disinfezione e detersione delle mani

33 **A CONFRONTO:**

TERMOFORMATRICI
Per farne di tutte le forme

35 *Tabelle di comparazione*

37 **APPROFONDIMENTI:**

- Horiform: la piccola-grande termo-stampatrice
- Termoformatrici "MinistarS" e "Nuova Biostar"

39 **DALLE AZIENDE:**

- Dentoflex e Dentolino: l'innovazione nell'igiene orale
- OpusDuo Aqualite
- Get inside the future
- Fantasmino Ortolab

• Videothron: la Comunicazione in sala d'attesa

43 **IN VETRINA:**

Ogni mese i prodotti in offerta proposti dagli operatori

45 **ANNUNCI ECONOMICI:**

Annunci gratuiti di offerta e ricerca collaborazione, offerta e ricerca attrezzatura, offerta e ricerca attività

INSERZIONISTI

• A&A General Consulting (Galbiati) pag. 31 • Amici di Brugg pag. 38 • B&C pagg. 12/43/44 • Burzacchi pag. 22 • Casa Schmidt pag. 14 • Class Implant pag. 18 • Collegio dei Docenti di Odontoiatria pag. 32 • Dent Up pag. 13 • Dental Shine pag. 46 • DL Medica pag. III Cop. • Dolphin Computer pag. 41 • Faro pag. I Cop. • Fordent pag. 4 • Fornilimplant pag. IV Cop. • Giorgi Forniture Dentali pag. 48 • Horis pag. 37 • Imeneo Antonio pag. 40 • Instrumentarium pag. 10 • Kavos Italia pag. 10 • Laboratorio Odontotecnico Michele Mealli pag. 3 • Mariotti pagg. 19/43 • Mectron pagg. 47/49 • Multysystem pagg. 20/43 • Odontocard pag. 21 • Ogna Laboratori Farmaceutici pag. 30 • Orthopost pag. 39 • Ortolab pag. 10 • Owandy pag. II Cop. • Physioline pag. 16 • Samdent pag. 21 • SDM pag. 30 • Smile Center pag. 42 • Smile Creation Italia pag. 43 • Softwork pag. 45 • TD Service pag. 50 • Tecno Med pag. 37 • TP Italia pag. 37 • Vimar pag. 11 • Welltrade pag. 15/17

Informativa ai lettori - Questa rivista Le è stata inviata tramite abbonamento, l'indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per l'invio della rivista, per l'invio di altre riviste, per l'invio di proposte di abbonamento, per l'invio di informazioni tecniche e commerciali, nonché per la divulgazione di eventi formativi e promozionali e per la cessione degli stessi a terze aziende per le medesime finalità. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Qualora venisse esercitato il diritto alla cancellazione lo stesso comporterebbe il mancato invio della presente rivista. Il titolare del trattamento è B&C srl con sede in Viterbo, Strada Teverina Km 3,600, nella persona del suo legale rappresentante.



LABORATORIO ODONTOTECNICO

Michele Mealli & C. snc
Via della Vetrina 81/103
50063 Fiesole Valdarno (FI)
Tel. 05592498 - Fax 0559157403
e-mail: mmealli@tin.it


Visitate il nostro sito internet
www.dentalmealli.it



Protesi su barra
con abbiastelli



Arretrati adigione
in ceramica

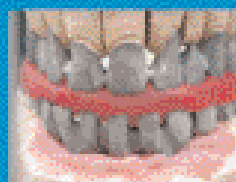


Prova finali

Specializzati in:
Protesi implantare
Passivazione Cresco™
Metalceramica
Corone integrati
Tecnica Press
Corone Galvano
Protesi in titanio

The Dental Company

sirona.

C8+

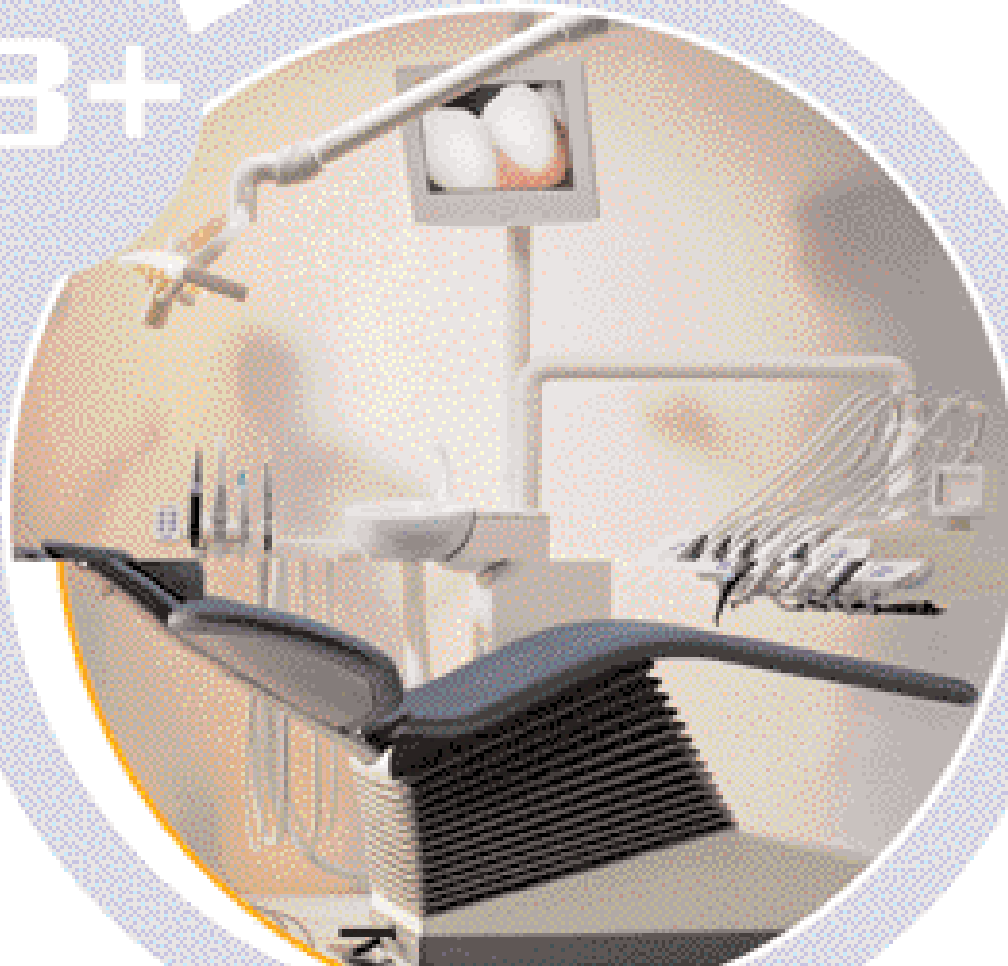

€ 10.200,00 + IVA

con turbina T2R in omaggio




GRUPPO
FORDENT
DENTAL SUPPLY

ESPOSIZIONE VIA ATRIE, 5/7/9 - CUNEO BNHA TEL. 06.79.62.180 - 06.79.04.10.36 - 06.79.35.05.08 S.A.

WWW.FORDENTSRLL.IT - FORDENTSRLL@FORDENTSRLL.IT

ORTOPANTOMOGRAFI ANALOGICI A CONFRONTO

Geometria e parametri

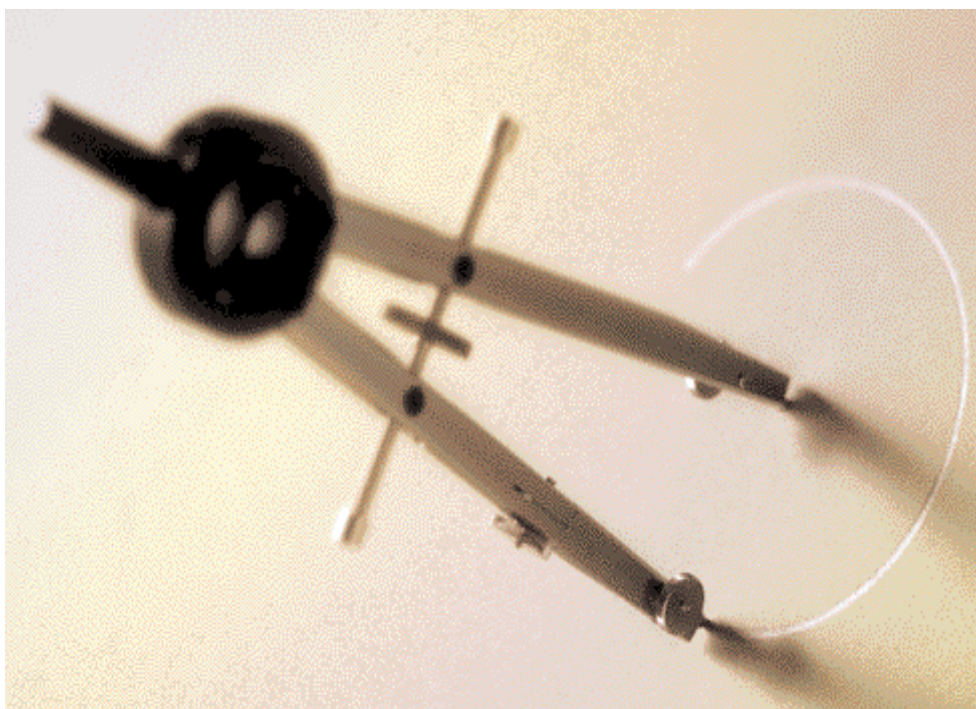

L'ortopantomografia è un esame radiologico di base che permette di pianificare il trattamento odontoiatrico con maggior precisione e sicurezza. Essa, infatti, fornisce dati completi sul sistema di masticazione e permette il riconoscimento delle connessioni funzionali e patologiche.

Per ottenere la proiezione delle arcate - che sono una struttura curvilinea ovoidale complessa - è necessario utilizzare una tecnica che si basa sulla rotazione intorno alla testa del paziente del tubo radiografico durante contemporanea rotazione della cassetta radiografica. Il fascio di raggi x emesso dal tubo è assai sottile ("radiografia a fessura") così da attraversare volta a volta un'unica sottile sezione delle arcate e proiettarne l'immagine radiografica su una precisa posizione della pellicola.

La rotazione e i movimenti sincronizzati del tubo radiogeno e del ricettore d'immagine producono un'immagine nitida dell'anatomia del paziente all'interno dello strato focale e offuscano gli oggetti davanti e dietro.

Nella radiografia panoramica,

la sfida è quella di ottenere un'immagine senza distorsioni delle arcate la cui forma è irregolare e varia da un paziente all'altro e di ottenere contrasto e luminosità d'immagine riproducibili e uniformi dell'oggetto (la testa), la cui densità, dimensione e forma sono irregolari e variabili negli individui.

Per ottenere una buona immagine radiografica panoramica è necessario un buon posizionamento del paziente. L'operatore, infatti, deve posizionare i denti e la mascella del paziente in modo da coincidere con lo strato focale.

Il sistema di posizionamento del paziente offerto dal panoramico deve quindi essere il più semplice possibile e deve permettere all'operatore di monitorare costantemente il paziente e di rilevarne immediatamente eventuali cambi di posizione.

Ovviamente, tutti gli accessori di posizionamento del paziente devono essere realizzati in materiale e devono essere autoclavabili per garantire la massima igiene.

IMMAGINI DI QUALITÀ

Fondamentale è anche il controllo dei parametri d'imaging secondo la corporatura del paziente. È quindi indispensabile che il panoramico abbia un dispositivo di imaging il cui strato focale segua l'anatomia esposta, con il risultato di radiografie precise e senza distorsioni.

Il panoramico, quindi, deve permettere la regolazione della dimensione e forma dello strato secondo l'anatomia individuale del paziente. Infatti, vi sono differenze significative


I parametri d'esposizione

Il contrasto e la luminosità dell'immagine finale dipendono dalla quantità di radiazioni, dai parametri usati per l'esposizione, dalla combinazione pellicola-schermo e dallo sviluppo. Dal punto di vista dell'unità radiografica l'impostazione dei kV (voltage anodico del tubo radiogeno) ha l'influenza maggiore sul contrasto dell'immagine. Inoltre, quanto più piccola è la variazione dei kV, causata dal generatore (fluttuazione), tanto migliore è la qualità delle radiazioni e più uniforme è il contrasto e la luminosità dell'immagine. L'impostazione dei mA (corrente anodica del tubo radiogeno) ha l'influenza maggiore sulla luminosità dell'immagine e il tempo di esposizione influenza la luminosità dell'immagine.

nella forma e dimensione della mascella a seconda dell'età, del sesso e della razza. La forma della mascella umana è irregolare e non può quindi essere approssimata solo tramite forme ellittiche.

Per una corretta geometria dell'immagine delle radiografie panoramiche il fascio raggi deve essere ortogonale all'oggetto, in modo che l'anatomia appaia sulla radiografia senza distorsioni. Inoltre, per evitare che i denti adiacenti si sovrappongano sull'immagine panoramica, il fascio raggi deve essere parallelo alle superfici interprossimali dei denti.

La geometria dell'immagine deve essere in grado di eliminare le ombre superflue e le immagini fantasma causate da oggetti al di fuori dello strato dell'immagine. Le tipiche ombre superflue sono causate da strutture anatomiche come le vertebre cervicali, i rami mandibolari, l'osso ioide od oggetti artificiali come corone metalliche, fili metallici e piastre

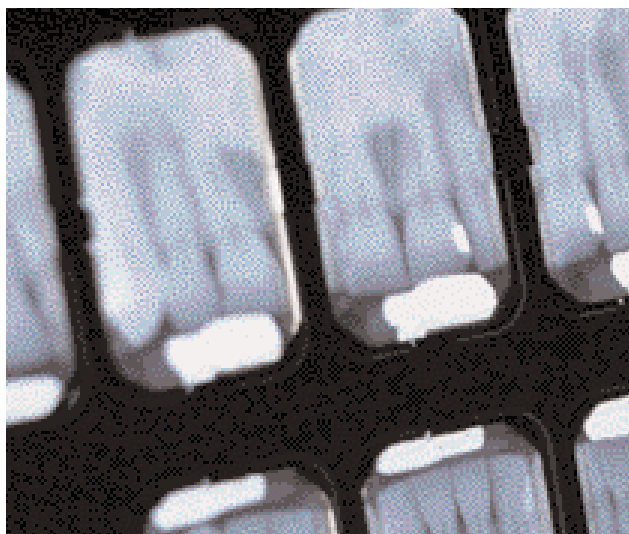

di ricostruzione mascellare. Per ottenere immagini con valori di contrasto e luminosità desiderati bisogna ricordare che la radiopacità di ogni paziente varia a seconda della dimensione, della razza e dello spessore dei tessuti molli e dell'osso.

L'operatore deve essere in grado di regolare i parametri d'immagine più importanti (kV, mA). L'ottenimento di radiografie di qualità dipende dall'esperienza dell'operatore e dal controllo della qualità dello sviluppo. Per un operatore meno esperto, la selezione dei parametri d'esposizione corretti può essere difficile. Ecco perché alcuni panoramici prevedono un controllo automatico dell'esposizione che misura la radiotrasparenza del paziente e regola i valori d'esposizione corretti per ottenere la densità ottica e il contrasto dell'immagine ottimali.

L'ingrandimento della radiografia deve essere costante, sia nella direzione orizzontale sia in quella verticale, in modo da favorire anche le misurazioni anatomiche.

Alcuni panoramici sono dotati di un sistema di marcatura della pellicola. Questa avviene durante l'esposizione e i parametri d'esposizione appaiono

automaticamente sulla pellicola, garantendo così una facile identificazione dei dati del paziente e dei parametri di esposizione.

Lo sviluppo delle tecniche digitali ha influito anche sui panoramici tradizionali. Generalmente, infatti, le unità più avanzate sono già predisposte per un eventuale e successivo passaggio al sistema digitale.

La tomografia

Il trattamento implantare ha creato una più vasta richiesta di tecniche radiografiche per la valutazione pre-chirurgica e post-operatoria del paziente. I seguenti importanti fattori dovrebbero essere chiaramente visibili:

- larghezza bucco-linguale dell'osso;
- entità dell'osso corticale e alveolare;
- larghezza della cresta nel sito dell'impianto;
- pavimento del seno mascellare;
- distanza tra la cresta alveolare e il bordo superiore del canale mandibolare nella direzione bucco-linguale.

Dato che questi fattori non sono visibili nelle radiografie panoramiche o periapicali, per ottenere informazioni complete sono necessarie le immagini tomografiche.

GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SUGLI ORTOPANTOMOGRAFI ANALOGICI

Blue X Imaging srl -

02.45712171 - www.blux.it

Faro spa - 039.68781 - www.faro.it

Gendex Dental Systems srl -

02.618008.1

www.gendex-dental.com

Instrumentarium - Palodex Group

Oy - 0362.331191 -

www.instrumentariumdental.com

Owandy - VSM - 0362.621106 -

www.owandy.com

Planmecca Oy (Dati forniti da Dental

Network srl - 0444.963200 -

www.planmecca.com -

www.dentalnetwork.it

Sirona Dental Systems -

www.sirona.de (Importatore e

distributore STD spa - 045.8281811

- www.stdspa.com)

Soredex (Importatore e distributore

DL Medica spa - www.dlmedica.it)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

I dati pubblicati in questa sezione sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. I prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Per immagini panoramiche di qualità, l'unità radiografica dovrebbe fornire:

- Sistema di posizionamento per impostare la corretta posizione e angolazione secondo l'anatomia del paziente.
- Spessore dello strato selezionabile per far fronte alle diverse necessità diagnostiche.
- Radiografie con ingrandimento costante che consentano misurazioni precise.
- Possibilità di eseguire immagini individuali (in manuale) e serie di immagini (in automatico) di qualsiasi parte della mascella.

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Ortopantomografi analogici				
Denominazione del prodotto	CRANEX EXCEL CEPH	CRANEX TOME CEPH	ORTHOPANTOMOGRAPH® OP/OC200 (A)	ORTHOPHOS PLUS CEPH
Produttore	Soredex	Soredex	Instrumentarium Palodex Group Oy	Sirona Dental Systems
Breve descrizione	Doppi tubi radiogeni indipendenti	Tomografo con scansione a spirale per tomografie a sezione trasversale	Apparecchiatura radiologica per esami panoramici e cefalometrici	Ortopantomografo analogico per panoramiche tele
Braccio per teleradiografia	Si L.L./P.A./A.P./Mano	Si L.L./P.A./A.P./Mano	Si AP/Lat/proiezioni speciali	Si L.L./P.A./A.P./carpale
Cassetta (cm)	15x30	15x30	15x30 e 24x30 (opzionale)	15x30
Schermi (tipo)	Lanex M	Lanex M	Ektavision, Lanex regular, medium	Lanex medium a luce verde
Cefalometria	Si, 24x30 oppure 18x24	Si, 24x30 oppure 18x24	Si, 18x24 e 24x30	Si, 18x24, 24x30
Colonna motorizzata	Si	Si	Si	Si
Escursione verticale (cm)	Utile da 85 a 170	Utile da 98 a 180	Ca 150	149-212
Pannello di comando	Microprocessore	Display interattivo digitale	Digitale a led, programmi e parametri	Comando remoto
Tipo di generatore	Alta frequenza	Alta frequenza	Alta frequenza 150 KHZ	Multipulse alta freq.
Macchia focale (mm)	0,5x0,5	0,5x0,5	0,5x0,5	0,5x0,5
Filtrazione totale (Al)	2,5 mm	2,5/2,7 mm	2,5 mm	2,5 mm
Tensione del Tubo (KV-ma)	63-81/6-10	85-10	57-85/2-16	90-16
Programmi	N. 6 automatici: panoramiche adulto, bambino emiarcata DX, SX, centrale, ATM	Radiografie panoramiche adulti, bambini, tomografie a sezione trasversale, tomografie ATM, scanografie dentale e scano ATM	N. 5 panoramiche, n. 4 ATM, seni paranasali, tomografia lineare, cefalometria, controllo qualità	N. 16: standard, bambini, ingrandimento costante, ATM, seni, emipanicomiche
Tempi di esposizione (in secondi)	19	Da 4 a 56	Da 0,1 a 17,6	4,9-25,3
Alimentazione (V)	220	220	230 +/- 10%	230
Frequenza (Hz)	60	60	60	50/60
Corrente massima assorbita (A)	12	12	10	12
Dimensioni (cm)	185x120x224 (LxPxH)	Con tele 280x140x240 (LxPxH)	227,2x83(190)x100	185,5x212x116
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 25.190,00	Euro 35.119,00

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Ortopantomografi analogici			
Denominazione del prodotto	ORTHORALIX 8500	ORTHORALIX 9200 (A)	PANTOS 16 XP
Produttore	Gendex Dental Systems srl	Gendex Dental Systems srl	Blue X Imaging srl
Breve descrizione	Sistema per radiologia panoramica	Sistema per radiografia panoramica e cefalometrica	Radiografico Pan Ceph a proiezioni multiple
Braccio per teleradiografia	No	Si, L.L./A/P-P/A, submento vertex	Sid 165 cm ingr. 1.11
Cassetta (cm)	15x30 (PAN)	15x30 (PAN)	15x30
Schermi (tipo)	PAN (Lanex Medium) a corredo	PAN (Lanex medium), CEPH (Lanex regular) (a corredo)	Verdi speed 400
Cefalometria	No	Si 18x24 cm a corredo	Si, 18x24, 8x10"
Colonna motorizzata	Si, a 2 velocità	Si, a 2 velocità	No
Escursione verticale (cm)	160-232 per l'intero corpo macchina	100-180 piano oclusale	900-1760
Pannello di comando	Due pannelli sul corpo macchina gestiti da microprocessore	Gestito microprocessore 1 tasto 1 funzione	Selezione ad icona progr/paziente
Tipo di generatore	Monoblocco radiogeno alta frequenza potenziale costante	Monoblocco radiogeno alta frequenza potenziale costante	DC in alta frequenza
Macchia focale (mm)	0,4 (IEC 336 1993)	0,5 (IEC 336 1993)	0,5 IEC 336
Filtrazione totale (Al)	2,5 mm	2,5 mm	> 2,5 mm
Tensione del Tubo (KV-ma)	60-80	60-84	61-85/4-10
Programmi	N. 2 pan standard, bambino	Pan standard, bambino, dentatura ortogonale, emi-panoramica, atm laterale, atm frontale, seni frontali, seni laterali, emi-ortogonale, transcan, cefalometria laterale, cefalometria a/p p/a submento v.	Pan standard, bambino, ATM, seni e parziali Ceph AP, LL, polso
Tempi di esposizione (in secondi)	PAN 11-12	PAN 3-12 - CEPH 0,16-2,5	Pan 15
Alimentazione (V)	Nominale 120 o 230 AC	115-250 Vac +/- 10%	230/115
Frequenza (Hz)	50/60 +/- 2	50/60 +/- 2	50/60
Corrente massima assorbita (A)	8,5 (a 230V)	10 (a 250V)	6/8
Dimensioni (cm)	98,3x125,1x232,2 (LxPxH)	181,6x122x228,5 (LxPxH)(Ceph)	240x170x225
Prezzo di listino*	Euro 18.630,00	Euro 25.300,00 - 35.280,00	Euro 16.960,00

PAX150 E PAX150C	PROLINE XC	ROTOGRAPH PLUS	STRATO 2000
Faro spa	Planmeca Oy	Owandy - Vsm	Owandy - Vsm
Ortopantomografo analogico ad alta definizione, completamente motorizzato	Ortopantomografo	Panoramico completo di teleradiografo e programma ATM e sinus con controllo computerizzato	Panoramico tri-motore assiale completo di programma Implant
Si L.L./A.P./carpale	Si L.L. P.A.	Si Laterale/Frontale/Polso mano/Submento vertice	Si Laterale/Frontale/Polso mano /Submento vertice
15x30	Piatta15x30	15x30, 18x24, 24x30	15x30, 18x24, 24x30
Terre rare Lanex regular	Terre rare, sensibili al verde	Luce verde	Luce verde
Si, 20,3x25,4	Si 18x24 o 24x30	Si 18x24, 24x30	Si 18x24, 24x30
Si	Si	Elettro-magnetico	Si
93 (da 88,5 a 181,5)	Da 90 a 195	83	67
Intuitivo, in grado di garantire precisione e riproducibilità dell'acquisizione. Possibilità di regolare a scelta kV e mA	Touch screen a colori	Digitale a cristalli liquidi	Digitale a cristalli liquidi
Alta frequenza	A potenziale costante, ad alta frequenza	Monofase autoaddezzante	Alta Frequenza
0,35x0,50	0,5x0,5	0,5 (IEC336)	0,5 (IEC336)
2,8 mm	3 mm	0,1 mm	0,5 mm
50-90/2-9	60-80/4-12	60-85/10	50-80/4-12
N. 8 con 3 tipologie di pazienti e 3 taglie. panoramica, emipanoramica destra e sinistra, parte frontale, atm aperto/chiuso, seni mascellari, latero-laterale, anteriore posteriore, carpale	175 combinazioni diverse	N. 7: panoramici, ATM, sinus, cefalometri	N. 22: panoramici, ATM, sinus, implant, cefalometri
16-19 Pano/0,2-3,5 Ceph	2,5-18 Pan, 0,2-5 Tele	17	15
110/230	120-130	230	230
50/60	50/60	50	50
5,65	8	1,15 kVA	2 kVA
Pano: 90x110x224 Tele: 178x110x224	90x80x220 (LxPxH)	117x114	125x100
Euro 15.600,00 (Pax150) Euro 18.000,00 (Pax150C con Teleradiografia)	Euro 15.000,00	Euro 13.750,00	Euro 24.500,00



Primi nella storia, da sempre all'avanguardia

La storia di Orthopantomograph® nasce nei primi anni 60 quando Instrumentarium (allora Palomex) realizzò attraverso gli studi del Prof. Paatero il primo Ortopantomografo al mondo. Da allora Instrumentarium ha sviluppato differenti modelli, (OP1 OP2, OP5 OP10) fino al leggendario OP100 ed al nuovissimo OP/OC200. Disponibile nelle versioni panoramico e cefalometrico, digitale e tradizionale su film, esso racchiude in sé caratteristiche uniche come il controllo automatico dell'esposizione (brevettato) che imposta la dose ottimale secondo la reale densità ossea del Paziente. Dotato di un generatore ad alta fre-


quenza, fino a 150 KHz, è in grado di garantire immagini di altissima qualità, utilizzando dosi ridotte. Le apparecchiature OP/OC200 sono complete di 5 differenti programmi panoramici, ognuno dei quali può acquisire l'intera arcata oppure solamente uno o più settori di essa, studi completi dell'ATM sia in laterale che in Postero Anteriore, con visualizzazione del condilo secondo il reale profilo (ad angolo verticale di 0°), seni paranasali, e studi cefalometrici (anche con cassetta 24x30); inoltre tutti gli Orthopantomograph® tradizionali dispongono di uno speciale programma di controllo della qualità che permette

di monitorare lo stato dei chimici di sviluppo e di assicurare la massima qualità anche durante il loro decadimento. Il posizionamento del Paziente garantisce la massima stabilità, evitando movimenti accidentali ed inopportuni e contribuendo ad assicurare la massima qualità dell'immagine. Ogni versione tradizionale può essere trasformata in versione digitale diretta.

Per informazioni:
www.instrumentariumdental.com
italyinfo@instrudental.com
 Tel. 0362.331191



Sistemi Orthoralix 9200 a film

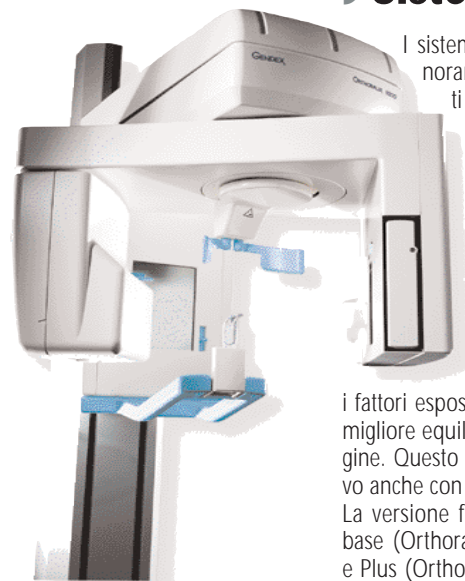

I sistemi Orthoralix 9200 per radiografia panoramica e cefalometrica sono caratterizzati da un sistema di rotazione multi-motorizzato che permette di realizzare una gamma completa di proiezioni per il dentista, il chirurgo e il radiologo maxillo-facciale.

La scelta dei corretti fattori tecnici di esposizione è resa semplice dal sistema di controllo dell'esposizione automatica (AEC) che riconosce automaticamente il profilo caratteristico del paziente correggendo in tempo reale i fattori espositivi preselezionati, per ottenere così il migliore equilibrio tra densità e contrasto sull'immagine. Questo importante sistema di controllo è attivo anche con proiezioni cefalometriche.


La versione film è disponibile in 3 configurazioni: base (Orthoralix 9200), AEC (Orthoralix 9200 AEC) e Plus (Orthoralix 9200 Plus). Per operare in moda-

lità cefalometrica è anche disponibile, per tutte le versioni, un braccio cefalometrico che può anche essere installato successivamente con estrema facilità. Tutti i sistemi Orthoralix 9200 a film possono essere facilmente convertiti in sistemi digitali in una fase successiva.

Per l'utilizzo in enti come ospedali o strutture sanitarie, utilizzando scanner medicali ai fosfori, è anche disponibile una speciale configurazione "PPE" (Phosphor Plate Extension) che permette all'unità di utilizzare una cassetta panoramica piana 24x30 cm anziché la tradizionale cassetta 15x30 cm.


Per informazioni:
 KaVo Italia srl
 Via R. Merello, 8 A
 16141 Genova
 Tel. 010.83321 Fax 010.8332210
kavoitalia@kavo.it
www.kavo.it

ORTOLAB
 P.O.M.P.E.I.

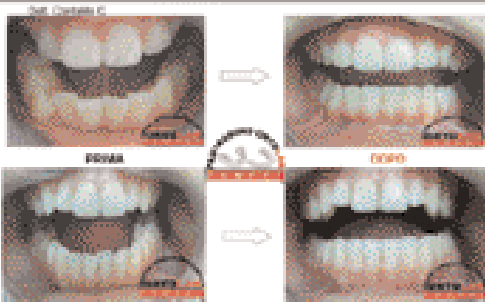

CONSEGNA E RITIRO IN TUTTA EUROPA

SITO INTERNET
WWW.ORTOLABPOMPEI.COM

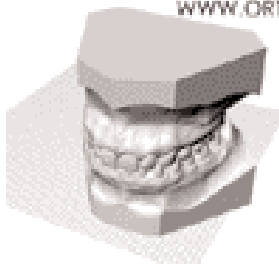

PROTOTIPAZIONE e
 MODELLAZIONE 3D

Via ANASTASIO ROSSI, 54 Pompei (NA) Tel. 081 863 75 99



ABSOLUTE Professional



VISION
LED MICRO

Blue Foot
WHITE SURGERY



VIMAR



LAVINIO MARE - ANZIO - ROMA
Tel. 06.9813261 - 06.9814608
Corso S. Francesco, 108
vimar@vimarweb.com

Concessionaria

EURODENT
Treat yourself!

Infodent, indispensabile.

Infodent, lo strumento di aggiornamento e approfondimento merceologico, che in modo puntuale e obiettivo affianca quotidianamente chi deve affrontare la professione odontoiatrica.

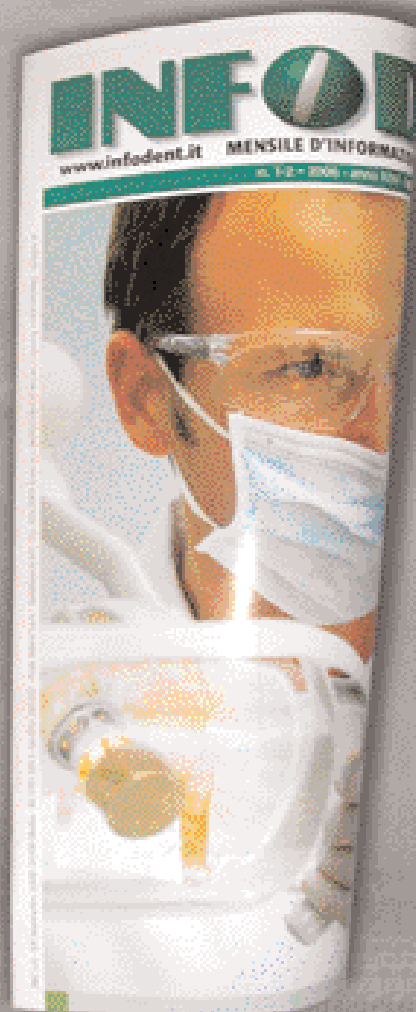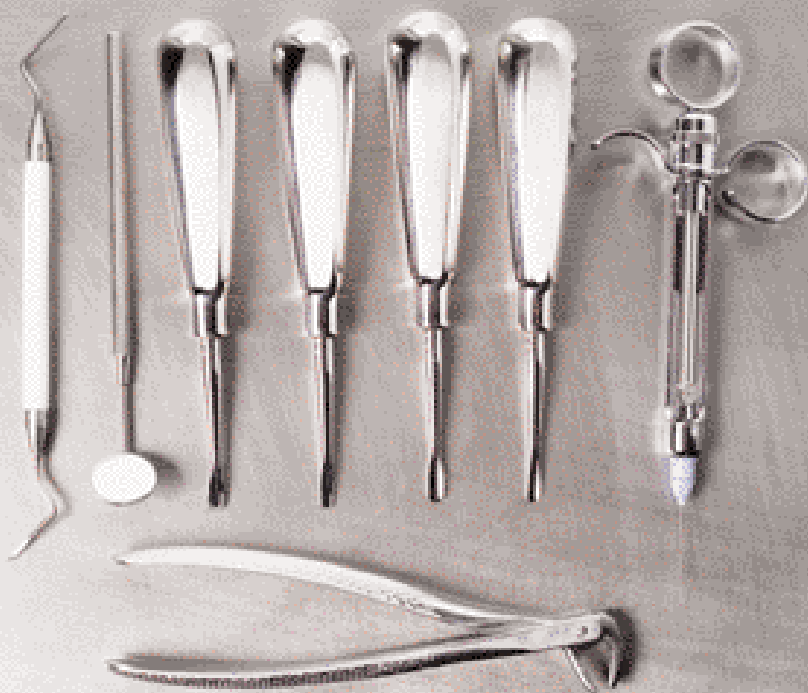

La rubrica **"A confronto"** offre al lettore una panoramica sui prodotti per odontoiatri e odontotecnici. Le tabelle comparative, mettono a confronto, in modo chiaro, le caratteristiche tecniche e le proprietà fisiche dei materiali per valutarne le differenze e le diverse indicazioni. Una sorta di vademecum per orientarsi nella scelta del prodotto.

Infodent è anche uno strumento che promuove la comunicazione degli operatori commerciali.

La rubrica "Approfondimenti" costituisce uno spazio privilegiato in cui gli operatori del settore possono illustrare in dettaglio le caratteristiche dei loro prodotti. Una vera opportunità per gli operatori di comunicare in modo mirato, aprendo un dialogo diretto con il lettore.

INFODENT

www.infodent.it

Nel 2007 Infodent moltiplica il numero dei lettori dei suoi Confronti:

- ✓ Da gennaio Infodent raggiunge anche **Sicilia, Sardegna e Calabria**, coprendo così gli operatori dell'intero territorio nazionale.
- ✓ Da Aprile Infodent si apre al mondo accademico con **Infodent Università**, edizione speciale trimestrale presente in tutte le Università italiane.

"A CONFRONTO" NEL 2007

Gennaio - Febbraio

Rilevatori di carie, Frese per preparazione protesica, Plafoniere professionali

Marzo

Ortopanoramici analogici, Disinfettanti per mani, Termoformatrici - Termostampatrici

Aprile

Lavastrumenti chirurgiche - Termodisinfettori, Sonde parodontali, Software odontotecnici

Maggio

Riuniti digitali, Adesivi smaltodontinali, Forni per ceramica

Giugno - Luglio

Manipoli per micromotori per riunito, Ortodonzia Rickets - Attacchi estetici, Polimerizzazione a pressione resine

Agosto - Settembre

Bisturi elettrici, Dentifrici medicati, Fonditrici elettroniche pressofusione

Ottobre

Rilevatori di colore, Guanti monouso, Mobili laboratorio - Camera di lavoro

Novembre

Defibrillatori, Suture chirurgiche, Miscelatori gesso

Dicembre

Sistemi compattazione e iniezione Guttaperca, Dighe in gomma, Denti in ceramica

I CONFRONTI MERCEOLOGICI GIÀ PUBBLICATI POSSONO ESSERE SCARICATI ALL'INDIRIZZO: www.comparazioni.com

Le aziende potranno scaricare le schede da compilare per essere presenti nei prossimi confronti merceologici di Infodent. Possono, inoltre, compilare il form relativo ai prodotti di loro competenza che verranno pubblicati nel 2007. Per ulteriori informazioni 0761.393.307

Congressi e Fiere all'estero

APRILE 2007

02-05 Guangzhou - Cina
12ª Conferenza e Fiera South China International Dental Equipment & Technology
 Department of Science & Technology of Guangdong Province Address: Room 202, Guangdong Science Hall No. 171 Lianxin Road, Guangzhou - 510033 - P.R. CHINA Tel: +86 20 83567276 // 83549150 Fax: +86 20 83549078 // 83517103 Contact: Ms. Maura Wu, Ms. Cherry Wu E-mail: maurawu@ste.com.cn E-mail: ste-dental@ste.com.cn Website: www.dentalsouthchina.com

03-06 Kharkiv - Ucraina
11th Medvin "Dentistry, medicine, medicaments"
 Of. MEDVIN 12E Heroyiv Stalingrada ave. 04205, Kiev Ukraine Tel /Fax: +38 044 501 0344 // 0342 // 0366 E-mail: mail@medvin.kiev.ua General Director: Edwin Zadorozhnyi Project Manager: Valeria Oleksiyenko E-mail: Valery@medvin.kiev.ua Scientific Programme Manager: Oksana Musiets E-mail: oxana@medvin.kiev.ua Website: www.medvin.kiev.ua

03-06 Minsk - Byelorussia
Belarus Medica 2007 & Parmforum - 7th International dental exhibition & conference
 Green Expo Address: 220015, Belarus, Minsk, box 242 Belarus E-mail: info@greenexpo.by Tel/fax: + 375 17 2 10 21 34 // 2 51 54 29 Tel: +375 29 6 10 21 34 Venue:

Minsk, Palace of Youth, Starovilenski trakt, 41

11-14 Kiev - Ucraina
Medvin ExpoStomat
 Of. MEDVIN 12E Heroyiv Stalingrada ave. 04205, Kiev Ukraine Tel /Fax: +38 044 501 0344 // 0342 // 0366 E-mail: mail@medvin.kiev.ua General Director: Edwin Zadorozhnyi Project Manager: Valeria Oleksiyenko E-mail: Valery@medvin.kiev.ua Scientific Programme Manager: Oksana Musiets E-mail: oxana@medvin.kiev.ua Website: www.medvin.kiev.ua

12-14 Houston (Texas) - Usa
The star of the South dental meeting
 Greater Houston Dental Society One Greenway Plaza, Suite 110 Houston, Texas 77046 Exhibits Coordinator: Charlotte Bolls Tel: +1 713 961 4337, Ext. 12 Fax: +1 713 961 3617 E-mail: cbolls@ghds.org Website: www.ghds.org/star

12-14 Portland (Oregon) - Usa
ODA 2007
 Oregon Dental Association P.O.Box 3710, Wilsonville Oregon, 97070-3710 - USA Tel +1 503 218 2010 Fax +1 503 218 2009 Website: www.oregondental.org Exhibits manager: Cinty Fletcher cfletcher@oregondental.org Tel: +1 503 6203230 ext. 102 Fax: +1 503 6204169

14 New York - Usa
LMT's 8th annual Lab Day East
 LMT Communications, Inc. 731 Main St., Ste.A2 Monroe, CT 06468 Tel +1 203 459 2888 Fax +1 203 459 2889 Contact Person: Laurie Freddino E-mail: lf@lmtcommunications.com Website: www.lmtcommunications.com

16-19 Mosca - Russia
Dental Salon 2007 - 21st International exhibition
 "Company "Dental-Expo" 125319 Moscow, Usievicha, 8A Russia Tel & Fax: +7 495 155 79 00 // 155 79 03 // 152 15 40 // 152 68 02 // 152-85-49 E-mail: info@dental-expo.ru Website: www.dental-expo.ru

19-21 Varsavia - Polonia
Dentexpo 2007
 Project Manager: Grazyna Pietrzyk E-mail: grazynap@brsa.com.pl Warsaw Exhibition Board -Biuro Reklamy S.A. 02-566 Warszawa, Poland ul. Pulawska 12a Tel: +48 22 849 60 06 // 71 Fax +48 22 849 35 84 E-mail: biuro_reklamy@brsa.com.pl Website: www.brsa.com.pl

25-27 Tashkent - Uzbekistan
Stomatology Uzbekistan 2007
 ITE Uzbekistan 20, Oybek Street, Tashkent, 100015., Uzbekistan Contact Person: Shakhnoza Nizamova (project manager) Tel: +998 71 113 01 80 Fax: +998 71 152 51 64 E-mail: dental@ite-uzbekistan.uz Website: www.stomatology.tihe.uz

26-28 Jakarta - Indonesia
29th Asia Pacific Dental Congress 2007

Asia Pacific Dental Federatin (APDF) with Indonesia Dental Association (IDA) 29th APDC 2007 Jakarta Organizing Committee Jalan Hang Lekir Raya No 26 Jakarta 12120 -Indonesia Contact Person: Febby Kuspradono E-mail: febbyk@yahoo.com Tel: +62 21 7260088 Fax: +62 21 7397555 E-mail: pbpdgi@cbn.net.id E-mail: pco@apdc2007jakarta.com Website: www.apdc2007jakarta.com

26-29 Oklahoma City - Usa
Oklahoma Dental Association annual meeting and exhibition 2007
 Oklahoma Dental Association 317 NE 13th Oklahoma City, OK 73104 USA Tel: +1 405 848 8873 Toll free: 800 876 8890 Fax: +1 405 848 8873 E-mail: exhibits@okda.org. Website: www.okda.org

AVVERTENZE PER IL LETTORE:

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.

D
E
N
T
U
P

Laboratorio Odontotecnico DentUP

Il PRIMO centro fresaggi che ti assicura : PRECISIONE&QUALITA'

I nostri servizi:

- Laser - Elettroerosione - Metal-Ceramica - Metal Free
- Ceramica Integrale - Titanio - Galvanotecnica - Protesi Mobile -
- Ortodonzia - Cad-Cam

www.Dentup.it > Collegati al nostro portale per maggiori info

Laboratorio odontotecnico Dentup Via Maira 04100 Latina - Tel : 0773 695671 Web: www.dentup.it

Tel : 0773 663444
LABORATORIO

Casa Schmidt
Casa Schmidt Italia S.p.A.

Quando...
l'ultimo arrivato in famiglia
è il numero
UNO

JS UNO

Casa Schmidt
DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER
L'ITALIA DEI
PIÙ AVANTI

ASSISTENZA
840 700 117*

FEDESA

27-28 Vienna - Austria

WID 2007 - International dental exhibition

Osterreichischer Dentalverband
Eschenbachgasse 11 A-1010
Vienna Austria Tel: +43 1 587
363322 Website:
www.dentalverband.at //
www.wid-dental.at

28 Irvine (California) - Usa

LMT's 16th annual Lab Day West
LMT Communications, Inc. 731
Main St., Ste.A2 Monroe, CT
06468 Tel +1 203 459 2888
Fax +1 203 459 2889 Contact
Person: Laurie Freddino
lf@lmtcommunications.com
www.lmtcommunications.com

MAGGIO 2007

02-05 Mexico City - Messico

AMIC 2007 - 47th International Expo Dental

AMIC Dental A.C. Av. Cuauht moc
451-310 Col Navarte 03020
Benito Juarez Mexico,
D.F. Contact Person: Lic. Silvia
Calzado Santibanez
(Executive Director)
Tel. +52 5 639 1073 // 0324
Fax +52 5 639 9069 E-mail:
amicdent@webtelmex.net.mx
Website: www.amicdental.com.mx

Boricacute Tel: +385 1 6503 433
Fax: +385 1 6503 270 E-mail:
medicina@zv.hr Website:
www.zv.hr

18-22 Seattle (Washington) - Usa

107th AAO Annual session 2007

AAO - American Association of
Orthodontists Attn: AAO Senior
Meetings and Exhibits Manager
401 North Lindbergh Boulevard
St. Louis, Missouri, 63141-7816
USA Tel: +1 314 993 1700
Fax: +1 314 997 1745 // 692 8178
Toll free: 800 424 2841
Website: www.aaortho.org
Website: www.AAOmembers.org
E-mail: info@aaortho.org
Exhibition Venue: Washington
State Convention Center

08-11 Sofia - Bulgaria

Bulmedica - Buldental 2007

41th International specialized exhibition

Bulgarreklama agency 147
Tzarigradsko Chaussee 1000 Sofia
Bulgaria Mrs. Ogniana Dikova
Tel.: + 359 2 96 55 281 Fax: + 359
2 96 55 231 E-mail:
odikova@bulgarreklama.com
Website: www.bulgarreklama.com

22-25 San Pietroburgo - Russia

Stomatology St. Petersburg 2007 - 10th International dental exhibition & conference

ITE Group PLC, Primexpo 24A,
Yakubovicha Str. St. Petersburg
Russia, 190000
Tel: +7 812 380-60-06 // 380-60-
00 Fax: +7 812 380-60-01
E-mail: med@primexpo.ru
Web-site: www.primexpo.ru/den-
tal/ Show director:
Sevastyanova Dina Venue:
Lenexpo
Exhibition Centre St. Petersburg,
Russia (V.O., Bolshoy pr., 103,
metro Primorskaya)

15-18 L'viv - Ucraina

11th Medvin "Dentistry, medicine, medicaments"

Of. MEDVIN 12E Heroyiv
Stalingrada ave. 04205, Kiev
Ukraine Tel /Fax: +38 044 501
0344 // 0342 // 0366
E-mail: mail@medvin.kiev.ua
General Director: Edwin
Zadorozhnyi Project Manager:
Valeria Oleksiyenko E-mail:
Valery@medvin.kiev.ua Scientific
Programme Manager: Oksana
Musiets E-mail:
oxana@medvin.kiev.ua Website:
www.medvin.kiev.ua

24-26 Harrogate - Inghilterra
British Dental conference & exhibition 2007

BDA Events team
Tel: +44 20 7563 4590
Fax: +44 20 7563 4591 Contact
Person: Elise Cole E-mail:
events@bda.org Website:
www.bda.org

16-19 Zagabria - Ucraina

Medicine and Technology 2007

Contact person: Valentina Dulcic
Tel: +385 1 6503 284 // +385 1
6503 414
Contact person: Ivanka

24-26 Porto - Portogallo
Expo Dentis 2007
 EXPONOR (Porto International Fair) and ANCECSI (National Association of Traders of Scientific Equipment) International Department:
 Tel: +351 22 998 1400
 Fax: +351 22 998 1482
 normedica@exponor.com

24-26 Siviglia - Spagna
29° Reunión anual de la Sociedad Española de Odontopediatría
 Sociedad Española de Odontopediatría
 Address: Alcalá nº 79 2º, 28009 Madrid Spain
 Tel: +34 650 42 43 55

Congressi e Fiere in Italia
APRILE 2007

18-21 Roma - RM
14° Congresso Nazionale del "Collegio dei docenti di Odontoiatria" - Expoprivavera Pro Odonto Congress srl (Gallusi Sig.ra A.R.)
 Via Monte delle Gioie 24, 00199 Roma
 Tel. 06.86211131
 Fax 06.86212026, proodcgs@tin.it
 www.proodontocongress.it

20-21 Riva del Garda - TN
12° Congresso Nazionale AIC - Accademia Italiana di Conservativa
 www.accademiaitalianadiconservativa.it

21 Udine - UD
2° Memorial Lucia Mareschi: "Dalla prognosi alla scelta terapeutica: fare bene le cose giuste"
 AIE - Via Milano 34, 22100 Como,
 Tel./Fax 031.269671,
 segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it

19-21 Montecatini Terme - PT
Odontotecnica "Made in Italy"
 Siced - Tel./fax 030.2092960,
 siced-dl@libero.it
 www.siced-rtd.it

MAGGIO 2007

04-05 Firenze - FI
Implant Symposium - Esperienze a confronto In fase di accreditamento Dental Trey
 Tel. 0543.929129
 Fax 0543.940659
 corsi@dental Trey.it
 www.dental Trey.it

Fax 081.682286
 e-mail: medcongr@tin.it
 www.mediacongress.it

24-26 Rimini - RN
50° Congresso - Amici di Brugg
 Promunidi - Viale Forlanini 23, 20134 Milano
 Tel. 02.7006121
 Fax 02.70006546

AVVERTENZE PER IL LETTORE:

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.

31-03 Napoli - NA
1° Congresso Internazionale Sinet: "La filosofia di Norman Cetlin"
 Media Congress Riviera di Chiaia 127, 80100 Napoli
 Tel. 081.7616181



LA PRIMA RESINA PER RIBASARE E REALIZZARE PONTI E CORONE PROVVISORIE CON ATTIVITÀ ANTIMICROBICA



ANTIMICROBICITÀ
Riduzione degli stati infiammatori



- ✓ Rispetto e corretto mantenimento dei tessuti parodontali
- ✓ Migliore chiave di lettura dell'impronta per il laboratorio

DUREZZA / ELASTICITÀ

La scelta di materie prime selezionate consente un incremento eccezionale dei valori di risposta alle prove di tensione e compressione

- ✓ Riduzione drastica di ritorni negativi per lo studio e il laboratorio relativamente alle fratture e ai distacchi delle protesi provvisorie

Per uso diretto e indiretto



Gentile concessione del Dott. G. Albergo

Alone di inibizione di crescita microbica periferica ad un disco di resina Sintodent.

SINTODENT ANTIMICROBICO ha superato tutti i test di biocompatibilità previsti dalla norma internazionale UNI EN ISO 10993:2004: citotossicità, irritazione e sensibilizzazione.

BIBLIOGRAFIA

G. ALBERGO, E. ACCARISI, F. SAMPALMIERI, R. BEDINI, S. ANDREANA. *Effect of Antimicrobial Ingredients on Mechanical Performance in Acrylic Resin.* J Dent Res; 76 special ISSUE: # 2128, 1997


G. ALBERGO, R. BEDINI, P. CHISTOLINI. *Caratteristiche Meccaniche di una nuova resina acrilica: risultati preliminari.* Estratto III° Congresso Nazionale S.I.D.O.C. Capri 05/07 Ottobre '96

G. ALBERGO, F. SAMPALMIERI, P. LILLO ODOARDI. *Osservazioni sul comportamento termico da polimerizzazione di alcune resine metacriliche.* Estratto III° Congresso Nazionale S.I.D.O.C. Capri 05/07 Ottobre '96

G. ALBERGO, E. ACCARISI, F. SAMPALMIERI, R. BEDINI. *Mechanical Performance of Some Dental Acrylic Resin.* J Dent Res; 76 (5): # 1103, 1997

M. CAPPELLI, G. ALBERGO, L. CASOLARI, F. SAMPALMIERI, G. FURIORE. *Antibacterial Activity of a Resin: A Qualitative Study.* J Dent Res; 77 special ISSUE B: 805, # 1389, 1998

Per saperne di più o conoscere il fornitore più vicino

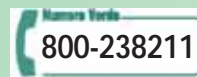

Nuove soluzioni per l'odontoiatria

www.welltrade.it info@welltrade.it

DENTISTI

MARZO 2007

CHIRURGIA

Milano - MI 02-03
Promoden Tel. 0761.251248
De Sanctis Prof. M.,
Zucchelli Prof. G.
**La chirurgia estetica
mucogengivale: lo stato
dell'arte**

Buccinasco - MI 23-24
Tel. 02.45773274
Casentini P.
Video corso di chirurgia orale

COLORE

Sutri - VT 24
Centro sul colore di G. Spina
Tel. 0761.600396
Spina G.
**Corso introduttivo alla teoria
del colore**

CONSERVATIVA

Milano - MI 23-24
Promoden Tel. 0761.251248
Favatà Dr. M.
**Restauri adesivi nei settori
anteriori**

EMERGENZE

Milano - MI 03
Promoden Tel. 0761.251248
Argenton Dr. S.

**Gestione emergenze nello
studio odontoiatrico -
1° gruppo**
6 crediti ECM

Roma - RM 03
Cenacolo Odontostomatologico
Laziale Tel. 06.8549724
Di Maria C., Niso M.
**Prevenire e fronteggiare
l'emergenza**

Milano - MI 16
Promoden Tel. 0761.251248
Argenton Dr. S.
**Gestione emergenze nello
studio odontoiatrico - 2°
gruppo**
6 crediti ECM

ENDODONZIA

Milano - MI 09-10
Promoden Tel. 0761.251248
Abundo Dr. R.
**Endodonzia facile, rapida,
ripetibile e prevedibile. È un
sogno o ci siamo già?**
11 crediti ECM

Villa S. Giovanni - RC 10-11
Cenacolo Odontostomatologico
Reggino Tel. 0965.331678
Pongione G.
Endodonzia moderna

Buccinasco - MI 19
Tel. 02.45773274
Gorni F.

**L'endodonzia dalla A alla
Zeta - corso teorico-pratico di
endodonzia ortograde (altre
date: 2/04 - 16/04 - 14/05 -
28/05 - 11/06 - 25/06 - 9/07 -
10/09 - 24/09)**

Sondrio - SO 30-31
Cenacolo Odontost. Milanese -
Sez. Valtellinese
Tel. 0342.515110
Gorni F.

Il ritrattamento endodontico
Milano - MI 8-10
Promoden Tel. 0761.251248
Vignoletti Dr. G.
**Corso pratico di endodonzia
(altra data: 19-21/04)**
50 crediti ECM

IMPLANTOLOGIA

Milano - MI 09
Promoden Tel. 0761.251248
Abundo Dr. R.
**Gli impianti post estrattivi
immediati e le loro possibili
alternative nelle aree
estetiche**
Corso pratico

Milano - MI 10
Coi-Aiog Tel. 02.201488
Ciancio B., Agliardi E.
**Novità implantari. Impianti
angolati. W-two-w.
Tecnica di Malò. Soluzioni
mini invasive**

Milano - MI 10
Promoden Tel. 0761.251248
Abundo Dr. R.
**Impianti post estrattivi
immediati**
4 crediti ECM

Torino - TO 15
Cenacolo Odontostomatologico
Torinese Tel. 011.734388
De Giovanni P.P.
**Pianificazione implantare
assistita da computer (altra
data: 29/03)**
6 crediti ECM

Magenta - MI 30-31
Centro diagnostico chirurgico
magentino - Sig.ra Paola Uvini
Tel. 02.97298533
Bucci Sabbatini Prof. V. e Coll.
**"Corso modulare di
formazione per medici
dentisti e odontoiatri"**

Sesto Fiorentino - FI 31
Cenacolo Odontostomatologico
del Giglio Tel. 055.470424
Bianchi A.E., Podda G., Rossi
A.L., Terzitta G., Tomatis M.
**La preparazione del sito
implantare**

IMPLANTOPROTESI
Bologna - BO 03
Segreteria Organizzativa
Tel. 0761.270113
Ravasini Dr. T.

Entra nel mondo PHYSIOLINE
PRODOTTI DI QUALITÀ SUPERIORE CHE SI MISURANO NEL TEMPO

Con **PHYSIOSHOP ON-LINE** ti puoi permettere una qualità superiore, un servizio rapido e sicuro dove anche i costi saranno una gradita sorpresa.

Rendere accessibile la qualità è, da sempre, l'impegno di **PHYSIOLINE** per il dentista moderno.

Entra nel mondo **PHYSIOSHOP ON-LINE** visitando il sito **WWW.PHYSIOLINE.IT**

Via Garibaldi, 17 - 21100 Varese - tel. +39 0332 28 48 12 - fax +39 0332 31 96 20 - e-mail: info@physioline.it

Trattamento mininvasivo del paziente edentulo. Stabilizzazione di protesi totali mediante minimpianti

Verona - VR 10
Segreteria Organizzativa
Tel. 0761.270113
Montagna Dr. F.

Trattamento mininvasivo del paziente edentulo. Stabilizzazione di protesi totali mediante minimpianti

Milano - MI 17
Segreteria Organizzativa
Tel. 0761.270113
Ritzmann Dr. J.

Trattamento mininvasivo del paziente edentulo. Stabilizzazione di protesi totali mediante minimpianti

Roma - RM 24
Segreteria Organizzativa
Tel. 0761.270113
Ravasini Dr. T.

Trattamento mininvasivo del paziente edentulo. Stabilizzazione di protesi totali mediante minimpianti

Genova - GE 31
Segr. Org. Tel. 0761.270113
Ritzmann Dr. J.

Trattamento mininvasivo del paziente edentulo. Stabilizzazione di protesi totali mediante minimpianti

LASER

Cagliari - CA 21
Cenacolo Odontostomatologico
Cagliaritano Tel. 070.400302
Iaria G.

Il laser a diodi in odontoiatria

LEGISLAZIONE

Milano - MI 02
Promoden Tel. 0761.251248
Montagna Dr. F.

Odontoiatria e responsabilità professionale

ODONTOIATRIA

Genova - GE 03
Cenacolo Odontostomatologico
Ligure Tel. 019.811118
Odontoiatria oggi: etica, medicina legale e

giurisprudenza: un nuovo modello comportamentale

Napoli - NA 31
Cenacolo Odontostomatologico
Mediterraneo Tel. 081.5094848
Borriello A.
L'uso del filler nella pratica odontoiatrica

ORTODONZIA

Milano - MI 03
Promoden Tel. 0761.251248
De Franco Dr. D.J.
Corso teorico di ortodonzia clinica

Milano - MI 15
Coi-Aiog Tel. 02.201488
Zerbini A.

Ortodonzia estetica: Invisalign System

Roma - RM 15-17
Segreteria Organizzativa: Tel. 06.44243217

Giancotti Dr. F., Richter Dr. O.
Corso di ortodonzia (altre date: 29-31/03 - 12-14/04)

Milano - MI 30-31
Promoden Tel. 0761.251248
La Luce Dr. M.

La nuova ortodonzia: le terapie rapide (altre date: 20-21/04 - 25-26/05 - 06-07/07)

50 crediti ECM

PARODONTOLOGIA

Milano - MI 22-24
Promoden Tel. 0761.251248
Fonzar Dr. A.

Protesi parodontale - corso pratico
29 crediti ECM

Milano - MI 24
Promoden Tel. 0761.251248
Roncati Parma Benfenati
Dr.ssa M.

Corso pratico di parodontologia non chirurgica
9 crediti ECM

Milano - MI 30-31
Promoden Tel. 0761.251248
De Sanctis Prof. M., Zucchelli
Prof. G.



**SINTODENT ROSA UNIVERSALE
LA PRIMA RESINA
PER PROTESI MOBILI
CON ATTIVITÀ ANTIMICROBICA**



ANTIMICROBICITÀ

Contrasta il depositarsi di placca batterica e di ife fungine di tipo candida, con conseguente riduzione di irritazioni, bruciori, infiammazioni e di spiacevoli forme di alitosi

VERSATILITÀ DI UTILIZZO

Polimero e monomero a caldo

- ✓ Tecnica a caldo tradizionale con muffola
- ✓ Tecnica con forno a microonde

Polimero e monomero a freddo


- ✓ Riparazioni, ribasature dirette e indirette, resinatura selle scheletrati
- ✓ Tecnica per colata a freddo nelle muffole con controstampo in gelatina o in silicone

SINTODENT ROSA UNIVERSALE ANTIMICROBICO ha superato tutti i test di biocompatibilità previsti dalla norma internazionale UNI EN ISO 10993:2004: citotossicità, irritazione e sensibilizzazione.

BIBLIOGRAFIA

<p>1. G. ALBERGO*, R. BEDINI, P. CHISTOLINI. Caratteristiche Meccaniche di una nuova resina acrilica: risultati preliminari. Estratto III° Congresso Nazionale S.I.D.O.C. Capri 05/07 Ottobre '95.</p> <p>2. G. ALBERGO, F. SAMPALMIERI, P. LILLO ODOARDI. Osservazioni sul comportamento termico da polimerizzazione di alcune resine meta-criliche. Estratto III° Congresso Nazionale S.I.D.O.C. Capri 05-07 Ottobre '95.</p>	<p>3. G. ALBERGO, E. ACCARISI, F. SAMPALMIERI, R. BEDINI, S. ANDREANA*. Effect of Antimicrobial Ingredients on Mechanical Performance in Acrylic Resin. J Dent Res; 76 special ISSUE: # 2128, 1997.</p> <p>4. G. ALBERGO, E. ACCARISI, F. SAMPALMIERI, R. BEDINI. Mechanical Performance of Some Dental Acrylic Resin. J Dent Res; 76 (8): # 1103, 1997.</p> <p>5. M. CAPPELLI*, G. ALBERGO, L. CASOLARI, F. SAMPALMIERI, G. FURIORE. Antibacterial Activity of a</p>	<p>Resin: A Qualitative Study. J Dent Res; 77 speciale ISSUE 8: 806, # 1389, 1998.</p> <p>6. GIULIANA G. PIZZO G, MILICI ME, GIANGRECO R. In vitro activities of antimicrobial agents against Candida species. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1999 Jan;87(1):44-9.</p> <p>7. OTHMAN HF, WU CD, EVANS CA, DRUMMOND JL, MATASA CG. Evaluation of antimicrobial properties of orthodontic composite resins combined</p>	<p>with benzalkonium chloride. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002 Sep; 122(3):288-94.</p> <p>8. IMAZATO S, TORII M, TSUCHITANI Y, MCCABE JF, RUSSELL RR. Incorporation of bacterial inhibitor into resin composite. J Dent Res. 1994 Aug; 73(8):1437-43.</p> <p>9. PATARCA R, FLETCHER MA. Effects of benzalkonium salts on eukaryotic and microbial G-protein-mediated processes and surface membranes. Crit Rev Oncog. 1995;4(3-6):327-56.</p>
---	---	---	--

Per saperne di più o conoscere il fornitore più vicino

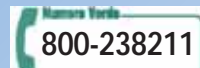

Nuove soluzioni per l'odontoiatria

www.welltrade.it info@welltrade.it

La gestione dei tessuti molli in chirurgia parodontale - corso pratico
16 crediti ECM

Milano - MI 30-31
Promoden Tel. 0761.251248
Cortellini Dr. P.

La terapia parodontale: scelta e pianificazione dell'approccio chirurgico
10 crediti ECM

PEDODONZIA

Milano - MI 15-16
Promoden Tel. 0761.251248
Olivi Dr. R.

Odontostomatologia infantile: gestione psicologica e clinica del piccolo paziente
16 crediti ECM

PROTESI

Catania - CT 10
Cenacolo Odontostomatologico Etneo Tel. 095.534486
Semenza M.

Razionale clinico per la realizzazione di manufatti protesici in grado di garantire una corretta integrazione estetica, biologica e funzionale

Sesto Fiorentino - FI 10
Cenacolo Odontostomatologico del Giglio Tel. 055.470424
Temperani M., Schiariti F.

Lavorare in team. La comunicazione tra il protesista e il laboratorio per un restauro protesico dal risultato prevedibile

PROTESI FISSA

Milano - MI 16-17
Promoden Tel. 0761.251248
Gracis Dr. S.

Protesi fissa. Dalla preparazione dei denti alla presa
11 crediti ECM

Roma - RM 17

Segreteria organizzativa: Tel. 06.77205816
Groppi C., Simeone Dr. P.
Inizio corso di protesi fissa in 12 incontri

RICOSTRUZIONE

Roncadelle di Castel Mella - BS 31

Cenacolo Odontostomatologico Milanese - Sez. Bresciana Tel. 030.2404771

Poli G.P.
Tecniche ricostruttive nelle atrofie ossee con particolare riferimento all'"osteogenesi distrazionale"

SICUREZZA SUL LAVORO

Torino - TO 10
Cenacolo Odontostomatologico Torinese Tel. 011.734388
Motta A.

Corso di prevenzione incendi con rilascio di attestato valido ai fini 626
2 crediti ECM

Milano - MI 16
Coi-Aiog Tel. 02.201488
Motta A.

Corso di prevenzione incendi con rilascio di attestato valido ai fini 626
2 crediti ECM

▷ APRILE 2007

ENDODONZIA

Sesto Fiorentino - FI 14
Cenacolo Odontostomatologico del Giglio
Tel. 055.470424
Lendini M.

Strumentazione e anatomia: i nuovi traguardi dell'endodonzia - tecniche, tecnologie, strumenti e materiali

ESTETICA

Milano - MI 14
Coi-Aiog Tel. 02.201488

ClassImplant®

ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA

KAPS

CLASSIMPLANT S.r.l., Via delle Castellazioni, 305 - 00144 Roma - tel. 06 87 44 031 - fax: 06 99 69 83 55 - www.classimplant.com - classimplant@classimplant.com

Ilic I.

Sistemi di sbiancamento dentale - corso teorico-pratico

FOTOGRAFIA

Zola Predosa - BO 21
Cenacolo Odontostomatologico Emiliano Bolognese Tel. 051.255440
Corso teorico-pratico di fotografia digitale in odontoiatria

GESTIONE

Roma - RM 21
Cenacolo Odontostomatologico Laziale Tel. 06.8549724
Leghissa G.C., Palermo C.
La gestione dell'attività odontoiatrica: la struttura e il paziente

IMPLANTOLOGIA

Bologna - BO 20
Segreteria Scientifica S.I.d.P., c/o Promo Leader Service Tel. 055.241131
Fax 055.2342929, congressi@promoleader.com
Chiapasco Dr. M., Gatti Dr. C.
Corso Video Education - Chirurgia e protesi implantare nell'attività ambulatoriale quotidiana

Magenta - MI 27-28
Centro diagnostico chirurgico magentino - Sig.ra Paola Uvini Tel. 02.97298533
Bucci Sabattini Prof. V. e Coll.
"Corso modulare di formazione per medici dentisti e odontoiatri"

ORTODONZIA

Lecce - LE 14
Cenacolo Odontostomatologico Salentino Tel. 0836.920469
Rossi M.
Ortodonzia pre-protetica e antiprotetica
7 crediti ECM

PROTESI

Napoli - NA 14
Cenacolo Odontostomatologico Mediterraneo Tel. 081.5094848
Montesarchio C., Paolantoni G.
Le riabilitazioni protesiche convenzionali e implantari:

indicazioni e limiti nei pazienti parzialmente e totalmente edentuli

Milano - MI 20-21
Promoden Tel. 0761.251248
Marino Prof. G., Marino Dr. A., Smorto Dr. F.
Protesi totale e protesi totale su impianti
10 crediti ECM

PROTESI FISSA

Milano - MI 20
Coi-Aiog Tel. 02.201488
Cimma R.
Corso pratico di protesi fissa 1° livello
8 crediti ECM

Roma - RM 21
Segreteria organizzativa: Tel. 06.77205816
Groppi C., Simeone Dr. P.
Inizio corso di protesi fissa su impianti in 7 incontri

RESTAURI

Villa S. Giovanni - RC 21-22
Cenacolo Odontostomatologico Reggino Tel. 0965.331678
Pongione G., Gualandri M.
Il restauro post-endodontico: intarsi in composito

RICOSTRUZIONE

Brescia - BS 13-14
Cenacolo Odontostomatologico Milanese - Sez. Bresciana Tel. 030.2404771
Cazzaniga A., Di Stefano A.D.
Tecniche chirurgiche e materiali per le ricostruzioni ossee dalla Gbr agli innesti onlay
12 crediti ECM

◻ MAGGIO 2007

CHIRURGIA

Milano - MI 11-12
Promoden Tel. 0761.251248
Chiapasco Dr. M.
Corso di chirurgia orale
11 crediti ECM

CONSERVATIVA

Alessandria - AL 05
Smartover srl Tel. 0131.231642
Favatà Dr. M.

La restaurativa estetica nei settori anteriori e lateroposteriori; un'importante alternativa al restauro protesico

Milano - MI 11
Promoden Tel. 0761.251248
Cattaruzza Dr. M.
Corso avanzato teorico di stratificazione estetica con resine composite
07 crediti ECM

Milano - MI 12
Promoden Tel. 0761.251248
Cattaruzza Dr. M.
Corso avanzato pratico di stratificazione estetica con resine composite
07 crediti ECM

DIAGNOSTICA

Firenze - FI 25-26
DL Medica (Canella Sig.ra L.) Tel. 02.76275218
Ridi Dr. R.
Corso teorico-pratico: "Occlusione Atm e postura: dalla diagnosi alla terapia" - seconda sessione

EMERGENZE

Torino - TO 19
B&C Organizzazione Eventi Tel. 0761.393939
Maggio Dr. C., Mancini Sig.ra A., Silviero Sig.ra S.
Corso teorico-pratico - Conoscere e utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno nell'arresto cardiaco

ENDODONZIA

Milano - MI 05
Promoden Tel. 0761.251248
Marcoli Dr. P.A.
Preparazione canalare con la tecnica simultanea ed otturazione con l'onda continua di condensazione
07 crediti ECM

Milano - MI 10
Promoden Tel. 0761.251248
Marcoli Dr. P.A.
Preparazione canalare con la tecnica simultanea ed otturazione con l'onda

**Micromotori e Fresatori**

V5



V89



CC3



Innovazioni per una qualità superiore

MARIOTTI & C
via Seganti 73 - 47100 Forlì ITALY
tel. +39 0543 474105 - fax +39 0543 781811
info@mariotti-italy.com - www.mariotti-italy.com

MULTYSYSTEM
Integrated Dental Implant System

SISTEMI IMPLANTOPROTESICI MULTYSYSTEM

IMPLANTI AUTOMASCELLATI ET-DM CON ZANFUSCO INTERNA - € 31,00

Implante conico ST
Diametro: 3,2-3,7-4,2 mm

Implante post-estrattivo ST
Diametro: 4,2-4,9-5,5 mm

Implante cilindrico ST
Diametro: 3,2-3,6-4,2 mm

Implante conico TM
Diametro: 4,7 mm

Implante post-estrattivo TM
Diametro: 4,5-5,2-6,5 mm

IMPLANTI AUTOMASCELLATI MF A CARICO IMMEDIATO - € 37,00

Mini-implante a manovela sferica MF
Diametro: 3,3-3,8 mm

Implante a manovela sferica MF
Diametro: 3,5 mm

Mini-implante a manovela cilindrica MF
Diametro: 3,5 mm

Implante a manovela cilindrica MF
Diametro: 3,5-4,0-5,0 mm

La tecnica implantoprotesica Multysystem è composta da impianti, abutments e protesi con maggior estesa e controllo a carico immediato, totale o parziale, in modo da offrire al paziente il miglior risultato estetico e funzionale.

MULTYSYSTEM S.p.A.
Via S. Felice, 10 - 20139 Milano (MI)
Tel. 02.47601111 - Fax 02.47601112
http://www.multysystem.com
e-mail: multysystem@multysystem.com

64.0401

continua di condensazione
07 crediti ECM

IMPLANTOLOGIA

Casale Monferrato - AL 03-04
Tocksystem Tel. e fax
031.280301

Rendo Dr. B., Schirripa Dr. G.,
Tock G.R.

**Osteoespansione e
implantoprotesi**

Roma - RM 15
Tocksystem Tel. e fax 031.280301
Yacoub Dr. J.C., Tock G.R.

**Osteoespansione e
implantoprotesi**

Magenta - MI 25-26
Centro Diagnostico Chirurgico
Magentino - Sig.ra Paola Uvini
Tel. 02.97298533

Bucci Sabattini Prof. V. e Coll.
**Corso modulare di
formazione per medici
dentisti e odontoiatri**

Milano - MI 25-26
Promoden Tel. 0761.251248
Chierico Dr. A.

**Il successo estetico in
implantologia: dalla biologia
alla clinica**

Como - CO 29
Tocksystem Tel. e fax
031.280301
Piccione Dr. G., Schirripa Dr. G.,
Tock G.R.

**Osteoespansione e
implantoprotesi**

LASER

Milano - MI 04
B&C Organizzazione Eventi
Tel. 0761.393939
Crippa Dr. R.

**Corso teorico-pratico. L'uso
del laser a diodi nell'estetica
dentale**

PARODONTOLOGIA

Milano - MI 11
Promoden Tel. 0761.251248
Buonora Dr. A.

**L'allungamento di corona
clinica**

08 crediti ECM

Roma - RM 25
Varesi srl - Tel. 06.44254539 -

master.corsi@virgilio.it
Trombelli L.

**Corso teorico-pratico: "Uso
dei biomateriali per
ricostruzione parodontale pre
e peri-implantare"**

Milano - MI 25-26
Promoden Tel. 0761.251248
Cortellini Dr. P.

**I lembi parodontali e le
metodiche di sutura**
18 crediti ECM

Trieste - TS 25-26
Segreteria Scientifica S.l.d.P.,
c/o Promo Leader Service Tel.
055.241131 Fax 055.2342929,
congressi@promoleader.com

Carnevale Dr. G.
**Corso di aggiornamento - Il
ruolo della parodontologia e
dell'implantologia nella
riabilitazione protesica**

PROTESI

Concesio - BS 04-05
Siced - Tel./fax 030.2092960
Olivieri A.

La protesi completa

Milano - MI 11-12
Promoden Tel. 0761.251248
Zilli Dr. M., Lopes-Pegna Dr. B.,
Capri Dr. D., Bonfiglioli R.

**Il piano di trattamento dei
casi complessi**

Alessandria - AL 12
Smartover srl Tel. 0131.231642
Massironi Dr. D.

**Aspetti clinici e di laboratorio
nella realizzazione di corone
complete. Il moderno
approccio alle preparazioni
protesiche, alle impronte e
alla precisione, in funzione
dei tipi di materiali
restaurativi e dei build up
eseguiti**

Conegliano - TV 12
Tressis Italia srl Tel. 0438.418316
Borin G.

**La protesi mobile secondo la
dinamica linguale**

Roma - RM 19-20
EARTH - European Agency for
Relationship and Training
Holistic Tel. 328.6146431

e-mail: paola-mei@alice.it
Palumbo Dr. R.

**Public speaking: per imparare
a parlare in pubblico con
sicurezza ed efficacia**
In fase di accreditamento

ODONTOTECNICI

APRILE 2007

CERAMICA

Ascoli Piceno - AP 13-14
Tel. 0736.250135
Narducci G.

Estetica in ceramica integrale
18 crediti ECM

Concesio - BS 27-28
Siced - Tel./fax 030.2092960
Peters J.

**La modellazione in cera degli
anteriori**
Serpilli E.

**Tecniche di progettazione e
realizzazione dello scheletrato
con ganci**

COLORE

Sutri - VT 13-14
Centro sul colore di G. Spina
Tel. 0761.600396

Spina G.
**Corso master sul colore
(pratico)**

PROTESI

Milano - MI 21
DL Medica (Canella Sig.ra L.) Tel.
02.76275218

Mellera D.
**Estetica dentale:
"Ottimizzazione del sistema
Diamond Crown nella pratica
quotidiana"**

PROTESI FISSA

Colleferro - RM 14
Segreteria Organizzativa Tel.
06.9700323 - 06.97087500

Villani A.
**Il modello di lavoro master in
protesi fissa**

Colleferro - RM 20-21
Segreteria Organizzativa Tel.
06.9700323 - 06.97087500

Villani A., Paglia P.
**Corso master di protesi fissa
in 4 incontri: "Dal modello**

alla modellazione, dagli articolatori al compasso" (altre date: 27-28/04)

Roma - RM 21
Segreteria organizzativa: Tel. 06.77205816
Groppi C., Simeone Dr. P.
Inizio corso di protesi fissa su impianti in 7 incontri

RESTAURI

Villa S. Giovanni - RC 21-22
Cenacolo Odontostomatologico
Reggino Tel. 0965.331678
Pongione G., Gualandri M.
Il restauro post-endodontico: intarsi in composito

MAGGIO 2007

COLORE

Sutri - VT 12
Centro sul colore di G. Spina Tel. 0761.600396
Spina G.
Corso sul colore e forma in protesi totale (teorico-pratico)

Sutri - VT 26
Centro sul colore di G. Spina Tel.

0761.600396
Spina G.
Corso tessitura superficiale (teorico-pratico)

FUSIONE

Roma - RM 18-19
Segreteria organizzativa: Tel. 06.77205816
Groppi C.
Corso di fusione

PROTESI

Concesio - BS 04-05
Siced - Tel./fax 030.2092960
Olivieri A.

La protesi completa

Conegliano - TV 12
Tressis Italia srl
Tel. 0438.418316
Borin G.

La protesi mobile secondo la dinamica linguale

Roma - RM 12
DL Medica (Canella Sig.ra L.)
Tel. 02.76275218
(Capparella Sig. S.)
Tel. 347.9054466
Magliozzi T.
Estetica dentale:

"Ottimizzazione del sistema Diamond Crown nella pratica quotidiana"

Milano - MI 26
DL Medica (Canella Sig.ra L.)
Tel. 02.76275218

Mellera D.
Estetica dentale:
"Ottimizzazione del sistema Diamond Crown nella pratica quotidiana"

PROTESI FISSA

Colleferro - RM 12
Segreteria Organizzativa
Tel. 06.9700323
06.97087500
Villani A.

Il modello di lavoro master in protesi fissa

Colleferro - RM 18-19
Segreteria Organizzativa
Tel. 06.9700323
06.97087500

Villani A., Paglia P.
Corso master di protesi fissa in 4 incontri: "Dal modello alla modellazione, dagli articolatori al compasso" (altre date: 25-26/05)

PROTESI MOBILE

Concesio - BS 18-19
Siced - Tel./fax 030.2092960
Quinzi P.

Il montaggio in protesi mobile secondo Gerber

IGIENISTI, ASSISTENTI E PERSONALE AUSILIARIO

APRILE 2007

EMERGENZE

Torino - TO 19
B&C Organizzazione Eventi
Tel. 0761.393939
Maggio Dr. C., Mancini Sig.ra A., Silviere Sig.ra S.
Corso teorico-pratico per infermieri - Conoscere e utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno nell'arresto cardiaca

LASER

Milano - MI 04
B&C Organizzazione Eventi
Tel. 0761.393939
Crippa Dr. R.
Corso teorico-pratico. L'uso del laser a diodi nell'estetica dentale



ODONTOCARD
il franchising



sito: www.odontocard.it
mail: info@odontocard.it
Tel-1: 02/26305051
Tel-2: 02/27205242

Stiamo selezionando
Laboratori Odontotecnici
per la nostra rete
in Franchising
*esperienza minima 10 anni

Soddisfatti o rimborsati!
Siamo presenti ormai in
10 capoluoghi di provincia con
oltre 40 laboratori affiliati.

"Solo chi guarda
lontano può
andare oltre
il proprio
confine"

S.A.M.DENT s.u.r.l.
di Stefano Marchetti

Forniture Dentali

OGNA
L'ALTRA FARMACIA

DEMETRON
KERR

MAJOR

DENSPLY

mactron
DENTAL TECHNOLOGY

3M ESPE

Intensiv
Swiss Dental Products

LANG



burzacchi srl
forniture dentali

associato
onda
consorzio



Pensare globale
Agire locale

**La distribuzione tradizionale a Roma e Centro Italia
vicina alle esigenze del cliente**

Burzacchi srl - forniture dentali

Via Tiburtina, 257 - 00162 Roma Tel. 06.4441534 r.a. Fax 06.4959327
www.burzacchi.it info@burzacchi.it

DISINFETTANTI PER MANI A CONFRONTO

Mani pulite, ma non solo



Disinfezione della pelle, dei cibi, dell'acqua e di qualsiasi oggetto utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Ma perché è così importante disinfettare? La disinfezione serve a distruggere i germi patogeni diffusi nell'ambiente, negli impianti e nelle attrezzature e quindi ad allontanare il pericolo di contrarre eventuali infezioni.

La disinfezione è una misura atta a ridurre tramite uccisione, inattivazione o sollevamento la quantità di microrganismi (batteri, virus, miceti, protozoi) di almeno centomila volte, al fine di rendere esente da qualsiasi fonte di infezione il materiale disinfettato. Per "tattica della disinfezione" s'intende la scelta ottimale dei parametri d'azione: tipo, concentrazione,

tempo di trattamento in relazione alla conta batterica. L'efficacia della disinfezione dipende dalla conta batterica, dalla presenza di sostanze organiche, dalla natura della superficie da trattare. In linea generale, nell'utilizzo dei disinfettanti, è indispensabile tenere in considerazione pochi, ma imprescindibili, elementi. La concentrazione, per esempio, gioca un ruolo

fondamentale: se non rispettata, può provocare fenomeni di resistenza. Particolare importanza, quindi, deve essere rivolta al dosaggio dei disinfettanti. L'utilizzo di una soluzione non perfettamente dosata rischia di rendere inutile l'operazione in corso e porta a un inutile spreco di prodotto. Occorre quindi ricordare che concentrazioni maggiori non assicurano risultati migliori e che concentrazioni inferiori alla MIC (Minima Concentrazione Inibente) possono provocare fenomeni di resistenza batterica. Importante, poi, attenersi scrupolosamente ai tempi di contatto per non vanificare l'azione del disinfettante. Il disinfettante, infatti, ha una maggiore efficacia se lasciato a contatto con la superficie da trattare per un certo periodo e il tempo di contatto dipende ovviamente dal tipo di prodotto usato e dalla percentuale di diluizione ed è quindi indispensabile attenersi ai tempi d'azione indicati dal produttore. La presenza di sporco può rendere inefficace qualsiasi intervento di disinfezione, pertanto non può esserci una buona disinfezione se non si parte da una perfetta pulizia. Dato che un'elevata carica microbica può annullare l'azione del disinfettante, è necessario ridurre la stessa con un'adeguata pulizia di ciò che de-

ve essere disinfettato. Anche i residui organici e i saponi possono inattivare la soluzione antisettica disinfettante e la temperatura troppo bassa o troppo alta rispetto alla quella consigliata può interagire negativamente con l'efficacia del disinfettante, diminuendo o degradandone il principio attivo. Le soluzioni disinfettanti devono essere conservate sempre come descritto dalle istruzioni, tenendo sempre bene in evidenza la data di scadenza. Inoltre, dato che le fibre di cotone assorbono il principio attivo riducendo il potere antibatterico, è inutile conservare battuffoli di cotone già imbevuti di antisettico. Per quanto riguarda i disinfettanti per le mani, tra i requisiti considerati essenziali vi sono certamente l'attività germicida e l'ampio spettro d'azione. Inoltre, il disinfettante deve

dimostrare un'azione rapida e persistenza nel tempo (attività residua). La sua capacità di azione deve permanere anche in presenza di sostanze organiche, con assenza di tossicità acuta e cronica. Ovviamente, la sua azione deve avvenire nel pieno rispetto della cute e quindi è essenziale che non alteri il pH fisiologico. Inoltre, deve avere un buon potere di penetrazione, possedere buone caratteristiche di stabilità chimica ed essere compatibile con saponi e liquidi di comune impiego (acqua potabile, distillata, alcol). In tema di compatibilità, il disinfettante non deve possedere azione irritante, né indurre sensibilizzazioni o resistenza. Non ultimo, l'eventuale presenza di profumazione può rendere più gradevole il contatto delle mani dell'operatore con il paziente.

La "resistenza" dei disinfettanti

Si parla di resistenza quando un disinfettante non riesce ad inattivare i microrganismi.

Si possono avere:

- resistenza apparente: in caso di conte batteriche o gradi di sporco molto elevati alcuni microrganismi sopravvivono;
- resistenza naturale: alcuni microrganismi sono particolar-

mente resistenti a determinati disinfettanti;

- resistenza acquisita: attraverso la continua selezione di cellule resistenti e le mutazioni si sviluppano lentamente ceppi (mutanti) resistenti. Soluzioni disinfettanti di concentrazione inadeguata favoriscono questo fenomeno.

Gli albori della disinfezione

La prima apparizione della parola disinfettante risale al diciassettesimo secolo, quando si pensava che certi effluvi o misteriose inalazioni causassero malattia e potessero essere distrutte da sostanze chimiche come lo zolfo combusto. In quel periodo, le malattie e gli ospedali erano associati ai cattivi odori o all'aria malsana e quindi il disinfettante rappresentava ciò che, distruggendo l'odore, aveva il potere di allontanare le infezioni.

Su 143 definizioni di "disinfettante" note tra il 1854 e il 1930 è stato evidenziato che in ben venticinque di esse non si faceva alcun riferimento a un eventuale effetto sui germi.

Nel 1750 Pringle indicò come antisettiche le sostanze che inibivano la putrefazione di materie organiche e fu solo con Lister che il concetto di antisepti venne legato a un'azione sui germi di tipo battericida o batteriostatico.

GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SUI DISINFETTANTI PER MANI

Alpro Dental

www.alpro-medical.com (Dati forniti da Quattroli srl - 02.96409029 - www.quattroli.com)

Amedics srl - 0532.978497 - www.amedics.it

Bier Farmaceutici sas - www.bierfarmaceutici.it

Dürr Dental (Dati forniti da SDM srl - 02.2401655 - www.duer.de)

Golmar Italia spa - 02.38103456 - www.golmar.com

IMS srl - 06.9145399 - www.imsonline.it

MC Italia srl - 02.93570411 - www.mcitallasrl.com

Metasys - 045.9814477 - www.metasys.com

Nuova Farmec srl - 045.6767672 - www.farmec.it (Dati forniti da Gaba Vebas srl - 02.98282085 - www.dentalvebas.com)

Ogna Laboratori Farmaceutici - 039.2782954 - www.ogna.it

Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico srl - 0131.822340 - www.sanitas-forma.it

Schülke & Mayr (Importatore e distributore De Marco srl - 02.719065 - www.demarco.biz)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

I dati pubblicati in questa sezione sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. I prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Disinfettanti per mani				
Denominazione del prodotto	CITROSTERIL SAPOMANI	CRM ANTIBACT	CRM WASH	DETERPAN (A)
Produttore	Sanitas srl	Alpro Dental	Alpro Dental	Ogna Laboratori Farmaceutici
Attività	Detergente, disinfettante	Detergente, disinfettante	Detergente	Detergente
Principio attivo	Benzalconio cloruro	•	•	•
Contiene alcoli	Si	Si	Si	No
PH	4.0-6.0	5.5-6.5 (20°C)	6.4-6.8 (20°C)	5.6-6.0
Formulazione quali-quantitativa completa	Principio attivo: benzalconio cloruro 3,50 g, Eccipienti: essenza di limone 0,12 g, essenza di timo 0,06 g, alcool etossilato 6 g, glicerolo 6 g, alchilamidobetaina 1 g, coccodietanolamide 8,80 g, glicole etilenico 0,50 g, giallo tartrazina 0,39 mg, blu patent 0,54 mg	Etanolo/ isopropanolo 40%, qav < 5%, tensioattivi anfoteri agente consolidante della schiuma, addensante	Aqua, sodium laurets sulfat, cocamidopropylbetaine, potassiumcocoyl, hydrolyzed collagen, peg-7, glyceryl cocoate, sodium chloride, laureth2, glycol distearate, cocamide mea, citric acid, parfum, benzyl - alcohol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, lodopropynyl butylcarbamate, c.l. 74180	Tensioattivi anionici e non ionici, profumo, coloranti, perlante, eccipienti ed acqua q.b.
Sostanze emollienti e curative	Vedi scheda tecnica	Si	Si	Disodium laneth-5 sulfosuccinate
Attività biocida	Battericida	Battericida, fungicida in 30 sec, virucida (hbv-hiv) in 1 min	No	No
Indicazioni d'uso specifiche	Soluzione saponosa, pulizia disinfezione cute e mani	Disinfezione e detersione delle mani in accordo con la normative DIN EN 1499. Specifica per studi medico/dentistici, cliniche e ospedali	Sapone in crema delicato per lavaggi frequenti (particolarmente indicato per aree igieniche sensibili come studi medico/dentistici, cliniche e ospedali)	Lavaggi frequenti delle mani in ambito professionale
Modalità di impiego	Usare puro, diluendo nel corso del lavaggio	3 ml sulle mani per 30 sec prima del risciacquo con acqua corrente	Detersione con acqua	Da utilizzare come i normali saponi liquidi
Incompatibilità fisico-chimiche	Si saponi, detersivi anionici	Si infiammabile	No	No
Caratteristiche tossicologiche	DL 50 os-rat: 400 mg/kg; DL 50 skin-rat: 1560 g; DL 50 skin-mouse: 1420 mg/kg	Nessuna tossicità acuta né effetti irritanti noti	Nessuna tossicità acuta né effetti irritanti noti	•
Confezionamento	1000 ml	Flacone da 500 ml	Flacone da 1.000 ml	Flacone da 500 g con erogatore
N° di applicazioni	Vedi scheda tecnica	Mattino, sera, ogni intervento chirurgico	Frequenti, ad ogni cambio guanti	> 250
Tossicità ambientale	Rifiuto speciale	Biodegradabili in accordo alla normativa OECD	Biodegradabili in accordo alla normativa OECD	Nessuna pericolosità
Presenza di studi di cancerogenesi	•	No	No	No
Esistenza di riferimenti bibliografici	•	Si	Si	No
Prezzo di listino*	Euro 12,65	Non fornito	Non fornito	Euro 14,22 (confezione 2 flaconi da 500 ml cad)

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Disinfettanti per mani				
Denominazione del prodotto	GEL MANI DISINFETTANTE	G MULTIUSI FAZZOLETTINI DISINFETTANTI	GREEN&CLEAN HD	GREEN&CLEAN HL
Produttore	Amedics srl	Golmar Italia spa	Metasys	Metasys
Attività	Disinfettante	Disinfettante	Disinfettante	Detergente
Principio attivo	Alcool denaturato	Cloruro di Alchilbenzileilammonio, ortofenilfenolo, alchilisoquinolina bromuro	N-propanol, 2-propanol	Clorexidina
Contiene alcoli	Si	Si	Si	No
PH	6.5-8.5	•	7.0	5.5-5.7
Formulazione quali-quantitativa completa	Alcool denaturato 62 g, eccipienti tecnologici q.b. a 100 g	Cloruro di Alchilbenzileilammonio 0,5%, ortofenilfenolo 0,01 mg, alchilisoquinolina bromuro 0,2%, estratto di camomilla in soluzione alcolica, eccipiente detergente Alchil-poliglicol-letere ed acqua deionizzata q.b. a 100 g	1-propanolo, 2-propanolo, didecildimetilammonio cloruro	Clorexidina, digluconato, isopropanolo, tensioattivi, profumo, agenti curativi
Sostanze emollienti e curative	Non diffondibili	Estratto di camomilla	Olio di noccioli di albicocca, estratti di barbabietole da zucchero	Allantoina
Attività biocida	Si EN 1040 - CEN/TC216 - Draft PrEN 12054 - CEN/TC 216 EN 1500	Batteri gram+ e gram- e acido resistenti, funghi, virus	Si battericida, fungicida, virucida, tuberculocida	Si battericida, fungicida
Indicazioni d'uso specifiche	Disinfettante per mani senz'acqua	Disinfezione rapida di mani e parti del corpo, punture di insetti e cute prima e dopo le iniezioni. Deodora rapidamente e profuma la pelle, medicazione ideale per i bambini perché non brucia.	Disinfezione igienizzante e chirurgica mani	Detergente antisettico mani
Modalità di impiego	Frizionare con 5 ml per 30 sec	Strofinare il fazzolettino sulle mani o sulla parte del corpo che si intende disinfettare, lasciare che il prodotto agisca senza asciugarsi	Strofinare su mani e avambracci per 5 min (chirurgica), strofinare su mani per 30 sec (igienizzante)	Strofinamento su mani con acqua
Incompatibilità fisico-chimiche	Si non applicare su mucose e occhi	Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto	Nessuna se utilizzato in modo appropriato	Nessuna se utilizzato in modo appropriato
Caratteristiche tossicologiche	Vedi scheda di sicurezza	Prodotto ben tollerato, bassa tossicità acuta	LD50 orale > 500 mg/kg, irrita le mucose oculari	Nessuna nota
Confezionamento	Flacone da 500 ml x 12 pz	Scatola da 400 bustine o 6 barattoli da 120 strappi	Flaconi, taniche	Flaconi, taniche
N° di applicazioni	Ogni paziente	All'occorrenza, più volte al giorno	Prima e dopo ogni trattamento 3 ml cad., 5000 ml/3 = 1.666 applicazioni	Prima e dopo ogni trattamento 3 ml una volta 5000 ml/3 = 1.666 applicazioni
Tossicità ambientale	Vedi scheda di sicurezza	Biodegradabile oltre il 90%	DIN 38412: LCO= n.a. mg/l; OECD: > 99%	Nessuna
Presenza di studi di cancerogenesi	No	No	No	No
Esistenza di riferimenti bibliografici	Si	No	Si	Si
Prezzo di listino*	Euro 10,00 (Flacone da 500 ml con dosatore)	Non fornito	Euro 9,16 al lt (tanica da 5 lt)	Euro 12,26 al lt (tanica da 5 lt)

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Disinfettanti per mani				
Denominazione del prodotto	HD 410 (A)	HD 430 SCHIUMA (A)	HD 435 (A)	HYGIEN SOAP
Produttore	Dürr Dental	Dürr Dental	Dürr Dental	Amedics srl
Attività	Disinfettante	Detergente	Detergente	Detergente, disinfettante
Principio attivo	Alcool, quats	•	•	Cetilpiridinio cloruro
Contiene alcoli	Si	No	No	No
PH	5.5	5.8	5.4	4.5-6.5
Formulazione quali-quantitativa completa	1 - propanolo 26 g 2 - propanolo 27 g (in 100 g), benzil di idrossiletile, olio di cocco, cloruro di ammonio 0,1 g e altro (vedi scheda tecnica)	Acidi grassi naturali, altre sostanze attive (vedi scheda tecnica)	Tensioattivi e sostanze antimicrobiche (vedi scheda tecnica)	Cetilpiridinio cloruro 0,15 g, eccipienti empicol esb 3m, empilan c.d.e., glicerina, idrossietilcellulosa, fiori bianchi, acqua depurata q.b. a 100 g
Sostanze emollienti e curative	Gliceridi caprilici	Allantoina+altro (vedi scheda tecnica)	Acido lattico. Sali, allantoina, olii (vedi scheda tecnica)	Glicerina
Attività biocida	Fungicida, battericida, virucida	No	No	Si
Indicazioni d'uso specifiche	Disinfezione delle mani o dei guanti omologati pluriuso	Sapone schiumogeno per la pelle	Detergente non sapone	Dermosapone disinfettante per mani
Modalità di impiego	3 o 2x5 ml x 30 o 300 secondi	Applicazione da dispenser Dürr	Applicazione da dispenser Dürr	Lavarsi le mani frizionando con 5 ml per 30 sec
Incompatibilità fisico-chimiche	Non idoneo su ferite aperte	No	No	Si non applicare su mucose e occhi
Caratteristiche tossicologiche	Lievemente irritante in caso di contatto con gli occhi	•	•	Vedi scheda di sicurezza
Confezionamento	Flacone 2,5 lt	Flacone 2,5 lt	Flacone 2,5 lt	Flacone da 500 ml x 24 pz - 1000 ml x 12 pz - 5 litri x 4
N° di applicazioni	Variabile	Circa 2.000	800 circa	Ogni paziente
Tossicità ambientale	Biodegradabile	Biodegradabile OECD	Biodegradabile OECD	Vedi scheda di sicurezza
Presenza di studi di cancerogenesi	No	No	No	No
Esistenza di riferimenti bibliografici	Si	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Euro 36,00	Euro 26,00	Euro 25,00	Euro 5,00 (Flacone da 500 ml) Euro 7,00 (1000 ml) Euro 23,00 (tanica)

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Disinfettanti per mani				
Denominazione del prodotto	NEOXIDINA MANI 4%	OASIS MEDICAL P.M.C. N. 17108	OGNADERM (A)	PERLE MANI
Produttore	Nuova Farmec srl	Golmar Italia spa	Ogna Laboratori Farmaceutici	Bier Farmaceutici sas
Attività	Disinfettante	Detergente, disinfettante	Detergente, disinfettante	Detergente
Principio attivo	Clorexidina gluconato	Alchilbenzildimetil ammonio cloruro e O-Fenilfenolo	Triclosan + fenossietanolo	•
Contiene alcoli	Si	No	Si	No
PH	7	5.5	5.5-6.0	4.5-4.7
Formulazione quali-quantitativa completa	100 ml contengono: clorexidina gluconato 4 g, alchilpoliglucoside 4 g, dietanolammide di cocco 5 g, alcool isopropilico 1 g, polisorbato 20 15 g, peg 150 1 g	Alchilbenzildimetil ammonio cloruro 500 mg, O-Fenilfenolo 500 mg, oli essenziali solubilizzati 1500 mg, glicerina 3000 mg, alcalonammide poliglicoletere, alchilpoliglicoletere e acqua deionizzata q.b. a 100 g	Tensioattivi anionici e non ionici, triclosan, fenossietanolo, alcool isopropilico, coloranti, profumo, eccipienti ed acqua q.b.	•
Sostanze emollienti e curative	No	Glicerina	No	No
Attività biocida	Battericida, Fungicida, Virucida EN 1040, draft prEN 12054, EN 1500	Valutazione efficacia disinfettante secondo Normative Europee: EN 1040 - EN 13727 - prEN 12791.	Battericida - prEN12054 battericida su mani EN1499	No
Indicazioni d'uso specifiche	Lavaggio antisettico, disinfezione chirurgica delle mani	Antisettico liquido che garantisce un'azione disinfettante, elimina e controlla la carica batterica presente sulla cute, oltre all'effetto detergente, garantisce un'azione batterica ad ampio spettro	Sapone disinfettante per cute integra, indicato per lavaggi frequenti	Detersione frequente delle mani
Modalità di impiego	Inumidire le mani, versare 4 ml, strofinare x 1 minuto, risciacquare. Nel lavaggio chirurgico, ripetere per altri 2 minuti	Applicare sulle mani preventivamente bagnate circa 5 ml e dopo un accurato lavaggio risciacquare (fino a 2 minuti, prima di interventi chirurgici)	Dopo aver bagnato le mani, prelevare una quantità di sapone sufficiente per detergere la zona, indi strofinare per circa 30 secondi. Risciacquare abbondantemente	Uso esterno
Incompatibilità fisico-chimiche	Si incompatibile con detergenti anionici, perossido d'idrogeno, ioduri, saponi ed agenti emulsionanti	Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto	No	No
Caratteristiche tossicologiche	In caso di contatto può provocare irritazione agli occhi e, se ingerito, alla mucosa orale ed al tratto superiore dell'apparato digerente	Tossicità: DL50 per os nel ratto = 15 ml/kg	Irritante per gli occhi	Non si riscontrano note tossicologiche
Confezionamento	12 flaconi da 100 ml	6 flaconi da litro con dosatore o 12 flaconi da 1/2 litro con dosatore	Conf. da 100 g e da 500 g	Tanica 10 lt
N° di applicazioni	25 lavaggi	Consente frequenti lavaggi	50 conf. 100 g - 250 conf. 500 g	•
Tossicità ambientale	Nessuna	Biodegradabile secondo il regolamento CE n°648/04	Nessuna pericolosità	Non tossico
Presenza di studi di cancerogenesi	No	No	No	No
Esistenza di riferimenti bibliografici	Si	No	No	No
Prezzo di listino*	Euro 164,80	Non fornito	Non fornito	Non fornito

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Disinfettanti per mani				
Denominazione del prodotto	S&M WASHLOTION	SACTI-MED SMEL GEL	SACTI-MED SMEL SOAP	SPOREXIN MANI
Produttore	Schülke & Mayr	MC Italia srl	MC Italia srl	IMS srl
Attività	Detergente	Disinfettante	Detergente, disinfettante	Disinfettante
Principio attivo	•	Alcool etilico denaturato	Cetilpiridinio cloruro monoidrato	Fenolo
Contiene alcoli	No	Si	No	No
PH	5.5	6.5-8.5	4.5-6.5 20°C	8.0 +/- 0.5
Formulazione quali-quantitativa completa	Lozione lavante senza alcoli e saponi a base di tensioattivi compatibili con la pelle delle mani e del corpo	Alcool etilico denaturato 62,00 g, eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100 g	Principio attivo: cetilpiridinio cloruro monoidrato 0,15 g, eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100 g	Fenolo 1,41 g, sodio fenato 0,24 g, eccipienti e acqua depurata q.b. a ml 100
Sostanze emollienti e curative	No	Isopropile adipato, glicerina	Glicerina	No
Attività biocida	No	Batteri Gram+ e Gram- (staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli), funghi (candida albicans), micobatteri (mycobacterium tuberculosis), virus (Hiv, Hbv, Hcv)	Battericida ATCC 6538, ATCC 15442, NCTC 10538, ATCC 10541, CEN TC/216 EN 1499	Attività battericida prEN 12054 EN 1499
Indicazioni d'uso specifiche	Pulizia delle mani e del corpo	Gel pronto all'uso per la disinfezione delle mani senza risciacquo nei reparti di chirurgia, negli ambulatori odontoiatrici e ambienti sanitari in genere	Antisepsi e detersione della cute non lesa per il personale medico e paramedico nei reparti di chirurgia, negli ambulatori odontoiatrici e ambienti sanitari in genere	Si antisettico, anallergico, disinfettante
Modalità di impiego	Utilizzare 2 cc di liquido con aggiunta di acqua	Frizionare con 5 ml per 30 sec, ripetere l'operazione due volte frizionando fino a sentire le mani asciutte	Versare una piccola quantità (5 ml) nel cavo della mano e frizionare per almeno 1 minuto, risciacquare. Ripetere l'operazione	Distribuire 5 ml su mani bagnate, frizionare, risciacquare
Incompatibilità fisico-chimiche	No	Agenti ossidanti	Saponi e detersivi anionici e con anioni inorganici	No
Caratteristiche tossicologiche	•	Un uso improprio del prodotto può produrre effetti come irritazione e secchezza	Non irritante per la cute; il principio attivo contenuto presenta una DL50 a.o., nel ratto pari a 200 mg/kg	Nocivo per ingestione, irritante per gli occhi
Confezionamento	Flaconi da 1 lt	Flacone 1 lt, tanica 5 lt	Flacone 1 lt, tanica 5 lt	Flacone 500 ml, tanica 5.000 ml
N° di applicazioni	500	•	•	Da 100 a 500
Tossicità ambientale	Smaltimento con rifiuti urbani	•	P.A Facilmente biodegradabile	Biodegradabile oltre il 90%
Presenza di studi di cancerogenesi	No	No	•	No
Esistenza di riferimenti bibliografici	No	Si	No	Si
Prezzo di listino*	Euro 6,45 (flacone da 1 lt)	Non fornito	Non fornito	Euro 6,20 (flacone 500 ml) Euro 41,20 (tanica 5000 ml)



► Igiene profonda nel rispetto della pelle



Deterpan è un sapone non sapone (syndet) nato da un'accurata ricerca cosmetologica: la sua formulazione a pH isodermico è stata studiata per non inaridire la cute anche dopo fre-

quenti lavaggi, come purtroppo accade con i saponi tradizionali. I tensioattivi delicati e le sostanze emollienti presenti detergono la cute lasciandola piacevolmente idratata e profumata. Il prodotto è quindi particolarmente adatto ad un utilizzo in ambito professionale ogni volta che sia necessaria un'accurata pulizia delle mani. Deterpan è disponibile in confezioni da 500 g con erogatore e in pratiche ricariche da 5 Kg. Cod. 15021

Ognaderm è un sapone disinfettante liquido per una rapida ed efficace disinfezione della cute integra (mani, braccia). Grazie alla presenza di tensioattivi delicati ed al suo pH isodermico, Ognaderm non aggredisce la cute ma la deterge e disinfetta in profondità. Il prodotto è stato testato in accordo alla norma prEN 12054 ed è risultato efficace sui seguenti ceppi batterici: Enterococcus Hirae, E. Coli, St. Aureus, Ps. Aeruginosa. Il prodotto è stato sottoposto al saggio EN 1499 con esito favorevole. La sua

formulazione lo rende particolarmente adatto per l'uso frequente sia in ambito professionale (disinfezione delle mani prima e dopo gli interventi) che in ambito domiciliare. Il prodotto contiene, come principi attivi triclosan + fenossietanolo veicolati in alcool isopropilico, tensioattivi, coformulanti ed acqua. Ognaderm è disponibile in confezioni da 100 g e da 500 g.

Validità del prodotto: 36 mesi.
Presidio Medico Chirurgico - reg. n° 19233
del Ministero della Salute
Cod.15055

Per informazioni:
Ogna Laboratori Farmaceutici
Via Figini, 41
Muggiò (MI)
Tel. 039.2782954
Fax 039.2782958
info@ogna.it
www.ogna.it



► HD 410 – 430 e 435 per la disinfezione e deterzione delle mani



HD 410 DISINFEZIONE DELLE MANI

HD 410 è una frizione alcoolica ad azione rapida per la disinfezione igienica e chirurgica delle mani. D 410 contiene componenti per un'azione immediata e duratura. Le sue sostanze idratanti e curative proteggono le mani e consentono un utilizzo regolare del prodotto. Con l'HD 410 si possono disinfetta-

re anche guanti pluriuso omologati. HD 410 presenta un'ampia efficacia microbiologica, infatti è attivo contro batteri incl. Tbc, funghi, virus (virus con involucro, HBV, HCV1) e HIV2)). Lista DGHM.

1) Test su surrogato BVDV
2) L'efficacia contro il virus HBV comprende anche l'efficacia contro il virus HIV.

HD 430 FOAM LOZIONE DETERGENTE

HD 430 foam è un sapone schiumogeno delicato con speciali sostanze attive per la pulizia delle mani, per esempio dopo l'utilizzo di preparati irritanti alcoolici. Il pH basico dei normali saponi ha potuto essere ridotto a un valore neutro grazie a una speciale formulazione, che consente di preservare il normale strato protettivo acido della pelle durante il lavaggio. HD 430 foam mostra un'ottima tollerabilità anche in caso d'uso frequente. Piacevole sensazione "cremosa" sulla pelle prima e dopo il lavaggio grazie ad additivi seleziona-

ti. HD 430 foam permette un uso moderato.

HD 435 LOZIONE DETERGENTE

HD 435 è una soluzione detergente antimicrobica delicata per la pelle. HD 435 rispetta infatti il pH della pelle, preservandone lo strato protettivo acido. Prodotto privo di alcali e sapone, adatto per la pulizia delle mani, per esempio dopo l'uso di preparati irritanti alcoolici, per il bagno e la doccia. L'aggiunta di componenti speciali per la cura e la protezione della pelle garantisce un'eccellente tollerabilità e una piacevole sensazione sulla pelle durante e dopo il lavaggio. Sostanze speciali stabilizzano la naturale umidità della pelle, creano una barriera contro eventuali irritazioni in caso di lavaggi frequenti e proteggono grazie a marcate proprietà idratanti. HD 435 contiene additivi antimicrobici per una generale riduzione dei germi.




Per informazioni:
SDM srl
Via G. di Vittorio, 307/2
20099
Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.2401653
Fax 02.2428637
info@sdmdurr.it


MULTIVANTAGGI



Kit videografia
+ software
€ 4.500

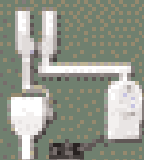

Radiologia
digitale
€ 6.800

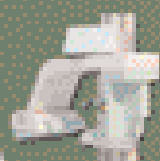

Tomografo
€ 10.700
Tomografo
digitale*
€ 20.900

*PC omaggio

EGO
€ 13.200


CORSO GRATUITO
per l'uso del G-LASER




G-Laser 6
€ 8.300
G-Laser 25
€ 13.500



SMART
€ 8.700

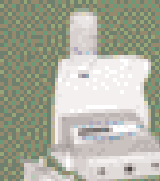

Micro-motore
per implantologia
€ 2.650

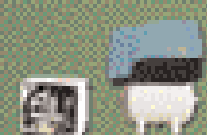

Compressore
+ aspiratore
€ 2.150

€ 2.000 DI SUPERVALUTAZIONE
dell'usato* se acquisti EGO
completo di dentifiori
e kit multimediale**



Lampade
Fly light
€ 850



FOX
€ 11.400

€ 13.500
in versione multimediale**

IN OMAGGIO
GPS kit disinfezione
e GPS kit manutenzione




Aladdin
€ 2.650


BioPostural
System
€ 6.000




Linea di
sterilizzazione
€ 3.300
con autoclave
e sigillatrice
€ 7.200

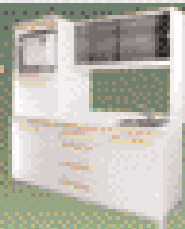

Easy € 390

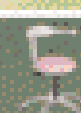

F4 € 490

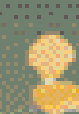


Pluto € 390



14° CONGRESSO NAZIONALE DEL "COLLEGIO DEI DOCENTI DI ODONTOIATRIA"



SOTTO L'ALTO PATRONATO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ON. GIORGIO NAPOLITANO
E CON IL PATROCINO DI:
COMUNE DI ROMA
REGIONE LAZIO

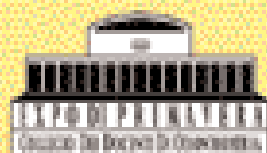

Esposizione di Attualità e Materiali per Odontochirurgia

ROMA - PALAZZO DEI CONGRESSI
18 - 19 - 20 - 21 Aprile 2007

SEGRETERIA CONGRESSO & MOSTRA

Pro Odonto Congress s.r.l.


Via Monte delle Gioie, 24 - 00199 - Roma

Tel. 06.86.21.11.31 Fax 06.86.21.26.26

e-mail: proodonto@tin.it sito: www.proodontocongresso.it

Anna Rosa GALLONI



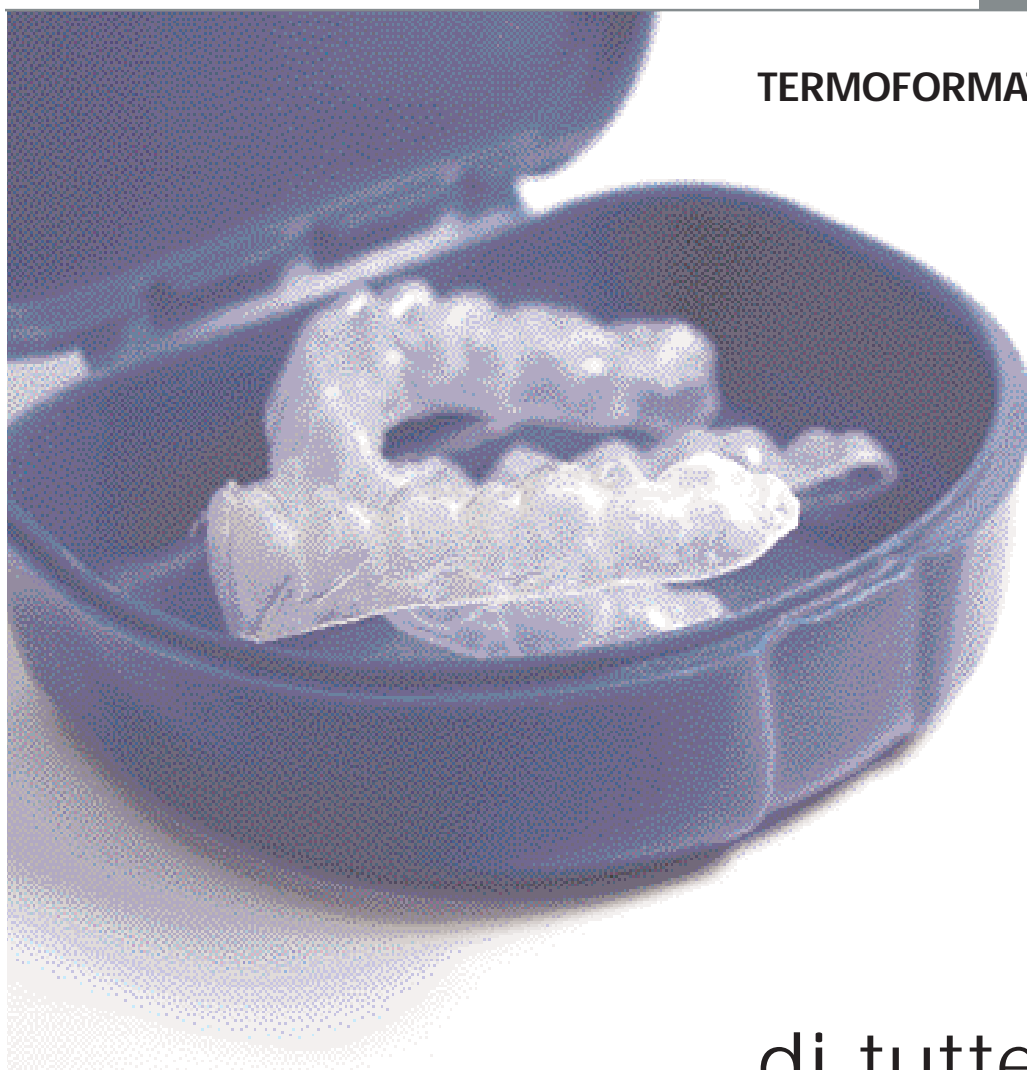

TERMOFORMATRICI A CONFRONTO

Per farne di tutte le forme

Il calore è da sempre nella storia dell'uomo. Alleato indispensabile nella vita di tutti i giorni, gioca un ruolo da protagonista anche nelle applicazioni professionali.

Lo stampaggio tramite calore è una tecnologia largamente utilizzata in diversi ambiti industriali. In ambito dentale, la tecnica del termostampaggio può essere utilizzata per diverse tipologie di lavorazione. Infatti, grazie ad essa, è possibile realizzare:

- mascherine di trasferimento per bracket
- mascherine per sbiancamento dei denti
- docce morbide o rigide
- paradenti per apparecchi fissi o sport
- contenzioni
- bite
- placche
- duplicazioni
- cappette

- portaimpronta individuali
- provvisori
- basi per masticazioni e per protesi totali

Il fulcro di tutto ciò è rappresentato da un'apparecchiatura chiamata termostampatrice o termoformatrice. Si tratta di unità particolarmente versatili, in grado di scaldare e modellare fogli costituiti da resine termoplastiche per dare forma ai diversi tipi di mascherine e dispositivi. Sono apparecchi sofisticati, controllati elettronicamente, che dispongono di diverse combinazioni tra tempo di riscaldamento e temperatura per le diverse applicazioni. In commercio sono presenti termoformatrici che



funzionano a pressione o con vuoto aspirato. La scelta tra le due tipologie dipende principalmente dal tipo di utilizzo. Le unità con pompa del vuoto integrato realizzano la mascherina "tirando" il materiale di termoformazione sul modello. Gli apparecchi ad aria compressa, invece, pressano il materiale sul modello. Entrambe le tecniche risultano precise e in grado di riprodurre accuratamente i dettagli, ma di solito per la realizzazione di alcuni tipi di placche, cappette o dispositivi ortodontici è preferibile l'utilizzo di unità a pressione. D'altra parte, rispetto a quelle con vuoto aspirato, le termoformatrici a pressione richiedono una fornitura di aria compressa. Le termoformatrici hanno solitamente dimensioni compatte e quindi la loro collocazione nella zona operativa risulta agevole. Alcuni modelli prevedono la possibilità di abbinare un dispositivo occluso-

re, che permette di realizzare anche l'arcata antagonista in una sola fase. La realizzazione delle mascherine avviene mediante fogli di vinile o dischi in resina termoplastica che all'origine risultano rigidi e duri. Per effetto del calore, la resina diventa deformabile e modellabile e in grado di adattarsi con precisione al modello dell'arcata.

UN'APPLICAZIONE PARTICOLARE

Mediante l'utilizzo di una termoformatrice a pressione è possibile realizzare mascherine per il trasferimento indiretto dei bracket, denominate transbracket. Si tratta di una metodica veloce e affidabile, la cui ideazione risale agli anni Settanta. In linea generale, la procedura prevede l'incollaggio dei bracket sul modello in gesso con collante idrosolubile. Successivamente, si passa alla fase di

Le materie plastiche

Con materie plastiche ci si riferisce all'ampia gamma di polimeri (o resine) ad alto peso molecolare, sintetici e artificiali, additivati con determinate sostanze, utilizzati nella produzione di fibre tessili, materiali da imballo, da costruzione, articoli casalinghi e oggetti vari. La denominazione corretta è quella di plastomeri, che ne evidenzia la natura polimerica e lo stato fisico plastico. Quando si trovano sotto sforzo, subiscono deformazioni permanenti, a differenza degli elastomeri che, una volta cessato lo sforzo deformante, ritornano alla loro forma iniziale. Le materie plastiche possono essere rigide, e in tal caso sono costituite da composti polimerici amorfi, come il polistirene, il polimetilmetacrilato, le resine fenoliche e le resine amminiche; oppure flessibili, costituite da composti polimerici con discreti valori di cristallinità, come il polietilene e il polipropilene. Un'importante suddivisione delle materie plastiche, ai fini della loro lavorabilità, è quella che le distingue in termoindurenti e termoplastiche. Le **materie plastiche termoindurenti** sono costituite da polimeri in cui il riscaldamento induce dapprima un rammollimento accompagnato da un aumento

della plasticità, del quale ci si avvantaggia per sottoporre il materiale alla lavorazione; poi, continuando ad aumentare la temperatura, ha inizio una reazione di reticolazione, con formazione di legami trasversali tra le diverse catene polimeriche e conseguente aumento della viscosità del materiale, che diventa rigido, duro, insolubile e infusibile. Questa trasformazione è permanente. Tra le materie plastiche termoindurenti vi sono: resine fenolo-formaldeide, urea-formaldeide e melammina-formaldeide; resine epossidiche e poliuretani reticolabili. Le **materie plastiche termoplastiche** sono costituite da polimeri che con l'innalzamento della temperatura assumono uno stato di scorrevolezza plastico ma, con il ritorno alla temperatura ambiente, riacquistano le caratteristiche e la consistenza iniziali. Infatti, il calore non provoca alcuna modificazione chimica nel materiale, ma soltanto un allentamento dei legami deboli che tengono unite le catene polimeriche. Tra le materie plastiche termoplastiche vi sono: polivinilcloruro, polistirene, polietilene, polipropilene, poliammidi, poliuretani non reticolabili e fluoropolimeri non elastomerici, politetrafluoroetilene.

termostampaggio con una macchina a 5 atmosfere di pressione di esercizio effettivo, utilizzando un disco di consistenza morbida ed elastica dello spessore di 0,5 mm. La mascherina così ottenuta deve essere opportunamente tagliata e rifinita. Ultimata la rifinitura del primo disco, si passa al termostampaggio del secondo disco di consistenza dura e rigida dello spessore di 0,5 mm. Questo secondo disco arriva a coprire completamente la prima ma-

schierina e ha lo scopo di mantenere la posizione dei bracket invariabile inglobando il primo foglio morbido. Una volta terminata questa seconda fase, i modelli vengono immersi in acqua tiepida per facilitare il distacco delle mascherine. Con la stessa tecnica è possibile realizzare anche mascherine per la mordenzatura, che permetteranno all'odontoiatra di individuare i punti esatti su cui applicare la mordenzatura per la successiva applicazione dei bracket.

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Termoformatrici					
Denominazione del prodotto	BIOSTAR (A)	HORIFORM (A)	KEYSTONE TERMOFORMATRICE	LUX SEAL	MINISTAR S (A)
Produttore	Scheu Dental	Horis srl	Keystone	Reverberi srl	Scheu Dental
Breve descrizione della macchina	Termostampante a pressione di grande versatilità per tutti gli utilizzi nella tecnica di termostampaggio	Automatica, dotata di pozzetto perline	Termoform. proform sotto-vuoto permette di realizzare in poco tempo mascherine, cucchiai x bruxismo, basi per dentiere	Saldatrice termica per carta e plastica	Termostampante a pressione di grande versatilità per tutti gli utilizzi nella tecnica di termostampaggio
Alimentazione (V)	230	220	230	230	230
Frequenza (Hz)	50/60	50	50	50/60	50/60
Presa di corrente (A)	4	25	•	Suko France	4
Potenza assorbita (W)	850	350	16 AMP	150	850
Oblò	Si, stessa potenza assorbita	Si	No	No	Si, stessa potenza assorbita
Tempo di preriscaldamento (min)	Nessuno	2-3	5	5	Nessuno
Tempi di raffreddamento (in secondi)	Dipende dal materiale utilizzato	120	6 min	5 min	Dipende dal materiale utilizzato
Dimensioni (LxPxH) (mm)	460x250x260	250x290x340	19,5x25x33	350x350x300	420x190x350
Peso (kg)	16	9	7	9	9
Massa netta (kg)	16	9	•	8	9
Massa con imballo (kg)	18	11	7,5	10	112
Materiali utilizzabili	Essix, biocryl, duran, imprelon, durasoft, isofolan, copyplast, hardcast, bioplast	Alluminio	Vinile, PVC, stirene, propilene	Rotoli carta/plastica diam. 275 mm	Essix, biocryl, duran, imprelon, durasoft, isofolan, copyplast, hardcast, bioplast
N. di interruttori	1, accensione	7, resistenza, pompa, salita e discesa del carrello, alimentazione	2	1, generale	1, accensione
Piastra per il vuoto	Non necessaria	Circolare e forata	Senza guarnizioni plastiche	12 mm	Non necessaria
Pompa del vuoto incorporata	Funziona a pressione 6 atmosfere	Si	Si	No	Funziona a pressione 3 atmosfere
Spessore piastre (mm)	Da 0,1 a 5	Da 0,2 a 4	0-5	12	Da 0,1 a 5
Silenziatore	No	Si	No	Si	No
Prezzo di listino*	Euro 2.640,00	Non fornito	Euro 435,00	Euro 395,00	Euro 1.425,00

Legenda: (A) Approfondimenti (E) In offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Termoformatrici

Denominazione del prodotto	PERIOVAC	PERIOVAC 3	PERIOVAC 2	PLASTIFORM
Produttore	Periodent	Periodent	Periodent	WH
Breve descrizione della macchina	Robustezza costruttiva, flusso d'aria ad alta velocità e cornice a blocco rapido senza guarnizioni. Leggera	Design che previene la contaminazione del motore e schermata l'elemento termico. Vuoto a due stadi, cerniera autolivellante, costruzione per uso pesante, durevole e affidabile	Vuoto a due stadi, cerniera autolivellante, costruzione per uso pesante, durevole e affidabile	Termoformatrice completa di vuoto a motore
Alimentazione (V)	220	220	220	220
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	•
Presa di corrente (A)	Shueko	Shueko	Shueko	•
Potenza assorbita (W)	900	900	900	450, resistenza motore 700
Oblò	No, cappa di riscaldamento	No, cappa di riscaldamento	No, cappa di riscaldamento	•
Tempo di preriscaldamento (min)	2,30	2,30	2,30	•
Tempi di raffreddamento (in secondi)	5 min	5 min	5 min	•
Dimensioni (LxPxH) (mm)	191x241x381	178x406x280	190,5x267x381	360x200x350
Peso (kg)	7,7	16,5	14,5	7
Massa netta (kg)	•	•	•	•
Massa con imballo (kg)	9	18	16	8
Materiali utilizzabili	Stirene, polipropilene, etil-vinil acetato (EVA) EVA, vinile, ecc.	Stirene, polipropilene, etil-vinil acetato (EVA) EVA, vinile, ecc.	Stirene, polipropilene, etil-vinil acetato (EVA) EVA, vinile, ecc.	Tutti i tipi di dischi
N. di interruttori	2, sotto vuoto e riscaldamento	2, sotto vuoto e riscaldamento	2, sotto vuoto e riscaldamento	•
Piastra per il vuoto	Multifori antiaderente, quadrata	2 intercambiabili: multifori antiaderente, quadrata e vaschetta con sfere metalliche	Multifori antiaderente, quadrata	•
Pompa del vuoto incorporata	Si	Si	Si	Si
Spessore piastre (mm)	Da 0,5 a 4,5	Da 0,5 a 4,5	Da 0,5 a 4,5	•
Silenziatore	No	No	No	Si
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito

GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SULLE TERMOFORMATRICI

Horis srl - 0544.523302 - www.horisdental.it

Keystone (Importatore e distributore Las srl - 0434.597001 - www.unicagroup.it)

Periodent (Dati forniti da Illic Dr. Riccardo spa - 02.55016500 - www.illic.it)

Reverberi srl - 0522.875159 - www.reverberi-srl.it

Scheu Dental (Dati forniti da TP Italia srl - 035.4520001 - www.tpitalia.com e da Dentag Italia srl - 0471.256233 - www.dentag-italia.com)

WH (Importatore Metal Store sas - www.dentalshop.it)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

I dati pubblicati in questa sezione sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. I prodotti, quando possibili, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

CINQUANTESIMO
CONGRESSO

50

Fiera di Rimini
24-25-26 maggio 2007
ACCREDITATO ECM



Associazione
Amici di Brugg

Dentoflex e Dentolino: l'innovazione nell'igiene orale

G&D Distribuzione presenta in anteprima sul mercato italiano una linea completa di prodotti innovativi per l'igiene orale (tascabile).

Dentoflex

Il sistema di cura dentale tascabile Dentoflex costituisce una innovazione nell'igiene orale. Il set (completo) del prodotto originale permette di pulire accuratamente i denti in qualsiasi situazione. Questo prodotto, ideale per tutti, è particolarmente indicato per le persone con dentiera, capsule e apparecchi dentali in genere. Raggiunge con facilità le parti più scomode della bocca grazie anche alle angolazioni regolabili. Il disegno è originale e brevettato. Il fusto e le setole, infrangibili, sono prodotti con resina di plastica igienica gusto menta. La testina a spazzola arrotondata, delicata sulle gengive, è rimovibile (usa e getta) ed evita infezioni. La spazzola interdentale facilita la rimozione delle particelle di cibo. Flessibile e regolabile per poter arrivare ai molari e negli spazi interdentali. La lima è seghettata per rimuovere placca e principi di tartaro tra i denti.



Dentolino

Il sistema di cura dentale tascabile Dentolino è un'autentica evoluzione del vecchio stuzzicadenti in legno, per secoli utilizzato dall'uomo per rimuovere le particelle di cibo. Questo prodotto permette di pulire accuratamente i denti in qualsiasi situazione e nella massima sicurezza, senza danneggiare o provocare fastidio ai denti. Dentolino, col suo disegno originale brevettato, si presenta come sicuro, pratico e conveniente. Oltre ad essere uno stuzzicadenti è anche un piccolo spazzolino. La testina arrotondata è delicata sulle gengive e le piccole setole spazzolano via le particelle di cibo. L'estremità è a lima seghettata per rimuovere placca e i principi di tartaro tra i denti. La forma e la flessibilità consentono di accedere anche ai molari. Il materiale igienico (polipropilene) non assorbe saliva. ■



G&D Distribuzione
ged.distribuzione@alice.it
Fax 085.4223062


finition[®]
Silicone medicale



CE

finition[®] **XT**
Termoplastica medicale

posizionatori preformati

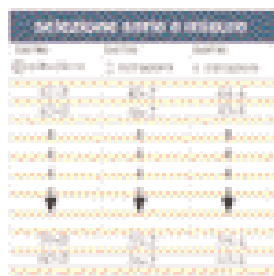

- Trasparente
- Elastico
- Biocompatibile
- Sterilizzabile in autoclave
- Può essere disinfettato nell'acqua bollente
- Ottima resistenza alla lacerazione
- Uso a lungo termine e come stabilizzazione

finition[®] **XT** e **finition**[®]

Prezzo unitario € 49 iva escl.
Offerta 5 pz. € 215 *
10 pz. € 390 *
Offerta valida fino al 30/06/07

Bracket ceramica **MISO**



Standard
018/022

Rcp
018/022

Offerta -10% fino al 30/06/07
Da € 9,9 iva esc. prezzo unitario

Attacco trasparente
in zaffiro monocristallino



Via Modigliani 33
20090 Segrate
tel. 0226952457 fax 022131604
Email orthopost@fastwebnet.it
www.orthopost.com

► OpusDuo Aqualite

Dall'esperienza di OpusDent e Lumenis, azienda leader mondiale nella produzione di sistemi laser e luce pulsata IPL™ ad uso medico chirurgico, è nato OpusDuo Aqualite, l'apparecchio che combina due sorgenti laser: Erbium:YAG e CO2 superpulsato, il tutto racchiuso in un guscio di puro design estremamente contenuto nell'ingombro e di facile spostamento all'interno dello studio.

A tale scopo, OpusDuo è completo con una vasta gamma di puntali e manipoli in alluminio anodizzato. I puntali conici in zaffiro HPX™ brevettati da Opus Dent sono disponibili in cinque misure (1300; 1000; 800; 600; 400 e 200 µm), determinano un taglio rapido e veloce, efficiente e praticamente indolore grazie alla loro particolare conformazione conica che conferisce una sensibilità tattile e di taglio simile a quella della strumentazione rotante, soprattutto garantiscono una preparazione della cavità a contatto dall'inizio alla fine, garantendo con la massima facilità biselli e sottosquadri e una chirurgia parodontale e ossea fino ad oggi impensabile.

Il tutto viene gestito da un monitor touch-screen a colori e da un acceleratore a pedale in grado di controllare la frequenza degli impulsi pri-



prio come una turbina! Tutta l'energia sviluppata dalle sorgenti viene trasmessa tramite delle fibre cave, Hollow fiber™ brevetto Lumenis; questo permette all'operatore di avere la massima energia senza alcuna dispersione rispetto all'uso del braccio articolato, sistema ormai superato ed estremamente scomodo nell'utilizzo della pratica quotidiana odontoiatrica. ■

DL Medica spa
Via Pietro Calvi, 2
20129 Milano
Tel. 02.762751
Fax 02.76275300
dlmedica@dlmedica.it
www.dlmedica.it

► Get inside the future

Inside è il primo sistema di endoscopia applicata nel settore dentale: si compone di un endoscopio in Alluminio ed acciaio inox montato su un braccio articolato dedicato con elettronica integrata. Inside nasce dalla professionalità del centro di ricerca e sviluppo Faro, in stretta collaborazione con gli studi odontoiatrici, con l'obiettivo di: migliorare la qualità delle cure, ridurre le contaminazioni crociate medico-paziente, favorire il dialogo con il paziente ed agevolare il lavoro dell'odontoiatra.

Tutto questo è possibile grazie ad un'ottica che ingrandisce 10 volte, con effetto tridimensionale, l'immagine della zona da trattare sul monitor e ad un sofisticato sistema di rotazione dell'ottica (esclusivo brevetto FARO) che rende perfettamente coerente i movimenti dell'operatore all'interno della bocca con l'immagine proiettata sul monitor (Mirror).

L'utilizzo della "visione supportata", ottenuta tramite Inside, permette all'odontoiatra di lavorare su immagini dettagliate e stabili. Questo garantisce una maggiore precisione degli interventi, un controllo più accurato su tutte le superfici e rende meno invasiva la terapia. La visione extraorale del campo

operatorio, illuminato dalle fibre ottiche, riduce l'affaticamento della vista dell'operatore e la posizione seduta, ma non chinata sul paziente favorisce, nello stesso tempo, il comfort dell'odontoiatra e l'agio del paziente. I vantaggi derivati dall'uso di INSIDE ne fanno un compagno di lavoro irrinunciabile. ■

Faro spa
Via Faro, 15
20060 Ornago (MI)
Tel. 039.68781
Fax 039.6010540
www.faro.it



**DOTTORE...
MI HA SBAGLIATO
LA PROTESI!!!**

**DOTTORE... DOPO LE OTTURAZIONI
HO IL MAL DI TESTA!!!**

DOTTORE!!!

**DOTTORE... DOPO LE CAPSULE
MI E' VENUTO UN DOLORE
ALLA MANDIBOLA!!!**



Quotidianamente si assiste ad un circolo di lamenti talvolta sconcertanti, spesso sono semplici fantasie, ma molto spesso potrebbero celare ed essere delle dolorose verità!

La **DESIM Italia** offre, direttamente nel Vostro studio, un servizio diagnostico strumentale: **tens, elettromiografia (di superficie), kinesiografia e baropodometria**, in grado di migliorare la precisione ed il successo del Vostro manufatto odontoiatrico. Gli esami diagnostici eseguiti saranno analizzati e valutati da qualificati esperti del settore (gnatologia, ortopedici, neurologi, specialisti in odontoiatria etc.).

Per qualsiasi richiesta di informazione
chiami il numero 335.5324105
oppure inviate una email a formazione@desimitalia.org

Fantasmio Ortolab

**I FANTASMI
DELL'ORTODONTISTA!**

Il Centro tecnico ortodontico "ORTOLAB POMPEI" nasce circa 20 anni fa: è specializzato in dispositivi medici ortodontici su misura. Conta approfonditi studi di settore ed altissime specializzazioni. Consulenza, progettazione e realizzazioni di manufatti funzionali ortopedici e ortodontici. Nuove tecniche linguistiche. Rivoluzionaria invenzione per risolvere le problematiche degli affollamenti dentali con marchio e brevetto europeo del fantasmio Ortolab®.

LA TERAPIA

Il **Fantasmio Ortolab**: è un innovativo apparecchio ortodontico per il ripristino di anomalie dentali di ogni genere. È costituito da una guaina di materiale polivinilico formata su un tradizionale modello da laboratorio preventivamente settato, rinforzato con filo di acciaio modellato sulle superfici vestibolari e palatali di ogni dente, con diverso spessore e materiale. La terapia da noi proposta consta nell'applicazione di una serie di tali apparecchi imponendo uno spostamento dentale a step successivi, spostamento che non supera l'ampiezza di mezzo millimetro per step eseguito in precedenza secondo le tabelle di pound o di korkhaus.

La nostra terapia ortodontica ha l'ambizione di affiancare le attuali tecniche di

ortodonzia fissa, essendo essa capace di indurre, al pari di queste ultime, spostamento corporeo del dente. Com'è noto dalla biomeccanica del movimento dentario un tale tipo di movimento è indotto da un sistema di sollecitazioni composto da una forza singola più una coppia di forze. Nell'ortodonzia fissa tale sistema di forze è generato mediante un filo metallico di sezione rettangolare che scarica su un bracket e quindi sulla superficie dentale le forze necessarie:

La forza singola è data dalla tensione del filo ed è applicata al centro del bracket B. La coppia di forze è data dall'elasticità torsionale del filo stesso.

Sulla base di questi studi, è stato prototipato il fantasmio ortolab, che impone ai baricentri dentali uno spostamento in direzione linguale di 0.5 mm. È stato possibile realizzare questo test grazie all'impiego di software CAD/CAE (Computer aided design & engineering) a partire da una stereolitografia di un modello in gesso da laboratorio, che è stata settata secondo i parametri di spostamento citati in precedenza. Tramite il software CAE è stato poi possibile testare il sistema sul modello iniziale grazie ad un'analisi agli elementi finiti (FEA) che ha restituito i valori puntuali della sollecitazione sulla superficie dentale. Estrapolando da tali risultati la forza media agente sulla superficie di ogni dente e ripetendo la media tra questi valori si è giunto al valore medio della forza che il fantasmio ortolab è in grado di imprimere sulla superficie dentale. Tale valore come menzionato prima si è stimato attorno a 0,78 N (circa 80 g).



Tutte le cose dimostrate fino ad ora si traducono nella pratica odontoiatrica in una serie di vantaggi, sia per il medico che per il paziente:

- Mobilità dell'apparecchio con conseguente calo del disagio psicologico nonché la migliorata igiene orale.
- Basso impatto estetico dovuto alla trasparenza dei materiali impiegati.
- Attenuazione dei fenomeni di recidività garantita da un movimento corporeo del dente.
- Registrazione periodica dell'apparecchio assente.
- Nessun contatto vestibolare spigoloso evitando in questo modo ferite o irritazioni.

LA CASISTICA

Sulla base di tale studio abbiamo realizzato e brevettato il Fantasmio Ortolab, terapia ortodontica, innovativa ed efficiente, la quale è sperimentata da un ventaglio di medici, i quali hanno avvalorato la nostra tecnica, documentandola con foto sia del caso iniziale, intermedio che finale, ma anche con radiografie, che consentono alla nostra terapia di avvalersi di una folta casistica di terapie portate a termine con successo. Di cui di seguito riportiamo le foto di una paziente del dott. Avino G., ragazza C.A. in età adolescenziale, risulterà affetta da grave



malocclusione con diminuzione del diametro trasverso del palato ed estrusione mandibolare, con scavalco degli incisivi inferiori, respirazione ovviamente orale. Caso risolto con successo dal dott. Avino G. con la terapia "fantasmio ortolab". (Sono qui pubblicate solo le immagini del caso prima e dopo la cura, tuttavia è possibile visualizzare l'intera sequenza dello spostamento dentale di ogni singolo caso visitando il sito internet www.ortolabpompei.it). ■

Arch. Alessandro Bianco
Dirigente settore informatico
"Ortolab Pompei"

Dipartimento di Costruzioni e Metodi
Matematici in Architettura
Facoltà di Architettura Università di
Napoli "Federico II"

Ortolab Pompei
Via A. Rossi, 44
80045 Pompei (NA)
Tel. 081.8637599
info@ortolab.it
www.ortolabpompei.it

Con Videothron i vostri pazienti vi vedranno con un occhio diverso

VIDEOTHRON è la Soluzione per rendere la comunicazione con i Pazienti più facile ed immediata già dalla sala d'attesa disponendo unicamente dell'alimentazione elettrica, senza la necessità di collegarsi a Personal Computer, lettori (DVD), o addirittura società esterne via cavo telefonico.

CARTA DEI SERVIZI: è già disponibile il video "Carta dei Servizi dello Studio Dentistico" che è stato sviluppato con un'Agenzia di Comunicazione ponendo particolare cura ed attenzione nella scelta delle immagini, dei testi e dei filmati rivolti ai Pazienti (sterilizzazione, anatomia del dente, metodiche).

Il video viene personalizzato con le Vostre immagini (foto dei Professionisti/assistenti, ambienti, strumenti...) ed i Vostri testi (curriculum, metodiche applicate, servizi offerti dallo Studio...).

VIDEOTHRON È L'UNICA SOLUZIONE VERAMENTE IN GRADO DI PROPORRE LA VOSTRA "CARTA DEI SERVIZI".

Per maggiori informazioni:
www.videothron.it
info@videothron.it

Prodotto da
Dolphin Computer
Tel. 02-469.53.245

La soluzione per la Vostra sala d'attesa

VIDEOTHRON: la Comunicazione in sala d'attesa

VIDEOTHRON è la Soluzione per rendere la comunicazione con i Pazienti più facile ed immediata già dalla sala d'attesa disponendo unicamente dell'alimentazione elettrica, senza la necessità di collegarsi a Personal Computer, lettori DVD, o addirittura società esterne via cavo telefonico. Di sicuro impatto estetico, raffinato nelle cornici e nei colori, Videothron è stato progettato in diversi formati, 17", 32" e 42" per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente e per "comunicare" in modo innovativo e dinamico. Videothron infatti è in grado di riprodurre i contenuti precaricati (carta dei servizi, testi, immagini, filmati ed animazioni), ma anche di trasformarsi in un punto d'intrattenimento dotato

di TV per non perdere il particolare evento televisivo o i cartoni animati preferiti dai piccoli pazienti e con l'ulteriore opzione di collegare decoder, dvd, videoregistratore, Personal Computer. La grande opportunità di visualizzare filmati ed animazioni sviluppati da professionisti della comunicazione, come quelli che siamo in grado di offrire, ma anche fotografie e testi esportati semplicemente da programmi quali Microsoft PowerPoint, rendono Videothron uno strumento facilmente gestibile ed aggiornabile da qualsiasi utente, anche quotidianamente. Il video "Carta dei Servizi dello Studio Dentistico" è stato sviluppato con un'Agenzia di Comunicazione, po-



nendo particolare cura ed attenzione nella scelta delle immagini, dei testi e dei filmati rivolti ai Pazienti (sterilizzazione, anatomia del dente, metodiche) e viene personalizzato con le immagini ed i testi di ogni singolo Studio permettendo quindi di evidenziare la propria professionalità e quella dei propri collaboratori, la modernità e l'efficienza delle apparecchiature, le metodiche applicate, la particolare attenzione posta dallo Staff alla sterilizzazione (aspetto spesso ignorato dai Pazienti), mostrare esempi estetici e nuove applicazioni, educare all'igiene orale adulti e bambini con simpatiche sequenze

animate, ricordare la particolarità dei servizi offerti dallo Studio (finanziamenti, pagamenti tramite Pos, invio sms come promemoria degli appuntamenti, ...) sostituire tutte le comunicazioni cartacee attualmente appese in sala d'attesa (orari dello Studio, precauzioni in caso di gravidanza, mese della prevenzione dentale, ...) comunicando in modo veramente efficace tutto quello che si desidera far sapere ai propri Pazienti. Videothron è quindi l'unica soluzione veramente in grado di proporre la "Carta dei Servizi" di ogni singolo Studio ed è facile da usare per chiunque: per avviarlo/spengerlo è sufficiente inserire e girare la chiave di accensione! ■

Luca Montoli

Dir. Marketing VIDEOTHRON

Dolphin Computer
Tel. 02.48953243 (r.a.)
info@videothron.it
www.videothron.it

CENTRO CORSI SMILE CENTER S.R.L.

CORSI AVANZATI DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA ANNO 2007

- CORSO TEORICO-PRATICO DI "IMPLANTOLOGIA"

Relatore: *Dr. Marco Cernicchi*

Il corso si svolgerà in 4 incontri di 1 giorno ognuno

- CORSO TEORICO-PRATICO SU "LE RECESSIONI GENGIVALI"

Relatore: *Dr. Marco Cernicchi*

- CORSO TEORICO-PRATICO SUL "CARICO IMMEDIATO" PER MEDICI ED ODONTOTECNICI

Relatori: *Dr. Marco Cernicchi - Sig. Andrea Pedetta*

Crediti E.C.M.: 7 punti formativi

- CORSO TEORICO-PRATICO SUL "GRANDE RIALZO DI SENO"

Relatore: *Dr. Marco Cernicchi*

Inizio corso 11 maggio 2007

Crediti E.C.M.: 7 punti formativi

- CORSO BASE DI PARODONTOLOGIA ANNO 2007 - 2008

Relatori: *Dr. Carlo Tinti e Dr. Stefano Parma Benfenati*

Il corso si svolgerà in 6 incontri di tre giorni ognuno

Inizio corso 13/14/15 dicembre 2007

- CORSO DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA AVANZATA

Relatore: *Dr. Carlo Tinti e Dr. Stefano Parma Benfenati*

Il corso si svolgerà in 2 incontri di 1 giorno

- GIORNATA DI CHIRURGIA IN STUDIO

Il Dr. Cernicchi offre la possibilità a

n. 4 partecipanti di assistere in

diretta, nel suo studio,

ad interventi di chirurgia e

parodontologia

PER INFORMAZIONI E PROGRAMMI RIVOLGERSI A:

SMILE CENTER SRL

VIA COLLEDORO, 37/41 - 00030 - COLLEFERRO (RM)

RESPONSABILE SIG.RA MELISSA - TEL 069770581/2 FAX

E-MAIL: SMILECENTER@MCLINK.IT SITO INTERNET: WWW.SMILECENTER.IT



OFFERTE DALLE AZIENDE

Le promozioni degli operatori commerciali

Una rubrica utile che evidenzia gli "affari" periodicamente proposti dagli operatori.



CUCCIOLO CC3

Fresatore nuova serie CC3, completo di micromotore 30.000 rpm, mandrino posa-attacchi, aria, luce e base porta-modelli.

PREZZO TAGLIATO ~~€~~ **EURO 1.729,75 +iva**

MARIOTTI&C

Via Seganti 73, 47100 Forlì
Tel 0543.474105 - Fax 0543.781811
e-mail: info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com



FIX'N RELAX

Il cuscino sottovuoto, ottimo per fermare la testa dei pazienti in una posizione ottimale. Ideale per le prolungate sessioni di implantologia, parodontologia, sbiancamento, chirurgia, endodonzia etc.

PREZZO TAGLIATO ~~€~~ **EURO 150,00 + iva**
10,00 Spese di sped.

SMILE CREATION ITALIA

Tel. 06.97277675 - 06.97277679 - Fax 06.97277680



KIT CHIRURGICO MULTYSYSTEM®

Ref. 7105100 per il rialzo del seno mascellare a minima invasività

PREZZO TAGLIATO ~~€~~ **EURO 549,00 +iva**

MULTYSYSTEM srl

Via Solferino, 4 - 20052 Monza (MI)
Tel. 039.2302681 - Fax 039.2302686
e-mail: multysystem@multysystem.com - www.multysystem.com



ZAAP LIGHT

La lampada che consente di effettuare lo sbiancamento professionale dei denti in soli 20 minuti.

PREZZO TAGLIATO ~~€~~ **EURO 2.900,00 + iva**
+ 1 kit omaggio per 3 pazienti

SMILE CREATION ITALIA

Tel. 06.97277675 - 06.97277679 Fax 06.97277680

Legenda: = APPROFONDIMENTI
 = SCHEDA INFORMATIVA

I beni offerti in questa sezione si intendono destinati all'utilizzatore professionale. Le apparecchiature soggette alla regolamentazione di cui alla Legge 175/92 possono essere cedute solamente agli iscritti all'Albo dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri. Per ogni informazione sulle offerte qui elencate il lettore interessato è invitato a rivolgersi direttamente all'inserzionista.



Robert Cavezian - Gerard Pasquet

La diagnostica per immagini in odontoiatria

edizione italiana

a cura di Antonio Leccisotti

Questo nuovo libro di Robert Cavezian e Gerard Pasquet, edito da B&C nella versione Italiana, vuole essere un valido manuale per odontoiatri e radiologi che si avvicinano alla radiologia odontoiatrica del terzo millennio. Gli Autori propongono le linee-guida, per saper scegliere, tra le metodiche d'indagine disponibili, quelle più idonee per raggiungere gli obiettivi diagnostici e terapeutici.

PREZZO SPECIALE Euro 50,00
Zero spese di spedizione

per informazioni

800-238779



Continuiamo a camminare insieme.

Il vostro interesse per Infodent ha dato dinamismo alla rivista ed ha reso possibile importanti cambiamenti. Il 2007, infatti, inizia con una grande novità. Infodent entra in tutti gli studi dentistici e laboratori odontotecnici d'Italia, anche grazie a voi.

Negli ultimi anni ci avete dimostrato in modo tangibile il vostro sostegno aderendo in tanti al progetto "Salviamo la Tariffa". Un progetto che si propone di salvare una "tariffa postale".

È ormai noto che Infodent è un mensile a diffusione gratuita sostenuto dalla pubblicità delle aziende che ritengono sia un efficace strumento di promozione oltre che un valido veicolo d'informazione. La rivista è inviata per posta usufruendo di una speciale tariffa. Dal 2003 la tariffa ha subito un aumento del 160%. Aumento a dir poco sproporzionato considerando che Infodent spedisce gratuitamente 35.000 copie ogni mese in tutta Italia. L'incremento delle tariffe postali avrebbe fatto lievitare i costi degli spazi pubblicitari, di conseguenza molte aziende non avrebbero potuto far fronte all'aumento. Ma grazie a tutti

coloro che hanno aderito al progetto con un abbonamento "simbolico" Infodent ha potuto usufruire della precedente tariffa.

Con la vostra collaborazione è possibile continuare ad inviare INFODENT senza applicare alcun taglio alla tiratura.

Ancora una volta contiamo sulla vostra collaborazione, chiedendovi di attivare un abbonamento ad Infodent. Potete abbonarvi per un anno, semplicemente inviando **due francobolli da 0,60 euro** o per tre anni inviando **sei francobolli, da 0,60 euro**. Uno sforzo modesto vi permetterà di continuare a ricevere **Infodent** e a noi, di offrirvi un servizio sempre al passo con i tempi.

COMPILA E SPEDISCI

Tagliare lungo la linea tratteggiata ed inserire insieme ai francobolli nella busta intestata a: INFODENT, S.P. Teverina km 3,6 - 01100 Viterbo

- Sì, desidero abbonarmi a Infodent per un anno al costo di 1,20 Euro
 Sì, desidero abbonarmi a Infodent per 3 anni al costo di 3,60 Euro

Spedite i numeri della rivista all'indirizzo indicato di seguito. Effettuo il pagamento allegando l'importo in francobolli.

Cognome:

Nome:

Indirizzo: Cap:

Località: PV:

Tel:

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03, in qualsiasi momento potrà modificare o cancellare i suoi dati personali scrivendo a: B&C Srl - strada Teverina Km 3,600, 01100 Viterbo. Le informazioni da lei rilasciate potranno essere utilizzate al fine di inviare ulteriori offerte commerciali. Qualora lei non intendesse avvalersi di questa opportunità, barrare la seguente casella: Diritto di recesso. Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 1922/50 potrà avvalersi del diritto di recedere dal presente contratto facendo alla rs. sociale comunicazione per iscritto entro sette giorni dal ricevimento con raccomandata A.R.

Firma Data

INFODENT CENTRO - SUD 3/2007

INFODENT
MENSILE D'INFORMAZIONE MERCEOLOGICA DEL DENTALE



■ OFFRO COLLABORAZIONE

- 30enne, con esperienza, bella presenza, massima serietà, offresi per mansione assistente alla poltrona. Zona Frosinone-Colleferro. Telefonare al 349.7908633.
- A studi dentistici, odontoiatra offre collaborazione in tutte le discipline odontoiatriche. Telefonare al 339.2313983.
- Assistente alla poltrona, diplomata, esperienza pluriennale in conservativa, endodonzia, ortodonzia e pedodonzia, cerca serio lavoro part-time. Telefonare al 347.1457007.
- Assistente alla poltrona, esperienza pluriennale, 34 anni, cerca collaborazione presso studi dentistici part-time. Telefonare al 329.1094471.
- Assistente alla poltrona, esperta, qualificata e

- referenziata, offre collaborazione, full-time, presso studio dentistico zona Roma nord. Telefonare allo 328.2844744.
- Assistente alla poltrona - segretaria, esperienza 4 anni, offre collaborazione presso studio dentistico, zone Roma e provincia, solo la mattina dal lunedì al giovedì. Telefonare al 338.1989061.
- Assistente dentale 40enne, professionale, esperienza di base, offresi presso studio odontoiatrico, part-time. Massima serietà, zona Roma nord. Telefonare al 346.3238222.
- Assistente - segretaria studio dentistico, esperienza decennale, 30 anni, bella presenza, cerca impiego solo la mattina (anche orario di pranzo compreso). Telefonare al 349.5953038 o allo 06.88328688.

- Assistente-segretaria, con 23 anni di esperienza, cerca lavoro presso studio dentistico zona piazza Euclide, corso Francia, Parioli (RM) e dintorni, orario part-time oppure continuato. Telefonare al 339.6492840.
- Assistente-segretaria, esperienza ventennale nella conduzione di studi medici dentistici, disponibilità part-time oppure orario continuato, diploma di scuola media superiore, referenziata, capacità relazionale. Telefonare al 347.5809617.
- Dottoressa medico odontoiatra offre collaborazione a società odontoiatriche in Roma e Lazio. Telefonare allo 06.8607309 o al 333.3509155.
- Dottoressa medico odontoiatra offre collaborazione a società odontoiatriche in Roma e Lazio.

COLLEGATI ALL'INDIRIZZO INTERNET WWW.INFODENT.IT ED INSERISCI ANCHE ON-LINE IL TESTO DEL TUO ANNUNCIO.

I testi degli annunci di interesse odontoiatrico sono visionati preventivamente dall'A.N.D.I. - Dipartimento Regionale Lazio

- ANNUNCI GRATUITI
 VARIAZIONE DATI

indirizzo: Strada Teverina km. 3.600 • 01100 VITERBO • Tel. 0761.393.204 - Fax 0761.393.222

Nome Cognome
 Tipo di attività Specializzazione
 Via Numero CAP
 Città Prov. Tel.
 E-mail PIVA Cell.

(Per annunci a pagamento è obbligatoria la partita iva e il codice fiscale)

- OFFRO O CERCO COLLABORAZIONE ATTREZZATURE ATTIVITÀ

Spazio per l'annuncio (scrivere a macchina o stampatello) MAX 30 PAROLE • Sarà pubblicato solo il testo sottostante*

.....

*IMPORTANTE

Gli annunci riguardanti la ricerca di collaborazioni (ricerca personale, collaboratori ecc.) devono essere pubblicati corredati delle generalità del richiedente, in ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, attuazione della legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge 14 febbraio 2003 n. 30, cosiddetta "legge Biagi"). In relazione a quanto sopra, al fine di consentire la pubblicazione delle suddette generalità in base a quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/03 che regola il trattamento dei dati personali, si autorizza la pubblicazione delle generalità suindicate.

DATA

NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)

.....

FIRMA

.....


Per la comunicazione telefonica degli annunci economici è attiva negli orari di ufficio una segreteria telefonica al numero 0761.393.204 dal lunedì al venerdì. ATTENZIONE: SARANNO PUBBLICATI SOLO GLI ANNUNCI COMPLETI DI TUTTI I DATI RICHIESTI: NOME, COGNOME, INDIRIZZO, CAP, CITTÀ, TELEFONO, PREFISSO E PROFESSIONE. Gli annunci si ricevono fino al 5 di ogni mese precedente l'uscita e saranno pubblicati una sola volta. Per vedere pubblicato nuovamente il proprio annuncio, occorre spedire il coupon per una nuova richiesta oppure comunicare telefonicamente la riconferma. Se si desidera pubblicare in evidenza o per quelli che pervengono dalle regioni dove non è spedita INFODENT è necessario effettuare un versamento di Euro 15,50 IVA compresa su c.c.p. n° 16819015, intestato a B & C srl - Strada Provinciale Teverina Km. 3.600 - 01100 Viterbo. Servizio Annunci (spedire fotocopia versamento). Per gli annunci in evidenza il versamento da diritto a 2 uscite. Nell'eventualità di concomitanza dei due casi (evidenza - fuori zona di spedizione) il versamento da effettuare è di Euro 31 e dà diritto a due uscite. INFODENT offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti sulle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile della veridicità delle inserzioni. Si procederà a norma di legge contro chiunque si servirà di questa rivista per scopi illeciti e di disturbo. Le inserzioni gratuite sono riservate ai privati. Gli operatori commerciali, per le inserzioni che riguardano l'attività svol-

ta, devono servirsi degli annunci a pagamento o degli spazi pubblicitari. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati avverrà mediante supporti sia telematici che cartacei, entrambi eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la pubblicazione dell'annuncio o per il ricevimento della rivista. La mancata comunicazione, ovvero l'accettata erroneità dei dati richiesti legittimeranno la nostra società a rifiutare l'esecuzione del rapporto, ovvero ad interrompere l'esecuzione stessa. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo della nostra Società, nonché a tutti gli Organi societari ed ai soci. I medesimi dati potranno essere inoltre comunicati agli omologhi soggetti di società da noi controllate o collegate, ovvero di società che controllano l'attività della nostra Società. I dati relativi all'indirizzo saranno utilizzati per l'invio di riviste e attività commerciali. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D.lgs. 196/03 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica e l'integrazione dei vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Il titolare del trattamento è B&C srl con sede in Viterbo Strada Teverina km 3.600 nella persona del suo legale rappresentante. Qualsiasi comunicazione o atto ufficiale potrà essere inviato dall'intermediaria presso la redazione di infodent con sede in Viterbo Strada Teverina km 3.600.

SW Dental



- Facile
- Sicuro
- Flessibile
- Modulare
- Completo
- Fiscale
- Clinico

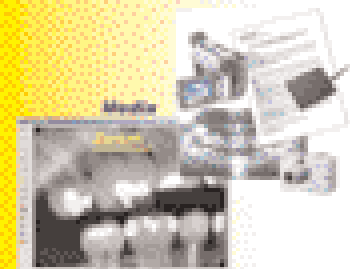

dallo STUDIO
alla CLINICA
da 480€ IVA esclusa

Chiedi come
ricerarlo GRATIS

PCDental

SW Dental Software

Via G. Saverio, 21 - 01100 Viterbo - Tel. 0761.393.204 - Fax 0761.393.222

www.infodent.it - info@infodent.it

Evolutione di un'idea per una libera

Telefonare allo 06.8607309 o al 333.3509155.

• Igienista dentale, con laurea 1° e 2° livello, con esperienza e spiccate capacità comunicative, valuta proposte in Roma. Assicura e richiede massima serietà. Gradevole presenza. Telefonare al 339.3756833.

• Igienista dentale, laurea con lode, esperienza pluriennale, capacità comunicative, curriculum vitae, presenza, max serietà, esamina proposte per serio rapporto di lavoro in studi odontoiatrici in Roma. Telefonare al 393.0097330.

• Igienista dentale, laurea di 1° livello, con partita IVA, offre collaborazione presso studi dentistici di Roma e limitrofe. Telefonare allo 06.6240211 o al al 338.4681608.

• Igienista dentale laureata, 15 anni di esperienza, cerca studio odontoiatrico per seria collaborazione part-time, preferibilmente zona Roma. Telefonare al 349.8698802.

• Igienista dentale, laureata a La Sapienza di Roma, con esperienza, offre seria collaborazione presso studi dentistici su Roma e provincia. Telefonare al 347.1609586 o allo 06.99900062.

• Igienista dentale, laureata con lode, esperienza, capacità comunicative, massima serietà, esamina proposte per serio

rapporto di lavoro in studi odontoiatrici di Roma. Telefonare al 334.3422645.

• Igienista dentale laureata, residente in zona Eur-Ardeatino, valuta opportunità di collaborazione con studi seriamente motivati all'igiene orale. Assicura competenza clinica e relazionale. Telefonare al 328.1924407.

• Igienista dentale, laureata Tor Vergata, con partita Iva, cerca per collaborazione studio dentistico sito in Roma. Telefonare al 328.0612767.

• Igienista dentale neolaureata offre collaborazione presso studi odontoiatrici, per i primi tempi anche come assistente alla poltrona. Telefonare al 349.4684726.

• Igienista dentale, plurilaureata con lode, esperta in RFP, processi di comunicazione, motivazione, forte empatia, valuta proposte di collaborazione in studi odontoiatrici di Roma e provincia. Telefonare al 339.8140889.

• In qualità di agente di vendita, offresi a società settore dentale per la Sicilia occidentale. Esperta, solare, estroversa, di classe. Garantisce un salto di qualità delle vendite. Telefonare al 347.4620793.

• Laboratorio odontotecnico, altamente specializzato in protesi fissa e mobile, offre

collaborazione a studi odontoiatrici. Listino prezzi interessantissimo. Telefonare al 338.5444300.

• Laureato in medicina (1996) e con lode in odontoiatria (2001), con esperienza presso strutture pubbliche e private, offre collaborazione a studi dentistici di Roma e provincia. Telefonare al 349.3210170.

• Medico chirurgo odontoiatra, con esperienza ventennale, anche di pronto soccorso odontoiatrico e chirurgia maxillo-facciale, valuta proposte di collaborazione, max 3 giorni alla settimana, eventuale sabato, in tutta Italia. Telefonare allo 06.30891203 o al 335.5243948.

• Medico dentista offre collaborazione presso studi odontoiatrici. Telefonare al 339.7125724 o allo 06.9625723.

• Medico dentista, titolare di studio, lunga esperienza, disponibile per collaborazione, anche studi da avviare. Si garantisce e si richiede serietà e professionalità. Telefonare allo 06.78344345 ore 13,30 o 21,00.

• Medico odontoiatra, esperienza ventennale implantologia carico precoce, offre collaborazione in studi dentistici, ovunque, esclusivamente implantologia e protesi su impianti, strumentario proprio, prezzi

interessanti. Telefonare al 335.8164406.

• Medico specialista dentista, offre collaborazione a studi dentistici di Roma e provincia; max serietà, esperienza decennale, no direzione sanitaria. Telefonare al 335.254328.

• Medico-chirurgo dentista, esperienza quindicennale in implantologia, disponibile effettuare in altrui studi interventi, anche con strumentario proprio. Telefonare al 333.2360123.

• Odontoiatra 36enne, ex odontotecnico, offresi per collaborazione in protesi, conservativa, endodonzia e piccola chirurgia in studi di Roma e provincia. Massima serietà. Telefonare al 333.7638431.

• Odontoiatra con esperienza pluriennale offre collaborazione in studi odontoiatrici di Roma e zone limitrofe. Esegue protesi, conservativa, endodonzia, chirurgia, parodontologia, odontoiatria infantile; possibilità implantologia. Garantiata serietà, professionalità e competenza nel settore. Telefonare al 328.7225073.

• Odontoiatra, esperienza ultradecennale in protesi, conservativa, endodonzia, con sistema Ni-Ti Thermafil con chiusura canali in unica seduta,



Laboratorio Odontotecnico
DENTAL SHINE s.n.c.
di Stefano Lapucci & C.


Via Rocco Pagliaro, 64 - 00135 Roma
tel: 0630816021 • fax: 0630815601
E-mail: dentalshine@fastwebnet.it
www.dentalshine.it

- Ceramica
- Compositi
- Diamond Crown
- Ossido di Zirconio
- Protesi su Impianti
- Protesi Telescopiche
- Microscopia

OSSIDO DI ZIRCONIO

CON SISTEMATICA ZIRKON ZAHN®
tecniche pentografica manuale

- applicabile su qualsiasi preparazione
- realizzazione di monconi implantari
- dalla corona singola al circuito

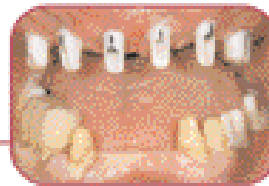

offre collaborazione presso studi di Roma e provincia e Latina e provincia. Telefonare al 339.2066638.

• Odontoiatra, esperto e qualificato, affidabile e puntuale, offre consulenze in implantologia e chirurgia orale a studi del Lazio, con le seguenti modalità: euro 250,00 per un impianto, euro 200,00 ad impianto da 2 impianti in poi. Strumentario proprio. Telefonare al 340.3749265.

• Odontoiatra, laurea con lode nel 2003, con esperienza in conservativa e protesi, perfezionata in endodonzia (Ni-Ti), già collaboratrice presso strutture pubbliche e private, offre collaborazione a Roma. Telefonare al 333.4885550.

• Odontoiatra laureata con lode nel 2000, cerca studio dentistico a Roma e nel Lazio, per collaborazione in conservativa, endodonzia, piccola protesi, chirurgia semplice. Massima serietà. Telefonare al 338.4679412.

• Odontoiatra offre collaborazione in implantologia con attrezzatura propria in studi di Roma e provincia. Telefonare al 328.5720465.

• Odontoiatra, pluriennale esperienza in endodonzia, ampia casistica documentata, valuta seria collaborazione in Roma e nel Lazio. Telefonare al

347.4745453.

• Odontoiatra, regolarmente aggiornato, esperto implantologo e titolare di studio, offre consulenze ed esegue interventi con attrezzatura propria presso studi odontoiatrici del Lazio. Telefonare al 349.6045286.

• Odontoiatra specialista chirurgia degli ottavi e chirurgia implantare, offre la propria collaborazione a studi professionali di Roma e del Lazio. Telefonare al 347.2386630

• Odontoiatra specialista in implantologia offre collaborazione per la sola parte chirurgica con propria attrezzatura in studi in Roma e nel Lazio. Si esegue anche carico immediato per dente singolo, o intere arcate in un giorno. Disponibilità affiancamento gratuito nella realizzazione protesica. Telefonare allo 333.2362346.

• Odontotecnico ceramista con propria partita Iva offre collaborazione a laboratori odontotecnici per lavorazioni di protesi, con pagamenti a percentuale 40 euro a elemento o eventualmente 40 euro ora lavorativa. Disponibilità centro Italia. Possibilità di spedizioni in un giorno in tutta Italia. Telefonare allo 0774.324147.

• Odontotecnico con esperienza in protesi fissa e

mobile cerca serio impiego presso laboratorio odontotecnico, anche part-time, zona Frosinone e provincia. Telefonare al 347.8609529.

• Odontotecnico, con propria partita Iva, offre collaborazione a laboratori odontotecnici, per protesi fissa, con pagamenti a percentuale, zona Roma, Viterbo e Frosinone. Telefonare al 333.4432355

• Ortodontista, esperta in terapia mobile, funzionale e fissa, offre collaborazione in studi dentistici a Roma. Telefonare al 339.3022704.

• Ortodonzia (Straight-wire, funzionale), endodonzia (NiTi manuale e rotanti), disfunzioni Atm, strumentazione propria. Odontoiatra laureato Padova offre consulenze (40% studio), studi Roma - centro Italia, fatturazione autonoma. Telefonare al 328.1696300.

• Ortodonzista, con esperienza decennale, offre collaborazione presso studio dentistico avviato in Roma. Telefonare al 393.9206773.

• Ortodonzista specialista in ortodonzia mobile, funzionale, fissa, prechirurgica, Invisalign, esperienza quinquennale, offre collaborazione presso studi dentistici di tutto il Lazio, Umbria, bassa Toscana, Abruzzo e Campania. Telefonare al 329.5478180.

• Ragazza 25enne, seria e

volenterosa, offresi come assistente alla poltrona e/o segretaria presso studio dentistico di Roma o Cagliari. Telefonare al 349.1639019.

• Segretaria cerca lavoro part-time pomeriggio in uno studio dentistico o anche solo per pulizie studio. Telefonare al 347.4130733 il pomeriggio.
• Specialista con lode in ortodonzia, offre collaborazione in ortodonzia mobile, funzionale, fissa e prechirurgica presso studi dentistici in Roma e nel Lazio. Telefonare al 338.4679412.

■ CERCO COLLABORAZIONE

• Biotec Impianti Dentali di Povolaro (VI), cerca venditori introdotti nel settore per province libere. www.bioteconline.com - curriculum:

info@bioteconline.com - fax 0444.361249 - telefono 0444.361251.

• Galbiati srl, azienda leader nella produzione di attrezzature odontoiatriche, ricerca agenti per zone libere. Telefonare allo 02.90968479.

• Giorgi Forniture Dentali, concessionaria Kavo e distributrice dei migliori marchi nel settore odontoiatrico e odontotecnico, ricerca

NEW!



piezo smart
L'ultrasuoni - semplice,
innovativo, sicuro

mectron

medical technology

piezo smart - smart nell'uso, smart nella tecnica

- Macchine innovative a prova di gelo, isolamento e fuoriuscite
- Macchine in posizione verticale con capacità 300 ml
- funzione di pulizia automatica integrata
- tecnica ad ultrasuoni collaudata in più di 20 anni di esperienza
- sviluppo di potenza semplicemente maggiore grazie al feedback system e all'Automatic Protection Control (APC)
- possibilità di controllo protetti da eventuali interferenze
- dimensioni minime
- 2 anni di garanzia

IDS
2007
Vi aspettiamo!
Hall 10.2
Stand C 638 F-639

MECTRON s.p.a.
Via Cavone, 15/A - 00192 Capenne (Rm) - 01441
tel. +39 0746 35344, fax +39 0746 301374
www.mectron.it - info@mectron.it

Consiglieri di Vendita (ambosessi). Si richiede un diploma di scuola media superiore, unito ad una seppur minima esperienza in ambito commerciale. Telefonare allo 06.2428456 o inviare curriculum vitae allo 06.2428459 o all'indirizzo e-mail: comm@giorgiforniture-dentali.191.it

• Laboratorio odontotecnico Stefano Pandolfi cerca segretaria part-time. Max 24 anni. Zona Testaccio (RM). Telefonare allo 06.5750327 o inviare e-mail all'indirizzo info@ortodonticaitalia.it.

• Odontotecnico/a Vullo - Roma cerca per collaborazione, anche pensionato che desidera rimanere nel giro. Telefonare allo 06.68803398 per chiarimenti.

• Prestigioso studio dentistico Dr. Giovanni Montagnaro, specializzato in implantologia, parodontologia, protesi, zona

Flaminio (RM), cerca dottoressa specializzata in pedodonzia, igiene-profilassi, conservativa, endodonzia.

Serietà, bella presenza, collaborazione seria. Telefonare allo 06/3221838 lun - gio.

• Studio dentistico del Dott. Antonino Dominici, sito in Fiano Romano (RM), e Passo Corese (RI), cerca collaboratrice (segretaria e assistente alla poltrona), anche con limitata esperienza. Inviare curriculum vitae all'indirizzo e-mail: a.dominici@tiscalinet.it o in via P. Togliatti 116 - 00065 Fiano Romano (RM).

• Vares.it srl di Roma ricerca igienista dentale da inserire nel proprio settore commerciale. Si offrono fisso, rimborso spese più provvigioni adeguate. Telefonare allo 06.97277675.

• York Global Village, associazione di volontariato Onlus, ricerca: medici, odontoiatri, odontotecnici e infermieri disponibili a

prestare un servizio di volontariato (minimo 10-15 gg) presso una missione di suore a Kampala (Uganda). Telefonare allo 06.4453343 o al 339.4050629 o inviare e-mail all'indirizzo:

yorkglobalvillage@tiscali.it
www.yorkglobalvillage.it

■ OFFRO ATTREZZATURA

• Anthos riunito Teseo 4 strumenti, modulo turbina f.o., modulo motore Bien Air elettrico, siringa, ablatore Ems, vendesi euro 3.300,00 trattabili. Telefonare allo 06.2428456.

• Apparecchio Tecnica ATR per endodonzia, completo di contrangolo 1:16 motore e manopole nuovi, vendo euro 600,00 + iva tratt. Telefonare allo 06.2428456.

• Arcus Digma Kavvo kit completo, nuovo, mai usato, subentro leasing. Telefonare allo 06.24418084.

• Arcus Pro Kavvo assiografo

meccanico (con possibilità montaggio su Arco facciale Kavvo). Nuovo, mai usato, garanzia ufficiale Kavvo 12 mesi, vendesi euro 1.600,00 trattabili. Telefonare allo 06.24418084.

• Banche laboratorio, nuovi, mai usati, vendesi privatamente a ottimo prezzo. Telefonare al 348.3342002 o allo 06.44245364.

• Chiusura attività, svendo n. 2 poltrone complete di ogni cosa + strumentario vario + compressore + Rx + 2 serie mobili ecc. Euro 5.000,00. No perditempo. Telefonare al 333.2856045.

• Composizione mobili nuovi da sala espositiva estetici con piano in cristallo, 5 elementi compreso lavello e servomobile, vendesi a prezzo interessante, visibili. Telefonare allo 06.24418084.

• Composizione mobili sterilizzazione nuovi, da sala espositiva, 2 m larghezza x 2 m altezza, vendesi a prezzo



Giorgi Forniture dentali s.r.l.

“SEMPRE PROPOSTE DI QUALITÀ PER I NS. CLIENTI”



Primus 1058

swident



Partner

Info line 06.24418084 - Via F. Ferraironi, 86/F - 00177 Roma
e mail: comm@giorgiforniture-dentali.191.it

interessante. Visibili. Telefonare allo 06.24418084.

• **Denti Vitapan Vita e Cosmo Dentsply a prezzo di realizzo, vendesi.** Telefonare allo 06.2428456.

• **Deposito dentale, causa chiusura, vende, a prezzo di realizzo, riuniti nuovi-usati, radiografici endorali Ardet 70 Kvp a muro, compressori a secco, fisiodispenser per implantologia etc.** Telefonare al 333.7975728.

• **Depuratore d'aria De Marco, doppie celle elettrostatiche, usato 10 mesi, praticamente nuovo. Modello Kevc-1, Euro 1.800,00. Più vaporizzatrice Silfradent mod. EV4.** Telefonare allo 06.3701191.

• **Endo Twin Ritter manipolo per endodonzia con 2 punte. Nuovo, mai usato, garanzia 12 mesi, vendesi euro 950,00 trattabili.** Telefonare allo 06.24418084.

• **Fimet F1 riunito 5 strumenti, siringa, micromotore elettrico fibre ottiche, 3 modulo turbina fibre ottiche, kit bottiglia acqua spray, siringa lato assistente, vendesi euro 2.500,00.** Telefonare allo 06.24418084.

• **Galbiati riunito modello Scout, 3 strumenti, ottime condizioni, vendesi euro 2.300,00 trattabili.** Telefonare allo 06.24418084.

• **Laboratorio odontotecnico vende 2 banchi di lavoro**

seminuovi a 2 posti, 1 banco nuovo con lavabo incorporato, 5 banchi per appoggio macchinari, articolatori (seminuovi) completo di box per la posa su articolatori Asa Dental, Magnete de Luxe, Keystone, Quick, Shofu ProArch 1, Artek, Whip Mix 100. Telefonare allo 06.8104750 o al 335.446223 fax 06.88328692.

• **Laboratorio vende cappa aspirante Interospital completa di fonditrice, fionda Degussa TSI + forno preriscaldamento.** Affare. Telefonare al 329.1573213.

• **Odontotecnico, per chiusura laboratorio in Roma, vende residuo attrezzatura in blocco o in parti singole. No perditempo.** Telefonare al 349.6954084.

• **Ortopanoramico Rotograph Villa con telecranio + sviluppatrice automatica Durr XR24, ottime condizioni, revisione ufficiale, prezzo interessante.** Telefonare allo 06.24418084.

• **Riuniti marca Idem, modelli Cobra ed Ellisse, poltrone PN3, vendesi nuovi, mai usati.** Prezzo affare. Telefonare al 328.3361913.

• **Riunito Castellini Skema 4, ottime condizioni, anno '92, con aspiratore chirurgico, euro 2.800,00.** Telefonare al 333.4822476.

• **Riunito Eurocad - Newminic - CD, anno 2000, ottime condizioni, serie mobili,**

servomobile, seggiolino, turbina contrangolo Bien Air, negatoscopio, aspiratore chirurgico Cattani, euro 4.500,00. Compressore Eurocompress Power Oilless con essiccatore, anno 2006, euro 1.300,00. Lampada Mectron - Bluelight'S, anno 2006, euro 300,00, ablatore P5 Booster euro 300,00. Telefonare al 339.3641721 o al 333.4432355 o allo 06.2306829.

• **Riunito marca Idem, modello Colibri con poltrona Ritter Dental X in pelle, mai usato, vendesi.** Telefonare allo 06.44241021.

• **Rondoflex Kavo, nuovo, mai usato, prezzo speciale per fine serie, garanzia 12 mesi con 2 conf. sabbia, vendesi euro 650,00 + Iva.** Telefonare allo 06.24418084.

• **Telecamera intraorale Tecno Gaz, nuova da sala esposizione, con garanzia, vendesi.** Telefonare allo 06.24418084.

• **Vendesi aspiratore chirurgico Cattani Turbo Jet 1 Modular, carenato e insonorizzato. Euro 450,00 iva inclusa, anno 2003.** Telefonare al 339.8244315.

• **Vendesi forno per composito Star-Cure 360 Silfradent euro 150,00; 3 lampade da banco 1x16W, luce fredda, con braccio snodato, euro 100,00; sistema per modelli Easy Model + 25 basi in plexiglas,**

euro 150,00. Telefonare allo 06.3014690 o al 338.3848052.

• **Vendesi illuminatore originale a fibra ottica, sistemi ingrandenti Zeiss, a partire da euro 1.000,00.** Telefonare allo 06.3212435.

• **Vendesi laboratorio completo, nuovissimo. Forno per porcellana, banco a 2 posti, squadramodelli con aspirazione a secco, compressore 25 lt, pressa, trapano e strumentario. Euro 2.500,00.** Telefonare al 338.8633491.

OFFRO ATTIVITÀ

• **A odontoiatri con propria clientela affittasi camera completamente attrezzata in studio dentistico, in zona "Cassia" - Tomba di Nerone (RM).** Telefonare al 338.8150356.

• **A odontoiatri con propria clientela affittasi stanza completamente attrezzata in studio dentistico, zona adiacente Università "La Sapienza" (RM).** Telefonare allo 06.44235367 ore 9,00-13,00/15,00-19,00 escluso il sabato.

• **Ad odontoiatri e igienisti con pazienti propri, affittasi unità odontoiatrica completa di radiografica endorale e ortopantografo, in elegante studio zona Porta Pia, via dei**

doppio manopoli
€ 890,00

microscopio della potenza luminosa

starlight pro
Lampada a Led -
leggera e funzionale

3 anni di garanzia*
oltre 1800 mW/cm²

Tecnica innovativa a doppia batteria

mectron

Medical technology

starlight pro - cordless maneggevole e di facile utilizzo

- maneggevole, 450 g
- liberazione, senza vibrazione
- facilmente igienizzabile, priva di ferrose di raffreddamento
- indurisce uno strato di 2 mm in solo 10 secondi
- la capacità della batteria per mettere in effetto 300 cura da 10 secondi (tempo di ricarica 10 minuti)
- due modalità di funzionamento: "Fast Cure" e "Slow Cure"
- radiometria integrato per controllo della potenza
- fibra ottica da 4,5 mm internamente sterilizzabile
- potente fibra ottica da 4,5 mm

IDS
2007

Vi aspettiamo!
Hall 10.3
Stand G-414 P-419

MECTRON SpA

via Loreto, 14/A - 00144 Lariano (RM) Italia
tel. +39 0761 80133, fax +39 0761 801774
www.mectron.com, mectron@idestore.com

Villini 10, 00161 Roma.
Telefonare al 349.4688201 o
allo 06.4402050.

- Affittasi ad igienista dentale unità operativa in studio dentistico in zona Balduina (RM). Massima serietà, condizioni da concordare. Telefonare al 333.7638431.

- Affittasi ad odontoiatra con clientela propria camera attrezzata con servizio di segreteria, in studio dentistico, zona La Sapienza (RM). Sabato escluso. Telefonare allo 06.44244637.

- Affittasi studio dentistico, completamente attrezzato e climatizzato, a collega odontoiatra con clientela propria. Ottimamente collegato, zona Tuscolana - Porta Furba (RM). Telefonare allo 06.97614745 o al 347.6256804.

- Affittasi studio dentistico in appartamento ristrutturato completo di due unità operative, RVG, unità per implantologia ecc. Affitto per uno o due giorni la settimana zona Montesacro - Roma. Telefonare al 328.9685750.

- Affittasi studio dentistico in via Portuense 697 (RM), dalle ore 9,00 alle 13,00 tutte le mattine tranne il martedì, con utilizzo materiali monouso e utilizzo di segreteria. Euro 300,00 al giorno. Telefonare allo 06.6572396.

- Affittasi studio odontoiatrico a colleghi con clientela propria, zona Trieste (RM), con 2 unità operative + altra camera predisposta per altra unità. Raggi X e ortopantomica. Sala attesa, office e 2 bagni. Telefonare al 347.7567711 o allo 06.86217615.

- Affittasi unità operativa in elegante studio medico odontoiatrico, recentemente ristrutturato, completamente a norma, metro B Castro Pretorio (Roma), euro 150,00 per mezza giornata, incluso materiale di consumo e servizi segreteria e sterilizzazione. Telefonare allo 06.4453930 o al 335.6626004.

- Affitto studio dentistico provincia di Perugia, a dentista o igienista orale con p. Iva. Possibilità di collaborazione. Lo studio, a norma, è situato in elegante centro commerciale in Foligno. Telefonare al 339.7425277.

- Affitto unità operativa completa, in studio odontoiatrico zona Salario-Parioli (RM). Telefonare allo 06.8415680 ore 9,00-12,30 dal lun al ven.

- Cedesi studio odontoiatrico, attività trentennale + mura, mq 130, 3 unità operative + altra possibile, fermata metro Baldo degli Ubaldi (RM). Telefonare allo 06.6633180 o al 347.6611323.

- Cedo studio odontoiatrico

avviatissimo, per motivi di salute, in appartamento in affitto, a Roma, zona Tiburtina, presso studios cinematografici. Ottime apparecchiature, Rvg, telecamera intraorale, tutto a norma. Possibilità di subentro graduale. fatturato dimostrabile. Telefonare al 347.0508398 (lun, mer, ven).

- Cercasi collega disposto a trasferirsi in studio prestigioso sito a Roma in viale Parioli. Telefonare al 339.2313983.

- Roma, zona Fleming, studio odontoiatrico offre 1-2 unità, strumentazioni, servizi clinici e amministrativi, in affitto. Tempi, modi e costi da definire. Telefonare allo 06.3338986.

- Si affittano a colleghi medici-odontoiatri unità operative in studi prestigiosi siti in Roma in Viale Parioli ed in via Boncompagni. Gli studi sono comprensivi del servizio di segreteria e di ogni attrezzatura necessaria anche all'implantologia. Telefonare al 339.2313983.

- Studio dentistico affitta a collega con clientela propria stanza attrezzata, 1-2 giorni la settimana. Quartiere Africano - viale Eritrea (RM). Telefonare allo 06.86216866 o al 339.7259481.

- Studio dentistico offre condivisione spese, zona piazzale Clodio (RM), con stanza autonoma attrezzata. Telefonare allo 06.39741238.

- Studio di odontoiatria infantile affitta stanza attrezzata a medico pediatra, logopedista, psicoterapeuta infantile, foniatra. Possibilità di collaborazione professionale. No dentisti. Telefonare al 339.8244315.

- Vendo 2 appartamenti comunicanti (A10 - A3) di circa 170 mq, con avviamento trentacinquennale di studio dentistico e laboratorio, già restaurati a norma, completi di attrezzatura, arredi e clientela. Zona centrale di Roma, piazza Mazzini. Telefonare al 333.4970043 o al 330.972169.

- Via Sardegna (RM). Affittasi a collega studio dentistico completamente attrezzato, uno o più giorni a settimana. Telefonare al 333.2156615.

- Vorrei condividere il mio studio con odontoiatri con propria clientela, sito vicinanza piazza Mancini - Flaminio (RM). Solo se seriamente interessati. Telefonare al 392.7477049 o al 335.6783974.

■ CERCO ATTIVITÀ

- Rilevo studio dentistico piccolo/medio, già avviato, nella città di Roma (dentro il GRA). Richiesto affiancamento, almeno semestrale. No direzione sanitaria. Telefonare al 349.4442903.



CONERO DENTAL
TD Service

Via GRANDI, 9
60131 Z.I. Baraccola Ovini
(ANCONA) ITALY
Tel. e fax: 071/2861660
mail: servicotd@libero.it

Per informazioni tecniche
sulla distribuzione commerciale:
Tel. 071.2861660 - 348.3338958

**LEGHE E SILDAMI
PER ODONTOIATRIA**

Leghe e saldami prodotti negli Stati Uniti e certificati in Italia dall'Istituto Superiore di Santa CE (2570)

- BIOLOGIC C
- BIOLOGIC P
- BIOLOGIC U
- BIOLOGIC D
- BIOLOGIC NA
- CSN V
- NP ROUND V
- NPR III
- NP ROUND
- CSN
- CNPS
- NNPS
- NPC III

SEMME DENTAL di Marco Anselmi
ALBERTO CARDANO DENTAL
APOTEMA di Carmelita Paoletti
AURICONT di Federico Smeets
AUCENT di Medicina Nido
CALABRESE PROLO
CARVICARTE FRANCESCO
CHEVNER di Micaela Corrado
DENTAL DESIGN di Angarino Pasquale
DENTAL GOLD di Dina Giosepina
DENTAL OFFICE DISTRIBUTOR
DENTAL SELECT di Anselmi Luca
DENTAL SERVICE di Tullio Gioia
DENTAL SPACE di Cristina Mauro
DONESI LUCA

Distributori italiani delle leghe Conero Dental

02/040108	02/070105	DPT SERVICE di Degli Agostini Pierpaolo	049876572	347030471
07/020060	02/031047	ELACODENTAL di BELLIORE Massimo	001462711	0492644591
02/164972	02/032078	GIUNTA SALVATORE	005448755	02/022194
07/177052	04/032020	GYMADENT di Muzarella Gerry	0915582147	0493052190
02/181350	04/751362	ICHEM di Cressati Rita	0354491958	03/0620255
04/079189	03/0430821	LICCAROLLO ROGERO	054331254	0479289135
04/043084		MACRODENTAL di Di Benedetto Alessandro	0524961579	02/05554123
03/041428	04/0398821	NEWELLPHARMA di Fred	011894783	0356760458
02/0480752	04/0327028	SISTEMI MEDICALI di Castelli Alfreda	041220809	02/0741577
01/0480787	04/0330737	STELLADENT di Cinciarini Marco	0545420017	0495880351
04/024041	02/075762	TD DISTRIBUTION di Ceimano Giovanni	07186285	049144075
01/027088	04/035415	TD GROUP di Bartoli Carlo	074424073	049323379
02/040701	02/038028	TD SERVICE di Tesei Lorenzo	0712861560	0493338950
02/070175	02/032587	VICCAROLI MARINO	0707136130	0354883355

SOREDEX



New Cranex Tome

Tomografie a sezione trasversali
con movimento a spirale per uso
implantologico equivalenti a TAC

Tomografie dell'articolazione
temporo-mandibolare

Scanografie dentali, dell'ATM e dei
seni paranasali

Teleradiografie (18 x 24 e 24 x 30)

Sistema ACS
(selezione automatica del collimatore)

Predisposizione per il sistema digitale con
DIGORA Pct: il miglior sistema di lettura a
piastre per imaging ora anche con l'opzione
endorale e occlusale

Radiografie panoramiche (adulti e bambini)

Numerosi altri programmi impostabili

Un'eccellente unità per radiografie
panoramiche e tomografie trasversali con
l'esclusiva tecnica della scansione a spirale



distribuito in esclusiva da

DL MEDICA
ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES

via Piero Calvi 2
20129 Milano - Italia
tel 02 76 27 51
fax 02 76 27 53 00
dlmedica@dlmedica.it




Digora Pct

SOREDEX 1977 - 2007

30

www.dlmedica.it

FORNILIMPLANT®

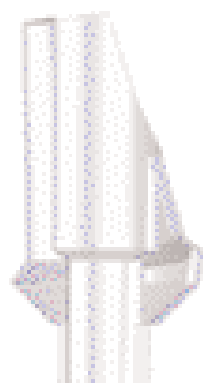

**SOMMERSI POST-ESTRATTIVI
TRASMUCOSI A CARICO IMMEDIATO**

PARTE PROTESICA e VITI PASSANTI In Ti® 5


ACCOPPIAMENTO CONOMETRICO

CONNESSIONE ESAGONALE

**UNICA E COMPATIBILE CON TUTTA LA GAMMA PROTESICA
INDIPENDENTEMENTE DAL DIAMETRO DELL'IMPIANTO**

*Il particolare design della spira permette
un'autofilettatura senza
compressione e massimo contatto osso impianto
dall'apice al collare.*

Superficie SABBIATA e MORDENZATA

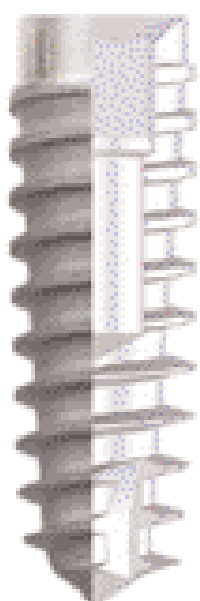


MINI €38


Classic €75

NEW € 75


**NOVITA'
PRIMARY €70**

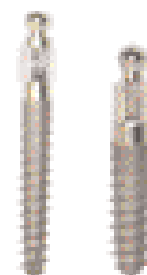

Ø2,3 Ø2,8

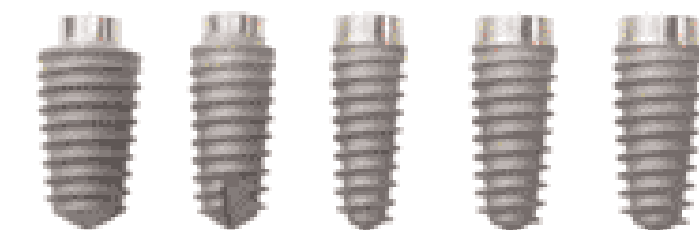

Ø 5,8 Ø 4,8 Ø 3,8 Ø 4,8 Ø 5,8

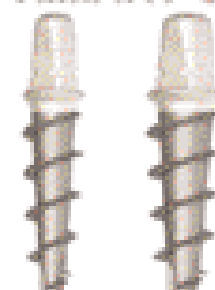

Ø3,8 Ø4,8

FORNILIMPLANT®

MADE IN ITALY  **CE 0434**

Produzione e vendita impianti dentali

P. Matteotti, 11 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 0309914049 FAX 0309120225

VENDITA DIRETTA anche su: www.Fornilimplant.com info@fornilimplant.com