

# INFODENT®

www.infodent.it MENSILE D'INFORMAZIONE MERCEOLOGICA DENTALE

n. 3 • 2008 – anno XX – CENTRO-SUD ITALIA

## SEMPRE AL VOSTRO FIANCO



### COMPLETEZZA DI GAMMA

Per rispondere a tutte le esigenze dell'odontoiatra.

### DESIGN

Forte impatto estetico coniugato alla migliore ergonomia.

### AFFIDABILITÀ

Frutto di grande esperienza e delle tecnologie più avanzate.

Ornago (MI) - via Faro, 15 - Tel. 039.68781 - www.faro.it

L'ODONTOTECNOLOGIA

## IN QUESTO NUMERO A CONFRONTO: APPARECCHIATURE PIEZOELTRICHE PER CHIRURGIA ORALE

– I nuovi orizzonti della  
chirurgia orale

Pag 4

## SBIANCANTI

– Bianco è bello

Pag 23

## SISTEMI CAD-CAM

– Progettazione e  
realizzazione High Tech

Pag 33

## APPROFONDIMENTI

APPARECCHIATURE PIEZOELTRICHE  
PER CHIRURGIA ORALE

- ENAC, il piezoelettrico  
all'avanguardia
- Ultrasonic Bone Surgery®

Pag 8

SBIANCANTI


- Snow
- Aladdin 38 e Paint-on: un'azione  
totale per uno sbiancamento ottimale
- Ena White nuova linea di  
sbiancamento: facile, sicuro, veloce

Pag 31

SISTEMI CAD-CAM

- Il sistema Procera®
- Echo: punto di incontro tra creatività  
e tecnologia
- Sistema DTM Abacus

Pag 39

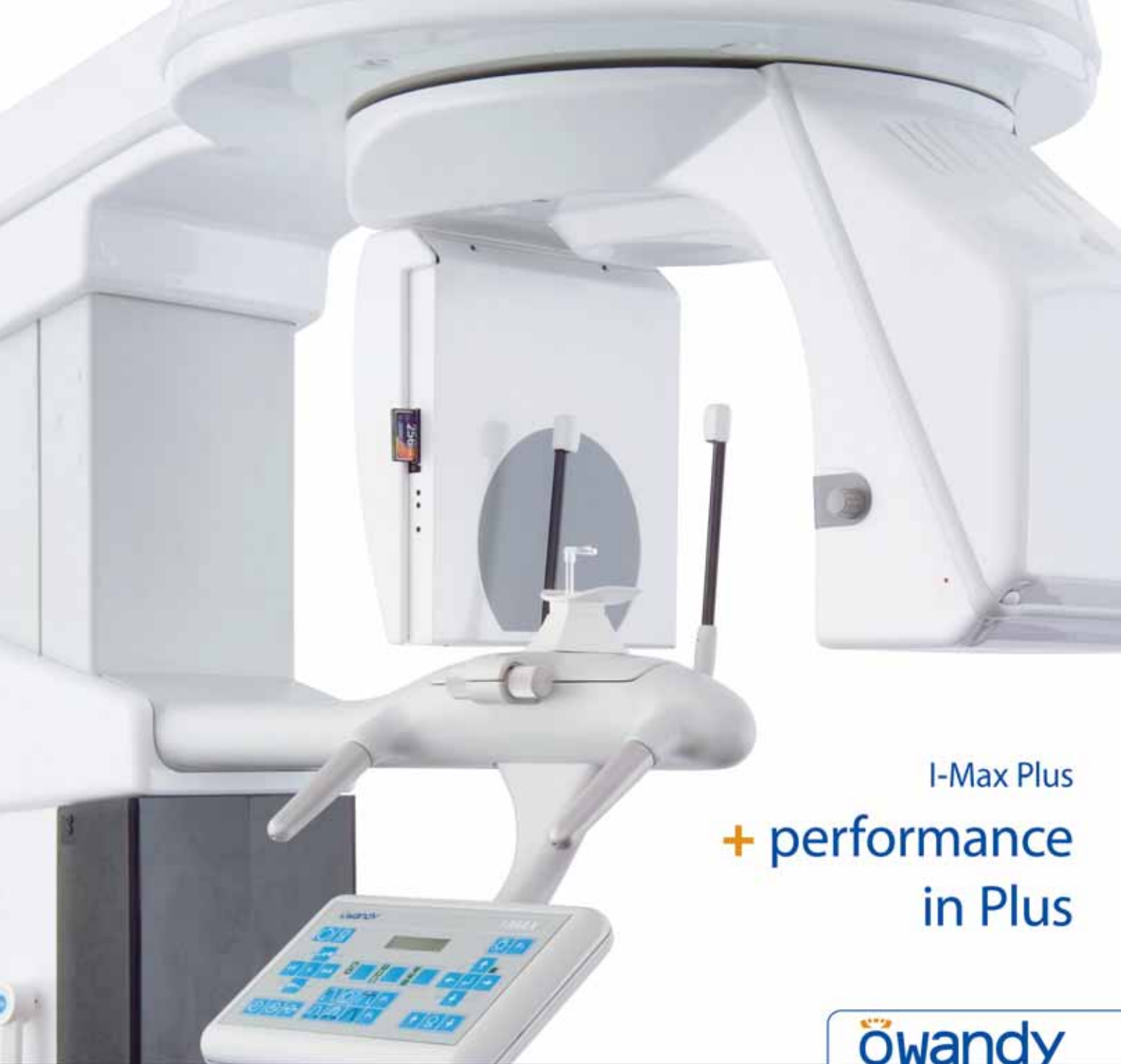

I-Max Plus  
 + performance  
 in Plus

**owandy**  
 DENTAL IMAGING SYSTEMS & SOFTWARE

## I-Max Plus

Panoramico  
 digitale Dual System



Immagine  
 di sezioni  
 tomografiche

CCD alta definizione + sezioni di stratigrafia + pannello di controllo virtuale e/o reale + 12 programmi d'esame + 18 programmi anatomici + posizionamento paziente face-to-face + Connessione USB2: immagine in tempo reale + Compact Flash: acquisizione senza PC + Tri-motore assiale + estensione Ceph digitale.

Sensore digitale  
 Krystal-X WiFi



Telecamera digitale  
 Real Hi-T



Radiografico HF  
 Altis DC



Software  
 Quickvision



**Owandy Radiologie Italia**

Via del Guado, 57  
 20033 Desio (MI)  
 Tel: 0362 62 11 06  
 Fax: 0362 62 77 07  
 Email: infoitalia@owandy.com  
 www.owandy.com

**Direttore responsabile**

Riccardo Chiarapini

**Segreteria di redazione**

Stefano Toticchi

**Coordinamento**

Diana Carbonetti

**Direzione grafica**

Gisella Benedetti

**Consulenza scientifica e normativa**

Alberto Emiliani

**Collaboratore**

Cristina Rodighiero

**Impaginazione e grafica**

B&C s.r.l. - divisione grafica

**Marketing e Pubblicità**

Gianluca Passeri tel. 0761.393306 - 335.1213136

Baldo Pipitone tel. 06.97277679 - 336.773328

*Mensile d'informazione merceologica dentale*

ANNO XX - n. 3 marzo 2008

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in A.P. - D.L.

353/2003 (conv. in L. 26/02/2004 n° 46) art. 1 comma

1 DCB VITERBO - Autorizzazione del Tribunale di

Viterbo n. 341 del 7/12/88

**Editore B&C s.r.l.**

Strada Teverina Km. 3,600 - 01100 VITERBO

Telefono 0761.393.1 - Fax 0761.393.222



**Stampa - Graffietti Stampati snc**

S.S. Umbro Casentinese Km. 4,500

Montefiascone (VT)

**Testata volontariamente sottoposta a**

**certificazione di tiratura e diffusione**

**in conformità al Regolamento C.S.S.T.**

**Certificazione Stampa Specializzata Tecnica**

Per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2007

**Tiratura media:** 18.444

**Diffusione media:** 18.075

Certificato CSST n. 2007-1.506 del 27.02.08

**Società di Revisione:** BDO Sala Scelsi Farina

**Tiratura del presente numero:** 19.400

una copia euro 0,77 - contiene I.P.

La redazione non restituisce il materiale utilizzato

## SOMMARIO

### 4 **A CONFRONTO:** **APPARECCHIATURE** **PIEZOLETTRICHE PER** **CHIRURGIA ORALE**

I nuovi orizzonti della chirurgia orale

6 *Tablette di comparazione*

### 8 **APPROFONDIMENTI:**

- ENAC, il piezoelettrico all'avanguardia
- Ultrasonic Bone Surgery®

### 9 **AGENDA:**

- 9 Congressi e Fiere in Italia e all'estero (Marzo/Aprile/Maggio)
- 13 Calendario dei Corsi (Marzo/Aprile/Maggio)

### 13 **A CONFRONTO:**

**SBIANCANTI**  
Bianco è bello

25 *Tablette di comparazione*

### 25 **APPROFONDIMENTI:**

- 31 • Snow
- Aladdin 38 e Paint-on: un'azione totale per uno sbiancamento ottimale
- Ena White nuova linea di sbiancamento: facile, sicuro, veloce

### 31 **A CONFRONTO:**

**SISTEMI CAD-CAM**  
Progettazione e realizzazione High Tech

35 *Tablette di comparazione*

### 35 **APPROFONDIMENTI:**

- 39 • Il sistema ProCera®
- Echo: punto di incontro tra creatività e tecnologia
- Sistema DTM Abacus

### 39 **DALLE AZIENDE:**

- 41 • MESODAMIANI: non più insuccessi in implantologia
- Franchising odontoiatrico Implantomat
- Fresatori modulari e rettifica

- di Zirconio
- i-FIX: l'innovativa linea implantare F.M.D.
- Videotron: la comunicazione in sala d'attesa

### 13 **IN VETRINA:**

45 Ogni mese i prodotti in offerta proposti dagli operatori

### 13 **ANNUNCI ECONOMICI:**

46 Annunci gratuiti di offerta e ricerca collaborazione, offerta e ricerca attrezzatura, offerta e ricerca attività

## ERRATA CORRIGE

Nel numero 1-2/2008 (gennaio/febbraio), nella rubrica "A confronto" relativa alle Lampade Fotopolimerizzanti, a pagina 7, nella scheda relativa alla lampada **Master Light** di EMS sa, il prezzo indicato di Euro 147,00 si riferisce al puntale in vetro e a 50 puntali monouso. Il prezzo di listino della lampada è di Euro 2.650,00 + iva.

## INSERZIONISTI

• Abacus pag. 40 • Bicon pag. I Cop. • Biotec pag. 21 • Caes Software pag. 15 • Casa Schmidt pag. 11 • Class Implant pag. 17 • CMF Marelli pag. 32 • Dental Gaia pag. 22 • DID Dental Instrument Design pag. 31 • Dolphin Computer pag. 39 • Dr. Riccardo Ilic' pag. 48 • Eurocompress pag. 45 • Falappa pag. 43 • Faro pag. I Cop. • Foshion pag. 44 • Implantmed pag. 14 • Implantomat pag. 9 • Ing. Carlo Alberto Issoglio pag. 8/IV Cop. • Manfredi pag. 12 • Mariotti pag. 13/45 • Mealli Laboratorio Odontotecnico pag. 48 • Mecatron pag. 45/47 • Medical Division pag. 3 • Micerium pag. 31 • Multysystem pag. 45 • Nobel Biocare Italiana pag. 39 • Owand Radiologie Italia pag. II Cop. • Physioline pag. 10 • Protefil pag. 50 • QP Dental pag. 40 • Reverberi pag. 41 • Samdent pag. 19 • Smile Center pag. 42 • Smile Creation Italia pag. 45 • Softwork pag. 45 • Sweden & Martina pag. 8/31/39 • Tecno Med pag. 16 • Vimar/Eurodent pag. III Cop.

**Informativa ai lettori** - Questa rivista *Le* è stata inviata tramite abbonamento, l'indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per l'invio della rivista, per l'invio di altre riviste, per l'invio di proposte di abbonamento, per l'invio di informazioni tecniche e commerciali, nonché per la divulgazione di eventi formativi e promozionali e per la cessione degli stessi a terze aziende per le medesime finalità. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Qualora venisse esercitato il diritto alla cancellazione lo stesso comporterebbe il mancato invio della presente rivista. Il titolare del trattamento è B&C s.r.l. con sede in Viterbo, Strada Teverina Km 3,600, nella persona del suo legale rappresentante.

**elenco completo**  
**dei confronti 2008 sul sito**  
**WWW.COMPARAZIONI.COM**

# Medical division

servizi·prodotti·apparecchiature  
per odontoiatria e odontotecnica

**MEDICAL DIVISION sas** di Pagnanelli Erica & C.

Sede Legale: Via M. F. Nobiliore, 98 00175 ROMA

Sede Operativa e Showroom:

Via Cattaneo 03039 SORA (FR)

Tel. Ufficio 0776.890471

Tel./Fax Magazzino 0779.890471



Ergonomia,  
sicurezza e full optional di serie,  
il traguardo del tuo successo

4 ANNI DI GARANZIA

nice



# mighionico

CONSTRUZIONE RIUNITI ODONTOIATRICI

## APPARECCHIATURE PIEZOELETTRICHE PER CHIRURGIA ORALE A CONFRONTO

# I nuovi orizzonti della chirurgia orale

*L'applicazione dell'effetto piezoelettrico alla chirurgia orale è sempre più frequente, anche grazie ai numerosi studi che ne hanno dimostrato l'efficacia clinica.*



La scoperta dell'effetto piezoelettrico risale al 1880 e la si attribuisce ai medici Pierre e Jacques Curie, in collaborazione con Gabriel Lippmann. Secondo i loro esperimenti, l'applicazione di forze di compressione su alcuni corpi solidi generava una carica elettrica. Da qui la scelta del termine «Piezo», che viene dal greco «piezein» che significa «comprimere» o «pressare». I corpi solidi dotati di una si-

mile proprietà hanno strutture cristalline come il quarzo, la tormalina, il sale di Rochelle o il titanato di bario. Oggi, i cristalli di quarzo sono stati abbandonati e i manipoli piezoelettrici sono per lo più costituiti da ceramiche con strutture cristalline.

L'effetto piezo può essere di tipo diretto o indiretto. L'effetto diretto dipende dalle proprietà di alcuni corpi solidi detti «piezoelettrici» (come il

quarzo o la ceramica) di polarizzarsi elettricamente (spostamento di cariche positive e negative) sotto l'azione di una forza meccanica.

L'effetto indiretto, invece, consiste nell'insieme delle deformazioni (dilatazione o contrazione) di alcuni corpi detti «piezoelettrici» sotto l'effetto della polarizzazione, durante l'applicazione di un campo elettrico.

La corrente elettrica deforma

le pastiglie ceramiche, i cui movimenti provocano delle vibrazioni nell'asse del trasduttore. L'amplificatore, accoppiato alla puntostamenti vibratorii emessi dalle pastiglie ceramiche. La punta vibra quindi su un asse longitudinale. La contro-massa ammortizza le vibrazioni, ottimizzando il rendimento elettro-meccanico.

Grazie alle frequenze selezionate, gli strumenti piezoelettrici sono attivi sui tessuti duri, limitando al contempo il rischio di ledere i tessuti molli. Il generatore produce per intermittenza vibrazioni ultrasoniche ad ampiezza inferiore. Il segnale modulato in ampiezza, sviluppato automaticamente durante la realizzazione di interventi di chirurgia preimplantare, consente di ottenere un rilassamento tissutale e una riparazione cellulare ottimale, con un taglio preciso e una cicatrizzazione migliore. Infine, esso assicura una incisione esente da frizioni e vibrazioni. Nell'ambito della chirurgia pre-implantare e parodontale, la piezoelettricità offre numerosi vantaggi. Infatti, consente di eseguire tagli precisi, sottili, senza sforzo e senza ledere i tessuti molli. I dolori post-operatori sono minimi e la cicatrizzazione è rapida. Inoltre, lo sforzo richiesto per ottenere una linea di taglio è decisamente inferiore rispetto all'utilizzo degli strumenti manuali. Diversi sono gli studi che comprovano i vantaggi operativi di questa tecnologia, come la precisione, l'effetto coagulante e l'assenza di postumi post-operatori.

Uno studio comparativo condotto all'Università di Harvard da Vercellotti T. et al. (Osseous response following resective therapy with piezosurgery. International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, 2005 (Dec), 25 (6):543-9.) ha messo a confronto la ci-



catrizzazione dopo l'uso di uno strumento piezoelettrico, una fresa al carburo e una fresa diamantata, durante una osteotomia e una osteoplastica su un cane, il 14°, il 28° e il 56° giorno dopo l'intervento. Al 56° giorno, sui siti trattati con le frese (al carburo e diamantata) si è osservata una perdita ossea (rispettivamente di 0,37 e 0,83 mm), mentre sui siti trattati con strumento piezoelettrico si è osservato un guadagno osseo di 0,45 mm. Questo studio ha permesso di dimostrare che lo strumento piezoelettrico fornisce una riparazione ossea più favorevole rispetto alle frese durante le osteotomie e le osteoplastiche. Grazie alla sua irrigazione soggetta alla cavitazione, il bisturi piezoelettrico ha un effetto emostatico a livello delle superfici di taglio, dovuto in parte alla comparsa di ossigeno nascente. La cavitazione è caratterizzata dalla comparsa di micro-bolle quando il liquido entra a contatto con la punta

sottoposta alle vibrazioni ultrasonore. Implodendo, le bolle di cavitazione hanno un effetto decapante. Questo fenomeno consente di avere una visibilità ottimale del campo operatorio, di limitare il travaso sanguigno, di pulire le zone di lavoro dai residui ossei e di evitare aumenti termici suscettibili di causare il degrado dei tessuti. La selettività e precisione dell'azione di taglio dipendono anche dalla grande manovrabilità del manipolo,

combinata alle punte dalle forme specifiche per il contesto anatomico e per i diversi tipi di applicazione. L'azione chirurgica mediante uno strumento piezoelettrico risulta quindi molto precisa e meno traumatizzante per i tessuti, ma non bisogna dimenticare che questa tecnica richiede un certo tempo di apprendimento per trovare il perfetto equilibrio tra l'azione del clinico e la velocità di movimento della punta.

### IL SISTEMA PIEZOELETTRICO

L'accezione di "sistema piezoelettrico" fa riferimento al pacchetto di ceramiche in grado di vibrare ad altissima frequenza e quindi di generare ultrasuoni. Tale pacchetto è contenuto nel manipolo sul quale vengono montati gli inserti. Quindi è il "motore" del sistema. Sono in realtà le vibrazioni delle estremità degli inserti che, agendo nel campo degli ultrasuoni, consentono di ottenere risultati sorprendenti ed innovativi in termini di invasività limitata e di salvaguardia dei tessuti molli.

*I vantaggi principali sono:*

- riduzione delle lacerazioni fino all'eliminazione delle stesse se confrontate con gli effetti ottenuti con i tradizionali strumenti rotativi;
- miglioramento dello stato generale delle superfici dei tessuti grazie all'effetto cavitazione.

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

### ► Apparecchiature piezoelettriche per chirurgia orale

Denominazione del prodotto	EASY SURGERY	OSADA ENAC <sup>(A)</sup>	PIEZON MASTER SURGERY	PIEZOSURGERY® II
Produttore	BioSAF srl	Osada Electric Co	EMS SA	Mectron spa
Potenza di lavoro (W)	50 ± 10%	•	Potenza nominale 105 VA, max 25	70
Frequenza di lavoro (Hz)	25.000-35.000	30.000	24.000-32.000	24.000-29.500
N° livelli di potenza	50	21	2 modalità operative regolabili con potenziometri	6
Portata pompa peristaltica (ml/min)	•	5~50±10	100	0-100
Manipolo incluso	Si, autoclavabile con anelli rinforzati	Si, autoclavabile dotato di illuminazione permette di evidenziare il campo operatorio	Si, Piezon® con cordone	Si, 2 manipoli versione "professional", 1 versione "starter"
Sistema di protezione	Si, sistema di riconoscimento mal-funzionamento dell'inserito all'avviamento dell'apparecchiatura	•	Si, spina equipotenziale per protezione elettrica	Si, automatico di feedback della potenza degli ultrasuoni, ogni interferenza visualizzata sul display
Inseriti disponibili	12, inserti chirurgia parodontale, chirurgia impiantare, chirurgia orale, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia endodontica	Per chirurgia ossea, chirurgia endodontica ed ablazione	15, chirurgia endodontica, estrattiva, ossea	37, chirurgia orale, implantologia, ortodonzia, chirurgia parodontale
Materiale utilizzato per gli inserti	Acciaio AISI 420	Acciaio inossidabile	Acciaio nitrurato	Acciaio medicale
Lunghezza degli inserti (mm)	•	•	16 ca	Varia
Durata degli inserti	•	•	Variabile secondo la potenza utilizzata	Varia
Campi di utilizzo	Implantologia, parodontologia, endodonzia, chirurgia maxillo-facciale	Chirurgia ossea, chirurgia endodontica ed ablazione	Chirurgia parodontale, implantologia, chirurgia orale e mascellare	Implantologia, chirurgia orale e parodontale, ortodonzia
Caratteristiche principali	L'apparecchiatura è dotata di 2 programmi per chirurgia ed endodonzia con 10 sottoprogrammi ciascuno	Potenza modulabile e ampia varietà di inserti permettono di avere in un'unica unità le funzionalità di una macchina chirurgica, un bisturi di precisione ed un apparecchio ad ultrasuoni	Taglio selettivo dell'osso	Prima unità sul mercato (2001), background scientifico
Display	LCD	•	Con sistema touchboard unico nella chirurgia, 94x253x283mm (HxLxP)	Vacuum fluorescent 71x22 mm
Peso (kg)	•	3,2	2,5 ca	3,5
Dimensioni (cm)	•	21,4x20,5x10,5	9,4x25,3x28,3 (HxLxP)	34x21x15
Durata della garanzia	1 anno	•	1 anno	2 anni
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 5.950,00	Euro 7.329,00 (professional) Euro 5.554,00 (starter)

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ► Apparecchiature piezoelettriche per chirurgia orale

Denominazione del prodotto	<b>SURGISON</b>	<b>SURGYBONE SB300</b>	<b>UBS ULTRASONIC BONE SURGERY</b> (A)
Produttore	Castellini spa	Silfradent srl	Resista Italia Medica srl
Potenza di lavoro (W)	16	170 VA assorbiti, 50 resi	90
Frequenza di lavoro (Hz)	25.000-32.000	25.000-35.000	26.000(± 10%)
N° livelli di potenza	1-100%	50	9
Portata pompa peristaltica (ml/min)	Integrato nel riunito	0-50	80-120
Manipolo incluso	Si, autoclavabile, intercambiabile con ablatore del tartaro, con riconoscimento automatico	Si, irrigazione esterna antiotturazione, 6 ceramiche Ø 13 mm	Si, manipolo sezionabile con sistema di raffreddamento interno
Sistema di protezione	Si, protezione elettrica a norma, protezione contro il surriscaldamento per autoregolazione della potenza in base al carico, utilizzo di liquidi sterili e/o medicati	Si, test di funzionamento, mancanza manipolo, risonanza fallita, pompa bloccata	Si, controllo computerizzato del flusso d'irrigazione con arresto in caso di assenza di liquido
Inseri disponibili	11, chirurgia orale, ossea, separazione e scollamento della membrana sinusale, preparazione della finestra per il sollevamento del seno	Chirurgia medicale	42, chirurgia orale generale e preparazione sito implantare
Materiale utilizzato per gli inserti	Acciaio inox rivestito di Tin	AlSI 420 B	Titanio gr. 5ELI integralmente
Lunghezza degli inserti (mm)	•	Diversi usi e impieghi	30
Durata degli inserti	•	Riutilizzabili	Vedi Approfondimento
Campi di utilizzo	Chirurgia orale, implantare, parodontale, ortodontica, endodontica, estrattiva	Taglio, foratura, levigatura	Microchirurgia ossea e implantologia
Caratteristiche principali	Alta potenza per un taglio preciso e pulito del tessuto osseo, atraumatico per i tessuti molli, in modalità normale, boosted e hammer, autoregolazione della frequenza e della potenza	10 livelli di vibra, manipolo per uso prolungato privo di riscaldamento, pedale chirurgico pneumatico	Punte in titanio, controllo computerizzato dell'irrigazione, 90 W di potenza, sezionamento manipolo-cavo brevettato
Display	LCD, 4 righe per 16 caratteri	Alfanumerico 2x16 caratteri, altezza carattere 8,5 mm	Led
Peso (kg)	Integrato nel riunito	4,9	6
Dimensioni (cm)	Integrato nel riunito	27x23,5x17	30x32x15 (LxPxH)
Durata della garanzia	1 anno	2 anni	2 anni
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 5.500,00 con 6 tips	Non fornito

### AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

I dati pubblicati in questa sezione sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. I prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

### GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SULLE APPARECCHIATURE PIEZOELETTRICHE PER CHIRURGIA ORALE

#### BioSAF srl

[www.bio-saf.com](http://www.bio-saf.com)

#### Castellini spa

051.700877 -

[www.castellini.com](http://www.castellini.com)

#### EMS SA Switzerland

[www.swissquality.ch](http://www.swissquality.ch)

(Distributore EMS Italia spa

- 02.34538111 -

[www.ems-dent.com](http://www.ems-dent.com))

#### Mectron spa

0185.35361 -

[www.mectron.com](http://www.mectron.com)

#### Osada Electric Co

(Importatore

Sweden&Martina SpA -

049.9124300 -

[www.sweden-martina.it](http://www.sweden-martina.it))

#### Resista

**Italia Medica srl** -

0323.828.004 -

[www.ubsurgery.com](http://www.ubsurgery.com)

#### Silfradent srl

[www.silfradent.com](http://www.silfradent.com)

## ENAC, il piezoelettrico all'avanguardia



ENAC è il dispositivo piezoelettrico ad ultrasuoni di ultima generazione, che può essere utilizzato, a seconda delle esigenze, come una macchina chirurgica di elevata qualità, un bisturi di precisione per il taglio dei tessuti molli, nonché un performante apparecchio ad ultrasuoni. Di design ergonomico e accattivante, Enac permette, con un semplice regolatore, di selezionare una potenza variabile in 21 livelli

a seconda del trattamento da eseguirsi. Le potenze minime offrono oscillazioni per ablazione; il settaggio massimo offre, invece, un impiego efficiente e controllato per il taglio di sostanza ossea. L'apparecchiatura è dotata inoltre di un sistema di controllo delle oscillazioni (ricerca automatica delle funzioni) per erogare in ogni condizione di utilizzo l'ottimale frequenza di oscillazione adatta all'inserto selezionato. Questo sistema permette un utilizzo continuo dell'apparecchio senza necessità di modificare l'emissione di potenza. Il manipolo è dotato di illuminazione, per alleviare l'affaticamento visivo e rendere più agevole l'intervento sul campo operatorio. Le aree di applicazione di ENAC sono davvero ampie, grazie alla modulazione delle

frequenze ultrasoniche. In particolare, con questo sistema si ottengono ottimi risultati in caso di osteotomia e osteoplastica, rialzo del seno, osteotomia della finestra ossea, espansione di cresta, preparazione del sito implantare, prelievi ossei, scollamento della membrana di Scheider, ablazione, root planing, preparazione di monconi e superfici radicolari, apicectomia, estrazioni. Insieme al sistema ENAC è stata sviluppata una gamma completa di inserti in acciaio inossidabile, il cui concept assicura una maggiore accuratezza nel taglio e una minore forza e pressione sul paziente, riducendo così il dolore e i tempi di riabilitazione. La serie di strumenti per chirurgia ossea è stata messa a punto grazie all'esperienza clinica del dottor A. Golz.

**Per informazioni:**  
**Sweden & Martina S.p.A.**  
**Via Veneto, 10**  
**35020 Due Carrare (PD)**  
**Tel. 800.010789**  
**info@sweden-martina.it**  
**www.sweden-martina.it**



## Ultrasonic Bone Surgery®



Con una punta d'orgoglio l'Ing. Carlo Alberto Issoglio, titolare della Resista, ci racconta del successo crescente ottenuto dall'unità per la chirurgia ossea ad ultrasuoni UBS, che alcuni commenti entusiastici riportati su blog di settore americani hanno addirittura definito come la Ferrari della chirurgia piezoelettrica. Effettivamente, al di là della linea esteticamente accattivante, e piuttosto originale, il contenuto tecnologico dell'UBS consente di stupire i suoi estimatori. La soddisfazione di anni di ricerca e di studi si è concretizzata con un sistema che sposta ulterior-

mente le frontiere della chirurgia ad ultrasuoni. Nell'UBS non c'è un unico segreto che consente all'unità di conservare le caratteristiche intrinseche della chirurgia ad ultrasuoni (effetto cavitazione e salvaguardia dei tessuti molli), ma un mix di elettronica e meccanica che, generando potenza e controllo dell'unità, permettono di eseguire operazioni di chirurgia ossea con sicurezza e velocità sorprendenti pur avendo l'impressione di sfiorare i tessuti da modellare. Questo anche grazie ai puntali chirurgici che, per composizione, dimensioni e legati alla forma d'onda particolare erogata dall'UBS, permettono visibilità e facilità di accesso anche ai siti più difficili da raggiungere, permettendo di manipolare con semplicità estrema uno dei più potenti sistemi oggi sul mercato. Nella progettazione delle punte si è utilizzato il titanio, che in natura è l'elemento più adatto a trasmettere onde sonore con efficienza. L'utilizzo del titanio si è poi dimostrato premiante soprattutto in termini di durata degli inserti, che, se confrontati con la stessa forma geometrica realizzata in acciaio, hanno una resistenza allo stress generato dagli ultrasuo-

ni anche cinque volte superiore. Con notevoli sforzi, date le difficoltà di lavorazione del titanio, siamo stati in grado di ottenere un set originale di inserti, molti dei quali addirittura oggetto di privativa brevettuale. Lo staff tecnico della Resista è riuscito a declinare la tecnologia alle esigenze della pratica chirurgica ispirata dalla competenza e dall'esperienza del Prof. Cornelio Blus. I suoi suggerimenti, che sono in costante confronto con un vero e proprio network di ricercatori ed insegnanti di atenei di tutta Europa, sono anche contenuto di articoli scientifici ed oggetto di insegnamento accademico. Con i primi 22 inserti sono state coperte le funzioni ormai considerate classiche nella chirurgia orale ad ultrasuoni. Prelievi ossei intra ed extra-orali, Separazioni di Cresta, Rialzo del pavimento del Seno Mascellare, estrazioni di denti inclusi e trattamento del tessuto osseo in chirurgia parodontale sono applicazioni che possono essere eseguite con relativa semplicità e in sicurezza, grazie anche al controllo elettronico del flusso del liquido della soluzione fisiologica di raffreddamento che oltre ad essere mantenuto costante prevede lo stop delle vibrazioni degli

inserti in caso di assenza del liquido stesso. Con altri 20 nuovi puntali oggi l'UBS allarga la propria gamma di inserti. Tra i suoi "ambiziosi" obiettivi c'è la possibilità di eliminare i classici sistemi rotanti in favore di una completa gamma di strumenti ad ultrasuoni che permettono sia la realizzazione del sito impiantare classico che la sterilizzazione e la preparazione dell'alveolo in caso di implantologia immediata post-estrattiva. Infine la Resista, col suo staff di ricercatori, ha studiato e realizzato "tips" Ultrasonici ad alta performance per la chirurgia maxillofacciale, che terminata la fase di verifica sperimentale e clinica dai risultati ancora più sorprendenti, saranno a breve immessi sul mercato.

**Per informazioni:**  
**Ing. Carlo Alberto**  
**Issoglio & C. srl**  
**Via F.lli di Dio, 68**  
**28887 Omegna (VB)**  
**Tel. 0323.828004**  
**0323.827088**  
**Fax 0323.828914**  
**info@resista.it**  
**www.ubsurgery.com**

## Congressi e Fiere in Italia

### MARZO

**06-08 Bologna - BO**  
**15° Congresso Nazionale SIDP - Metodologia in parodontologia ed implantologia**  
 Promo Leader Service  
 Tel. 055.241131 - 055.243755  
 sidp@promoleader.com

**07-08 Bologna - BO**  
**Congresso per igienisti dentali**  
 Segreteria Organizzativa  
 Promo Leader Service  
 Tel. 055 241131 - 055 243755  
 sidp@promoleader.com

**14-15 Rimini - RN**  
**22° Memorial Biaggi per assistenti ed igienisti dentali**  
 Dental Trey  
 Tel. 0543.929129 Fax 0543.940659  
 corsi@dental Trey.it - www.dental Trey.it

**28-29 Torino - TO**  
**Congresso Nazionale AIOM**  
 AIOM - Dr. Mario Lendini,  
 Tel. 011.8196989  
 Fax 011.8197717,  
 segreteria@aiom.net  
 www.aiom-micro.it

### APRILE

**03-05 Bologna - BO**  
**12° Congresso Nazionale Coi-Aiog: "Estetica ed odontoiatria"**  
*In fase di accreditamento*  
 Coi-Aiog  
 Tel. 02.201488  
 Fax 02.29526207,  
 segreteria.nazionale@cenacolo.com  
 www.cenacolo.org

**05 Pesaro - PU**  
**17° Simposio AIOP Adriatico**  
 www.aiop.com

**10-12 Montecatini Terme - PT**  
**Congresso "Odontotecnica made in Italy"**  
 Siced - Via Europa 46,  
 25062 Concesio (BS),  
 Tel. 030.2092867  
 Fax 030.2092960  
 siced-dl@libero.it

**11-12 Venezia - VE**  
**Finishing in Orthodontics: The state of the art**  
 Università di Ferrara  
 www.orthospringbreak.com

**16-18 Roma - RM**  
**SIDO Meeting at XV Congress of Dental Academic Board**  
 Tel. 02.56808224  
 segreteria@sido.it  
 www.sido.it

**16-19 Perugia - PG**  
**23° Congresso Nazionale SIDCO**  
 Segreteria scientifica e organizzativa Italymeeting  
 sidco2007@italymeeting.it

**16-19 Roma - RM**  
**15° Congresso del "Collegio dei docenti di Odontoiatria" 1° Congresso Internazionale Expoprimavera**  
 Pro Odonto Congress srl (Gallusi Sig.ra A.R.), Via Monte delle Gioie 24, 00199 Roma,  
 Tel. 06.8621113  
 Fax 06.86212026  
 proodcgs@tin.it  
 www.proodontocongress.it

**17-19 Bologna - BO**  
**Congresso Internazionale AIO 2008**  
 www.aio.it

### MAGGIO

**08-11 Venezia - VE**  
**SIDO Spring Meeting - International Meeting SIDO- SFODF**  
 Congressship  
 Tel. +39.010.5999.500  
 Fax +39.010.5999.499,  
 venice2008@gastaldi.it  
 www.congressship.it

**09 Fiuggi - FR**  
**3° Congresso internazionale città di Fiuggi. Eccellenza e qualità in odontoiatria**  
*In fase di accreditamento*  
 Coi-Aiog Tel. 02.201488  
 www.cenacolo.org

**22-24 Rimini - RN**  
**51° Congresso Amici di Brugg**  
 Promunidi  
 Tel. 02.7006121  
 Fax 02.70006546

**28-31 Bologna - BO**  
**Exposanità - 16ª Mostra internazionale al servizio della sanità e della salute - Healthy Dental**  
 www.senaf.it

## Congressi e Fiere all'estero

### MARZO

**04-06 Dubai - Emirati Arabi Uniti**  
**AEDC Dubai 2008 - UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition**  
 INDEX Conferences & Exhibitions  
 Organisation Est.P.O.Box 13636,  
 DubaiUnited Arab Emirates  
 Tel: +971 4 3624717

Fax: +971 4 3624718  
 matios.tcholokian@index.ae  
 aedc@index.ae  
 www.aedc.com // www.index.ae

**27-29 Madrid - Spagna**  
**Expodental 2008 - 10th International Dental Equipment,**

**Supplies and Services Show - Biennial Show**  
 IFEMA, Feria de Madrid Parque Ferial Juan Carlos I 28042 Madrid - Spain  
 Tel.: +34 91 722 30 00 Fax: +34 91 722 57 91 Director: Mr. Alfonso de Borbón Commercial Manager: Ms. Marta Ariste Secretariat: Ms. Yolanda

Cruz E-mail: expodental@ifema.es  
 Website: www.expodental.ifema.es  
 For Italy: IFEMA Fiera di Madrid Corso Italia, 47 20122 Milan  
 Tel: +39 02 58 31 81 81  
 Fax: +39 02 58 32 50 77  
 E-mail: ifema@tin.it Exhibition Venue: Feria de Madrid, Hall 10

# implantomat.it

# IMPLANTOMAT®

La tua attività verrà gratuitamente inserita in tutti i circuiti marketing implantomat con un solo acquisto

Acquistare su internet è facile, comodo, sicuro.

Scopri subito quanti vantaggi abbiamo in mente per te!

Numero Verde  
**800-451640**

APRILE

**03-05 Phoenix - Usa**

**Western Regional Dental Convention 2008**  
Arizona Dental Association 3193 N. Drinkwater Blvd. Scottsdale, AZ 85251-6491 USA  
Tel: +1 480 344 5777  
Fax: +1 480 344 1442  
Website: www.azda.org

**04-06 Singapore - Singapore IDEM 2008**

**International Dental Exhibition and Meeting**  
KoelnMesse GmbH Messeplatz 1 50679 Cologne Germany  
Tel: +49 221 821 2374 // 2314 Fax: +49 221 821 3325 E-mail: idem@koelnmesse.de International Contact: Mr. Denis Steker E-mail: d.steker@koelnmesse.de Website: www.idem-singapore.com Exhibition Venue: Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre (Level 6)

**05 New York - Usa LMT's 9th Annual Lab Day East 2008**

LMT Communications, Inc. 731 Main St., Ste.A2 Monroe, CT 06468 USA Contact Person: Mr. Jim Poulliard Tel: +1 203 459 2888 Website: www.lmtcommunications.com

**09-12 Bucarest - Romania Denta - 18th International Exhibition of Dentistry, Spring Edition**

Roxana IONESCU, PROJECT MANAGER  
Phone: +40 21 207.70.00 ext. 1110; +4021 202.57.29  
Fax: +4021 207.70.70  
roxana.ionescu@romexpo.org - Stela

Mazilu, Organizer,  
Phone: +40 21 207.70.00 ext. 1107; +4021 202.57.26  
Fax: +40 21 207.70.70  
E-mail: stela.mazilu@romexpo.org

**09-12 Tucson - Usa ALD 2008 - 15th Annual Conference and Exhibition of the Academy of Laser Dentistry**  
Academy of Laser Dentistry P.O. Box 8667 Coral Springs, Florida 33075 USA  
Tel: +1 954 346 3776  
Fax: +1 954 757 2598  
memberservices@laserdentistry.org  
Website: www.laserdentistry.org

**10-12 Copenhagen - Danimarca Scandefa 2008 - Scandinavian dental fair**  
Danish Dental Association/Bella Center - Contact: Sales- and project manager Lone Malling, Bella Center, direct tel. +45 32 47 21 23  
E-mail: lone.malling@bellacenter.dk  
Tel: +45 32 47 2123  
Fax: +45 32 519 636  
Website: www.bellacenter.dk // www.scandefa.dk

**10-12 Portland - Usa ODA 2008 - Oregon Dental Conference, Annual Spring Meeting**  
Exhibits manager: Cinty Fletcher  
E-mail: cfletcher@oregondental.org  
Tel: +1 503 6203230  
Toll free: 800 4525628  
Fax: +1 503 6204169  
Website: www.oregondental.org

**10-12 Saint Paul - Usa Star of the North Meeting 2008**  
Minnesota Dental Association 2236 Marshall Ave #200 St. Paul MN 55104 USA Website: www.mndental.org

**10-13 Los Angeles - Usa AAOP 2008 Annual Conference & Exhibition - Orofacial Pain**  
AAOP - American Academy of Orofacial Pain 19 Mantua Road, Mt. Royal, New Jersey 08061 - 1006, USA,  
Tel : (856) 423-3629  
Fax : (856) 423-3420  
Meetings:aaopmtg@talley.com - For exhibiting, please contact: Wendy Stevens  
Tel. 856-423-7222 x 262  
Email: wstevens@talley.com. Website: www.aaop.org - Exhibition Venue: Hyatt Regency Century Plaza

**16-19 Damasco - Siria Healthcare Dental Damascus - 10th edition International Dental Exhibition**  
Arabian Group for Exhibitions & Conferences - P.O. Box: 2683 - Damascus Syria Tel: +963 11 373 7444  
Fax: +963 11 373 7446 E-mail: arabiangroup@net.sy Website: www.arabiangroup.com Venue: Damascus International Fairground

**16-19 Grand Rapids - Usa MDA 2008 - Michigan Dental Association Annual Session**  
Michigan Dental Association 230 N. Washington Sq., Ste. 208, Lansing MI 48933-1312,  
Tel: +1 517 372 9070  
Fax: +1 517 372 6704  
E-mail: sowens@michigandental.org www.smilemichigan.com - Exhibition Venue: DeVos Place, 303 Monroe NW, Grand Rapids, MI 49503

**19 Irvine - Usa LMT's 18th Annual Lab Day West 2008**  
LMT Communications, Inc. 731 Main

St., Ste.A2 Monroe, CT 06468 USA Contact Person: Mr. Jim Poulliard  
Tel: +1 203 459 2888 Website: www.lmtcommunications.com

**22-25 Mosca - Russia Dental Salon 2008 - The 23rd Moscow International Denal Forum - International Exhibition**  
Dental Expo Ltd. - Usievicha 8A, 125319 Moscow -Russia  
Tel/Fax: +7-495 155-7900 // 7903 // 152-1540 // 152-6802 // 152-8549,  
Director of marketing and foreign affairs: Dmitry Makarov  
E-mail: makarov@dental-expo.ru  
E-mail: int@dental-expo.ru // info@dental-expo.ru  
Website: www.dental-expo.com  
Exhibition Venue: Crocus-Expo

**23-30 Santo Domingo - Repubblica Dominicana 5° Corso teorico-pratico di Implantologia clinica e metodiche implantari FMD**  
Tel. e fax 06.61521415 , info@fdmsrl.com www.fmdsrl.com

**24-26 Washington - Usa 2008 Nation's Capital Dental Meeting & Exhibition**  
District of Columbia Dental Society - 502 C Street, N.E., Washington, DC 20002-5810 USA,  
Tel: +1 202 547 7613  
Fax: +1 202 546 1482  
E-Mail: info@dcddental.org  
Website: www.dcddental.org  
Venue: Washington Convention Center, 801 Mount Vernon Place, NW, Washington, DC 20001

Physioline components  
SEMPLICITÀ e PRECISIONE

SINUS LIFTING SYSTEM

Rialzo seno mascellare



EXECUTIVE BONE DRILL

Recupero osso autologo



KEY POINT SYSTEM  
Sistema di fissaggio per membrane.



PHYSIOLINE  
BIOMEDICAL TECHNOLOGY

**24-27 Tashkent - Uzbekistan**  
**Stomatology Uzbekistan 2008 - 4th Tashkent International Dental Forum - 4th Uzbekistan International Exhibition**  
 ITE Exhibitions and Conferences LLC and ITE Uzbekistan - 20, Oybek Street, Tashkent, 100015, Uzbekistan, Contact: Shakhnoza Nizamova, Project Manager tel: +998 71 113 01 80 fax: +998 71 152 51 64 shakhnoza\_nizamova@ite-uzbekistan.uz www.stomatology.tihe.uz,

**26-27 Yokohama - Giappone**  
**The 51st General Session of the Japanese Society for Dental Materials and Devices (JSDMD) 2008**  
 Chairman of the Arrangement Committee - Asso. Prof. R. Nomoto Tel: +81-45-581-1001

Fax: +81-45-573-9599  
 E-mail: nomoto-r@tsurumi-u.ac.jp  
 Website: www.soc.nii.ac.jp/jsdmd/-  
 Venue: Tsurumi University Memorial Hall 2-1-3 Tsurumi, Tsurumi-ku, Yokohama 230-8501, Japan

**30-04 Città del Messico - Messico**  
**AMIC 2008 - 49th International Expo Dental**  
 AMIC Dental A.C. Av. Cuauhtemoc 451-310/311 Col. Navarte 03020 Benito Juarez Mexico, D.F. Contact Person: Lic. Silvia Calzado Santibanez (Executive Director)  
 Tel. +52 55 5639 1073 // 0324 Fax. +52 55 5639 9069amicdent@webtelmex.net.mx Website: www.amicdental.com.mx Exhibition Venue: Mexico City World Trade Center-WTC

MAGGIO

**01-03 Manchester - Inghilterra**  
**British Dental Conference & Exhibition 2008**  
 BDA Events team - 64 Wimpole Street, London, England, W1G 8YS, United Kingdom  
 Tel: +44 20 7563 4590  
 Fax: +44 171 486 0183  
 E-mail: events@bda.org  
 Website: www.bda.org -  
 For registration: Ph. + 44 (0) 1252 771 425 - For exhibiting: Kerry Sparks Ph. +44 20 7563 6883  
 Email: k.sparks@bda.org  
 Clare Chrishop Ph. +44 20 7563 4169  
 Email: c.chrishop@bda.org  
 Venue: Manchester Central Convention Complex

**01-03 Siviglia - Spagna**  
**XXX Reunión anual de la Sociedad Española de Odontopediatria**  
 Sociedad Española de Odontopediatria - Address: Alcalá nº 79 2º, 28009 Madrid Spain Tel: +34 650 42 43 55

**01-04 Anaheim - Usa**  
**Spring Scientific Session 2008 - California Dental Association**  
 California Dental Association - 1201 K St., 14th floor, Sacramento, CA 95814 USA, Exhibits Manager: Ms. Sue Gardner E-mail: sue.gardner@cda.org  
 Tel. +1 946 4433382 Ext. 4450  
 Fax +1 916 5545937 Website: www.cda.org - Exhibition Venue: Anaheim Convention Center

**01-04 San Antonio - Usa**  
**138th Annual Session of the Texas Dental Association**  
 TEXAS Dental Association - 1946 S. IH - 35, Suite 400, Austin, Texas 78704  
 Tel: (512) 443 36 75

Fax: (512) 692 41 68 - Meetings Assistant: Donna Musselman  
 Email: donna@tda.org, Exhibits Manager: Paula Tait  
 E-mail: paula@tda.org  
 Website: www.tda.org  
 Venue: Henry B. Gonzalez Convention Center, 200 East Market, San Antonio, TX 78205

**07-09 Bangkok - Thailandia**  
**30th Asia Pacific Dental Congress 2008 (APDC)**  
 The Dental Association of Thailand - 71 Ladprao 95, Wangtonglang, Bangkok 10310, Thailand  
 Tel: +662 539 4748  
 Fax: +662 514 1100  
 E-mail: apdc2008@gmail.com -  
 Secretariat: S.L.M. Management Co., Ltd., 10 Soi Lasalle 56, Sukhumvit Rd., Bangna, Bangkok 10260 - Thailand, Tel +662 748 7183 7, Fax +662 748 7050,

**AVVERTENZE PER IL LETTORE:**

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.



**Casa Schmidt Italia: dental habitat**

*Fornire, assistere, progettare e attrezzare il laboratorio a dimensione d'uomo*

Una vocazione straordinaria verso l'integrazione tra tecnologie dentali ed esigenze pratiche del professionista, ereditata dalla capogruppo spagnola **Casa Schmidt S.A.** la più grande realtà imprenditoriale nel mercato spagnolo, con 85 anni di esperienza.

Una scelta strategica di vicinanza, anche fisica, ai laboratori italiani che ha portato alla soddisfazione di presentare sul mercato dentale un catalogo di prodotti per il Laboratorio completamente innovativo e specificamente dedicato agli odontotecnici, unitamente ad un servizio di assistenza innovativo e di straordinaria efficacia.

Lo staff di **Casa Schmidt Italia** lavora assiduamente per poter offrire agli odontotecnici i migliori prodotti del mercato. Efficacia rapidità di evasione e informazione, tutto questo grazie alla esperienza, sicurezza e confidenza che **Casa Schmidt Italia** può offrire.

**Casa Schmidt Italia** sarà la casa ideale degli odontotecnici italiani.



ordini.laboratorio@casaschmidtitalia.it



www.slm.co.th  
E-mail: mail-slm@inet.co.th,  
Website: www.apdc2008.net -  
Exhibition Venue: Bangkok  
Convention Center at Central World

**09-10 Basilea - Svizzera  
2nd Camlog International  
Congress**

Alta-Tech Biotechnologies srl  
Tel. 0444.461311 Fax 0444.461346,  
www.alta-tech.it

**13-16 Sofia - Bulgaria  
Bul dental 2008 - 42nd  
International Specialized  
Exhibition**

Bulgarreklama agency - 147  
Tzarigradsko Chaussee, 1000 Sofia  
Bulgaria, Mrs. Ogniana Dikova  
Tel.: + 359 2 96 55 281  
Fax: + 359 2 96 55 231  
E-mail: odikova@bulgarreklama.com  
Website: www.bulgarreklama.com

**14-17 Almaty - Kazakistan  
KIDE 2008 - Stomatology of  
Kazakhstan**

Dental-Expo Ltd. - Usievicha 8A,  
125319 Moscow -Russia  
Tel/Fax: +7-095 155-7900  
// 7903 // 152-4015

**AVVERTENZE  
PER IL LETTORE:**

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.

E-mail: info@dental-expo.ru  
Website: www.dental-expo.ru -  
Exhibition Venue: KADT

**15-17 Berlino - Germania  
FTI 08 - Future trends in  
implantology**

Conference Secretariat - Paragon  
Conventions 18, Avenue Louis Casai,  
1209 Geneva, Switzerland  
Tel: +41 (0)22 747 7930  
Fax: +41 (0)22 747 7999  
fti08@paragon-conventions.com  
www.paragonconventions.com/fti08  
Venue: Hotel InterContinental Berlin,  
Budapester Strasse 2, Berlin

**15-17 Las Vegas - Usa  
DPRWorld08**

Advanstar Dental Media - 2  
Northfield Plaza, Suite 300,  
Northfield, Illinois 60093,  
Tel 888 248 0036  
(toll free within the USA),  
www.dprworldshow.com - Exhibition  
Venue: Mandalay Bay Resort, Las  
Vegas

**15-17 Montreux - Svizzera  
4th Swiss Symposium on esthetic  
dentistry: "The summits of  
esthetics"**

Swiss Symposium on Esthetic  
Dentistry - Postfach 145, 9450  
Altstätten/Switzerland,  
Tel. +41 (0)717575465  
Fax +41 (0)717575310,  
signer@coltenewhaledent.ch

**15-18 Oklahoma City - Usa  
Oklahoma Dental Association  
Annual Meeting and Exhibition  
2008**

Oklahoma Dental Association - 317  
NE 13th, Oklahoma City, OK 73104  
USA Tel: +1 405 848 8873  
Toll free: 800 876 8890  
Fax: +1 405 848 8873  
E-mail: exhibits@okda.org.  
Website: www.okda.org

**16-17 Vienna - Austria  
WID - International dental  
exhibition**

Österreichischer Dentalverband -  
Garnisongasse 7/22, A-1090 Wien

Tel.: +43-1-512 80 91-22  
Fax: +43-1-512 80 91-80  
www.dentalverband.at //  
www.wid-dental.at - admicos.  
Congress Incentive GmbH,  
Garnisongasse 7, 1090 Wien  
Tel.: +43-1-512 80 91-17  
Fax: +43-1-512 80 91-80  
email: fraundorfer@admicos.com  
web: www.admicos.com  
Venue: Messezentrum WienNeu,  
Messeplatz 1, A-1020 Wien

**16-20 Denver - Usa  
108th AAO annual session**

AAO - American Association of  
Orthodontists Attn: AAO Senior  
Meetings and Exhibits Manager, 401  
North Lindbergh Boulevard, St.  
Louis, Missouri USA 63141-7816  
Tel: +1 314 993 1700  
Fax: +1 314 997 1745 // 692 8178  
Toll free: 800 424 2841  
Website: www.aaortho.org  
Website: www.AAOMembers.org  
E-mail: info@aaortho.org -  
Exhibition Venue: Colorado  
Convention Center

**17-19 Poznan - Polonia  
Saldent 2008 - International  
dentistry fair**

Organizer: ExpoMenu Exhibitions -  
Lubyanskiy passage, 19/2, Moscow,  
Russia Phone: (495) 223-08-97  
Fax: (495) 223-08-69  
E-mail info@expomenu.ru  
Website: www.english.expomenu.ru

**20-22 San Pietroburgo - Russia  
Stomatology St. Petersburg 2008 -  
11th International Dental  
Exhibition & Conference**

Organizers: ITE Group PLC,  
Primexpo - 24A, Yakubovicha str., St.  
Petersburg, Russia, 190000  
Tel: +7 (812) 380-60-06; 380-60-00  
Fax: +7 (812) 380-60-01  
E-mail: med@primexpo.ru  
www.primexpo.ru/dental/ -  
Contact person: Tatjana Petina  
Your questions and suggestions  
please contact:  
Tel.: +7 (812) 380 6000, 380 6009  
Fax: +7 (812) 380 6001  
E-mail: events@primexpo.ru -

To attend or to speak at the  
conference, please contact:  
Medical Academy of Postgraduate  
Studies, 41 Kirochnaya str.,  
St.Petersburg 193015 Russia.  
Tel.: +7 (812) 273 8869, 736 8283  
Fax: +7 (812) 273 0039 -  
Venue: Lenexpo Exhibition Centre,  
St. Petersburg, Russia  
(V.O., Bolshoy pr., 103, metro  
Primorskaya)

**29-31 Montreux - Svizzera  
Dental 2008 "Dentalworld of  
tomorrow"**

Swiss Dental Events Ag - President:  
Ueli Breitschmid, Amlehnstrasse 22,  
CH-6010 Kriens - Switzerland  
Tel +41 41 319 4585  
Fax +41 41 319 4590  
E-mail: info@dental2008.ch  
Website: www.dental2008.ch

**29-31 Santiago - Cile  
Chilean dental show 2008**

Chilean Dental Show 2008/Mundo  
Dental - Mundo Dental  
Contacts: Av. 11 de Septiembre 2155  
/ Torre B / Of. 609, Providencia,  
Santiago de Chile  
Tel. (562) 233 12 63 - 234 12 29  
E-mail: olgatorrico@mundodental.cl  
Website: www.mundodental.cl

**31-04 Malaga - Spagna  
54 Reunion de la Sociedad  
Española de Ortodoncia**

Congresos Costa del Sol - C/ Monte  
de Sancha 8, 29016 Malaga  
Tel: 952 609 100  
Fax: 952 229 613  
Email: info@congresoscostadelsol.com  
Website: www.sedo.es //  
www.congresoscostadelsol.com -  
Venue: Palacio de Ferias y Congresos  
de Malaga, Avda. José Ortega y  
Gasset 201, 29006 Málaga



**ARKIMEDES**  
LASER DI SALDATURA



**MILLENNIUM**  
FONDITRICE CENTRIFUGA  
AD INDUZIONE



**EPHESTOS**  
PRESSOFUSIONE AD  
INDUZIONE



**WARMY**  
FORNI DA PRERISCALDO

DENTISTI

**MARZO**

**ADESIONE**

Zola Predosa - BO 01  
B&C Organizzazione Eventi  
Tel. 0761.393327  
Anderlini Dr. G.  
**Razionale impiego di sistemi adesivi e compositi nella pratica clinica**  
3 crediti ECM

**ARGOMENTI VARI**

Bologna - BO 08  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Processi infiammatori e tumorali del cavo orale**  
In fase di accreditamento

Rimini - RN 14-15

Dental Trey  
Tel. 0543.929129  
www.dental Trey.it  
**Il paziente disfunzionale - Diagnosi e terapia**

Mestre - VE 29

Coi-Aiog Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Incontro con la clinica odontostomatologica di Verona**  
In fase di accreditamento

**CHIRURGIA**

Padova - PD 03-05  
Associazione Italiana di Odontoiatria Operativa  
Tel. 049.8751112  
www.odop.it  
**Corso di chirurgia parodontale lembi e rigenerazione**  
22 crediti ECM

Colleferro - RM 10

Smile Center srl -  
Tel. 06.9770581-2  
(Sig.ra Emanuela)  
www.smilecenter.it  
**Giornata di chirurgia**

Campobasso - CB 14

Micerium  
Tel. 0185.7887801  
www.micerium.it  
Meneghini Dr. F., Lancellotti Dr. L.  
**Corso di Chirurgia ortognatica per ortodontisti**

Lecce - LE 15

Micerium  
Tel. 0185.7887801  
www.micerium.it  
Meneghini Dr. F., Lancellotti Dr. L.  
**Corso di Chirurgia ortognatica per ortodontisti**

**COLORE**

Albignasego - PD 07-08

DL Medica  
(Sig. Maurizio Magri)  
Tel. 02.76275272  
www.dlmedica.it  
Spina G.  
**Corso introduttivo sul colore in odontoiatria**

Albignasego - PD 07-08

DL Medica (Sig.ra Lorena Canella)  
Tel. 02.76275218  
www.dlmedica.it  
Spina G.  
**Corso introduttivo sul colore in odontoiatria (teorica e pratica)**

Sutri - VT 29

Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761.600396  
www.feniix.com  
Spina G.  
**Corso introduttivo alla teoria del colore**

**DIAGNOSTICA**

Tivoli - RM 01  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Lesioni precancerose e tumori maligni epiteliali del cavo orale: diagnostica clinica e strumentale**  
In fase di accreditamento

**EMERGENZE**

Napoli - NA 15  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Emergenze cardio-respiratorie ambulatoriali**

Torino - TO 15

Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Diagnosi e trattamento delle emergenze mediche nello studio odontoiatrico**  
In fase di accreditamento

Trezzano sul Naviglio - MI 15

Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Il ruolo dell'assistente odontoiatrica nella gestione delle emergenze (1° incontro)**

**ENDODONZIA**

Napoli - NA 01  
Sweden & Martina - Cristina Zanotto  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Malagnino Prof. V.  
**Corso teorico-pratico Mtwo + Microseal**  
9 crediti ECM

Buccinasco - MI 10  
Coi-Aiog Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**L'endodonzia dalla A alla Zeta**  
**Corso teorico-pratico di endodonzia ortograde (3° incontro)**  
In fase di accreditamento

Palermo - PA 14  
Sweden & Martina - Cristina Zanotto  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Malagnino Prof. V.  
**Corso teorico-pratico Mtwo + Microseal**  
9 crediti ECM

Lecce - LE 15  
Sweden & Martina - Cristina Zanotto  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Malagnino Prof. V.  
**Corso teorico-pratico Mtwo + Microseal**  
9 crediti ECM

Roncadelle di Castel Mella - BS 15  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Attualità in endodonzia**  
In fase di accreditamento

Vibo Valentia - VV 15  
Dr. Giuseppe Multari  
Tel. 0965.811236  
g.multari@libero.it  
**1ª Giornata endodontica calabrese: "Attualità nel trattamento e nella ricostruzione del dente trattato"**

Bergamo - BG 28  
Sweden & Martina  
Cristina Zanotto  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Marcoli Dr. S.  
**Corso teorico-pratico Mtwo + E&Q Plus**  
7 crediti ECM

Livorno - LI 28-29  
Sweden & Martina  
Cristina Zanotto N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Gesì Dr. A.

**Corso annuale di endodonzia (altre date: 18-19/04 16-17/06 - 11-12/07)**

Torino - TO 29  
Sweden & Martina  
Cristina Zanotto N. verde 800.010789



Micromotori e Fresatori



V5



V8g



CC3



Innovazioni per una qualità superiore

DENTISTI

www.sweden-martina.it  
 Marcoli Dr. S.  
**Corso teorico-pratico  
 Mtwo + E&Q Plus**  
 7 crediti ECM

**ENDODONZIA**

Buccinasco - MI 31  
 Coi-Aiog  
 Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**L'endodonzia dalla A alla Zeta -  
 Corso teorico-pratico di  
 endodonzia ortograde**  
 (4° incontro)  
 In fase di accreditamento

**ESTETICA**

Assago - MI 04  
 B&C Organizzazione Eventi  
 Tel. 0761.393327

Cosimi Dr. F.  
**L'estetica dentale e  
 l'utilizzo delle faccette**  
 3 crediti ECM

Assago - MI 04  
 B&C Organizzazione Eventi  
 Tel. 0761.393327  
 Douglas Dr. T., Cosimi Dr. F.

**Le sfide dell'estetica dentale**  
 2 crediti ECM

Torino - TO 04  
 B&C Organizzazione Eventi  
 Tel. 0761.393327

Douglas Dr. T., Cosimi Dr. F.  
**Le sfide dell'estetica dentale**  
 2 crediti ECM

Torino - TO 06  
 B&C Organizzazione Eventi  
 Tel. 0761.393327

Cosimi Dr. F.  
**L'estetica dentale e  
 l'utilizzo delle faccette**  
 3 crediti ECM

Verona - VR 08  
 B&C Organizzazione Eventi  
 Tel. 0761.393327

Cosimi Dr. F.  
**L'estetica dentale e  
 l'utilizzo delle faccette**  
 3 crediti ECM

Verona - VR 08  
 B&C Organizzazione Eventi  
 Tel. 0761.393327  
 Douglas Dr. T., Cosimi Dr. F.

**Le sfide dell'estetica dentale**  
 2 crediti ECM

Oristano - OR 14-15  
 B&C Organizzazione Eventi  
 Tel. 0761.393327

Cosimi Dr. F.  
**L'estetica dentale tramite  
 l'utilizzo diretto dei  
 materiali compositi**  
 8 crediti ECM

**FARMACOLOGIA**

Villa San Giovanni - RC 08  
 Cenacolo Odontostomatologico  
 Reggino Tel. 0965.331678  
**Osteonecrosi dell'osso  
 mascellare in pazienti  
 in corso di trattamento  
 con bifosfonati:  
 prevenzione e terapia**  
 In fase di accreditamento

**GESTIONE**

Genova - GE 31  
 Coi-Aiog Tel. 02.201488  
 www.cenacolo.org  
**Gestione economica e fiscale  
 dell'attività di lavoro autonomo: il  
 controllo di gestione e forme**

giuridiche per l'esercizio dell'attività. **Forme giuridiche per l'esercizio dell'attività (3° incontro)**

**IMPLANTOLOGIA**

Como - CO 01 Tocksystem  
 Tel. e fax 031.280301  
 Schirripa Dr. G.,  
 Tock Dr. V., Tock G.R.

**Osteoespansione & impianti di estensione: approccio**

Milano - MI 01  
 DL Medica  
 (Sig.ra Lorena Canella) Tel. 02.76275218  
 www.dlmedica.it  
 Dell'Aquila Dr. M.  
**Konus "Sistema implantare multifunzionale a connessione conometrica pura per un'implantoprotesi innovativa e sicura"**

Roma - RM 01  
 Acme sas  
 Tel. 0761.228317  
 Montagna Dr. F.  
**Trattamento mininvasivo del**

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO  
**UN SALTO NEL FUTURO**



sincristallizzatrice  
**SYSTEM ARGON  
 CONTROL**



linea implantare **STRATEGO**  
 il primo impianto bitasco con moncone di solidizzazione



impianti dentali **UNIQUE**  
 gli unici impianti emergenti per carico immediato solidarizzato



impianti **MDE SYSTEM**  
**TIPO L** MDE moncone emergente



vite **TRAMONTE®** vite bicorticale **GARBACCIO®**



**ImplaMed s.r.l.** via Bissolati 111/a - 26100 Cremona - I  
 tel. (+39) 0372.24915 / 531787 / 531788  
 fax (+39) 0372.22637  
 e-mail: info@implamed.it - www.implamed.it

**paziente edentulo.  
Stabilizzazione di protesi totali  
mediante minimpianti**

Sesto Fiorentino - FI 04  
ISO - Tel. 055.304458  
www.leone.it  
Targetti Dr. L.  
**Sistema implantare Exacone**

Cagliari - CA 07-08  
DL Medica  
(Sig.ra Lorena Canella)  
Tel. 02.76275218  
www.dlmedica.it

**Dalla chirurgia ambulatoriale alla  
chirurgia avanzata (teoria e pratica)  
- La finalizzazione in protesi  
(teoria e pratica) in 5 incontri  
(altre date: 9-10/05 - 11-12/07 -  
26-27/09 - 28-29/11)**

Milano - MI 08  
Acme sas  
Tel. 0761.228317  
Ritzmann Dr. J.

**Trattamento mininvasivo del  
paziente edentulo.  
Stabilizzazione di protesi totali  
mediante minimpianti**

Due Carrare - PD 10-12  
Sweden & Martina - Cristina Zanotto  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Csonka Dr. M., Franco Dr. M.  
**Corso avanzato di implantologia**

Colleferro - RM 14  
Smile Center srl  
Tel. 06.9770581-2  
(Sig.ra Emanuela)  
Cernicchi Dr. M.  
**Corso teorico-pratico  
di implantologia**

**AVVERTENZE  
PER IL LETTORE:**

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.

Pesaro - PU 14-15  
Sweden & Martina - Cristina Zanotto  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Bruschi Dr. G.B., Agabiti Dr. I.  
**Corso di implantologia (altre date:  
04-05/04 - 09-10/05 - 13-14/06)**

Firenze - FI 15  
Acme sas Tel. 0761.228317  
Ravasini Dr. T.  
**Trattamento mininvasivo del  
paziente edentulo.  
Stabilizzazione di protesi totali  
mediante minimpianti**

Sesto Fiorentino - FI 15  
Cenacolo Odontostomatologico del  
Giglio Tel. 055.470424  
www.cenacolo.org  
**GDS differita satellitare con  
protesista - implantologia protesi-  
camente guidata**

Casale Monferrato - AL 20-22  
Tocksystem  
Tel. e fax 031.280301  
Rendo Dr. B., Schirripa  
Dr. G., Tock G.R.  
**Osteoespansione e implantoprotesi**

Genova - GE 20-22  
Tocksystem  
Tel. e fax 031.280301  
Rendo Dr. B., Schirripa  
Dr. G., Tock G.R.  
**Osteoespansione e implantoprotesi**

Padova - PD 29  
DL Medica (Sig.ra Lorena Canella)  
Tel. 02.76275218 - www.dlmedica.it  
Dell'Aquila Dr. M.  
**Konus "Sistema implantare multi-  
funzionale a connessione cono-  
metrica pura per un'implanto-  
protesi innovativa e sicura"**

**IMPLANTOPROTESI**  
Venezia - VE 13  
DL Medica (Sig.ra Lorena Canella)  
Tel. 02.76275218  
www.dlmedica.it  
**Implanto protesi: il successo  
estetico-funzionale, predicibile e  
duraturo, quale risultato sinergico  
di diagnosi, progettazione e mate-  
riali dentali**

Cartura - PD 17  
B&C Organizzazione Eventi  
Tel. 0761.393327  
Corigliano Dr. M.  
**Implantoprotesi a R.O.P.  
In fase di accreditamento**

Como - CO 21-22  
Tocksystem Tel. e fax 031.280301  
Alberti U., Redaelli R., Tock G.R.  
**Meso-esostrutture, overdenture,  
titanio protesi**

**LASER**  
Venezia - VR 15  
B&C Organizzazione Eventi  
Tel. 0761.393327  
**L'utilizzo del laser nello studio  
odontoiatrico  
In fase di accreditamento**

**LEGISLAZIONE**  
Napoli - NA 15  
Cenacolo Odontostomatologico  
Mediterraneo Tel. 081.5094848 -  
www.cenacolo.org  
**Problematiche medico legali in  
odontoiatria  
In fase di accreditamento**

**MODELLAZIONE**  
Brescia - BS 06-08  
Siced Tel. 030.2092867  
siced-dl@libero.it  
Battistelli A.  
**Corso di modellazione e ritocco**

Brescia - BS 06-08  
Siced Tel. 030.2092867  
siced-dl@libero.it  
Battistelli A.  
**Corso di modellazione e ritocco**

**OCCLUSIONE**  
Torino - TO 15  
Coi-Aiog Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**La occlusione funzionale globale  
in chiave posturometrica  
In fase di accreditamento**

Sesto Fiorentino - FI 29  
Coi-Aiog Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Occlusione e postura, disturbi  
occluso-posturali  
3 crediti ECM**

**ORTODONZIA**  
Firenze - FI 07  
Nuovo Ospedale S. Giovanni di Dio -  
Tel. 348.0435135,  
francesca.mazza@asf.toscana.it -  
www.asf.toscana.it  
**Inizio corso annuale  
"L'ortodonzia nel paziente in  
crescita. Corso teorico e clinico"  
50 crediti ECM**

Messina - ME 08  
Sweden & Martina - Rossella Tosello  
N. verde 800.01078  
www.sweden-martina.it  
Jerardo Dr. G.  
**Corso di ortodonzia intercettiva e  
preventiva  
6 crediti ECM**

Pescara - PE 13-14-15  
SWP Ortho  
Tel. 085.4222228  
www.celliortho.it  
**Il trattamento con apparecchiatura**

Quando la scelta di un software è importante!

# Horizon Sql Volo



Horizon Sql Volo è disponibile in abbonamento annuale, che ti garantisce assistenza ed aggiornamenti per sempre.

[www.caes.it](http://www.caes.it)

Scegli il livello  
d'Abbonamento



**Livello Basic**  
160 € anno  
L'essenziale

**Livello Premium**  
210 € anno  
La performance

**Livello Top**  
260 € anno  
Il massimo

DENTISTI

**fissa: la tecnica Straight-Wire e le sei fasi del trattamento (4° - 5° - 6° incontro)**  
In fase di accreditamento

Buccinasco - MI 14

Coi-Aiog Tel. 02.201488

**Corso di ortodonzia - prima parte teorico-pratica propedeutica in 3 incontri (altre date: 15/03 - 29/03)**  
In fase di accreditamento

Caserta - CE 15

Sweden & Martina - Rossella Tosello

N. verde 800.010789

www.sweden-martina.it

Manes Gravina Dr. G.

**Corso di ortodonzia intercettiva e preventiva**

La Spezia - SP 15

Centro Corsi Clinici

Tel. 0187.523599  
(Sig.ra Daniela Moscatelli)

Veneziani Dr. A.

**Corso clinico di ortodonzia linguale in 6 incontri - 1° incontro**

In fase di accreditamento

Genova - GE 22-23

Coi-Aiog

Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Corso clinico di ortodonzia self-ligating - low friction (5° - 6° incontro)**

In fase di accreditamento

**PARODONTOLOGIA**

Torino - TO 13

Coi-Aiog

Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Funzionalità ed estetica -**

**Il trattamento del paziente parodontale: opzioni terapeutiche (1° incontro)**

In fase di accreditamento

Viterbo - VT 14-15

Segreteria Organizzativa:

Sig.ra Empler

Tel. 06.30154886

Deli Prof. G., Crea Dr. A., Dassatti Dr. L., Littarru Dr. C., Manicone Dr. G., Marigo Dr. L., Ursini Dr. R.

**Corso di perfezionamento in parodontologia clinica**

(altre date: 14-15/04 - 23-24/05 - 15-16/09 - 17-18/10)

Torino - TO 20

Coi-Aiog Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Funzionalità ed estetica -**

**Il trattamento del paziente parodontale: opzioni terapeutiche (2° incontro)**

In fase di accreditamento

**PARODONTOLOGIA**

Rende - CS 29

Coi-Aiog Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Terapia parodontale contemporanea: procedure consolidate e procedure innovative**

**PEDODONZIA**

Genova - GE 08

Coi-Aiog Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Il bambino nello studio odontoiatrico generico: una calamità o un'opportunità?**  
In fase di accreditamento

APRILE

**ARGOMENTI VARI**

Sesto Fiorentino - FI 04

B&C Organizzazione Eventi

Tel. 0761.393327

Farronato Dr. G., Barbato Dr.ssa E.

**22° Incontro culturale**

In fase di accreditamento

Torino - TO 18

Cemisa Tel./Fax 011.3855358

**Incontro culturale GAO**

Rende - CS 19

Coi-Aiog

Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Soluzioni protesiche fisse e rimovibili**

**nelle edentulie totali, accorgimenti clinici e tecnici**  
In fase di accreditamento

**CHIRURGIA**

Bologna - BO 03

Coi-Aiog

Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Lembi e suture in chirurgia orale e implantologia**  
In fase di accreditamento

Milano - MI 11-12

Coi-Aiog

Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Chirurgia orale ambulatoriale.**

**Corso teorico-pratico - I modulo (1° - 2° incontro)**  
30 crediti ECM

Sutri - VT 19

Centro sul colore di G. Spina

Tel. 0761.600396

www.feniixiii.com

Spina G.

**Corso introduttivo alla teoria del colore**

**CONSERVATIVA**

Parma - PR 19

AIC - Dr. Guido Prando

Tel. 010.2511769 -

www.accademiaitalianadiconservativa.it

**Corso monotematico AIC**

**EMERGENZE**

Trezzano sul Naviglio - MI 19

Coi-Aiog

Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Il ruolo dell'assistente odontoiatrica nella gestione delle emergenze (2° incontro)**

**ENDODONZIA**

Jesi - AN 11

Sweden & Martina - Cristina Zanotto

N. verde 800.010789

www.sweden-martina.it

Marcoli Dr. S.

**Corso teorico-pratico**

**Mtwo + E&Q Plus**

7 crediti ECM

MK-dent  
ITALIA

Tecno  
Med  
ITALIA

...discover the advantages

**Cod. MT 001**  
DUE TURBINE MK-DENT HC1021  
TITANIUM LINE  
TESTA STANDARD TRE FORI SPRAY  
FIBRE OTTICHE, ROTORE IN CERAMICA  
CON INNESTO A SCELTA  
TRA KAVO® - SIRONA® - W&H® - NSK®

€ 1458,00

€ 990,00

**Cod. MK 122**  
TURBINA HC1021. TESTA STANDARD  
FIBRE OTTICHE, ROTORE IN CERAMICA,  
CON INNESTO A SCELTA  
TRA KAVO® - SIRONA® - W&H® -  
+ CONTRANGOLO LS2011L ANELLO BLU  
RAPPORTO DIRETTO FIBRE OTTICHE  
CON SPRAY INTEGRATO  
E TESTINA ESTRAIBILE

€ 1050,00

€ 1417,00

**Cod. PH008**  
APPARECCHIO SRANCARTE PROPHY 800.  
ATTACCO KAVO®, SIRONA®, BIANCHI®,  
PUNTALE AUTOLUBRIFICANTE  
E COMPLETAMENTE ISPEZIONABILE.  
200 g. DI SOVIO INCARBONATO COMPRESI

€ 349,00

€ 599,00

**Cod. MR 55F**  
MACROMOTORE DA LABORATORIO MM10R,  
MANIPOLO LEGGERO E PRECISO,  
NESSUNA VIBRAZIONE,  
FUNZIONE INVERSIONE DI MARCIA,  
VELOCITÀ 1500/30.000 RPM,  
POTENZA 110W,  
TORQUE 28 N

€ 489,00

€ 289,00

**2 ANNI DI GARANZIA**

**Cod. MK 033**  
CONTRANGOLO LS2011L  
ANELLO BLU  
RAPPORTO DIRETTO FIBRE OTTICHE  
CON SPRAY INTEGRATO  
E TESTINA ESTRAIBILE  
COMPATIBILE KAVO® +  
TESTINA DI RICAMBIO

€ 799,00

€ 937,00

**Cod. MM004**  
2 TURBINE MK-DENT A VITE,  
ATTACCO BORDEN O MOVESIT,  
TESTA STANDARD,  
PUSH BUTTON,  
ROTORE IN CERAMICA

€ 499,00

€ 658,00

**Cod. AR602**  
AMPLIFICATORE PIEZOELETTRICO WOOD  
COMPATIBILE CON AMPLIFICATORE EMS®  
INDICAZIONE DI INTENSITÀ A LED -  
POTENZA 32 KHZ. COMPLETO  
DI MANIPOLO E CINQUE INSERTI

€ 429,00

€ 339,00

**Cod. PL 770L**  
LAMPADA POLIMERIZZATRICE  
LED TURBO 770 CORELESS,  
4 SELEZIONI DI TEMPERAZIONE,  
PROGRAMMA STANDARD O RAMPA,  
POTENZA 110W MAX. BATTERIA AL LITIO  
SENZA EFFETTO MEMORIA,  
RADIOCONTRO INCOPIRATICO,  
PESO 90 GRAMMI

€ 640,00

€ 499,00

Due Carrare - PD 12  
Sweden & Martina - Cristina Zanotto  
N. verde 800.010789  
www.sweden-martina.it  
Marcoli Dr. S.  
**Corso teorico-pratico  
Mtwo + E&Q Plus**  
7 crediti ECM

Buccinasco - MI 14  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**L'endodonzia dalla A alla Zeta -  
Corso teorico-pratico di  
endodonzia ortograde**  
(5° incontro)  
In fase di accreditamento

FrancaVilla al Mare - CH 19  
Dr. Claudio Tiberi  
Tel. 085.690800 - 338.7116523 -  
claudiotiberi@tin.it  
**7ª Giornata endodontica  
abruzzese: "L'elemento dentale  
gravemente compromesso: piano  
di trattamento multidisciplinare"**

**ESTETICA**  
Bologna - BO 03

Coi-Aiog Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Approci razionali nella gestione  
bio-estetica dentale del sorriso**  
In fase di accreditamento

Bologna - BO 03  
Coi-Aiog Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**L'estetica attraverso la salute**  
In fase di accreditamento

Bari - BA 11-12  
B&C Organizzazione Eventi  
Tel. 0761.393327  
Cosimi Dr. F.  
**L'odontoiatria conservativa  
estetica tramite l'utilizzo delle  
tecniche di ricostruzione indiretta**  
In fase di accreditamento

**FOTOGRAFIA**  
Sesto Fiorentino - FI 17  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Novità e consigli sulle macchine  
fotografiche digitali per lo studio  
odontoiatrico e odontotecnico**  
2 crediti ECM

**IMPLANTOLOGIA**  
Sesto Fiorentino - FI 01  
ISO - Tel. 055.304458  
www.leone.it  
Targetti Dr. L.  
**Sistema implantare Exacone**

Sommacampagna - VR 04  
Acme sas  
Tel. 0761.228317  
Ravasini Dr. T., Ritzmann Dr. J.  
**Trattamento mininvasivo del  
paziente edentulo. Stabilizzazione  
di protesi totali mediante  
minimpianti (in contemporanea  
anche in lingua tedesca)**

Bologna - BO 05  
Acme sas  
Tel. 0761.228317  
Ravasini Dr. T.  
**Trattamento mininvasivo del  
paziente edentulo. Stabilizzazione  
di protesi totali mediante  
minimpianti**

Como - CO 05  
Tocksystem  
Tel. e fax 031.280301  
Schirripa Dr. G., Tock Dr. V., Tock G.R.

**Osteoespansione & impianti di  
estensione: approccio**

Genova - GE 05  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488 - www.cenacolo.org

**AVVERTENZE  
PER IL LETTORE:**

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.

RIGENERAZIONE OSSEA

the  
NEW GENERATION

la tecnologia,  
il futuro...



PRESENTA il suo nuovo prodotto

**NEW PLASTER**  
NP170 NP30 NPsinus

che sostituisce, rinnovandolo, il precedente già commercializzato dalla stessa con il vecchio nome di Surgiplaster.

**ClassImplant®**

leader nel mercato  
del solfato di calcio granulare  
per la rigenerazione ossea,

CLASSIMPLANT srl  
Via delle Costellazioni, 305

00144 Roma

tel. 06 87 44 031

fax 06 99 69 83 55

classimplant@classimplant.com

www.classimplant.com

NEW PLASTER

DENTISTI

**Dente vs impianto. Selezione del paziente e morfologia del difetto**

Roma - RM 09

Tocksystem  
Tel. e fax 031.280301

Yacoub Dr. J.C., Tock G.R.

**Osteoespansione & impianti di estensione: approccio**

Ponte S. Giovanni - PG 11

Acme sas  
Tel. 0761.228317

Montagna Dr. F.

**Trattamento mininvasivo del paziente edentulo.**

**Stabilizzazione di protesi totali mediante minimpianti**

Roma - RM 12

Acme sas  
Tel. 0761.228317

Montagna Dr. F.

**Trattamento mininvasivo del paziente edentulo.**

**Stabilizzazione di protesi totali mediante minimpianti**

Milano - MI 19

Acme sas Tel. 0761.228317

Ritzmann Dr. J.

**Trattamento mininvasivo del paziente edentulo.**

**Stabilizzazione di protesi totali mediante minimpianti**

Sesto Fiorentino - FI 22

ISO - Tel. 055.304458  
www.leone.it

Targetti Dr. L.

**Sistema implantare Exacone**

Casale Monferrato - AL 24-26

Tocksystem Tel. e fax 031.280301

Rendo Dr. B., Schirripa Dr. G., Tock G.R.

**Osteoespansione e implantoprotesi**

Genova - GE 24-26

Tocksystem Tel. e fax 031.280301

Rendo Dr. B., Schirripa Dr. G., Tock G.R.

**Osteoespansione e implantoprotesi**

**IMPLANTOPROTESI**

Pescara - PE 18

Cenacolo Odontostomatologico dell'Adriatico

Tel. 085.373328

www.cenacolo.org

**Corso clinico pratico di implantoprotesi guidata dal computer**

17 crediti ECM

**LASER**

Milano - MI 04

B&C Organizzazione Eventi  
Tel. 0761.393327

Crippa Dr. R.

**Corso teorico-pratico: "Utilizzo del laser a diodi nell'estetica dentale"**

In fase di accreditamento

**ORTODONZIA**

Pescara - PE 03-04-05

SWP Ortho Tel. 085.4222228

**Straight Wire in progress - Straight Wire avanzato (4° - 5° - 6° incontro)**

In fase di accreditamento

Arezzo - AR 03-05

Libra Ortodonzia  
www.libra-ortho.com

Fiorelli Dr. G.

**Conoscere, comprendere e padroneggiare la biomeccanica - 1° livello: "Le basi della meccanica - Fondamenti per un trattamento ortodontico razionale" (altre date: 29-31/05 - 26-28/06 - 18-20/09 - 27-29/11)**

Due Carrare - PD 05

Sweden & Martina - Rossella Tosello  
N. verde 800.010789

www.sweden-martina.it

Manes Gravina Dr. G.

**Corso di ortodonzia intercettiva e preventiva**

7 crediti ECM

Due Carrare - PD 05

Sweden & Martina - Rossella Tosello

N. verde 800.010789

www.sweden-martina.it

Manes Gravina Dr. G.

**Corso di ortodonzia intercettiva e preventiva**

Foggia - FG 12

Sweden & Martina - Rossella Tosello  
N. verde 800.010789

www.sweden-martina.it

Ierardo Dr. G.

**Corso di ortodonzia intercettiva e preventiva**

6 crediti ECM

Napoli - NA 12

Coi-Aiog Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Il trattamento ortodontico delle malocclusioni in relazione alla dinamica di crescita cranio-facciale con tecnica Meaw**

In fase di accreditamento

Termoli - CB 12

Coi-Aiog Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Il bite nelle correzioni occluso posturali. Corso teorico-pratico**

13 crediti ECM

Torino - TO 12

Coi-Aiog Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Ortodonzia ad ancoraggio implantare**

In fase di accreditamento

Torino - TO 17

Coi-Aiog Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Individualizzazione del trattamento ortodontico**

In fase di accreditamento

Genova - GE 19

Coi-Aiog Tel. 02.201488

www.cenacolo.org

**Corso clinico di ortodonzia self-ligating - low friction (7° incontro)**

In fase di accreditamento

Genova - GE 19-20

Coi-Aiog Tel. 02.201488

**Corso clinico di ortodonzia self-ligating - low friction (7° - 8° incontro)**

In fase di accreditamento

**ORTOGNATODONZIA**

Bologna - BO 03

Coi-Aiog Tel. 02.201488

**Corso di gestione ambulatoriale e pratica di una moderna ortognatodonzia.**

**Dal bambino all'adulto**

In fase di accreditamento

**PARODONTOLOGIA**

Milano - MI 04-05

Coi-Aiog Tel. 02.201488

**Corso di parodontologia teorico-pratico in 9 giornate (3° - 4° incontro)**

In fase di accreditamento

Milano - MI 12

aidi@promoleader.com

**Corso teorico-pratico di strumentazione parodontale per igienisti e odontoiatri**

Crediti ECM

**POSTUROLOGIA**

Venezia - VE 18

Coi-Aiog Tel. 02.201488

**Posturologia e neurofisiologia.**

**Riprogrammazione posturale globale. Interrelazioni occlusione e postura (1° incontro)**

In fase di accreditamento

**PROTESI**

Parma - PR 12

F&T Flat Tel. 0521.778245

Ravasini Dr. F.

**Corso teorico di protesi totale, overdenture e perioverdenture**

**RESTAURI**

Cagliari - CA 26

Cenacolo Odontostomatologico

Cagliaritano Tel. 070.400302

**I restauri diretti e indiretti nei settori anteriori**

MAGGIO

**ANATOMIA**

Pescara - PE 17

Coi-Aiog  
Tel. 02.201488

**L'anatomia umana nella chirurgia dei mascellari - videodissezione, casi clinici e discussione**

**CHIRURGIA**

Colleferro - RM 12

Smile Center srl  
Tel. 06.9770581-2

(Sig.ra Emanuela)

**Giornata di chirurgia**

**COLORE**

Anzio - RM 30-31

DL Medica (Sig.ra Lorena Canella)  
Tel. 02.76275218

Spina G.

**Corso introduttivo sul colore in odontoiatria (teorica e pratica)**

**COMUNICAZIONE**

Pescara - PE 10

Cenacolo Odont. dell'Adriatico  
Tel. 085.373328

**Giornata sulla gestione e la comunicazione.**

**La comunicazione strategica**

**nello studio odontoiatrico**

In fase di accreditamento

**CONSERVATIVA**

Villa S. Giovanni - RC 03

Cenacolo Odont. Reggino  
Tel. 0965.331678

**Up date nella profilassi della carie nell'età evolutiva.**

**Terapia conservativa nell'infanzia e note traumatologia**

In fase di accreditamento

**ENDODONZIA**

Napoli - NA 03

Dr. Carmelo Pulella

Tel. 081.5094848 - 328.7511871

**11ª Giornata endodontica campana: "L'endodonzia nella pratica clinica"**

Roma - RM 10

Dr. Luigi Scagnoli

Tel. 06.36003525 - 335.6068229

**Manifestazioni regionali SIE - Sezione Laziale**

Torino - TO 17

Coi-Aiog

Tel. 02.201488

**Il ritrattamento endodontico:  
una sfida continua**  
7 crediti ECM

Bari - BA 24  
Dr.ssa Eva Amoroso d'Aragnona  
Tel. 080.5241694  
**Manifestazioni regionali SIE -  
Sezione Pugliese**

**FOTOGRAFIA**

Brescia - BS 10  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
**Corso teorico-pratico  
di fotografia in odontoiatria**  
In fase di accreditamento

**IMPLANTOLOGIA**

Como - CO 03  
Tocksystem  
Tel. e fax 031.280301  
Schirripa Dr. G., Tock Dr. V., Tock G.R.  
**Osteoespansione & impianti di  
estensione: approccio**

Firenze - FI 09  
Cenacolo Odont. del Giglio  
Tel. 055.470424  
**Corso teorico-pratico di  
implantologia osseointegrata  
1° incontro**  
30 crediti ECM

Rende - CS 10  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
**L'implantologia al di fuori della  
chirurgia: morfologia implantare,  
occlusione funzionale, impronta  
semplificata**  
In fase di accreditamento

Colleferro - RM 16  
Smile Center srl  
Tel. 06.9770581-2  
(Sig.ra Emanuela)  
Cernicchi Dr. M.  
**Corso teorico-pratico sul  
"grande rialzo di seno"**  
In fase di accreditamento

Bologna - BO 17  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488

**Mini, medio, grande rialzo del  
seno mascellare con approccio  
crestale senza uso di osteotomo**  
In fase di accreditamento

Milano - MI 17  
DL Medica  
(Sig.ra Lorena Canella)  
Tel. 02.76275218  
Dell'Aquila Dr. M.  
**Konus "Sistema implantare  
multifunzionale a connessione  
conometrica pura per  
un'implantoprotesi  
innovativa e sicura"**

Palermo - PA 17  
Medicina Viva  
Tel. 0521.290191  
**Corso di aggiornamento Sio:  
"La riabilitazione implanto-  
protetica della edentulia totale"**

**IMPLANTOLOGIA**

Casale Monferrato - AL 22-24  
Tocksystem  
Tel. e fax 031.280301  
Rendo Dr. B., Schirripa  
Dr. G., Tock G.R.  
**Osteoespansione e implantoprotesi**

Genova - GE 22-24  
Tocksystem  
Tel. e fax 031.280301  
Rendo Dr. B., Schirripa Dr. G., Tock G.R.  
**Osteoespansione e implantoprotesi**

Cagliari - CA 24  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
**Aggiornamento in implantologia:  
"Il vecchio ed il nuovo"**  
7 crediti ECM

Sesto Fiorentino - FI 27  
ISO - Tel. 055.304458  
Targetti Dr. L.  
**Sistema implantare Exacone**

Padova - PD 31  
DL Medica  
(Sig.ra Lorena Canella)  
Tel. 02.76275218  
Dell'Aquila Dr. M.  
**Konus "Sistema implantare**

**multifunzionale a connessione  
conometrica pura per  
un'implantoprotesi innovativa e  
sicura"**

**IMPLANTOPROTESI**

Sesto Fiorentino - FI 08  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
**La nascita e lo sviluppo delle  
protesi impianto - supportate**

**LASER**

Termoli - CB 03  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
**Il laser a diodi in odontoiatria**  
4 crediti ECM

**MEDICINA NATURALE**

Milano - MI 09  
aidi@promoleader.com  
**Corso di medicina naturale per  
igienisti e odontoiatri in 4  
giornate (altre date: 10-23-24/05)**  
Crediti ECM

**ORTODONZIA**

Pescara - PE 08  
SWP Ortho  
Tel. 085.4222228  
**Straight Wire in progress -  
Trattamento estrattivo vs  
trattamento non estrattivo.  
Meccaniche di trattamento  
interarcata: trattamento precoce,  
regolare e chirurgico delle  
malocclusioni di classe II e III sul  
piano sagittale, frontale e  
verticale (1° incontro)**  
In fase di accreditamento

Napoli - NA 10  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
**Invisalign: dove, quando e perché**  
In fase di accreditamento

Cinisello Balsamo - MI 17  
Sweden & Martina - Rossella Tosello  
N. verde 800.010789  
Ierardo Dr. G.  
**Corso di ortodonzia  
intercettiva e preventiva**  
6 crediti ECM

Viareggio - LU 17  
Sweden & Martina - Rossella Tosello  
N. verde 800.010789  
Manes Gravina Dr. G.  
**Corso di ortodonzia  
intercettiva e preventiva**  
7 crediti ECM

Vigevano - PV 22-26  
NewEgget - newepget@tin.it  
**NewEgget Tweed Course**  
33 crediti ECM

Roma - RM 24  
Sweden & Martina - Rossella Tosello  
N. verde 800.010789  
Manes Gravina Dr. G.  
**Corso di ortodonzia  
intercettiva e preventiva**  
7 crediti ECM

Pescara - PE 29  
SWP Ortho  
Tel. 085.4222228  
**Straight Wire in progress -  
Ortodonzia nel paziente adulto.  
Terapia gnatologica e  
finalizzazione ortodontica nel  
paziente con disordini cranio-  
mandibolari (1° incontro)**  
33 crediti ECM

**PARODONTOLOGIA**

Roma - RM 09-10  
Segreteria Organizzativa Promo  
Leader Service  
Tel. 055.241131 - 055.243755  
**Corso di aggiornamento - Il  
trattamento del paziente affetto  
da parodontite**

Rho - MI 10  
Aops (Silvia Fassetti)  
Tel. 02.93180821  
Sculean Dr. A.  
**Regenerative and esthetic  
periodontal therapy**  
In fase di accreditamento

Colleferro - RM 23  
Smile Center srl  
Tel. 06.9770581-2 (Sig.ra Emanuela)  
Cernicchi Dr. M.  
**Corso teorico-pratico su  
"le recessioni gengivali"**

**S.A.M.DENT** s.u.r.l.  
di Stefano Marchetti

Forniture Dentali



ODONTOTECNICI

**MARZO**

**COLORE**

*Albignasego - PD 07-08*  
DL Medica (Sig.ra Lorena Canella)  
Tel. 02.76275218  
www.dlmedica.it  
*Spina G.*  
**Corso introduttivo sul colore in odontoiatria (teorica e pratica)**

**OLORE**

*Sutri - VT 15*  
Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761.600396  
*Spina G.*  
**Corso tessitura superficiale (teorico-pratico)**

**COLORE**

*Sutri - VT 29*  
Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761.600396  
www.feniix.com  
*Spina G.*  
**Corso introduttivo alla teoria del colore**

**ESTETICA**

*Rende - CS 29*  
Coi-Aiog

Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**La forza del bello**

**FORMA E COLORE**

*Brescia - BS 05-08*  
Siced Tel. 030.2092867  
siced-dl@libero.it  
*Gebhard W.*  
**L'ottenimento della terza dimensione mediante forna e colore (con paziente)**

**GNATOLOGIA**

*Roma - RM 07-08*  
Laboratorio Groppi  
Segreteria organizzativa:  
Tel. 06.77205816  
*Groppi C.*  
**Inizio corso di gnatologia in 4 incontri**

**IMPLANTOLOGIA**

*Sesto Fiorentino - FI 15*  
Cenacolo Odontostomatologico del Giglio Tel. 055.470424  
**GDS differita satellitare con protesista - implantologia protesicamente guidata**

**IMPLANTOPROTESI**

*Como - CO 21-22*  
Tocksystem  
Tel. e fax 031.280301  
*Alberti U., Redaelli R., Tock G.R.*  
**Meso-esostrutture, overdenture, titanioprotesi**

**MODELLAZIONE**

*Brescia - BS 21-22*  
Segreteria organizzativa:  
Tel. 030.6852203, 335.5431320 -  
www.afgtab.it  
*Carulli D.*  
**Corso base di modellazione AFG**

**OCCLUSIONE**

*Sesto Fiorentino - FI 29*  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Occlusione e postura, disturbi occluso-posturali 3 crediti ECM**

**PROTESI FISSA**

*Roma - RM 28-29*  
Segreteria organizzativa:

Tel. 0774.379166 - 339.5419371 -  
www.afgtab.it  
*Cecere A.*  
**Corso di modellazione Afg**

**AVVERTENZE PER IL LETTORE:**

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.

**APRILE**

**COLORE**

*Sutri - VT 11-12*  
Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761.600396  
*Spina G.*  
**Corso master sul colore (pratico)**

*Sutri - VT 19*  
Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761.600396  
*Spina G.*  
**Corso introduttivo alla teoria del colore**

**ESTETICA**

*Milano - MI 19*  
DL Medica

(Sig.ra Lorena Canella)  
Tel. 02.76275218  
**Estetica dentale: "Ottimizzazione del sistema Diamond Crown nella pratica quotidiana"**

**FOTOGRAFIA**

*Sesto Fiorentino - FI 17*  
Coi-Aiog - Tel. 02.201488  
**Novità e consigli sulle macchine fotografiche digitali per lo studio odontoiatrico e odontotecnico 2 crediti ECM**

**MODELLAZIONE**

*Brescia - BS 04-05*  
Siced - Tel. 030.2092867

siced-dl@libero.it  
*Polz M.*  
**Corso di modellazione biodinamica in cera**

*Brescia - BS 19-20*  
Segreteria organizzativa:  
Tel. 030.6852203, 335.5431320  
*Carulli D.*  
**Corso base di modellazione Afg**

**PROTESI FISSA**

*Roma - RM 18-19*  
Segreteria organizzativa:  
Tel. 0774.379166 - 339.5419371  
*Cecere A.*  
**Corso di modellazione Afg**

**SCHELETRATI**

*Brescia - BS 04-05*  
Siced  
Tel. 030.2092867  
siced-dl@libero.it  
*Serpilli E.*  
**Tecnologie di esecuzione dello scheletrato con ganci**

**STRATIFICAZIONE**

*Brescia - BS 18-19*  
Siced  
Tel. 030.2092867  
siced-dl@libero.it  
*Peters J.*  
**Tecnica razionale di stratificazione su anteriori e posteriori**

**MAGGIO**

**COLORE**

*Sutri - VT 10*  
Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761.600396  
*Spina G.*  
**Corso sul colore e forma in protesi totale (teorico-pratico)**

*Sutri - VT 24*  
Centro sul colore di G. Spina  
Tel. 0761.600396  
*Spina G.*  
**Corso tessitura superficiale (teorico-pratico)**

*Anzio - RM 30-31*DL Medica  
(Sig.ra Lorena Canella)  
Tel. 02.76275218  
www.dlmedica.it  
*Spina G.*  
**Corso introduttivo sul colore in odontoiatria (teoria e pratica)**

**FUSIONE**

*Roma - RM 23-24*  
Laboratorio Groppi - Segreteria organizzativa:  
Tel. 06.77205816

*Groppi C.*  
**Corso di fusione**

**IMPLANTOPROTESI**

*Sesto Fiorentino - FI 08*  
Coi-Aiog  
Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**La nascita e lo sviluppo delle protesi impianto - supportate**

**MODELLAZIONE**

*Brescia - BS 23-24*  
Segreteria organizzativa:

Tel. 030.6852203  
335.5431320  
www.afgtab.it  
**Corso base di modellazione AFG**

**PROTESI**

*Brescia - BS 29-31*  
Siced Tel. 030.2092867  
siced-dl@libero.it  
*Battistelli A.*  
**Corso di morfologia naturale Afg I in cera o ceramica**

## IGIENISTI, ASSISTENTI E PERSONALE AUSILIARIO

## MARZO

**EMERGENZE**

Trezzano sul Naviglio - MI 15  
Coi-Aiog Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**Il ruolo dell'assistente odontoiatrica nella gestione delle emergenze (1° incontro)**

**IGIENE**

Milano - MI 01  
Coi-Aiog Tel. 02.201488  
www.cenacolo.org  
**I bifosfonati nella pratica dell'igienista dentale**  
*In fase di accreditamento*

Firenze - FI 20

Cenacolo Odontostomatologico del Giglio Tel. 055.470424  
www.cenacolo.org  
**Corso annuale per igienistedentali in 5 incontri (1° incontro)**

**PARODONTOLOGIA**

Roma - RM 14-15  
Dr. Antonio Lecce Tel. 338.3556346  
Quaranta Dr. A.  
**Corso teorico-Pratico "Terapia parodontale non chirurgica"**  
*In fase di accreditamento*

## APRILE

**ARGOMENTI VARI**

Rende - CS 19  
Coi-Aiog - Tel. 02.201488  
**Il circuito virtuoso del benessere**  
*In fase di accreditamento*

**EMERGENZE**

Trezzano sul Naviglio - MI 19  
Coi-Aiog - Tel. 02.201488  
**Il ruolo dell'assistente odontoiatrica nella gestione delle emergenze (2° incontro)**

**ESTETICA**

Roma - RM 04  
Dr. Nicola Lavallo Tel. 335.233568  
Benetti Dr. A.  
**Corso teorico-pratico**

**"Lo sbiancamento dentale"**  
*In fase di accreditamento*

**IGIENE**

Firenze - FI 02  
Cenacolo Odont. del Giglio  
Tel. 055.470424  
**Corso annuale per igieniste dentali in 5 incontri (2° incontro)**

Firenze - FI 16

Cenacolo Odontostomatologico del Giglio - Tel. 055.470424  
**Corso annuale per igieniste dentali in 5 incontri (3° incontro)**

Cagliari - CA 26

Cenacolo Odontostomatologico

Cagliaritano Tel. 070.400302

**Ergonomia di lavoro alla poltrona****ORTODONZIA**

Roncadelle di Castel Mella - BS 08  
Coi-Aiog - Tel. 02.201488  
**La gestione globale del paziente ortodontico: dalla fase intercettiva alla terapia parodontale aggiuntiva**  
*In fase di accreditamento*

**PARODONTOLOGIA**

Milano - MI 12  
aidi@promoleader.com  
**Corso teorico-pratico di strumentazione parodontale per igienisti e odontoiatri**  
*Crediti ECM*

## MAGGIO

**ESTETICA**

Fiumana Predappio - FC 17  
Dr. Gianfranco Sorgente  
Tel. 347.3756128  
Benetti Dr. A.  
**Corso teorico-pratico "Lo sbiancamento dentale"**  
*In fase di accreditamento*

**MEDICINA NATURALE**

Milano - MI 09  
aidi@promoleader.com  
**Corso di medicina naturale per igienisti e odontoiatri in 4 giornate (altre date: 10-23-24/05)**  
*Crediti ECM*



**biotec**  
DENTAL IMPLANTS

SEMPLICEMENTE  
NATURALE



Un'ampia gamma di *prodotti pensati con cura e attenzione*, per soddisfare ogni esigenza, migliorare il Vostro lavoro e assicurarvi ottimi risultati.

## CORSO 1

### CORSO TEORICO-PRATICO DI PROTESI MOBILE DENTALE COMPLETA PER ODONTOIATRI E ODONTOTECNICI

23 - 24 Maggio 2008  
13 - 14 Giugno 2008

17 - 18 Ottobre 2008  
14 - 15 Novembre 2008

- Impronta preliminare mascellare e mandibolare
- Fasi di laboratorio
- Impronta funzionale mascellare e mandibolare
- Fasi di laboratorio
- Studio della faccia del paziente
- Piano oclusale e verticentrica

- Apparato stomatognatico
- Fasi di laboratorio
- Prova estetica sul paziente
- Costruzione in laboratorio delle protesi diagnostiche
- Finalizzazione in laboratorio
- Protesi mobile su impianti
- Scelta del sistema di ancoraggio
- Attacchi a palla
- Attacchi a barra
- Impronta su impianti
- La protesi diagnostica nella tecnica impiantare
- Classificazione del sistema di ancoraggio

È possibile richiedere il programma dettagliato.

## CORSO 2

### CORSO PRATICO PER ODONTOTECNICI DI PROTESI MOBILE DENTALE COMPLETA

#### PARTE TEORICA

- Anatomia in relazione all'impronta preliminare
- Sviluppo del modello preliminare e portaimpronta individuale
- Tracciato anatomico
- Modello master
- Costruzione base fonetica
- Verticentrica
- Piano oclusale
- Scelta dei denti
- Estetica
- Montaggio denti
- Trasferimento in articolatore
- Linee di montaggio
- Prova estetica
- Costruzione della placca diagnostica
- Condizionamento con resina resiliente
- Finalizzazione
- Arco facciale
- Bilanciamento dei denti posteriori
- Modellazione delle gengive artificiali
- Imbuffolamento
- Caratterizzazioni gengiva artificiale
- Rifinitura lucidatura

- Consegna
- Ribasatura
- Protesi immediata

#### PARTE PRATICA

- Boxing impronta funzionale
- Costruzione del portaimpronta individuale
- Costruzione della base fonetica
- Montaggio dei denti anteriori sup. e inf.
- Montaggio dei denti posteriori sup.
- Linee di montaggio
- Controllo e modifica del piano oclusale
- Montaggio e bilanciamento dei posteriori inferiori
- Modellazione delle gengive artificiali

I partecipanti al corso eseguiranno le fasi sopradescritte.

I partecipanti dovranno portare il seguente strumentario:

- Camice
- Spatole da modellazione
- Frese per resina
- Quattro file denti

### 1 CORSO TEORICO-PRATICO DI PROTESI MOBILE DENTALE COMPLETA PER ODONTOIATRI E ODONTOTECNICI

Relatori: Prof. Glauco Marino  
Dott. Antonino Marino  
Sig. Stefano Proietti

### 2 CORSO PRATICO PER ODONTOTECNICI DI PROTESI MOBILE DENTALE COMPLETA

Relatori: Dott. Antonino Marino  
Sig. Stefano Proietti



Il corso 1 viene svolto a Roma con una programmazione bimestrale su 2 incontri di 2 giorni ciascuno. In questo corso il Prof. Marino illustrerà la tecnica ed esporrà i concetti per una corretta applicazione della sua metodica. Durante il corso verranno svolte dai relatori tutte le fasi cliniche e tecniche per il confezionamento di una protesi mobile completa. Oltre ai crediti formativi verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutti i coffee break e la pausa pranzo verranno offerti dall'organizzazione.

Il corso 2 viene svolto con una programmazione di 2 giorni, in cui i partecipanti eseguiranno le fasi pratiche descritte nel programma. I partecipanti potranno portare un caso proprio montato in articolatore, che verrà analizzato e confezionato durante il corso. Oltre ai crediti ECM e all'attestato di partecipazione verrà rilasciato tutto il materiale didattico utilizzato durante il corso. Tutti i coffee break e la pausa pranzo verranno offerti dall'organizzazione.



Sede del corso:

**CENTRO ODONTOIATRICO  
DENTAL GAIA**

Via di Torre Gaia 10-10/a - Roma

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

**Segreteria Organizzativa**

**Tel. 06.2030702 - 06.2031441**

Responsabile della Segreteria Organizzativa

**Sig. Stefano Proietti**

Possibilità di pernottamento in Albergo \*\*\*\*  
e \*\*\* tutti e due a 100 mt  
dalla Sede del Corso

## SBIANCANTI A CONFRONTO

**Bianco è bello**

*Il sorriso manifesta serenità e benessere. Il sorriso viene usato sia per manifestare uno stato emotivo, sia come strumento di comunicazione nel rapportarsi con gli altri.*



La consapevolezza da parte dei pazienti del valore sociale di un bel sorriso ha portato a un notevole aumento della richiesta di trattamenti sbiancanti. In effetti, col tempo i denti tendono a variare di colore a causa dell'età, dell'assunzione di determinati cibi o bevande o di terapie farmacologiche. In commercio oggi esistono sistemi ambulatoriali o domiciliari e la differenza tra i due tipi risiede sostanzialmente nella diversa percentuale di agente sbiancante contenuto e nella modalità di applicazione. Per far tornare i denti al loro colorito bianco si ricorre alla pratica dello sbiancamento dentale,

che viene effettuato sui denti naturali con un prodotto biocompatibile. Le sostanze utilizzate per lo sbiancamento si dividono in ossidanti e riducenti. Le sostanze ossidanti agiscono decomponendo le sostanze coloranti, mentre quelle riducenti operano una trasformazione chimica nelle molecole responsabili delle discromie. Il perossido di carbammide, attualmente il più utilizzato, agisce con un meccanismo di tipo ossidativo. È costituito da urea e perossido di idrogeno, con un contenuto di  $H_2O_2$  di circa il 35%. Oltre ad esplicare un'azione sbiancante, il perossido di carbammide sem-

bra ridurre in modo significativo anche l'indice di placca. Una volta applicato, si scinde in acqua ossigenata e urea. L'acqua ossigenata penetra nella struttura porosa dello smalto fino alla dentina, agendo sulle molecole causa di discromie. L'urea, invece, si scinde in anidride carbonica e ammoniaca, innalzando il pH e ostacolando così lo sviluppo di placca batterica. Con questo tipo di meccanismo si ottiene l'eliminazione delle discromie, senza indurre alterazioni nella sostanza del dente e riducendo i problemi di sensibilità. I trattamenti sbiancanti devono sempre essere eseguiti con la su-



## LE DISCROMIE

Con il termine "discromie dentali" si definiscono gli inestetismi cromatici e le alterazioni che modificano in modo più o meno sostanziale il colore fisiologico dei denti naturali. I fattori che determinano le discromie si possono raggruppare essenzialmente in due grandi gruppi: i fattori estrinseci e i fattori intrinseci. I primi sono quelli che determinano una discromia superficiale e sono rappresentati dall'assunzione di alimenti dall'elevato potere colorante (caffè, tè, liquirizia), dall'abitudine al fumo, dalla placca o dal tartaro. Generalmente, un'accurata seduta di igiene orale permette una facile rimozione di questo tipo di discromie. I fattori

intrinseci, invece, si dividono ulteriormente in primari e secondari. Fanno parte dei primari alcune sostanze o farmaci, come le tetracicline, che se assunti durante lo sviluppo possono penetrare e integrarsi nella struttura dello smalto. Anche l'invecchiamento, così come alcune malattie genetiche manifestatesi durante la formazione di smalto e dentina, sono tra le cause delle discromie primarie. Si considerano come fattori secondari quelli causati da un trauma, con conseguente decomposizione del tessuto pulpale. Non si devono poi dimenticare le discromie causate dall'utilizzo di alcuni materiali dentali, soprattutto per cure canalari.

pervisione di un professionista. Sia che si opti per il trattamento in studio o per quello domiciliare, occorre far capire al paziente l'importanza di una visita pre-sbiancamento, nella quale viene fatta una diagnosi globale, si controlla lo stato dei restauri, si determina il tipo e l'entità della discromia, si registra il colore, si effettua una seduta di igiene orale e si stabilisce il tipo di trattamento più consono al singolo caso clinico. Inoltre, per l'applicazione del trattamento mediante mascherine, è necessaria la rilevazione dell'impronta delle arca-

te per la realizzazione delle mascherine stesse. La percentuale di perossido utilizzata nei sistemi alla poltrona è più elevata rispetto a quella dei sistemi domiciliari e richiede, quindi, alcuni accorgimenti. È importante, infatti, proteggere i tessuti gengivali con apposite dighe o gel protettivi, onde evitare che la sostanza possa irritare le mucose. Per favorire o accelerare il processo di sbiancamento, alcuni sistemi prevedono l'esposizione delle arcate a una fonte luminosa di tipo alogeno o al plasma. L'attivazione del gel sbiancante

può avvenire anche tramite laser. In questo caso, la seduta si apre con una copertura delle arcate dentali con apposite membrane protettive, dopo di che si passa all'applicazione sui denti della sostanza sbiancante, totalmente atossica poiché composta da perossido di idrogeno, ed infine viene attivato il laser. L'irradiazione dei denti avviene con un apposito manipolo che defocalizza la luce laser con lo scopo di attivare il perossido, innescando la scissione dei doppi legami dei pigmenti presenti nei denti, trasformandoli in costituenti più piccoli, maggiormente solubili e lavabili. I trattamenti domiciliari si basano principalmente sull'applicazione di mascherine personalizzate in cui si inserisce la sostanza sbiancante. Anche in questo, il paziente dovrà fare attenzione affinché il perossido non fuoriesca dalla mascherina e irriti le mucose. Il periodo di trattamento dipende soprattutto dal tempo di applicazione giornaliera delle mascherine. Il trattamento notturno ha il vantaggio di non interferire con le attività quotidiane del paziente. Inoltre, durante la notte si verifica una riduzione del flusso e della perossidasi salivare, a tutto vantaggio dell'azione sbiancante.

## AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

*I dati pubblicati in questa sezione sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. I prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.*

## GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SUGLI SBIANCANTI

- Beyond Technology Corp.**  
(Importatore e distributore DL Medica spa - 02.762751 - [www.dlmedica.it](http://www.dlmedica.it))
- Biocosmetics Laboratoires**  
(Dati forniti da Molteni Dental srl - 02.30353088 - [www.moltenidental.it](http://www.moltenidental.it))
- Bio White Technology Corp**  
(Dati forniti da Mandent di Di Bonaventura A. - 011.3098143 - [www.mandent.net](http://www.mandent.net))
- By Dental srl**  
[www.bydental.com](http://www.bydental.com) (Distributore esclusivo Simit Dental srl - 0376.267811 - [www.simitdental.it](http://www.simitdental.it))
- B.W.I. Medical srl**  
800.180754 - [www.bwimedical.com](http://www.bwimedical.com)  
[www.biowhite.it](http://www.biowhite.it)
- Dental World srl**  
080.3381004 - [www.dental-world.it](http://www.dental-world.it)
- DID Dental Instrument Design**  
[www.did-dental.it](http://www.did-dental.it)
- Discus Dental**  
[www.discusdental.com](http://www.discusdental.com) (Importatore Novaxa spa - 02.618651 - [www.novaxa.it](http://www.novaxa.it))
- Horis srl**  
0544.523302 - [www.horisdental.it](http://www.horisdental.it)
- Ivoclar Vivadent**  
[www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)
- Lambda Scientifica spa**  
0444.349165 - [www.lambdascientifica.com](http://www.lambdascientifica.com)
- LAS srl**  
(Dati forniti da De Giorgi Srl - [www.degiorgi.it](http://www.degiorgi.it))
- LAS srl Unica Group**  
0434.597001 - [www.unicagroup.it](http://www.unicagroup.it)
- MC Italia srl**  
[www.mccitaliasrl.com](http://www.mccitaliasrl.com)
- Micerium spa**  
0185.7887870 - [www.micerium.it](http://www.micerium.it)
- Premier Dental Product Company**  
(Importatore e distributore Maxi Medical srl - 02.89124838 - [www.maximedical.it](http://www.maximedical.it))
- Procter & Gamble**  
800.149097 - [www.azricerca.it](http://www.azricerca.it)
- SDI Dental Limited**  
800-780625 - [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)
- Shofu Inc**  
[www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp) (Importatore e distributore Illic' Dr. Riccardo spa - 02.55016500 - [www.illic.it](http://www.illic.it))
- Spectrum Dental**  
[www.specdent.com](http://www.specdent.com) (Importatore Novaxa spa - 02.618651 - [www.novaxa.it](http://www.novaxa.it))
- Sweden&Martina SPA**  
049.9124300 - [www.sweden-martina.it](http://www.sweden-martina.it)
- Quick White DMDS**  
[www.quickwhite.net](http://www.quickwhite.net) (Importatore e distributore Quattrotri srl - [www.quattrotri.com](http://www.quattrotri.com))
- Ultradent Products Inc** - 800.830715 - [www.ultradent.it](http://www.ultradent.it)
- WHITESmile GmbH Germany**  
[www.whitesmile.com](http://www.whitesmile.com) (Distributore Oagna spa - 039.2782954 - [www.agna.it](http://www.agna.it))

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

Sbiancanti professionali							
Denominazione del prodotto	<b>ALADDIN 38%</b> (A)	<b>BEYOND WHITENING SYSTEM</b>	<b>BIO WHITE®</b>	<b>BIO WHITE WHITENING KIT</b>	<b>BRILLIANCE</b>	<b>BY WHITE ONE TIME HP 35%</b>	<b>BY X-TRA 38%</b>
Produttore	DID Dental Instrument Design srl	Beyond Technology Corp.	B.W.I. Medical srl	Bio White Technology corp	Horis srl	By Dental srl	By Dental srl
Agente chimico sbiancante	Perossido di idrogeno 38%	Perossido di idrogeno 35%, silice, altri componenti	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di carbamide 35%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 38%
PH	8	•	5,5	•	5,8-6,4	3	3
Acceleratore chimico	Idrossido di sodio	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	•	•	No	Idrossido di sodio	Idrossido di sodio
Attivazione con energia luminosa	Si lampada LED	Si luce fredda blu-cyano trasmessa per mezzo di fibre ottiche	Si lampada led 36.000 mW	Si lampada a led 3.600 mW/cm <sup>2</sup>	No	No	No
Desensibilizzante abbinato	Si nitrato di potassio	No	Si incluso nitrato di potassio	•	•	Si nitrato di potassio	Si nitrato di potassio
Altri componenti	•	•	•	•	Glicerina, acido poliacetico, olio di menta piperita	•	•
Protezione gengivale	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
Confezionamento	2 da 2,5 ml	Kit comprensivo di: siringa gel, flacone desensibilizzante, polish, gel protettivo, bicomponente vasellina	Vedi scheda tecnica	Tutto il necessario per il trattamento	5 siringhe per confezione, siringa da 3 ml	2 siringhe da 2,5 ml più 1 siringa di diga gengivale	2 siringhe da 2,5 ml più 1 siringa di diga gengivale
Durata della seduta (min)	15	30	30	30	20	45	45
N° di sedute	2	1	1	1	1/3	1/2	1/2
Trattamento domiciliare abbinato	Si	No	No	Si non necessario	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Euro 111,00	Euro 110,00 kit	Non fornito	Euro 135,00	Non fornito	Euro 51,10 (catalogo Simit Dental 2008)	Euro 53,70 (catalogo Simit Dental 2008)

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

**Sbiancanti professionali**

Denominazione del prodotto	CONTRAST AM	ENA WHITE POWER (A)	ENA WHITE REGULAR	HI-LITE II	KIT SBIANCAMENTO STUDIO PER WIS II	KIT STUDIO	LWS LASER WHITENING SYSTEM
Produttore	Spectrum Dental	Micerium spa	Micerium spa	Shofu Inc.	Quick White	Quick White	Lambda Scientifica spa
Agente chimico sbiancante	Perossido di idrogeno 22%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 12%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 12 e 6%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 35%
PH	•	7,3	7,3	4,4-5	5,5-5,8	5,5-5,8	9
Acceleratore chimico	•	Idrossido di sodio	•	Potassium Persulphinate (Oxone) 5,9%	•	Estratto di ferrina di cocciniglia	•
Attivazione con energia luminosa	Si alta intensità, laser	No	No	Si, alogena min 300 mW/cm <sup>2</sup>	Si led+azione subsonica	Si, luce alogena, led, laser	Si, laser 800 nm diodo/1064 nm Nd/Yag
Desensibilizzante abbinato	No	Si Ena White gel desensibilizzante	Si Ena White gel desensibilizzante	No	Si, nitrato di potassio	Si, nitrato di potassio	Si, nitrato di potassio
Altri componenti	•	Fluoro e nitrato di potassio	Fluoro e nitrato di potassio	Solfato manganoso monoidrato 5,0%, silice amorfa idrata 70,0%, poli metil etere maleato 19,0%, colorante verde guinea 0,1%	•	•	•
Protezione gengivale	Si	Si	Si	Si	Si/No	Si	Si
Confezionamento	6 siringhe da 2,6 g	1 siringa bicomponente 5 g, diga o ricambio 2 x 5g	1 siringa 2 ml, diga o ricambio 2 x 2 ml	1 x Hi-Lite polvere 5 g, 2 x Hi-Lite liquido 14 ml, 1 x Blue Vaseline 15 ml	2 al 18 + 3 al 6 + 1 SLT Tray	3 barattoli	4 siringhe 8 cannule, 2 siringhe diga 8 microbrush
Durata della seduta (min)	60	10	30	30	10-40	40	15-30
N° di sedute	1	Max 3	10 gg	Max 3	1 o più	1	2
Trattamento domiciliare abbinato	No	Si	Si	No	Si	No	No
Prezzo di listino*	Euro 188,70	Euro 65,00 kit euro 99,00 ricambio	Euro 45,00 kit euro 39,90 ricambio	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito

15° Congresso Nazionale  
del "Collegio dei Docenti di Odontoiatria"

I° CONGRESSO INTERNAZIONALE

"L'ODONTOIATRIA NEL MONDO  
Formazione e Ricerca a confronto"



ESPOSIZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER ODONTOIATRIA

Roma - Palazzo dei Congressi  
16 - 17 - 18 - 19 Aprile 2008



## IL CARCINOMA ORALE

Prof. Lorenzo LO MUZIO

Nell'ambito del 15° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria giovedì 17 aprile nell'Aula Magna del Palazzo dei Congressi si discuterà sul carcinoma orale. Nell'ambito della giornata verrà trattato l'impatto sulla salute pubblica di tale neoplasia con delle lectures riservate alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, con particolare riferimento sia ai più classici che ai più recenti fattori di rischio per la oncogenesi orale. Ampio spazio è riservato agli attuali protocolli di diagnosi e management del carcinoma orale.

Tale tumore è all'ottavo posto tra le neoplasie maligne più frequenti al mondo ed è caratterizzato da una bassa sopravvivenza, inferiore al 50% a 5 anni. Dopo il trattamento primario con la chirurgia e/o la radioterapia, la recidiva o le metastasi occorrono in più del 50% dei pazienti.

Se il carcinoma orale fosse diagnosticato e trattato nelle sue fasi iniziali la sopravvivenza a 5 anni potrebbe essere superiore all'80-90%. Nonostante il distretto orale sia un territorio di facile accessibilità, circa il 70% dei carcinomi orali viene diagnosticato in III o IV stadio, quando cioè sono già presenti linfonodi neoplastici e/o metastasi a distanza. È difficile capire perché an-

cora oggi si debbano osservare al momento della diagnosi tumori così avanzati quando una diagnosi precoce, oltre a migliorare notevolmente la prognosi, consentirebbe sicuramente anche trattamenti assai meno aggressivi e menomanti.

Da uno studio accurato la responsabilità del ritardo appare dover essere condivisa tra il paziente, il medico di prima consultazione e lo specialista di primo riferimento. Il WHO ha evidenziato diverse volte che il fattore chiave con il maggiore potenziale per ridurre la mortalità del carcinoma orale è sicuramente la sua diagnosi precoce. Attualmente, non esiste un metodo semplice, affidabile per la sua diagnosi precoce o un test non invasivo e di facile esecuzione per lo screening di massa. L'esame visivo della mucosa orale è efficace, ma permette l'identificazione di lesioni già in atto da tempo ed è caratterizzato da una bassa sensibilità e specificità, e la sua efficacia è legata essenzialmente all'esperienza clinica dell'esaminatore. Uno screening più efficace, meno soggetto all'esperienza clinica dell'esaminatore, basato su metodiche di genomica e proteomica avrebbe la possibilità di modificare radicalmente le prospettive prognostiche di questa patologia.

Per tali motivi la ricerca di base si sta concentrando sullo sviluppo di un tool non-in-

vasivo per la diagnosi precoce del carcinoma orale, eventualmente utilizzando la saliva come matrice diagnostica con l'applicazione delle più recenti tecnologie come la proteomica ed i transcriptomi. Negli anni scorsi si è visto un interesse notevole per le potenziali applicazioni della proteomica nella biomedicina per la diagnosi precoce ed il monitoraggio dell'evoluzione di una determinata patologia, così come per la scelta di terapie più efficienti.

La proteomica è particolarmente adatta per l'analisi non-invasiva dei fluidi biologici in quanto permetterebbe l'identificazione di alterazioni legate alla malattia e la individuazione di biomarkers proteici-molecolari specifici per le diverse malattie utilizzando come matrice il siero nel caso del carcinoma del colon-retto o le urine nel caso del carcinoma renale.

L'analisi della saliva, già utilizzata per la determinazione delle infezioni da HIV e HCV, ha il potenziale di divenire in breve un salvavita alternativo per la diagnosi di una patologia la cui diagnosi precoce è critica, come il carcinoma orale in fase iniziale. La integrazione tra ricerca e clinica è resa anche più attuale dalla proposizione di nuove strategie terapeutiche efficaci su fattori molecolari coinvolti nel determinismo di tali neoplasie.

# PROGRAMMA DEL CONGRESSO

(estratto)

## GIOVEDÌ 17 APRILE

**CARCINOMA ORALE,**  
**attualità nelle procedure diagnostiche e terapeutiche**

L. Lo Muzio, C. La Vecchia, C. Scully, I. Van Der Waal,  
A. Carrassi, S. Gandolfo, K. Nylander, I. Van Der Waal,  
G. Iannetti, G.F. Favia, R. Brusati, P.F. Nocini, N.  
Gebbia, S. Warnakulasuriya, L. Lo Muzio

**Crescere senza Carie: Quali le strategie?**

C. Van Loveren, R. Ferro, G. Campus, L. Ottolenghi,  
M.R. Giuca

**La prevenzione della salute orale nel bambino**

P. Lingstrom, A. Fuks, L. Strohmer, C. Caprioglio,  
R. Ferro, L. Grosso

## VENERDÌ 18 APRILE

**Implantologia Oggi: il monoedentulismo**  
**DIRETTA VIDEO DI IMPLANTOLOGIA**

A. Parpaiola, M. Donati, D. Cecchinato, M. Simion, I.  
Rocchietta, F. Fontana

**Giornata Ortodonzia**

L. Christensen, G. Farronato, C. Chimenti, S. Alonzi, G.  
Fiorillo, R. Deli, P. Cozza, L. Martucci, M. Manuelli, A.  
Lucchese, G. Cordasco, R. Nucera, R. Martina, P.  
Manzo, F. Festa

**Stato dell'arte in Conservativa**

L. Breschi, F. Mangani, F. Brenna, B.A. Matis

**Stato dell'arte in Endodonzia**

V. Malagnino, E. Berutti, G. Cantatore, M. Martignoni

## SABATO 19 APRILE

**PREMIAZIONE POSTERS**

**Tavola Rotonda**

Collegio dei Docenti, Industria, Liberi Professionisti,  
Igienisti, Odontotecnici

**ASSEMBLEA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI**

**Collegio dei Discenti**

A. Polimeni, V. Malagnino, C. D'Arcangelo, G.M.  
Macaluso, G. Preti, M. Baldoni, G. Goracci

**GIORNATA DEI CORSI DI LAUREA IN IGIENE DENTALE**

*consultate e scaricate il programma completo agli indirizzi*  
*[www.collegiodeidocenti.it](http://www.collegiodeidocenti.it) e [www.proodontocongress.it](http://www.proodontocongress.it)*

# L'ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO

*Il Presidente del Comitato Organizzatore e Scientifico: Prof. Guido GORACCI*

Il 15° Congresso del Collegio dei Docenti, del quale vi presentiamo il programma preliminare, si terrà al Palazzo dei Congressi di Roma EUR dal 16 al 19 aprile 2008. Come anticipato a settembre nella presentazione sarà un congresso interamente nuovo. Non si tratterà dei soliti mini congressi delle varie Società del mondo Odontoiatrico, che erano diventati delle mini repliche dei Congressi Nazionali già fatti, ma sempre con l'aiuto e l'accordo delle società, di una manifestazione di nuovo genere, che impegna un numero minore di aule, ma che punta su argomenti di grande attualità.

Così quest'anno abbiamo in aula magna il giovedì un excursus completo sul carcinoma orale, argomento trattato in ogni suo aspetto, dalla diagnosi alla terapia, da oratori del massimo livello, italiani e stranieri. Il venerdì sarà la volta dell'implantologia, affidata ai migliori esperti della materia, universitari e liberi professionisti. Nelle altre aule verranno trattati argomenti vari: avremo il "Laser

Day"; tutte le novità che ci offre la Pedodonzia, le attualità in Conservativa ed in Endodonzia; una giornata di Ortodonzia; il tutto con la partecipazione di rinomati conferenzieri italiani e stranieri. Altra novità del congresso l'apertura ai Workshop: nelle piccole aule verranno trattati argomenti mirati o vi si terranno simposi organizzati dalle industrie. Il congresso inizia mercoledì 16, con i corsi pregressuali, che sono quest'anno ben 10, ma diversamente orientati: nelle grandi aule avremo corsi monotematici su Endodonzia, Conservativa estetica, Pedodonzia, ecc.; nelle piccole aule si svolgeranno corsi estremamente pratici che trattano argomenti che sono stati oggetto di precise richieste del pubblico odontoiatrico.

Vi ricordo di pre-iscrivervi rapidamente, perché si tratta di corsi a numero chiuso, e con accreditamento ECM. Sarà quindi necessario prenotarsi in tempo per poter essere sicuri di potervi partecipare. Come sempre vi saranno le aule dedicate ad Odontotecnici,

Igienisti e Assistenti Dentali. I primi saranno in Aula D per tutta la giornata di venerdì; sabato mattina sarà la volta degli Igienisti in aula C e degli Assistenti Dentali il aula W1. Il sabato 19 mattina verranno premiati in Aula Magna i vincitori della sessione Poster, che si presenta anche quest'anno ricca (537 Posters). La premiazione dei Posters sarà seguita, come sempre, dalla Tavola Rotonda sulla "Formazione e Ricerca", con la partecipazione di rappresentanti del Collegio dei Docenti, dell'Industria, dei Liberi Professionisti, degli Igienisti e degli Odontotecnici, per lasciare poi il posto alle assemblee del Collegio. Le assemblee dell'OCI e dell'ADI avranno luogo il venerdì pomeriggio in Aula C.

Insomma quello che vi proponiamo è un congresso nuovo e forse particolarmente interessante, vi aspettiamo quindi numerosi dal 16 al 19 aprile 2008 al Palazzo dei Congressi Roma EUR, dove i Comitati, Organizzatore e Scientifico, saranno a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

## 6 Domande al Prof. Guido Goracci, Presidente del Comitato Organizzatore e Scientifico del XV Congresso del Collegio dei Docenti in Odontoiatria

*Che cosa c'è di cambiato in questa edizione del Congresso rispetto a quelle degli anni precedenti?*

Tutto! È un Congresso totalmente rinnovato: siamo passati da un Congresso nel quale le sale erano affidate a una o più Società scientifiche, ad un Congresso impostato su argomenti predeterminati ed affidati ad uno o più Coordinatori che hanno scelto i conferenzieri tra Membri delle Società, Professori universitari italiani e stranieri e Liberi professionisti. È stato anche diminuito il numero di Aule impegnate in modo da concentrare l'interesse sui temi scelti.

*Come mai è stato fatto un cambiamento così radicale?*

Perché il Congresso negli ultimi anni era andato impoverendosi di contenuti: probabilmente a causa dell'attuale congiuntura e quindi delle diminuite possibilità economiche degli sponsor, le Società

tendevano a riservare il meglio per i loro Congressi Nazionali o Regionali, portando al nostro Congresso un programma che risultava essere una ripetizione in formato ridotto dei loro precedenti incontri, per di più con meno oratori e pochissimi stranieri.

*Come sono stati scelti gli argomenti dell'edizione di quest'anno?*

È stata data la precedenza a due grandi Temi: "Il Carcinoma Orale" e l'"Implantologia". Il primo perché, come tutti ben sanno, riguarda un tumore maligno che statisticamente ha conservato tutta la sua potenziale malignità, a causa di diagnosi spesso tardive, dovute forse ad una scarsa conoscenza dell'aspetto delle lesioni pre-cancerose o semplicemente per la scarsa tendenza ad eseguire delle visite stomatologiche complete, limitandosi spesso l'azione dell'Odontoiatra alla terapia degli elementi dentari senza un vero interesse allo stato del resto della

cavità buccale. Abbiamo voluto dare quindi il posto d'onore a questo tema, che verrà trattato compiutamente, dalla diagnosi alla terapia, da illustri Patologi e Chirurghi, italiani e stranieri. Il secondo tema, richiesto da tutti, concerne l'implantologia che oggi rappresenta il settore trainante della nostra disciplina.

*Ma vengono trattati anche altri argomenti, o solo questi due?*

Il nostro è un Congresso completo e non poteva limitarsi solo a quei due temi, per importanti che fossero. Verranno trattati molti altri argomenti: avremo "Lo stato dell'arte in Conservativa ed in Endodonzia", una giornata dedicata all'Ortodonzia, un'altra alla Pedodonzia, un "Laser Day", poi ancora una giornata per gli Odontotecnici ed una per Igienisti ed Assistenti Dentali; ci saranno ancora delle Aulettes dove si terranno dei Workshop, richiesti da Società o da Industrie e poi dei Simposi.

Ci sarà l'imbarazzo della scelta; abbiamo effettuato una selezione, ma non siamo al piatto unico.

*I Posters avranno la stessa importanza degli anni precedenti?*

Altroché! Quest'anno sono stati accettati ben 537 Posters, cifra da fare invidia ad ogni grande Congresso, e pensate che non ci sono Concorsi in vista, che in genere stimolano i ricercatori più di ogni altra cosa. Avremo una novità, in quanto i posters verranno visionati il giovedì 17 ed i vincitori di ogni settore disciplinare avranno la possibilità di esporre i risultati della loro ricerca in un'Aula il venerdì pomeriggio; si potrà in tal modo nominare un vincitore assoluto che riceverà un premio di € 1.000.

*Quindi è secondo Lei un Congresso da non perdere.*

Che vi debbo dire! Se vogliamo entrare in competizione con un bel weekend da passare al mare, magari in barca, o in montagna, o più semplicemente a bigheonare per i bei musei di cui Roma è piena, è una partita persa. Se ci rivolgiamo a quello che oggi è il grosso mondo dell'Odontoiatria con tutti i suoi vari tipi di operatori e parliamo a gente che ama perfezionarsi e rimanere al passo dei tempi, penso proprio che non venire al Congresso voglia dire perdere una grossa occasione di aggiornarsi.

## **SEDE DEL CONGRESSO**

Palazzo dei Congressi  
Roma EUR - Piazza Kennedy  
Tel 06.54252710 - Fax 06.54252800

## **PRESIDENTE DEL CONGRESSO**

Giovanni DOLCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

*Presidente:* Guido GORACCI  
Matteo D'ANGELO  
Aletta DE STEFANO DORIGO  
Giampietro FARRONATO  
Romano GRANDINI  
Roberto MARTINA  
Giorgio NIDOLI  
Giulio PRETI

## **COMITATO ORGANIZZATORE**

*Presidente:* Guido GORACCI  
Ersilia BARBATO  
Alberto BARLATTANI  
Giancarlo CAMPANELLA  
Mario CAPOGRECO  
Massimo DE LUCA  
Roberto GATTO

Vito Antonio MALAGNINO  
Caterina MALAGOLA  
Giuseppe MARZO  
Livia OTTOLENGHI  
Sandro PELO  
Antonella POLIMENI  
Maurizio PROCACCINI  
Manlio QUARANTA  
Maurizio RIPARI  
Luca TESTARELLI  
Pietro VETTESE

## **SEGRETERIA CONGRESSO E MOSTRA**

PRO ODONTO CONGRESS SRL  
Via Monte delle Gioie 24/29 - 00199 ROMA  
Tel. 06.86211131 - Fax 06.86212026  
Email [proodegs@tin.it](mailto:proodegs@tin.it)  
Anna Rosa GALLUSI

## **RAPPORTI CON L'INDUSTRIA**

Arturo CHIURAZZI - Tel. 335.6041736

## **UFFICIO STAMPA**

B&C - XPERIENCE SRL  
Paola UVINI - Tel. 348.2806942  
Luca LEVRINI - Tel. 031.790141

## **II ORTHODONTIC CUP COLLEGIO DEI DOCENTI**

**Roma 16 aprile 2008 - Fioranello Golf Club**



*Con il patrocinio  
della Federazione  
Italiana Golf*

Per Informazioni ed iscrizioni:

Prof. C. Chimenti - M. Bucceri  
[max.bucceri@libero.it](mailto:max.bucceri@libero.it) - 349.5084151

## **I COPPA COLLEGIO DEI DOCENTI**



**Roma  
Tennis Club EUR**

*Con il patrocinio  
A.M.T.I.*

Per Informazioni ed iscrizioni:

Dr. T. di Carlo  
[dicarlotiziano@tiscali.it](mailto:dicarlotiziano@tiscali.it) - 338.3606769

**INFODENT**

SPECIALE UNIVERSITÀ

**Informare oggi i professionisti di domani**

[www.infodentuniversita.it](http://www.infodentuniversita.it) - [www.infodent.it](http://www.infodent.it)

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## ► Sbiancanti professionali

Denominazione del prodotto	<b>MENTADENT XTRA WHITE 16 E 20%</b>	<b>OPAESCENCE BOOST</b>	<b>OPAESCENCE ENDO</b>	<b>POLA OFFICE</b>	<b>POLA OFFICE PLUS</b>	<b>SNOW 35</b> (A)	<b>THE SMILE COMPLETE BLEACHING SYSTEM</b>
Produttore	MC Italia srl	Ultradent Products Inc	Ultradent Products Inc	SDI Dental Limited	SDI Dental Limited	Sweden&Martina spa	LAS srl Unica Group
Agente chimico sbiancante	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Perossido di idrogeno 38%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 37,5%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno trasparente e rosso 5-35%, perossido di carbamide 10-16-22-35%
PH	8 ± 10%	7	7	•	7	•	6,5 ± 6%
Acceleratore chimico	Idrossido di sodio	Si	•	•	•	•	•
Attivazione con energia luminosa	Si lampada Mentadent Xtra White a led	Non necessaria	No	Si, qualsiasi lampada	No	Si, cromoforo fotoattivabile studiato per laser ma funzionale anche con lampade al plasma e led	Si, lampade LED, laser odontoiatriche
Desensibilizzante abbinato	Si, incluso nitrato di potassio	Si, nitrato di potassio e fluoruro di sodio	No	Si, nitrato di potassio	Si, nitrato di potassio	Si, incluso nitrato di potassio	Si, The Smile Sensident nitrato di potassio 20%
Altri componenti	Glicerina	Acqua > 20%	No	•	•	Diga liquida fotopolimerizzabile, cannule e aghi metallici per la miscelazione	Stick vitamina E per l'idratazione delle labbra
Protezione gengivale	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Confezionamento	2 siringhe da 4 ml cad	4 sir. x 1,2 ml + accessori, 2 sir. x 1,2 ml, 20 sir. x 1,2 ml, 4 sir. x 0,5 ml + accessori	2 siringhe x 1,2 ml	6 sir. x 2 ml + 6 polveri x 0,3 g	3x2,8 g automiscelanti	4 sir. di gel da 2,5 ml, 4 sir. di diga fotopolimerizzabile	2 siringhe da 2,5 ml di gel, 1 siringa di diga 3 cc, 5 vials da 0,5 ml di desensibilizzante, 5 applicatori ultrabrush, 3 stick vitamina E
Durata della seduta (min)	10	15-45	•	30	24	•	15-20
N° di sedute	1	1	1	1	1	•	1
Trattamento domiciliare abbinato	Si	Si discrezionale	Si discrezionale	Si	Si	Si	Si
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 165,00 (4x1,2 ml) Euro 79,00 (2x1,2 ml)	Euro 69,90	Euro 115,22	Euro 129,19	Non fornito	Euro 97,21

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

### ► Sbiancanti professionali

Denominazione del prodotto	VIVASTYLE 30%	WHITE ACCELERATOR	WHITESMILE POWER BLEACHING XTRA 38%	WSMILE 35%	YOTUEL CARBAMIDE PEROXIDE 30%	YOTUEL SPECIAL	ZOOM 2 TWIN PACK
Produttore	Ivoclar Vivadent	LAS srl	WHITESmile GmbH	Dental World srl	Biocosmetics Laboratoires	Molteni Dental	Discus Dental
Agente chimico sbiancante	Perossido di carbamide 30%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 38%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di carbamide 30%	Perossido di idrogeno 35%	Perossido di idrogeno 25%
PH	6,6	6,5 ± 10%	Neutro	9 ± 10	Neutro	> 8	8
Acceleratore chimico	•	•	Si, nitrato di potassio	•	•	•	•
Attivazione con energia luminosa	No	Si, lampada a led	Si, lampada Kroma WS 25 LED	Si, lampada BL12	Si, led, laser (non necessaria)	Si, led, laser (non necessaria)	Si, lampada ad arco corto
Desensibilizzante abbinato	Si Vivasens (consigliato)	Si, nitrato di potassio 20%	Si After Bleaching Mousse 3 ml	Si nitrato di potassio	Si, incluso nitrato di potassio	Si, incluso nitrato di potassio	Si nitrato di potassio
Altri componenti	Glicolopropilene, acidi policarbossilici tampone, olio di menta, pirofosfato di sodio	•	Gengiva Protector siringa 3 g e scala colori VITA	Additivi q.b. 100%	Ac. fosforico, EDTA, carbossimetilcellulosa, glicerina	Ac. tartarico, EDTA, carbossimetilcellulosa, idrossido di sodio, glicerina	Glucomato di ferro
Protezione gengivale	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Confezionamento	1 siringa da 3 ml, 2 cappucci in plastica per la chiusura della siringa, accessori	2x2,5 ml cad di gel al 35%, 1x3,5 gr diga liquida, 5 flaconi di desensibilizzante da 0,5 ml	1 siringa da 2,5 ml, 4 siringhe da 2,5 ml	3 siringhe da 2,5 ml cad	4 siringhe di gel da 2,5 ml, 8 puntali, 1 portamascherina, 2 fogli per termoformatrice, 1 guida colore, 1 dentifricio	4 siringhe di gel da 2,5 ml, 2 siringhe di diga fluida da 3,5 g, puntali e 1 confezione di dentifricio	2 siringhe da 4,6 g
Durata della seduta (min)	20-30	20	10-15	10	20	•	60
N° di sedute	1	1	2/3	1	Max 3	Max 3	1
Trattamento domiciliare abbinato	Si	No	Si	No	Si	Si	No
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 99,00	Euro 62,70 (1 sir) Euro 176,00 (4 sir)	Euro 80,00	Non fornito	Non fornito	Euro 220,00

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

<b>► Sbiancanti domiciliari</b>					
Denominazione del prodotto	<b>AZ WHITESTRIPS</b>	<b>BY GEL WHITENING</b>	<b>BY WHITE 16%</b>	<b>DAY WHITE</b>	<b>ENA WHITE LIGHT</b>
Produttore	Procter & Gamble	By Dental srl	By Dental srl	Discus Dental	Micerium spa
Agente chimico sbiancante	Perossido di idrogeno 6%	Perossido di carbamide 18%	Perossido di carbamide 16%	Perossido di idrogeno 7,5%	Perossido di idrogeno 6%
PH	•	5	5	•	7,3
Acceleratore chimico	•	No	No	•	•
Desensibilizzante abbinato	No	Si, nitrato di potassio	Si, nitrato di potassio	Si, nitrato di potassio, fluoro	Si, Ena White gel desensibilizzante
Altri componenti	•	•	•	Fosfato di calcio amorfo (ACP)	Fluoro e nitrato di potassio
Protezione gengivale	No	No	No	No	Si
Confezionamento	56 strisce, 28 per i denti inferiori e 28 per i superiori	1 flacone da 12 ml con pennello inserito nel tappo	4 siringhe monocomponenti da 3 cc l'una, box porta mascherina, 2 fogli per mascherina	6 siringhe da 2,6 g	Kit 4 siringhe da 3 ml
Durata applicazioni (min)	30, 2 volte al giorno	30	30	60	6-8 ore
N° di applicazioni	14	15	2 al gg	9	10 gg
Prezzo di listino*	Euro 50,00	Euro 12,50 (catalogo Simit Dental 2008)	Euro 45,10 (catalogo Simit Dental 2008)	Euro 61,99	Euro 39,90 kit
Denominazione del prodotto	<b>KIT SBIANCAMENTO DOMICILIARE</b>	<b>MENTADENT XTRA WHITE PLUS 6</b>	<b>NITE WHITE</b>	<b>OPALESCENCE PF</b>	<b>OPALESCENCE TRESWHITE SUPREME</b>
Produttore	Quick White	MC Italia srl	Discus Dental	Ultradent Products Inc	Ultradent Products Inc
Agente chimico sbiancante	Perossido di idrogeno 6%	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Perossido di carbamide 10-16-22%	Perossido di carbamide 10-15-20-35%	Perossido di idrogeno 7,9% e carbamide al 7,5%
PH	5,5-5,8	5 ± 10%	•	6,5	6,6
Acceleratore chimico	•	•	•	•	No
Desensibilizzante abbinato	No	Si, incluso nitrato di potassio	Si nitrato di potassio, fluoro	Si, nitrato di potassio 3% e ioni fluoruro, 0,11%	Si, potassio e fluoro
Altri componenti	2 tray termoformabili	•	Fosfato di calcio amorfo (ACP)	Acqua, 20% del volume totale	Acqua
Protezione gengivale	No	No	No	Non necessaria	Non necessaria
Confezionamento	3	Barattolo da 10 ml	6 siringhe da 2,6 g	8 sir. x 1,2 ml cad, 2 fogli sofray, 1 blockout + portatray + sc. colori + dentifricio	10 blisters ciascuno con 1 tray per arc. superiore ed 1 tray per arc. inferiore
Durata applicazioni (min)	20-40	10	120	Da 8 ore a 30 min in base alla % di Carbamide	30-60
N° di applicazioni	6	2 al giorno	18	5-8	5-10
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 53,58	Euro 59,80	Euro 59,80

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Sbiancanti domiciliari

Denominazione del prodotto	<b>PAINT ON</b> (A)	<b>PERFECTA BRAVO'</b>	<b>PERFECTA REV!</b>	<b>PERFECTA TRIO</b>	<b>POLA DAY</b>
Produttore	DID Dental Instrument Design srl	Premier Dental Product Company	Premier Dental Product Company	Premier Dental Product Company	SDI Dental Limited
Agente chimico sbiancante	Perossido di carbamide 18%	Perossido di idrogeno 9%	Perossido di idrogeno 14%	Perossido di carbamide 11-13-16%	Perossido di idrogeno 3-7,5-9,5%
PH	8	•	•	•	Neutro
Acceleratore chimico	Idrossido di sodio	•	•	•	•
Desensibilizzante abbinato	No	No	No	No	Si nitrato di potassio
Altri componenti	•	Su base acquosa	Su base acquosa	Su base glicolica per minimizzare la disidratazione e la sensibilità	Acqua
Protezione gengivale	No	No	No	No	No
Confezionamento	•	4 siringhe da 3 cc cad	2 siringhe da 3 cc cad + 1 flacone da 118 ml di collutorio Rev! Finishing Rinse	6 siringhe da 3 cc cad, 2 all'11%, 2 al 13% e 2 al 16%	10 x1,2 ml, 4x1,2 ml
Durata applicazioni (min)	30	30 al giorno per 2 settimane	15 al giorno per 2 settimane	60 al giorno per 3 settimane	30
N° di applicazioni	4/8	•	•	•	7 gg ca
Prezzo di listino*	Euro 30,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 25,98 (4 siringhe) Euro 48,57 1(10 sir.+acc.)
Denominazione del prodotto	<b>POLA NIGHT</b>	<b>SNOW HOME</b> (A)	<b>VIVASTYLE® 10%-16%</b>	<b>WHITESMILE HOME BLEACHING 16-22-35%</b>	<b>YOTUEL PATIENT</b>
Produttore	SDI Dental Limited	Sweden&Martina spa	Ivoclar Vivadent	WHITESmile GmbH	Biocosmetics Laboratoires
Agente chimico sbiancante	Perossido di carbamide 10-16-22%	Perossido di carbamide	Perossido di carbamide 10-16%	Perossido di carbamide 16-22-35%	Perossido di carbamide 10-16%
PH	Neutro	•	6	Neutro	Neutro
Acceleratore chimico	•	•	•	Si nitrato di potassio	•
Desensibilizzante abbinato	Si, nitrato di potassio	•	Si, Vivasens (consigliato)	Si, after bleaching mousse 3 ml	Si nitrato di potassio
Altri componenti	Acqua	•	Glicerina, acido policarbossilico, olio di menta	Fogli termoplastici per mascherina personalizzata	Ac. fosforico, EDTA, carbosimetilcellulosa, glicerina
Protezione gengivale	No	Si	No	Si	Non necessaria
Confezionamento	10 x1,2 ml, 4x1,2 ml	4 siringhe da 3 cc di gel sbiancante, 2 fogli per termoformatrice (mascherine personalizzate)	4 siringhe 3 ml, 2 fogli termoplastici, 1 portamascherina, valigetta, accessori	4 siringhe da 3 ml	4 siringhe di gel da 3 ml, puntali 1 portamascherina, 2 fogli per termoformatrice, 1 guida colore e 1 dentifricio
Durata applicazioni (min)	30	•	60 per 10-12 gg	2/3 ore (16%) - 45 (22%) 30/60 (35%)	60
N° di applicazioni	7 gg ca	•	10-12 Max	8 (16 e 35%) - 4/8 (22%)	1/2 al giorno
Prezzo di listino*	Euro 25,98 (4 siringhe) Euro 48,57 (10 sir.+acc.)	Non fornito	Non fornito	Euro 59,80 (16%) 61,50 (22%) 72,00 (35%)	Non fornito

## ❶ Snow



Snow è una linea di sbiancanti, messa a punto dal centro di ricerca Sweden & Martina, che si basa sul principio del perossido di carbamide/perossido di

idrogeno e che può essere utilizzata nello sbiancamento di denti con discromie. Con Snow possono essere sbiancati un singolo elemento o più elementi contemporaneamente, affetti da discromie o devitalizzati. La linea è composta da Snow 35, sistema

professionale a base di perossido di idrogeno al 35% e da Snow Home, sistema a uso domiciliare con perossido di carbamide al 16%. Il gel sbiancante Snow 35 è stato studiato appositamente per essere utilizzabile in combinazione con laser a diodi (aventi lunghezza d'onda compresa tra 800 e 1.064 nanometri) o con metodo standard, con o senza foto attivazione. Il nitrato di potassio, agente desensibilizzante contenuto all'interno di Snow35, agisce sulle terminazioni nervose e le desensibilizza in prossimità del margine polpa-dentina, per un maggior comfort del paziente.

La presenza di acqua riduce, inoltre, la disidratazione dello smalto, contribuendo a ridurre la sensibilità dentinale. Sulla base del grado di discromia rilevata nel paziente è possibile suggerire la continuazione del trattamento da parte del paziente con il sistema domiciliare Snow Home.

**Per informazioni:**  
**Sweden & Martina S.p.A.**  
**Via Veneto, 10**  
**35020 Due Carrare (PD)**  
**Tel. 800.010789**  
**info@sweden-martina.it**  
**www.sweden-martina.it**

## ❷ Aladdin 38 e Paint-on: un'azione totale per uno sbiancamento ottimale

La perdita del colore naturale dei denti è un fenomeno comune, dovuto al deposito e all'aggregazione di particelle microscopiche all'interno della struttura dello smalto, che vanno ad impedire una corretta rifrazione della luce nel dente e danno come risultato il classico aspetto "scuro". Il perossido di idrogeno, alla base del sistema professionale Aladdin 38, determina la reversibilità di tale processo. Il perossido di idrogeno, infatti, rilascia ossigeno, che si insinua nella struttura porosa dello smalto fino alla dentina e scompone queste complesse molecole di pigmento, frazionandole e quindi riducendole in particelle più piccole, incolori, e consenten-

do pertanto una diversa riflessione della luce. Il risultato è l'aumento del bianco, che è il colore naturale del dente. Le siringhe che fanno parte del sistema Aladdin 38 sono costituite di due camere di differente capienza. La separazione che si ottiene tra additivi e attivatori dal principio attivo, consente di utilizzare una quantità maggiore e più concentrata di quest'ultimo. Unendo poi l'utilizzo di una apposita lampada sbiancante, si ha l'ulteriore vantaggio di concentrare gli effetti in un tempo minore, con un estremo sollievo del paziente. Il sistema è completato da Paint-on, gel al 18% di perossido di carbamide, studiato per mantere e pro-



lungare nel tempo l'effetto sbiancante dell'Aladdin 38, attraverso un trattamento domiciliare, che quindi il paziente applica direttamente sul dente a casa propria, grazie all'apposito pennellino incorporato nel tappo del flacone, oppure utilizzando una mascherina in resina. Nessuno di questi prodotti produce azione abrasiva.

**Per informazioni:**  
**DID Dental Instrument**  
**Design s.r.l.**  
**Via dell'Industria, 41**  
**33028 Tolmezzo (UD)**  
**Tel. 0433.466459**  
**Fax 0433.467160**  
**info@did-dental.it**

## ❸ Ena White nuova linea di sbiancamento: facile, sicuro, veloce



**Ena White Power** è un gel a base di perossido d'idrogeno al 35% per lo sbiancamento professionale rapido. Con Ena White Power i pazienti possono ritrovare un sorriso più bianco e brillante già dalla prima seduta. Si isola il campo con la protezione gengivale in pasta fotopolimerizzabile **Ena**

**Dam**, e si applica il gel Ena White Power lasciandolo in posa 10 minuti. Non è necessario utilizzare alcun tipo di lampada, e il trattamento si può ripetere fino a tre volte. La formula al pH neutro 7.3 è arricchita con fluoro e nitrato di potassio per ridurre la sensibilità e proteggere lo smalto naturale ed è

disponibile anche un gel desensibilizzante **Ena White Desensitizer** da applicare prima e/o dopo il trattamento. Ena White Power è confezionato in una siringa bicomponente che consente di attivare solo la quantità necessaria ed evitare gli sprechi. Il paziente può continuare il trattamento con un kit domiciliare **Ena White Light** perossido d'idrogeno al 6% da utilizzare con le apposite mascherine. Esiste anche una concentrazione intermedia **Ena**

**White Regular** perossido d'idrogeno al 12% per lo sbiancamento di denti non vitali con tecnica "walking bleaching" o per denti vitali sensibili.

**Per informazioni:**  
**Micerium spa**  
**Via Marconi, 83**  
**16030 Avegno (GE)**  
**Tel. 0185.7887870**  
**Fax 0185.7887970**  
**micerium@micerium.it**  
**www.micerium.it**



## SISTEMI CAD-CAM A CONFRONTO

# Progettazione e realizzazione High Tech



*I sistemi Cad/Cam applicati nell'ambito dell'odontotecnica consentono di ottenere elevati livelli di precisione e adattamento.*

La tecnologia Cad/Cam è stata sviluppata con l'obiettivo di progettare e realizzare strutture protesiche con caratteristiche di qualità costanti. Il Cad/Cam, infatti, permette di utilizzare procedure codificate, protocollate, controllabili e soprattutto ripetibili.

Le metodiche Cad/Cam applicate all'odontoiatria rappresentano l'avanguardia dal punto di vista tecnologico degli strumenti oggi a disposizione del clinico. Dai primi studi sull'applicazione del Cad/Cam in ambito dentale

sono passati più di venticinque anni e i progressi effettuati nelle moderne tecniche di scansione hanno portato questa tecnologia a un livello di applicabilità certamente importante. Le attuali tecnologie laser e ottiche, infatti, consentono di ottenere dati affidabili che, insieme ai software sempre più sofisticati, permettono di eseguire tracciati di fresatura precisi e fedeli.

La tecnologia Cad/Cam è riuscita ad affermarsi come valida alternativa alle metodiche dei restauri tradizionali in ce-

ramica, soprattutto con l'eliminazione dei metalli.

La lavorazione Cad/Cam garantisce prodotti di alta qualità utilizzando ossido di zirconio, bio-titanio, cromo cobalto e materiali sintetici. Tali materiali sono biologicamente compatibili e facilmente ceramizzabili.

L'ossido di zirconio, con le sue ottime caratteristiche di resistenza e biocompatibilità note nell'ambito delle protesi implantari, è il materiale di elezione per le strutture.

I sistemi in ceramica integrale attualmente presenti in commercio sono ritenuti idonei per corone e ponti per settori anteriori e per alcune applicazioni nei settori posteriori.

I restauri in ceramica integrale sono considerati inerti grazie alla loro stabilità orale e biocompatibilità. L'accumulo di placca su un restauro in ceramica integrale è paragonabile a quello che si verifica su un dente naturale. Inoltre, a differenza degli elementi con supporto in metallo, i restauri in ceramica integrale presentano una bassa conducibilità termica, eliminando così la sensibilità alle variazioni di temperatura.

I restauri protesici in ceramica integrale realizzati con la tecnologia Cad/Cam si distinguono anche per la loro precisione di adattamento, un fattore determinante per il successo funzionale ed estetico.

Per quanto riguarda la fase operativa vera e propria, l'operatore progetta e modella al computer la forma della protesi che verrà realizzata da macchine guidate dal computer stesso. Attraverso l'uso di uno scanner 3D, si effettua una lettura del modello del moncone naturale ricavato dall'impronta fornita dall'odontoiatra o di abutment implantari. Effettuata la lettura,

il software del computer elabora i dati e li invia alla macchina utensile Cam che scolpisce dal blocco grezzo di materiale scelto per la ricostruzione protesica la cappetta o il ponte. terminate le lavorazioni Cad/Cam, si procede alla consegna della struttura per la prova sul paziente e la presa del colore. Il tutto poi viene rimandato nel laboratorio odontotecnico per il completamento con la ceramica.

Le tecniche di produzione Cad/Cam permettono di produrre strutture in ceramica integrale per corone e ponti per i settori anteriori e posteriori. Il processo automatizzato garantisce risultati di elevata qualità - costante e controllata - ed è concepito per avere la massima flessibilità operativa.

Le strutture realizzate offrono una base altamente resistente che, in abbinamento a una ceramica di copertura, si traducono in restauri protesici funzionali ed estetici.

L'elevata resistenza e l'aspetto estetico naturale della struttura comportano la rimozione di minori quantità di struttura dentale durante la preparazione, consentendo così l'applicazione delle tradizionali tecniche di cementazione.

I sistemi Cad/Cam oggi disponibili per l'odontoiatria sono numerosi, alcuni dei quali risultano particolarmente utili in termini di semplicità d'uso e soprattutto di accuratezza dei risultati.

In linea generale, la procedura prevede i passaggi di scansione, progettazione, fresatura, sinterizzazione e rivestimento, con una diversificazione commerciale proposta dalle aziende produttrici che varia dalla gestione completa di tutto il processo da parte del laboratorio, fino a quella che prevede di affidare tutto il processo a centri specializzati.



## CAD-CAM

Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing è il significato dell'acronimo Cad/Cam, indicando che le fasi di progettazione e produzione sono assistite dal computer.

I primi segni di vita di questa tecnologia che tanto ha influito sulle procedure di produzione industriale risalgono all'inizio degli anni Sessanta, con la presentazione della prima interfaccia grafica che si avvaleva di una tavoletta e una penna luminosa.

Da quel momento, il passaggio al settore dentale richiese circa una decina d'anni. Infatti, l'idea di utilizzare le tecniche CAD/CAM per la realizzazione di restauri dentali fu concepita da François Duret negli anni Settanta.

Nei dieci anni successivi, l'approfondimento di questa tecnologia e della sua applicazione in ambito dentale portò alla realizzazione dei primi sistemi dedicati.

Il primo in assoluto fu il Cerec®, ideato da Mörmann e Brandestini presso l'Università di Zurigo nel 1981. Quattro anni più tardi, sempre nella stessa Università, venne prodotto e cementato il primo intarsio eseguito con questo apparecchio.

Parallelamente, anche in Svezia si procedeva con la messa a punto di un sistema CAD/CAM: nel 1983, grazie agli studi di due ricercatori svedesi, venne realizzata la prima corona in titanio.

Negli anni si è assistito a una considerevole accelerazione nello sviluppo di altri sistemi CAD/CAM da laboratorio, come conseguenza del significativo miglioramento delle prestazioni sia dei computer sia dei software applicativi.

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Sistemi Cad Cam				
Denominazione del prodotto	ACTIVITY 101	CERCON SMART CERAMIC SYSTEM	CYRTINA	DW-5-140
Produttore	Smartoptics	Dentsply DeguDent	Oratio B.V.	Dental Wings
<b>CAD</b>				
Scanner	Ottico per scansione 3D	Cercon Eye	Cyrtina	A 5 assi a triang. laser
Lettura	Ottica	Ottica	Laser	Ottica
Precisione (µm)	± 20	<10	12	0,02
Tempo di lettura singolo elemento	<2 min	15 sec ca	1,5 min	<1 min
Campo di misura (mm)	100x30 dia	30x30x25 ca	Arcata completa	14x140x95
Software	CAD Eversa (non vincolante)	Cercon Art	Scan Manager CAD 21	CAD Dental Wings per modellare strutture protesiche
Piattaforma	Windows	•	Windows, Vista	Windows XP
Breve descrizione sistema	Fornisce un file STL aperto che non vincola a nessun particolare CAD o CAM	Scansione dei singoli monconi (fino a 16 elementi per arcata) e posizionamento per "referencing"	Realizzazione di ponti corone ed abutments in Zirconia e Poliuretaniche - non necessita di ulteriore lavorazione al bordo-direttamente ceramizzabile	Sistema scansione 5 assi integrato a software CAD
<b>CAM</b>				
Fresatrice	•	Cercon Brain	Cyrtina Milling Unit (11 macchine)	•
Numero di assi	•	3	5	•
Numero di giri (g/min)	•	11.000 - 20.000	35.000-60.000	•
Tempo di fresatura (min)	•	4-6	9	•
Materiali	•	Base (Oss. di zirconio semisinterizzato), Cast (resina calcinabile)	Zirconia biozyram, poliuretaniche	•
Indicazioni per l'applicazione	•	Strutture con lunghezza anatomica fino a 47 mm	Totale	•
<b>UNITÀ DI SINTERIZZAZIONE</b>				
Unità di sinterizzazione	•	Cercon Heat	Cyrtina Hoven	T66-T2
Temperatura max (°C)	•	1.350	1.500	120
Processo di sinterizzazione	•	Automatico (6 h e 3 min complessivi)	Automatico	Deposito di cera con testine di stampa, spessore minimo 0,012 mm
Assistenza	•	Diretta con tecnici specializzati della casa produttrice	Aggiornamenti assistenza e nuovi software gratuiti	Service dato direttamente dalla società CMF Marelli srl
Prezzo di listino*	Non Fornito	Euro 100.400,00 (Cercon Cad/Cam) Euro 20.400,00 sistema Cad Cercon Eye&Art	Euro 20.500,00	Non fornito

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Sistemi Cad Cam

Denominazione del prodotto	EASYSHAPE	ECHO <sup>(A)</sup>	INLAB SYSTEM
Produttore	CIMsystem srl	Sweden&Martina spa	Sirona Dental Systems
<b>CAD</b>			
Scanner	Open technologies, gestione .stl	ScanSystems dental scanner	InEos esterno
Lettura	Rifrazione di luce	Luce strutturata	Triangolazione ottica
Precisione (µm)	5	10	12-15
Tempo di lettura singolo elemento	<1 min	2 min	1 sec ad elemento
Campo di misura (mm)	200x200x100	2 piattini per un massimo di 14 elementi	80x80
Software	Eversa Neocad, CADental	Customer vision per la scansione. Customer Coach e Customer Design per la modellazione	inLab 3D
Piattaforma	Windows	Windows	Windows
Breve descrizione sistema	Sistema "aperto", nessuna criptatura file .stl, creazione cappetta/moncone, bracket, bite	Tre moduli: lo scanner ad alta precisione con PC e software dedicati per la scansione degli elementi dentali in laboratorio, il software intuitivo, la produzione industriale centralizzata con precisione micrometrica del manufatto sulla base della richiesta dell'operatore	Completo per la produzione in-house, servizio centralizzato infiniDent
<b>CAM</b>			
Fresatrice	Qualsiasi, sviluppo custom post	•	Milling Unit: inLab MC XL
Numero di assi	Fino a 5	5	4 (5° virtuale)
Numero di giri (g/min)	Dipende da cnc	•	40.000
Tempo di fresatura (min)	Dipende da cnc	•	6 inlay, 9 cappette
Materiali	Zirconio, titanio, cromo/cobalto	Bio titanio, zirconia e cromo cobalto	Ceramiche (zirconio, feldspatiche, infiltrazione) inhouse e metalli (Ti,CrCo) by infiniDent
Indicazioni per l'applicazione	Scheletrati, nesting cappette, sottosquadra cappette, abutment, bite	Ponti e corone in zirconia o cromo cobalto fino a 14 elementi, abutment personalizzati in biotitanio e zirconia	Cappette e ponti, corone anatomiche in ceramica, provvisori
<b>UNITÀ DI SINTERIZZAZIONE</b>			
Unità di sinterizzazione	Forno ceramico/zirconio	•	InFire-HTC
Temperatura max (°C)	Max 1.500	•	1.600
Processo di sinterizzazione	Automatico	Automatico	Doppia capacità di carico, programmi pre-impostati
Assistenza	Completa	Installazione seguita da corsi di scolarizzazione con aggiornamento software via remoto per nuove release	Tecnica autorizzata nazionale
Prezzo di listino*	Euro 45.000,00 ca	Non fornito	Da Euro 43.900,00 (inLab) Da 19.500,00 (inEos) 10.900,00 (inFire)

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

<b>► Sistemi Cad Cam</b>			
Denominazione del prodotto	<b>LASERDENTA</b>	<b>PROCERA</b> <sup>(A)</sup>	<b>SINERGIA</b>
Produttore	Laserdenta AG	Nobel Biocare	Nobil Metal spa
<b>CAD</b>			
Scanner	Aperto	Procera forte/piccolo	Dental 3D Scanner D - 250™ 3Shape A/S
Lettura	Laser a 5 assi	A contatto	Ottica (laser/luce)
Precisione (µm)	15-20	± 3	•
Tempo di lettura singolo elemento	1,5 min	1,5 min	45 sec ca
Campo di misura (mm)	10x10	45x90	80x90
Software	Laserdenta Cad opzione italiano	Procera cad Design	DentalDesigner™, ScanItRestoration™, DentalManager™ (3Shape A/S)
Piattaforma	XP	Windows	Windows
Breve descrizione sistema	Software dedicato con rifinitura mesh. Il Cad permette di usufruire di tutti i vantaggi di una modellazione anatomica	Realizza sottostrutture per denti naturali e impianti industrialmente	A seguito della scansione ottica dell'oggetto le telecamere digitali all'interno dello scanner acquisiscono delle immagini che vengono processate in automatico dal software in modelli 3D. Possono essere realizzate modellazioni virtuali che, salvate in formato STL, possono essere inviate a qualsiasi centro di produzione
<b>CAM</b>			
Fresatrice	Alpha	Industriale	Stampante prototipatrice InVision® DPXT 3-D Printer, 3D Systems
Numero di assi	3-5	5	5
Numero di giri (g/min)	50.000	•	•
Tempo di fresatura (min)	20	5-30	•
Materiali	Poliammide, zirconio, titanio	Allumina e zirconio densamente sinterizzati e titanio	Resina calcinabile
Indicazioni per l'applicazione	Ponti, corone e abutment	Corone, ponti, abutment, implant bridge, Maryland bridge	Inlays, onlays, corone, coping, barre, scheletrica
<b>UNITÀ DI SINTERIZZAZIONE</b>			
Unità di sinterizzazione	•	•	•
Temperatura max (°C)	•	1.640	•
Processo di sinterizzazione	•	Automatico e bifasico	•
Assistenza	•	Help desk dedicato e personale tecnico sul territorio	•
Prezzo di listino*	Euro 19.900,00 (scanner) Euro 35.000,00 (milling)	Euro 40.845,00 (piccolo) Euro 93.450,00 (forte)	Non fornito

Legenda: (A) Approfondimenti (€) In offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Sistemi Cad Cam

Denominazione del prodotto	<b>SISTEMA DTM ABACUS APERTO</b> (A)	<b>TIZIAN CAD-CAM</b>	<b>ZENO TEC SYSTEM 2100</b>
Produttore	Abacus Sistemi Cad Cam srl	Schuetz Dental-Group	Wieland Dental + Technik GmbH & Co Kg.
<b>CAD</b>			
Scanner	Luce strutturata	3D strisce luminose	3shape D250 aperto
Lettura	Ottica	Ottica	Laser/ottica HR
Precisione (µm)	0,08 mm	20	20
Tempo di lettura singolo elemento	1,5 min	2 min	45 sec ca
Campo di misura (mm)	65x65x20	100x30	•
Software	Unione automatica scansioni, uscita STL	Schuetz Dental esclusivo by Kernel-Industrie	Dentaldesigner
Piattaforma	Windows	Windows	Windows
Breve descrizione sistema	Sistema aperto, compatibile con tutti gli scanner, software e zirconia più diffusi	Semplice e veloce sistema di scansione, determinazione automatica del bordo di preparazione. Modellazione anatomica con riduzione millimetrica uniforme della struttura in automatico	Scanner aperto file STL corone e ponti fino a 16 un. wax up-antagonisti-telescopiche-pressover
<b>CAM</b>			
Fresatrice	AbaMill dental	Automatico, motore pneumatico Jaeger	Da banco a secco
Numero di assi	4	4	4
Numero di giri (g/min)	100.000	60.000	Fino a 100.000
Tempo di fresatura (min)	10-20	30-300	10-20
Materiali	Zirconio, calcinabili	Ossido di zirconio, resina calcinabile, resina per provvisori	Zeno ZR, ZR eco, pmma A3/B1, pmma cast (zeno AL, cera pross.)
Indicazioni per l'applicazione	Ponti, cappette, circolari, intarsi	Inlays, onlays, corone e ponti anatomici fino a 16 elementi	Ponti 16 elem. corone anatom., barre, telescop., provvisori, elem. calcinabili
<b>UNITÀ DI SINTERIZZAZIONE</b>			
Unità di sinterizzazione	•	Tizian forno 6 resistenze	Zeno Fire
Temperatura max (°C)	•	1.400	1.600
Processo di sinterizzazione	•	Automatico o manuale	Automatico preimpostato e programmabile
Assistenza	•	Software Assistent Telematic System	Telefonica multilingue
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 65.000,00	Euro 60.400,00

**AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE**

I dati pubblicati in questa sezione sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. I prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esautività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

**GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SUI SISTEMI CAD/CAM**

**Abacus Sistemi Cad Cam Srl**  
0523.590640 - [www.abacus.it](http://www.abacus.it)

**CIMsystem Srl**  
02.61866330 - [www.cimsystem.com](http://www.cimsystem.com)

**Dental Wings**  
[www.solid-scape.com](http://www.solid-scape.com) (Dati forniti da CMF Marelli srl - 02.6182401 - [www.cmf.it](http://www.cmf.it))

**Dentsply DeguDent**  
800.921107 - [www.cercon-smart-ceramics.com](http://www.cercon-smart-ceramics.com) / [www.dentsply.it](http://www.dentsply.it)

**Laserdenta AG**  
[www.laserdenta.com](http://www.laserdenta.com) (Importatore e distributore Italtor sas - 02.40915269 - [www.italor.com](http://www.italor.com))

**Nobel Biocare**  
039.68361 - [www.nobelbiocare.com](http://www.nobelbiocare.com)

**Nobil Metal spa**  
0141.933811 - [www.nobilmetal.it](http://www.nobilmetal.it)

**Oratio B.V.**  
[www.oratio.it](http://www.oratio.it)

**Schuetz Dental-Group**  
[www.schuetz-dental.de](http://www.schuetz-dental.de) (Dati forniti da Nuova Gerhò Dental Division Srl - 0471.933013 - [www.gerho.it](http://www.gerho.it))

**Sirona Dental Systems**  
045.8281811 - [www.sirona.it](http://www.sirona.it)

**Smartoptics** (Importatore e distributore Simed Srl - [www.simedonline.com](http://www.simedonline.com))

**Sweden&Martina SpA**  
049.9124300 - [www.sweden-martina.it](http://www.sweden-martina.it)

**Wieland Dental + Technik GmbH & Co Kg.**  
0331.701105  
[www.wieland-dental.de](http://www.wieland-dental.de)

## Il sistema Procera®



Procera® consente all'odontotecnico di creare tridimensionalmente il progetto che verrà inviato all'unità produttiva CAM di Stoccolma. Macchine a controllo numerico e processi industriali ad elevata tecnologia mettono a disposizione del team odontoiatra-

odontotecnico materiali unici per le loro caratteristiche chimico-fisiche come l'allumina, lo zirconio e il titanio. La gamma di lavorazioni eseguibili è ampia e comprende corone e ponti in allumina, faccette in allumina, corone e ponti in zirconio, Maryland Bridge in zirconio, abutment in titanio, abutment in zirconio e Procera Implant Bridge in titanio e zirconio.

Come ha affermato Matts Andersson, l'inventore che ha brevettato Procera® nel 1983, la filosofia Procera® consiste nello sfruttare le economie di scala per una produzione dentale individuale. L'obiettivo per il clinico è di riabilitare e soddisfare il paziente con soluzioni protesiche funzionali ed estetiche. La tecnologia CAD-CAM PROCERA® permette al team odontoiatra-odontotecnico di offrire al paziente soluzioni protesiche uniche per le loro combinazioni di: resistenza, precisione, biocompatibilità ed estetica. Il sistema Procera® realizza industrialmente sottostrutture personalizzate per protesi su denti naturali e impianti. Lo scanner Forte è in grado di rilevare per contatto la morfologia dei monconi in gesso, i wax-up degli abutment, le travate in resina per l'implant bridge e tutto ciò che è necessario per completare l'informazione CAD. Il software

odontotecnico materiali unici per le loro caratteristiche chimico-fisiche come l'allumina, lo zirconio e il titanio. La gamma di lavorazioni eseguibili è ampia e comprende corone e ponti in allumina, faccette in allumina, corone e ponti in zirconio, Maryland Bridge in zirconio, abutment in titanio, abutment in zirconio e Procera Implant Bridge in titanio e zirconio.

**Per informazioni:**  
**Nobel Biocare Italiana srl**  
**Centro Direzionale Colleoni**  
**Palazzo Orione 2**  
**Viale Colleoni, 15**  
**20041 Agrate Brianza (MI)**  
**Tel. 039.68361**  
**Fax. 039.6899474**  
**info.italy@**  
**nobelbiocare.com**  
**www.nobelbiocare.com/it**

## Echo: punto di incontro tra creatività e tecnologia

Sweden & Martina in collaborazione con il TNO (Centro di ricerca olandese per l'applicazione della ricerca scientifica) ha sviluppato Echo, il sistema CAD/CAM integrato per la produzione di elementi protesici individuali in biotitanio, ossido di zirconio e lega di cromo cobalto (cappette per corone, strutture a ponte a più componenti ed abutment personalizzati). Echo combina la creatività e la sensibilità del tecnico di laboratorio con la precisione di macchine software industriali per la massima soddisfazione del cliente finale. È stato sviluppato sulla base delle esperienze raccolte da importanti centri odontotecnici internazionali e nazionali per garantire a tutti gli utilizzatori la certezza di realizzare in tempi estremamente rapidi manufatti di qualità elevata e costante senza nessun bisogno di investire in macchine di produzione. Echo si sviluppa attraverso un semplice processo costituito da tre moduli: lo scanner con PC e software dedicati per la scansione degli elementi dentali in laboratorio (fino a 14 elementi), ultima frontiera di precisione e semplicità; il software per le personalizzazioni dell'operatore sulla base dei dati acquisiti, punto di incontro tra creatività e tecnologia; la produzione centralizzata con precisione micrometrica del manufatto sulla base della richiesta dell'operatore, come naturale evoluzione della tradi-



zionale tecnica di microfusione. La ceramica all'ossido di zirconio utilizzata dal sistema Echo permette di realizzare restauri naturali e biocompatibili superando i tradizionali limiti imposti dalla metodica metallo ceramica. La professionalità del customer service Sweden & Martina costituisce il valore aggiunto del sistema Echo per una garanzia di soddisfazione dell'operatore, che viene seguito dalla prime esperienze di prova alla spedizione del prodotto finito, che avviene in tempi rapidissimi.

**Per informazioni:**  
**Sweden & Martina S.p.A.**  
**Via Veneto, 10**  
**35020 Due Carrare (PD)**  
**Tel. 800.010789**  
**info@sweden-martina.it**  
**www.sweden-martina.it**

### Con Videothron i vostri pazienti vi vedranno con un occhio diverso

**VIDEOTHRON** è la Soluzione per rendere la comunicazione con i Pazienti più facile ed immediata già dalla sala d'attesa disponendo unicamente dell'alimentazione elettrica, senza la necessità di collegarsi a Personal Computer, lettori DVD, o addirittura società esterne via cavo telefonico.

**CARTA DEI SERVIZI:** è già disponibile il video "Carta dei Servizi dello Studio Dentistico" che è stato sviluppato con un'Agenzia di Comunicazione ponendo particolare cura ed attenzione nella scelta delle immagini, dei testi e dei filmati rivolti ai Pazienti (sterilizzazione, anatomia del dente, metodiche).

Il video viene personalizzato con le Vostre immagini (foto dei Professionisti/assistenti, ambienti, strumenti...) ed i Vostri testi (curriculum, metodiche applicate, servizi offerti dallo Studio...).

**VIDEOTHRON È L'UNICA SOLUZIONE VERAMENTE IN GRADO DI PROPORRE LA VOSTRA "CARTA DEI SERVIZI".**

Per maggiori informazioni:  
[www.videothron.it](http://www.videothron.it)  
[info@videothron.it](mailto:info@videothron.it)

Prodotto da:  
  
**Dolphin Computer**  
 TEL. 02-489.53.243

La soluzione per la Vostra sala d'attesa

## ① Sistema DTM Abacus



**ABACUS Sistemi CAD-CAM** ha ideato un **sistema aperto** per la produzione di semilavorati nei Laboratori Odontotecnici. Permette di eseguire lavori di restauro in tutti i settori dell'arcata dentaria con un risultato funzionale ed estetico perfetto e modulabile. Il **Sistema DTM Abacus** è composto da:

### SCANNER

Lo scanner ottico utilizza un fascio di luce strutturata, tecnologia più precisa (per oggetti di piccole dimensioni) rispetto a quella laser. Grazie al particolare sistema brevet-

tato di calibrazione della scansione tramite marker, questo scanner è attualmente il più accurato (8-10 micron) di quelli utilizzati in questo settore. Questo sistema di scansione è dotato di una interfaccia utente completamente automatizzata, di semplice utilizzo. Con questo scanner è possibile "copiare" dal dente singolo all'intera arcata, nonché ogni tipo di check-bite per la gestione degli antagonisti.

### MODELLAZIONE

Questi programmi di modellazione sono tra i più avanzati e versatili in campo odontotecnico. Consentono

la modellazione semplice e precisa di corone, ponti (anche dell'intera arcata), cappette ed elementi intermedi. Frutto dell'esperienza di migliaia di installazioni nel mondo,

permettono una grande precisione ed attenzione ai dettagli. Clay-Tools è uno straordinario manipolo 3D che consente all'utilizzatore di modellare con naturalezza, avvertendo sulla mano la retroattività della forza esercitata per scolpire il modello.

### FRESATRICE

Disponibili due modelli a 4 assi che rispondono alle diverse moli di lavoro che l'utente deve realizzare. Stesso grado di precisione, una ha il cambio utensile automatico ed elettromandrino da 100.000 giri/minuto con servomotori; l'altra, per piccoli

laboratori, ha elettromandrino da 40.000 giri/minuto e motori passo-passo. Manutenzione pressoché assente, grande semplicità di utilizzo e robustezza, contenimento dei prezzi sia di acquisto che di gestione. È possibile fresare singoli elementi, ponti ed intere arcate anche su cialde di zirconia di produttori diversi.

### SISTEMA APERTO

Ogni componente (scanner, modellazione, fresatrice, manipolo 3D) è in grado di scambiare dati con "il resto del mondo" tramite i formati standard. Ogni componente può essere quindi utilizzato ed inserito in qualsiasi altro sistema analogo.

**Per informazioni:**  
**Abacus sistemi cad cam Srl**  
**Via Colombo, 101**  
**29100 Piacenza (PC)**  
**Tel. 052.3590640**  
**Fax 052.3591474**  
**www.abacus.it**

Disponiamo di alcune zone libere  
per nuovi concessionari - rappresentanti

**qp dental**  
 Qualità e Tecnologia centrano la Convenienza

Lampada  
fotopolimerizzante  
con doppio puntale  
e doppia batteria  
da 277,00 Euro



Ablatore  
a cassetta  
da 243,00 Euro



Sbiancatore  
a bicarbonato  
a 328,00 Euro




Riuniti da 3.730,00  
a 6.965,00 Euro

**qp dental srl**

Tel. 049 8975989 Fax 049 8973278  
 Via Fermi 17/a 35030 Rubano (Pd) Italy

## MESODAMIANI: non più insuccessi in implantologia

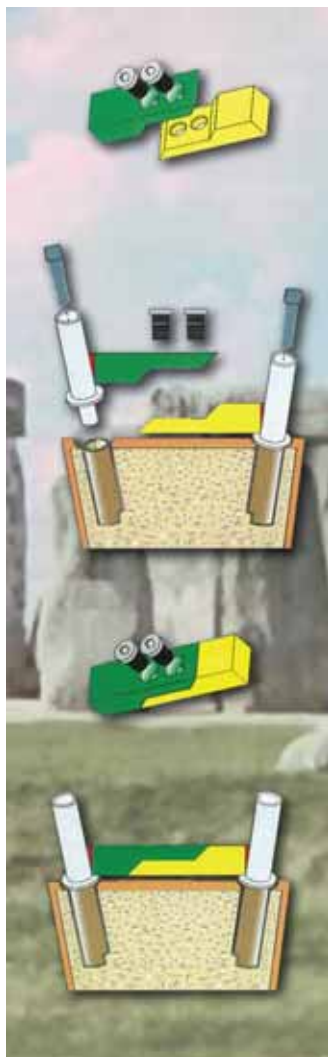

possibilità di costruire barre per protesi mobili e strutture per ricevere manufatti fissi.

La caratteristica principale di tale novità si può riassumere in due principali soluzioni:

- **la perfetta connessione meccanica fra impianti e monconi** per qualsiasi grado di disparallelismo, fino al punto che per raggiungere la massima precisione nelle clinicizzazioni multiple possiamo usare le ucla da sopra-fusione fornite dalle case costruttrici di impianti, solitamente usate nei mono-impianti;

- **l'eliminazione di fatto di tutte le tensioni fra impianti**, in quanto essendo il montaggio concepito come clinicizzazione di mono impianti, le due viti di congiunzione e stabilizzazione evitano ogni possibilità d'errore. Attraverso difficoltà di accoppiamento che si possono verificare, indicano chiaramente che ci sono delle imprecisioni; si effettuano le correzioni, e il manufatto è perfetto.

Ci si rende subito conto che risolti questi problemi si sono risolti tutti i problemi inerenti le clinicizzazioni multiple in implantologia. È disponibile gratuitamente materiale informativo e casi documentati su DVD. ■



1



2



3



4

- 1- Modello Master con calcinabili inseriti.
- 2- Modello Master montato con strutture "Mesodamiani".
- 3- Lavoro completato: si notino tutti gli esagoni perfettamente integri, non modificati.
- 4- Vista del lavoro finito.



1



2



3

- 1- Situazione di un caricamento immediato dopo aver tolto i provvisori.
- 2- Montaggio su modello master la mesostruttura con componentistica MESODAMIANI.
- 3- MONTAGGIO DELLA MESODAMIANI PASSIVATA ESEGUITA. In attesa di un diagnostico o di un definitivo.

Il sistema ideato, realizzato e prodotto da Giampaolo Damiani e commercializzato dalla DA.MA. srl si propone di risolvere definitivamente l'annoso problema inerente la clinicizzazione di due o più impianti. Il kit introdotto e tutta la sistematica danno la

**DA.MA srl**  
**Via Cerqueto, 18 - 63034**  
**Montalto delle Marche (AP)**  
**Tel. 0736.827088**  
**338.6644433**  
**mesodamiani@**  
**mesodamiani.com**  
**www.mesodamiani.com**

## AUTOCLAVI A VAPORE DA 7 LIT. A 20 LIT.



Baby

Autoclave completamente automatica, due cicli 121° e 134°, asciugatura automatica, carico acqua manuale con beaker, ciclo S, 7 lit.



Pretika B16 Ssd Card

Autoclave completamente automatica, undici cicli di sterilizzazione, cicli speciali, vacuum test, asciugatura supplementare, ciclo B frazionato, 16 lit.



Full Clave B20

Autoclave completamente automatica tre temperature, 105°, 121° e 134°, cicli speciali, vacuum test, asciugatura supplementare, ciclo B frazionato, stampante incorporata, 20 lit.



Matika New

Autoclave completamente automatica, due cicli 121° e 134°, asciugatura automatica, ciclo S, 16 lit.



Sealing Machine

Saldatrice termica per carta e plastica

**Agente Gaetano Neri**  
**Cell. 335.5266695**  
**E-mail: neriga@tiscalinet.it**

## ► Franchising odontoiatrico Implantomat

Il 2008 si apre con un nuovo importante progetto che Implantomat propone al settore odontoiatrico.

Di cosa si tratta?

Si tratta di un progetto di Franchising, studiato nei minimi particolari al fine di portare al successo, in pochissimo tempo, i centri affiliati al gruppo. Infatti l'affiliato non dovrà preoccuparsi più della ricerca continua di nuovi pazienti, in quanto chi decide di entrare in collaborazione con il gruppo Implantomat usufruisce di molti vantaggi, tra cui un'assistenza marketing all'avanguardia, con pubblicità sul sito internet aziendale completamente gratuita, inserimento dell'indirizzo e del numero telefonico del centro affiliato su depliant, pubblicità su quotidiani nazionali come Il Tempo. Tra l'altro gli affiliati hanno la possibilità di acquistare tutti i materiali di consumo ed attrezzature a prezzi sempre più convenienti.

Implantomat propone questo progetto di franchising come una vera e propria innovazione odontoiatrica. È semplicissimo poter aderire, è sufficiente scaricare il modello del contratto e rinviarlo tramite fax alla direzione commerciale (0766.541177). Non sono momentaneamente previsti costi di adesione né percentuali. È possibile, sempre tramite il sito [implantomat.it](http://implantomat.it), scaricare il modello per la richiesta di nuove aperture; l'azienda penserà alla ristrutturazione, all'allestimento, all'arredamento con costi fissi in base alla metratura del locale. L'azienda mette a disposizione anche un numero verde al quale i pazienti possono rivolgersi per richiedere maggiori informazioni, anche solo per sapere quale è il centro più vicino. ■

**Implantomat**  
[www.implantomat.it](http://www.implantomat.it)

## ► Fresatori modulari e rettifica di Zirconio



il quale permette all'odontotecnico di utilizzare il micromotore o la turbina come fosse una penna, in assoluta libertà di movimento e leggerezza. Inoltre i fresatori mostrano un design moderno e accattivante abbinato alla

Rimanendo fedele alla modularità e quindi alla possibilità di poter comporre il proprio fresatore con gli accessori desiderati, Mariotti&C presta una particolare attenzione anche alla rettifica dello zirconio. Le nuove linee di fresatori sono infatti predisposte, oltre al braccio con micromotore, anche per un secondo braccio pantografo con turbina e irrigazione. La caratteristica principale e più apprezzata dei fresatori Mariotti rimane sempre la sensibilità e la precisione del braccio pantografo,

grande praticità e all'alta qualità di queste macchine: il modo migliore per lavorare bene rimanendo al passo con i tempi e con le nuove tecnologie. La linea si compone di tre gamme storiche: Cucciolo, Paperino2000 e F18, disponibili nei colori rosso e grigio. ■

**Mariotti&C srl**  
**Via Seganti, 73**  
**47100 Forlì**  
**info@mariotti-italy.com**  
**www.mariotti-italy.com**

# CENTRO CORSI SMILE CENTER S.R.L.

## CORSI AVANZATI DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA ANNO 2008

### • CORSO TEORICO-PRATICO DI "IMPLANTOLOGIA"

Relatore: **Dr. Marco Cernicchi**

Il corso si svolgerà in 4 incontri di 1 giorno ognuno:

**1ª Sessione: 18/01/2008 - 15/02/2008 - 14/03/2008 - 18/04/2008**

**2ª Sessione: 13/06/2008 - 11/07/2008 - 26/09/2008 - 17/10/2008**

In fase di accreditamento

### • CORSO TEORICO-PRATICO SU "LE RECESSIONI GENGIVALI"

Relatore: **Dr. Marco Cernicchi**

Il corso si svolgerà in un'unica giornata: **23/05/2008**

In fase di accreditamento

### • CORSO TEORICO-PRATICO SUL "CARICO IMMEDIATO" PER MEDICI ED ODONTOTECNICI

Relatori: **Dr. Marco Cernicchi - Sig. Andrea Pedetta**

Il corso si svolgerà in un'unica giornata: **04/07/2008**

In fase di accreditamento

### • CORSO TEORICO-PRATICO SUL "GRANDE RIALZO DI SENO"

Relatore: **Dr. Marco Cernicchi**

Il corso si svolgerà in un'unica giornata: **16/05/2008**

In fase di accreditamento

### • CORSO ANNUALE DI PARODONTOLOGIA ANNO 2008/2009

Relatori: **Dr. Carlo Tinti e Dr. Stefano Parma Benfenati**

Il corso si svolgerà in 6 incontri di tre giorni ognuno

**Inizio corso: Dicembre 2008**

### • CORSO DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA AVANZATA

Relatori: **Dr. Carlo Tinti e Dr. Stefano Parma Benfenati**

Il corso si svolgerà in 2 incontri di 1 giorno Date da definire

### • GIORNATA DI CHIRURGIA

Si riserva a max n. 4 partecipanti la possibilità di assistere in diretta ad interventi di chirurgia e parodontologia nelle seguenti date:

**12/05/2008 - 14/07/2008**

**15/09/2008 - 10/11/2008**

**PER INFORMAZIONI E PROGRAMMI RIVOLGERSI A:**

**SMILE CENTER SRL**

VIA COLLEDORO, 37/41 - 00030 - COLLEFERRO (RM)

RESPONSABILE SIG.RA EMANUELA - TEL 069770581/2 FAX

E-MAIL: [SMILECENTER@MCLINK.IT](mailto:SMILECENTER@MCLINK.IT) SITO INTERNET: [WWW.SMILECENTER.IT](http://WWW.SMILECENTER.IT)



## ► i-FIX: l'innovativa linea implantare F.M.D.



Dalla lunga esperienza maturata da un team di esperti implantologi, in aggiunta al pluridecennale know-how tecnologico F.M.D., insieme alle sempre crescenti esigenze espresse dai professionisti, nasce i-FIX. L'innovativa linea implantare i-FIX è composta da impianti che coniugano caratteristiche e vantaggi già noti nell'implantologia con le più aggiornate e attuali conoscenze del settore. Tutti gli impianti della linea i-FIX sono sterilizzati a raggi gamma e hanno la superficie trattata con il sistema di sabbiatura e mordenatura S.A.S. (*sandblasted and acid-etched surface*) che garantisce l'ottimale interfaccia osso-impianto. Gli i-FIX sono impianti sommersi, cilindrici e conici, che hanno macromorfologia simile a quella delle altre fixtures prodotte dalla F.M.D. È possibile quindi usare gli stessi kit utilizzati per le altre linee implantari F.M.D. La filettatura degli impianti i-FIX, più marcata nella zona apicale, dà più grip alla fixture appena inserita e sulla zona coronale è presente una microfilettatura, utile per ridurre il riassorbimento osseo sotto carico. Gli impianti i-Fix si presentano sotto una veste rinnovata anche e soprattutto per quanto riguarda la filettatura. Per ottenere una migliore stabilità primaria sugli impianti cilindrici è stata adottata una spirale a "doppio principio", che permette alla fixture di bloccarsi nell'osso con maggiore efficacia e rapidità. Proprio la ricerca di queste ultime due caratteristiche ha portato alla scelta, sugli impianti a disegno conico, di una filettatura più "aggressiva", particolarmente adatta alle tecniche di carico immediato ove le condizioni biologiche lo permettano. La connessione protesica prevede internamente all'impianto un cono associato a un ottagonone. Il cono conferisce al moncone una

notevole stabilità, l'ottagonone lo rende antirotazionale e dà una posizione precisa sul modello di lavoro in gesso. Grazie a questa geometria interna è possibile utilizzare sia monconi con vite passante sia pieni. Tutti i monconi della linea i-FIX hanno una forma "a fungo" (*platform switch*) e la corona protesica chiude sul

moncone lontano dal livello osseo, riducendo il riassorbimento dell'osso stesso e mantenendo una buona anatomia gengivale. Il diametro della connessione protesica varia a seconda dei diametri implantari, che sono indicati con le sigle: F1, F2, F3, F3 wide.

I diametri disponibili sono:

- F1** Ø3.4 evo (conico)  
Ø3.4 cilindrico  
Ø3.8 cilindrico
- F2** Ø4.2 evo (conico)  
Ø4.8 evo (conico)  
Ø4.2 cilindrico  
Ø4.8 cilindrico
- F3** Ø4.8 evo (conico)  
Ø5.8 evo (conico)  
Ø5.2 cilindrico
- F3 wide** Ø5.8 evo (conico)  
Ø5.5 cilindrico

Per l'impianto cilindrico le lunghezze sono mm 8 - 10 - 12 - 14 - 16.

Per l'impianto evo (conico) le lunghezze sono mm 10 - 12 - 14 - 16.

L'inseritore già fornito con l'impianto è pick up (a strappo) e può essere usato anche come transfer per impronta. Gli impianti della linea i-FIX grazie alle loro caratteristiche sono indicati soprattutto nei siti ove sia particolarmente importante il fattore estetico e nel carico immediato, grazie alla notevole stabilità primaria e alla particolare connessione protesica. ■

**Falappa Medical  
Devices srl**  
**Via Barbaresco, 9**  
**00166 Roma**  
**Tel. 06.61521415**  
**Fax 06.6245123**  
**info@fmdsrl.com**  
**www.fmdsrl.com**



FALAPPA MEDICAL DEVICES



**FOR  
MODERN  
DENTISTS**



**WWW.FMDSRL.COM**

**FALAPPA MEDICAL DEVICES S.r.l**

**Via Barbaresco, 9 - 00166 Roma-Italy**

**Tel. +39 06 61521415 Fax +39 06 6245123**

## VIDEOTHRON : la Comunicazione in sala d'attesa



VIDEOTHRON è la soluzione per rendere la comunicazione con i pazienti più facile ed immediata già dalla sala d'attesa disponendo unicamente dell'alimentazione elettrica, senza la necessità di collegarsi a Personal Computer, lettori DVD, o addirittura società esterne via cavo telefonico. Di sicuro impatto estetico, raffinato nelle cornici e nei colori, Videothron è stato progettato in diversi formati, 17", 32" e 42" per integrarsi perfettamente in qualsiasi

ambiente e per "comunicare" in modo innovativo e dinamico. Videothron infatti è in grado di riprodurre i contenuti precaricati (carta dei servizi, testi, immagini, filmati ed animazioni), ma anche di trasformarsi in un punto d'intrattenimento dotato di TV per non perdere il particolare evento televisivo o i cartoni animati preferiti dai piccoli pazienti e con l'ulteriore opzione di collegare decoder, dvd, videoregistratore, Personal Computer. La grande opportunità di visualizzare filmati ed animazioni sviluppati da professionisti della comunicazione, come quelli che siamo in grado di offrire, ma anche fotografie e testi esportati semplicemente da programmi quali Microsoft PowerPoint, rendono Videothron uno strumento facilmente gestibile ed aggiornabile da qualsiasi utente, anche quotidiana-

mente. Il video "Carta dei Servizi dello Studio Dentistico" è stato sviluppato con un'Agenzia di Comunicazione, ponendo particolare cura ed attenzione nella scelta delle immagini, dei testi e dei filmati rivolti ai pazienti (sterilizzazione, anatomia del dente, metodiche) e viene personalizzato con le immagini ed i testi di ogni singolo Studio, permettendo quindi di evidenziare la propria professionalità e quella dei propri collaboratori, la modernità e l'efficienza delle apparecchiature, le metodiche applicate, la particolare attenzione posta dallo Staff alla sterilizzazione (aspetto spesso ignorato dai pazienti), mostrare esempi estetici e nuove applicazioni, educare all'igiene orale adulti e bambini con simpatiche sequenze animate, ricordare la particolarità dei servizi offerti dallo Studio (finanziamenti, pagamenti tramite Pos, invio sms come

promemoria degli appuntamenti, ...) sostituire tutte le comunicazioni cartacee attualmente appese in sala d'attesa (orari dello Studio, precauzioni in caso di gravidanza, mese della prevenzione dentale, ...) comunicando in modo veramente efficace tutto quello che si desidera far sapere ai propri pazienti. Videothron è quindi l'unica soluzione veramente in grado di proporre la "Carta dei Servizi" di ogni singolo Studio ed è facile da usare per chiunque: per avviarlo/spengerlo è sufficiente inserire e girare la chiave di accensione! ■

Luca Montoli

Dir. Marketing VIDEOTHRON

**Dolphin Computer**  
**Tel. 02.48953243 (r.a.)**  
**info@videothron.it**  
**www.videothron.it**

FOSHION ITALIA S.r.l.  
**YOUR partner**

riuniti odontoiatrici a partire da  
**€ 5.200** + Iva

fino a  
**5 anni**  
**di garanzia**



Autoclave Classe B 17 Litri  
 con stampante : € 1.990 + Iva

Autoclave Classe B 23 Litri  
 con stampante : € 2.590 + Iva

FOSHION ITALIA S.r.l.

Via degli Andosilla n.30  
 00165 - Roma  
 Tel: +39 06 66418141  
 Fax: +39 06 66411906  
 Email: info@foshion.it  
 Web: www.foshion.it

**FOSHION**

Qualità certificata

La Foshion garantisce a tutti i suoi partner un rigoroso rispetto delle norme internazionali attraverso il proprio sistema di qualità basato sulle più importanti certificazioni per i prodotti medicali.



# OFFERTE DALLE AZIENDE

## Le promozioni degli operatori commerciali

Una rubrica utile che evidenzia gli "affari" periodicamente proposti dagli operatori.



### CAMREX 191A

Telecamera intraorale.

**PREZZO TAGLIATO** <math>\approx</math> **EURO 1.080,00 + iva**

#### EUROCOMPRESS

Via Brunelleschi, 16-20 - 20090 Trezzano S/N  
Tel. 02.4454656 - Fax 02.4450027  
e-mail: eurocompress@eurocompress.it -  
www.eurocompress.it



### NUOVO CUCCIULO CC3

Fresatore nuova serie CC3, completo di micromotore 30.000 rpm, mandrino posataccchi, aria, luce e base porta-modelli.

**PREZZO TAGLIATO** <math>\approx</math> **EURO 1.814,00 + iva**

#### MARIOTTI&C

Via Seganti 73, 47100 Forlì  
Tel 0543.474105 - Fax 0543.781811  
e-mail: info@mariotti-italy.com  
www.mariotti-italy.com



### FIX'N RELAX

Il cuscino sottovuoto, ottimo per fermare la testa dei pazienti in una posizione ottimale. Ideale per le prolungate sessioni di implantologia, parodontologia, sbiancamento, chirurgia, endodonzia etc.

**PREZZO TAGLIATO** <math>\approx</math> **EURO 150,00 + iva**  
10,00 Spese di sped.

#### SMILE CREATION ITALIA

Tel. 06.97277675 - 06.97277679 - Fax 06.97277680



### SW DENTAL

Gestione completa dello studio odontoiatrico.

**A PARTIRE DA**  
**EURO 480,00 + iva**

#### SOFTWORK snc

Via Barucchi, 37 - 37139 Verona  
Tel: 045.9251255 - Fax 045.9250152  
e-mail: info@softwork-it.com - www.softwork-it.com



### KIT CHIRURGICO MULTYSYSTEM®

Ref. 7105100 per il rialzo del seno mascellare a minima invasività.

**PREZZO TAGLIATO** <math>\approx</math> **EURO 549,00 + iva**

#### MULTYSYSTEM srl

Via Solferino, 4 - 20052 Monza (MI)  
Tel. 039.2302681 - Fax 039.2302686  
e-mail: multysystem@multysystem.com - www.multysystem.com



### ZAAP LIGHT

La lampada che consente di effettuare lo sbiancamento professionale dei denti in soli 20 minuti.

**PREZZO TAGLIATO** <math>\approx</math> **EURO 3.300,00 + iva**  
+ 1 kit omaggio per  
3 pazienti

#### SMILE CREATION ITALIA

Tel. 06.97277675 - 06.97277679 Fax 06.97277680

Legenda: (A) = APPROFONDIMENTI  
(i) = SCHEDA INFORMATIVA

I beni offerti in questa sezione si intendono destinati all'utilizzatore professionale. Le apparecchiature soggette alla regolamentazione di cui alla Legge 175/92 possono essere cedute solamente agli iscritti all'Albo dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri. Per ogni informazione sulle offerte qui elencate il lettore interessato è invitato a rivolgersi direttamente all'inserzionista.

## starlight pro

Lampada a Led -  
leggera, funzionale e colorata



### OFFERTA PROMOZIONALE



starlight pro con doppio  
manipolo colorato a scelta

**990,00 €**

oltre 1000 mW/cm<sup>2</sup>

garanzia 3 anni

mectron

medical technology

starlight pro - senza fill, maneggevole e di facile utilizzo. Silenziosa e priva di ventilazione in solo 105 g. permette di effettuare 320 cicli da 10 secondi, il tempo di ricarica è di 90 minuti. Il radiometro integrato sulla stazione di ricarica facilita il controllo della potenza.

Scegliete il vostro highlight personale tra una vasta gamma di colori: rosa, arancione, azzurro, verde acqua o giallo. Qualunque sia il vostro colore preferito, la qualità rimane invariata!

mectron s.p.a.

via Loreto, 15/A, 16042 Carasco (Ge), ITALIA  
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374  
www.mectron.com, mectron@mectron.com

ANNUNCI ECONOMICI

**OFFRO COLLABORAZIONE**

- Assistente alla poltrona, 14 anni di esperienza, scuola Andi, in modo in particolare per conservativa, chirurgia, endodonzia, ortodonzia, offre collaborazione full-time, zona Roma Eur, Piramide e Ostia (RM). Telefonare al 335.1567352.
- Assistente alla poltrona, 38 anni, 13 anni di esperienza, esperta in chirurgia implantare, conservativa, ortodonzia e sterilizzazione, offresi part-time 3-4 giorni alla settimana, anche mattina, in zona Eur-San Giovanni (RM). Telefonare al 347.6276217.
- Assistente alla poltrona, bella presenza, diplomata, esperienza

- pluriennale in conservativa, endodonzia, ortodonzia, pedodonzia e chirurgia orale, cerca serio lavoro part-time. Telefonare al 347.1457007.
- Assistente alla poltrona cerca lavoro presso studio dentistico, esperienza quindicennale, esperta in ortodonzia, chirurgia, endodonzia. Full-time o part-time, zona Guidonia (RM). Telefonare al 320.1957637.
- Assistente alla poltrona, diplomata, conoscenza Pc, con esperienza, bella presenza, massima serietà, offresi per mansioni di assistente alla poltrona, part-time. Zona Roma Eur, Acilia e zone limitrofe. Telefonare al 348.7400374.
- Assistente alla poltrona e segretaria, con esperienza lavorativa nel settore, diploma

- maturità scientifica, attestato di partecipazione al Corso Andi "Gestione di segreteria in studio odontoiatrico" (Milano, giugno 2001), diplomata presso la scuola Andi Lazio "Corso biennale di formazione per assistenti alla poltrona", offresi per lavoro part-time su Viterbo e immediate vicinanze. Telefonare al 328.6373120.
- Assistente alla poltrona e segretaria, esperienza pluriennale, massima serietà, offre propria collaborazione a studi dentistici, zona Oristano - Cagliari. Part-time o full-time. Telefonare al 349.4408984.
- Assistente alla poltrona, esperienza pluriennale, massima serietà, bella presenza, offre propria collaborazione a studio

- dentistico part-time o full-time. Telefonare al 349.3053606 o.s.
- Assistente alla poltrona - segretaria, esperienza 5 anni e mezzo, offre collaborazione presso studio dentistico, zona Roma e provincia. Telefonare al 338.1989061.
- Assistente-segretaria, esperienza ventennale nella conduzione di studi medici dentistici, diploma di scuola media superiore, referenziata, capacità relazionale, disponibilità part-time oppure orario continuato. Telefonare al 347.5809617.
- Chirurgo odontoiatra, con esperienza pluriennale e pluridisciplinare in chirurgia, protesi, parodontologia, endodonzia, conservativa, odontoiatria infantile, offre

COLLEGATI ALL'INDIRIZZO INTERNET WWW.INFOIDENT.IT ED INSERISCI ANCHE ON-LINE IL TESTO DEL TUO ANNUNCIO. I testi degli annunci di interesse odontoiatrico sono visionati preventivamente dall'A.N.D.I. - Dipartimento Regionale Lazio

- ANNUNCI GRATUITI
- VARIAZIONE DATI



indirizzo: Strada Teverina km. 3,600 • 01100 VITERBO • Tel. 0761.393.204 - Fax 0761.393.222

INFODENT CENTRO-SUD 3/2008

Nome ..... Cognome .....

Tipo di attività ..... Specializzazione .....

Via ..... Numero ..... CAP .....

Città ..... Prov. .... Tel. ....

E-mail ..... P.IVA ..... Cell. ....

*(Per annunci a pagamento è obbligatoria la partita iva e il codice fiscale)*

- OFFRO O CERCO
- COLLABORAZIONE
- ATTREZZATURE
- ATTIVITÀ

**Spazio per l'annuncio (scrivere a macchina o stampatello) MAX 30 PAROLE • Sarà pubblicato solo il testo sottostante\***

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**\*IMPORTANTE**

Gli annunci riguardanti la ricerca di collaborazioni (ricerca personale, collaboratori ecc.) devono essere pubblicati corredati delle generalità del richiedente, in ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, attuazione della legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge 14 febbraio 2003 n. 30, cosiddetta "legge Biagi"). In relazione a quanto sopra, al fine di consentire la pubblicazione delle suddette generalità in base a quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/03 che regola il trattamento dei dati personali, si autorizza la pubblicazione delle generalità suindicate.

DATA.....

NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO).....

FIRMA.....

Per la comunicazione telefonica degli annunci economici è attiva negli orari di ufficio una segreteria telefonica al numero 0761.393.204 dal lunedì al venerdì. **ATTENZIONE SARANNO PUBBLICATI SOLO GLI ANNUNCI COMPLETI DI TUTTI I DATI RICHIESTI: NOME, COGNOME, INDIRIZZO, CAP, CITTÀ, TELEFONO, PREFISSO E PROFESSIONE. Gli annunci si ricevono fino al 5 di ogni mese precedente l'uscita** e saranno pubblicati una sola volta. Per vedere pubblicato nuovamente il proprio annuncio, occorre spedire il coupon per una nuova richiesta oppure comunicare telefonicamente la riconferma. Se si desidera pubblicare in evidenza o per quelli che pervengono dalle regioni dove non è spedita INFODENT è necessario effettuare un versamento di Euro 15,50 IVA compresa su c.c.p. n° 16818015. intestato a: B.& C. srl - Strada Provinciale Teverina Km. 3,600 - 01100 Viterbo. Servizio Annunci (spedire fotocopia versamento). Per gli annunci in evidenza il versamento dà diritto a 2 uscite. Nell'eventualità di concomitanza dei due casi (evidenza - fuori zona di spedizione) il versamento dà effettuate e di Euro 31 e dà diritto a due uscite. INFODENT offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti sulle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile della veridicità delle inserzioni. Si procederà a norma di legge contro chiunque si servirà di questa rivista per scopi illeciti e di disturbo. Le inserzioni gratuite sono riservate ai privati. Gli operatori commerciali, per le inserzioni che riguardano

l'attività svolta, devono servirsi degli annunci a pagamento o degli spazi pubblicitari. *Avvisi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati avverrà mediante supporti sia telematici che cartacei, entrambi eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la pubblicazione dell'annuncio o per il ricevimento della rivista. La mancata comunicazione, ovvero l'occorrenza erronità dei dati richiesti legittimeranno la nostra società a rifiutare l'esecuzione del rapporto, ovvero ad interrompere l'esecuzione stessa. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo della nostra Società, nonché a tutti gli Organi societari ed ai soci; i medesimi dati potranno essere inoltre comunicati agli omologhi soggetti di società da noi controllate o collegate, ovvero di società che controllano l'attività della nostra Società. I dati relativi all'indirizzo saranno utilizzati per l'invio di riviste e attività commerciali. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D.lgs. 196/03 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione e l'integrazione dei vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Il titolare del trattamento è B&C srl con sede in Viterbo Strada Teverina km 3,600 nella persona del suo legale rappresentante. Qualsiasi comunicazione o atto ufficiale potrà essere inviato dall'inserzionista presso la redazione di infodent con sede in Viterbo Strada Teverina km 3,600.*

collaborazione in studi odontoiatrici di Roma e zone limitrofe. Telefonare al 328.7225073.

- Dottoressa in odontoiatria, con 15 anni di esperienza, offre collaborazione in conservativa, endodonzia NiTi Thermanfil, chirurgia anche di inclusi, implantologia, protesi, ortodonzia, presso studio avviato in Roma, preferibilmente Roma nord. Anche eventuale associazione e subentro. Telefonare al 338.6547306.

- Dottoressa medico odontoiatra offre collaborazione a società odontoiatriche di Roma e Lazio. Telefonare allo 06.8607309 o al 333.3509155.

- Giovane ragazza 30enne cerca serio impiego presso studio dentistico come assistente alla poltrona. Lavoro part-time o full-time. Disponibilità immediata.

Preferibilmente zone Roma est-Roma centro o zone limitrofe. Telefonare 339.6425797 o allo 06.4513645.

- Igienista dentale, con esperienza pluriennale, laureata con lode, offre collaborazione presso studi dentistici. Telefonare al 349.2871689.

- Igienista dentale, con laurea

1° e 2° livello, con esperienza e spiccate capacità comunicative, valuta proposte in Roma.

Assicura e richiede massima serietà. Gradevole presenza. Telefonare al 333.3611179.

- Igienista dentale, diplomata George Eastman, offre collaborazione presso studi dentistici di Roma. Telefonare al 331.4215155.

- Igienista dentale, laureata con massimo punteggio, partita Iva, esperienza decennale, già presente in altri studi, grande dote empatica, offre collaborazione in Roma. Telefonare al 393.8857070 dopo le 19,00.

- Igienista dentale, laureata I livello 2003, esperienza pluriennale, offre collaborazione presso studi dentistici zona Roma nord. No perditempo. Telefonare allo 06.6240211 o al 338.4681608.

- Igienista dentale laureata, residente in zona Eur-Ardeatino, valuta opportunità di collaborazione con studi seriamente motivati all'igiene orale. Disponibile anche assistenza, preferibilmente part-time. Telefonare al 328.1924407.

- Igienista dentale offre collaborazione, anche in

ortodonzia, protesi mobile e protesi fissa, con esperienza ventennale, presso studi dentistici di Roma e provincia. Telefonare allo 06.9831434 o al 389.9714113.

- Implantologo con esperienza quindicennale esegue interventi presso studi. Attrezzatura propria. Telefonare al 338.6802806 o al 333.4239234.

- Implantologo, titolare di studio, con esperienza pluriennale, disponibile con propria attrezzatura e strumentario, offre consulenze o collaborazione anche per chirurgia orale e parodontale a studi odontoiatrici del Lazio. Prezzi interessanti. Telefonare al 340.3749265.

- Laboratorio odontotecnico altamente specializzato in protesi fissa e mobile offre collaborazione a studi odontoiatrici. Listino prezzi interessante. Telefonare al 338.5444300.

- Medico chirurgo odontoiatra offre propria collaborazione presso studi dentistici del Lazio e Abruzzo. Telefonare al 334.9747788 o.p.

- Medico dentista offre collaborazione presso studi odontoiatrici. Telefonare al

339.7125724 o allo 06.9625723.

- Odontoiatra, con 15 anni di esperienza, offre collaborazione presso studio avviato, preferibilmente Roma nord, in conservativa, endodonzia, chirurgia, implantologia, ortodonzia. Anche eventuale affiancamento o subentro. Telefonare al 393.9206773.

- Odontoiatra con esperienza pluriennale, è disponibile a collaborare in studi in Roma, nei campi di conservativa, protesi, chirurgia. Telefonare al 338.2035485.

- Odontoiatra, dottoressa, offre la propria collaborazione in endodonzia, ricostruzioni post endodontiche con perni in fibra e conservativa, in studi di Roma e Latina. Telefonare al 338.9515694.

- Odontoiatra, esperienza quindicennale, esperto in conservativa, endodonzia sistema Thermanfil con chiusure in unica seduta e protesi, offre collaborazione in studi di Roma, Latina e rispettive province. Telefonare al 339.2066638.

- Odontoiatra, esperienza quindicennale in chirurgia orale e implantologia, esamina proposte di collaborazione presso altri studi in Roma e



**piezo smart**

L'ultrasuoni multifunzionale di nuova generazione

**DOTAZIONE STANDARD**



**1.590,00 €**

**mectron**

medical technology

piezo smart, l'ablattore multifunzionale piezoelettrico, strumento ergonomico e versatile, soddisfa le necessità dell'igienista, dell'endodontista e del parodontologo più esigente. piezo smart non è vincolato alla rete idrica e può utilizzare tutte le soluzioni irriganti. La nuova connessione del flacone evita fuoriuscite accidentali di liquido.

Dotazione: inserti S1, S2, P10, ER4, chiave dinamometrica, due tappi di sicurezza (blu/grigio)

mectron s.p.a.

via Loreto, 15/A, 16042 Carasco (Ge), ITALIA  
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374  
www.mectron.com, mectron@mectron.com

provincia. Telefonare al 347.5643316.

- **Odontoiatra, formazione "La Sapienza", esperienza pubblica e privata nelle varie discipline, offre collaborazione in studio dentistico a Roma e Lazio. Telefonare al 334.3413357.**
- **Odontoiatra, laurea con lode nel 2003, offre collaborazione in conservativa, endodonzia (Ni-Ti) e protesi a Roma e dintorni. Telefonare al 333.4885550.**
- **Odontoiatra, laureata con lode nel 2000, con esperienza presso strutture pubbliche e private, offre collaborazione in conservativa, endodonzia, protesi e chirurgia semplice presso studi dentistici in Roma e nel Lazio. Massima serietà. Telefonare al 338.4679412.**
- **Odontoiatra laureata nel 2000, perfezionata in pedodonzia, specialista in ortodonzia mobile, intercettiva, funzionale, fissa, preprotetica e invisalign, cerca consulenze in Roma, Cassino, Isernia e dintorni. Telefonare al 347.8020245.**
- **Odontoiatra laureato con lode all'Università Cattolica del Sacro Cuore con esperienza di protesi, conservativa, endodonzia, con strumentazione Ni-Ti e chirurgia, offre collaborazione in studi di Viterbo e Roma Nord. Telefonare al 347.5509558.**
- **Odontoiatra medico chirurgo, esperienza ventennale, offre collaborazione presso studi Roma e dintorni. Telefonare allo 06.78344345 o.p.**
- **Odontoiatra, regolarmente**

- aggiornato, esperto implantologo e titolare di studio, offre collaborazione o consulenze ed esegue interventi con attrezzatura propria presso studi odontoiatrici del Lazio. Telefonare al 340.3749265.**
- **Odontoiatra, titolare di studio, 20 anni di esperienza lavorativa privata e pubblica, disponibile per collaborazione endodonzia, conservativa, ortodonzia, chirurgia, protesi. Massima serietà. Telefonare al 328.4556697.**
- **Odontotecnico ceramista, con esperienza ventennale, offre propria collaborazione a medici odontoiatri e a colleghi. Lavorazione di alto livello, al microscopio. Massima serietà e puntualità. Prezzi concorrenziali. Telefonare allo 06.66156389 o al 338.6844067.**
- **Odontotecnico ceramista con propria partita Iva offre collaborazione a laboratori odontotecnici per lavorazioni di protesi, con pagamenti a percentuale 40,00 euro a elemento o eventualmente 40,00 euro ora lavorativa. Disponibilità centro Italia. Possibilità di spedizioni in un giorno in tutta Italia. Telefonare allo 0774.324147.**
- **Odontotecnico con esperienza decennale, partita Iva propria, offre collaborazione a laboratori odontotecnici, con pagamenti a percentuale. Telefonare al 338.5444300.**
- **Ortodontista, con esperienza pluriennale in terapia fissa, funzionale ed ortopedica, offre collaborazione presso studi dentistici in Roma e regione**

Lazio. Telefonare al 339.8621289.

- **Ortodontista, specialista con attività esclusiva ultraquindicennale, è disponibile per collaborazioni presso studi dentistici in Napoli e provincia già avviati. Telefonare al 347.6365855, e-mail stampa2007@libero.it.**
- **Ortodontista, specialista, è disponibile per consulenze presso centri o studi dentistici in Campania. Disponibilità propria attrezzatura, flessibilità giorni ed orari. Esegue prestazione professionale anche su pazienti disabili. Telefonare al 347.6365855.**
- **Parodontologia: esperta in parodontologia, titolare di studio, sarebbe disponibile per collaborazione 2 o 3 mattine a settimana. Telefonare allo 06.5913003 oppure al 335.435658.**
- **Segretaria cerca lavoro part-time pomeriggio in uno studio dentistico. Telefonare al 347.4130733 il pomeriggio.**
- **Sono un odontoiatra, faccio protesi tradizionali, cerco un collega che vuole prendere un protesista che abbia esperienza. Meglio in Toscana, ma mi va bene in Italia. Telefonare al 392.0089260.**

**■ CERCO COLLABORAZIONE**

- **Cerco collaboratore esperto in endodonzia per studio Dr. Stefano Marziale in Civitavecchia (RM). Inviare curriculum a stefano.marziale@tiscali.it.**



- **Dr. Giorgio Tabanella, in Mentana (RM), odontoiatra specializzato in parodontologia e chirurgia orale, cerca assistente dentale diplomata, con partita Iva, per il giovedì intera giornata. Telefonare allo 06.9091900.**
- **Studio odontoiatrico Dott. Luca Argenti, sito in zona Casalotti-Boccea (RM), seleziona assistente alla poltrona-segretaria, max 30 anni, serietà, uso Pc e buone capacità comunicative. Telefonare allo 06.61597492 ore pomeridiane.**
- **York Global Village, associazione di volontariato Onlus, ricerca: medici, odontoiatri, odontotecnici e infermieri disponibili a prestare un servizio di volontariato (minimo 10-15 gg) presso una missione di suore a Kampala (Uganda). Telefonare allo 06.4453343 o al 339.4050629 o inviare e-mail all'indirizzo: yorkglobalvillage@tiscali.it - www.yorkglobalvillage.it.**



**Michele Mealli & C.snc**  
Via della Vetreria, 61/63  
50063 Figline Valdarno (FI)  
Tel.055952498 - Fax 0559157449  
e-mail:micmeall@tin.it

Vistate il nostro sito internet  
[www.dentalmealli.it](http://www.dentalmealli.it)

**"IL MIGLIORE RAPPORTO QUALITA' PREZZO"**

Presenti settimanalmente su Firenze / Arezzo  
In tutta Italia con corriere espresso



**Protesi su barra con chiavistelli**



**Arcata superiore in ceramica**



**11 in ceramica su impianto**

- Specializzati in:**
- Protesi implantare
  - Passivazione Cresco™
  - Ponti e Corone in Zirconia
  - Metalceramica
  - Corone Integrati
  - Tecnica Press
  - Corone Galvano
  - Protesi in Titanio

Per ricevere il nostro listino: [micmeall@tin.it](mailto:micmeall@tin.it)

## ■ OFFRO ATTREZZATURA

• **Autoclave simit Tecno-Gaz classe B, euro 1.800,00. Telefonare allo 06.7962180.**

• **Autoclave termodinamica Tecno Gaz di sala mostra, euro 1.500,00. Telefonare allo 06.7962180.**

• Banchi da laboratorio Centro Sei a 2 posti con aspirazione e lampade. Pressofonditrice Tecno-Gaz modello ASM 15. Sabbiatrice Tecno-Gaz Skylab 3. Tutto in ottime condizioni, vendesi. Telefonare al 349.6724493.

• Banco laboratorio Interospital 1 posto + cassettera + lampada, con siringa aria e predisposizioni varie + banco gessi con lavabo, vasca decantatore + cassettera marca Interospital colore bianco-nero, tutto euro 500,00. Telefonare al 347.7237963.

• **Cerec 2 con telecamera cad cam, anno 2000, euro 15.000,00. Telefonare allo 06.7962180.**

• Colibri, riunito marca Idem, perfetto stato, poltrona Ritter, splendida, seduta in pelle, tutti i movimenti, vendesi privato. Telefonare al 06.44241021.

• Compressore marca Fini modello Soffio per studio odontoiatrico, completo di mobiletto insonorizzato marca New Ullros, vendesi a euro 650,00. Telefonare al 339.8868069.

• Laboratorio odontotecnico vende forni per compositi Ivoclar nuovi Targis Power e Vectris, una rapida Casali 20.000 giri seminuova. Telefonare allo 06.8104750.

• Laboratorio odontotecnico vende pompa Vacuum De Marco per rivestimento e gesso, 1 parallelometro castellano, 1 forno per compositi Schutz Dental Pcl 4000, 1 vecchio forno per ceramica (Biodent Keramik) revisionato ed in buono stato. Telefonare allo 06.8104750.

• Laboratorio odontotecnico

vende serie di articolatori seminuovi, completi o non di box in gomma, per la posa di modelli di gesso su articolatori: Asa con e senza magneti, Asa filo, Unident, Whip Mix 100, Anau Mate, Pro Ark 1, Artek, Dental Hobby, Magnetic De Luxe, De Luxe, Keystone, Errey. Telefonare allo 06.8104750.

• **Lampade per compositi Hylux nuove, ultimi pezzi, euro 350,00 + Iva. Telefonare allo 06.7962180.**

• Odontoiatria - privato vende riuniti nuovi, marca Idem, 2 modello Ellisse, 1 modello Kobra, poltrona mod. amaca. Telefonare al 328.3361913.

• Odontotecnica - vendesi privatamente banchi nuovi a 2 posti, colore azzurro carta da zucchero ral, piano formica. Ottimo prezzo. Telefonare al 06.44245364.

• **Ortopanoramico Instrumentarium analogico, con tele e sviluppatrice, euro 7.000,00 esente Iva. Telefonare allo 06.7962180.**

• **Ortopanoramico Sirona Digitale (del 2005) con 3 programmi, con garanzia 5 anni, euro 17.000,00 esente Iva. Telefonare allo 06.7962180.**

• **Ortopanoramico Sirona Siemens analogico, 15 programmi, euro 6.000,00 esente Iva. Telefonare allo 06.7962180.**

• **Riunito Eurocad con 3 strumenti, euro 1.500,00. Telefonare allo 06.7962180.**

• **Riunito Kavo 1060 con 3 strumenti e seggiolino, euro 6.000,00. Telefonare allo 06.7962180.**

• Stereomicroscopi professionali da banco da 4x a 100x, con illuminatore per luce trasmessa e riflessa ed ampio corredo di accessori euro 400,00. Sistemi completi con illuminatore con lampada alogena e fibra ottica anulare per luce fredda. Eventuale disponibilità di supporti a pantografo, di sistemi per fotomicrografia e di fibre

ottiche bifilari. Telefonare allo 06.4072172 (casa) o allo 06.30484685 (ufficio) o al 338.3408288 e-mail: [massimo.dapice@casaccia.enea.it](mailto:massimo.dapice@casaccia.enea.it)

• **Telecamera Contact III, perfetta, euro 1.200,00. Telefonare allo 06.7962180.**

• **Unità chirurgica ATR 5.000, nuovi, euro 2.500,00 + Iva. Telefonare allo 06.7962180.**

• Vector Durr, come nuovo, vendo euro 1.500,00.

Ablatore Mectron, come nuovo, euro 300,00.

Telefonare allo 06.5038570 o al 339.4783616.

• Vendesi forno per ceramica Ivoclar P95 + pompa. Ottimo stato, prezzo euro 2.200,00. Telefonare allo 050.49140.

• Vendesi micromotore digitale per endodonzia, eps endo physio sistem Krugg, compreso di micromotore contrangolo specifico, endo NSK, ad euro 850,00. Telefonare al 328.7225073.

• Vendo banchi da lavoro mod. Saratoga (L1m - P50 - H83) in metallo rosso, piano bianco, 2 cassetti con sportello vetro con attacchi micromotore, turbina e siringa mod. Faro, euro 1.000,00 cadauno trattabili. Telefonare allo 06.5910679 ore pomeridiane dal lunedì al venerdì.

• Vendo cappa aspirante Interospital, con cassettone + fionda Degussa inclusa + fonditrice a induzione Degussa + forno + cilindri 6x6. Prezzo interessante. Telefonare al 329.1573213.

• Vendo: sistema per modelli Easy-Model con 28 basi per modelli in plexiglass, euro 150,00; compressore a secco mono cilindro 24 lt Mafordent, ottime condizioni, euro 350,00. Telefonare allo 06.3014690 o al 338.3848052.

• Vendo System B e siringa Optura 2, come nuovi, euro 1.500,00. Vendo inoltre rilevatore d'apice Apit Osaka, mai usato, euro 550,00. Telefonare al 347.6531824.

## ■ CERCO ATTIREZZATURA

• Cerco forno per ceramica Programmat P20 Ivoclar. Telefonare al 338.7074158.

## ■ OFFRO ATTIVITÀ

• A odontoiatri con clientela propria affittasi studio completamente attrezzato, zona Università "Sapienza". Telefonare allo 06.44235367 ore 9,00-13,00/15,00-19,00 escluso il sabato.

• A specialisti con propri pazienti si affittano, anche 1-2 giorni a settimana, stanze attrezzate in elegante centro polispecialistico a norma, in zona centrale e ben collegata.

Telefonare al 377.3013354.

• Ad odontoiatri con propria clientela affittasi studio attrezzato e climatizzato, per 2 giorni dalle 9,00 alle 13,30. No strumentario, no materiale consumo. Sito in complesso residenziale, zona Vigna Stelluti (RM).

Telefonare allo 06.3291943 mattina o al 348.3505691 dopo le ore 21,00.

• Ad odontoiatri e igienisti con pazienti propri, affittasi unità odontoiatrica completa di radiografico endorale e ortopantomografo, in elegante studio zona Porta Pia, via dei Villini 10, 00161 Roma. Telefonare al 349.4688201 o allo 06.4402050.

• Affittasi, a colleghi dentisti ed igieniste con pazienti propri, unità operative presso avviato studio dentistico, zona Vigna Clara (RM).

Da concordare il tempo. Telefonare al 339.1552727.

• Affittasi studio odontoiatrico (a norma), attività trentennale. Completamente attrezzato, 1 o più giorni a settimana. Zona Prenestino (RM).

Telefonare allo 06.2412052.

• Affitto a collega odontoiatra, con clientela, unità operativa, nuova attrezzatura con RVG, telecamera, ortopantomografo,



# PROTEFIL

servizi odontotecnici

**CORONE, PONTI E  
BLOCCAGGI FINO  
A 16 ELEMENTI UNITI  
IN ZIRCONIO,  
ZIRCONIA, ALLUMINA,  
TITANIO,  
LEGA E POLIAMMIDE  
CON E SENZA FIBRA**

Innovazione e Dinamicità  
al servizio dell'Odontoiatra



Via F. Massi, 29 - 00152 Roma  
Tel: 06.58.15.104 r.a.  
protefil2003@yahoo.it

con servizio di segreteria ed eventuale assistenza alla poltrona, in prestigioso studio odontoiatrico, zona piazza Bologna (RM), 50 metri metropolitana B. Telefonare allo 06.4403860.

• Affitto studio odontoiatrico, in elegante centro commerciale in provincia di Perugia, a dentisti o igieniste con p. Iva. Possibilità di collaborare. Telefonare allo 0742.353159 o al 338.3457480.

• Affitto unità operativa completa, in studio odontoiatrico zona Salario-Parioli (RM). Telefonare allo 06.8415680 ore 9,00-12,30 dal lun al ven.

• Causa trasferimento fuori regione, cedo studio dentistico sito in Isola Liri (FR), su strada principale, a norma di legge, completo di attrezzature e arredamento, mura in affitto. Trattative riservate. Telefonare al 347.6013498.

• Cedesi studio dentistico in Roma, avviamento decennale, situato su strada, a norma di legge e completo di tutte le attrezzature e macchinari. Poltrona nuova, con subentro leasing. Telefonare al 339.8956255 o al 349.5367638.

• Cedo stanza, completa di riunito Skema 6, aspirazione chirurgica, compressore, mobili ecc., in studio medico polimutualistico, sito in Roma, via Portuense angolo via del Trullo. Affare. Telefonare allo 06.30891203 o al 335.5243948 e-mail: giuseppe\_dicesare@libero.it.

• Per fine attività cedesi 3 locali in locazione, zona Monteverde (RM), Ponte Bianco, ampio magazzino, 2 canne fumarie, autorizzazioni Usl acque e fumi. Telefonare allo 06.5882425.

• Studio dentistico, zona largo Preneste, doppia unità operativa, completamente attrezzato, a norma, affittasi in Roma. Telefonare al 328.6462551.

• Studio medico dentistico affitta

stanza attrezzata, a norma, 1-2 volte a settimana, a collega, zona Eur centro - viale Europa (RM), 100 m dalla metro.

Telefonare al 347.6136710 o.p.  
• Studio odontoiatrico di recente costruzione, a norma, referenziato, sito in zona centrale di Ancona, dotato di ampio parcheggio attiguo, cedesi in affitto a collega, causa trasferimento in altra regione. 2 ambulatori, 2 sale di attesa - 100 mq. Possibilità di affiancamento. Telefonare al 339.2344110 o al 330.913172.

• Vendesi immobile, casa indipendente località Cervia (RA), agibilità studi dentistici più laboratorio. Ingressi indipendenti, trasformabili in struttura complessa. Arredati modernamente. Avviamento trentennale, buonuscita non richiesta. Telefonare al 338.8143303.

• Vendesi studio dentistico, mura + attrezzature, a norma. Piano terra, giardino + cantina, riscaldamento autonomo, aria condizionata, totalmente ristrutturato, zona Vigna Clara (RM). Telefonare al 331.6330038.

• Vendo studio dentistico, avviamento trentacinquennale (2 appartamenti A10, 200 mq totali) possibilità affitto o vendita appartamenti zona Ostia lido-centro. Telefonare al 335.6586779.

## ■ CERCO ATTIVITÀ

• Cerco studio da rilevare o anche associazione, zona Roma nord (Trieste, Nemorense) anche con stanza da attrezzare. Telefonare al 338.6547306.

# ABSOLUTE Professional

**Vision**  
LED MODE



## VIMAR

Sede e Show room:  
LAVINIO MARE - ANZIO - ROMA  
Tel. 06.9813261 - 06.9814608  
Corso S. Francesco, 108  
vimar@vimarweb.com

Show room:  
Via Fabio Numero, 40  
00181 Roma

Concessionaria  
Roma e provincia

## EURODENT

Treat yourself!

**Assistenza tecnica  
autorizzata Ciavarro**

Tel. 06.78348720 - 329.0642999  
06.7840604 - 338.7344179

# Chirurgia Ossea Senza Limiti

## Massimo rendimento

- 90W di potenza
- 42 inserti in titanio
- Controllo elettronico del flusso di irrigazione



## Ultrasonic Bone Surgery®

Ing. Carlo Alberto ISSOGLIO & C. S.r.l.  
Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB) - Italy  
tel. 0323.828.004 - 0323.827.088 / Fax +39.0323.828.914  
Info@resista.it



[WWW.UBSURGERY.COM](http://WWW.UBSURGERY.COM)

**RESISTA**