

INFODENT[®]

MENSILE D'INFORMAZIONE MERCEOLOGICA DENTALE

n. 6-7 • 2011 • anno XXIII • CENTRO-SUD ITALIA

TEKNICA



Serie **Glass** Teknica

IL MASSIMO DELLA QUALITÀ AD UN PREZZO
I M B A T T I B I L E



TEKNICA, azienda leader nel settore delle forniture dentali è lieta di presentarvi la nuova linea di mobili da studio serie Glass

Metal Store Import – Export sas

Via Vecchia Napoli, 132 - 80145 Napoli
Tel. 081.5854492 - 081.6582587 - 081.5854821 Fax 081.7407683
e-mail: metalstoresas@virgilio.it

IN QUESTO NUMERO
A CONFRONTO:

LASER CHIRURGICI

Pag 5

COMPOSITI ESTETICI

Pag 19

FACCETTE ESTETICHE IN CERAMICA

Pag 27

APPROFONDIMENTI

Laser chirurgici

- Laser a diodi KaVo GENTLeray 980 Classic Plus
- Claros PICO
- Laser ed Alta Frequenza (HF)

Pag 10

Compositi estetici

- IPS Empress Direct
- Enamel Plus HRI

Pag 25

Faccette estetiche in ceramica

- Natural Live Effect System

Pag 30



All'interno il poster da staccare
sull'Osteoporosi in Odontoiatria

bicon
DENTAL IMPLANTS

www.bicon.com - Tel. +39 069682293

Vinci con Expodental!



Cosa ti ricorda?

Partecipa al concorso, gioca con le similitudini, puoi vincere fantastici premi:
 1° premio - un iPad wifi-3G, 16 GB, bianco
 2° premio - un iPhone 4 16 GB nero
 3° premio - un iPod Nano verde 16 GB
 e molti altri messi in palio dalle aziende associate UNIDI.

Il 6 e il 7 ottobre, ad INTERNATIONAL EXPODENTAL presso: lo stand UNIDI, lo stand Infodent, l'area forum e l'area relax, potrai registrarti e giocare. Vincere è facile! Basterà indovinare il corretto abbinamento delle immagini alle frasi per partecipare all'estrazione finale.

Puoi effettuare la pre-registrazione on-line e accedere alla preview del gioco su:
www.infodent.it

INTERNATIONAL
 EXPODENTAL



UNIDI





A.N.E.S. Associazione Italiana Edizione Specializzata

Direttore responsabile Riccardo Chiarapini
Segreteria di redazione Stefano Toticchi
Coordinamento Diana Carbonetti
Direzione grafica Gisella Benedetti
Impaginazione e grafica
BeC s.r.l. – divisione grafica
Marketing e Pubblicità
Gianluca Passeri tel. 0761.393306 -
335.1213136

Mensile d'informazione merceologica dentale
ANNO XXIII - n. 6-7 Giugno/Luglio 2011
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in A.P. - 70%
Viterbo - Autorizzazione del Tribunale di Viterbo
n. 341 del 7/12/88

Editore BeC s.r.l.
Strada Teverina Km. 3,600 - 01100 VITERBO
Telefono 0761.393.1 - Fax 0761.393.222



Stampa - Graffietti Stampati snc
S.S. Umbro Casentinese Km. 4,500
Montefiascone (VT)

Testata volontariamente sottoposta a
certificazione di tiratura e diffusione
in conformità al Regolamento C.S.S.T.
Certificazione Editoria Specializzata
Tecnica

Per il periodo 1/1/2010 - 31/12/2010
Tiratura media: 17.867
Diffusione media: 17.659
Certificato CSST n. 2010-2054 del 28.02.2011
Società di Revisione: Fausto Vittucci & C. sas
Tiratura del presente numero: 19.800
Una copia euro 0,77 - contiene I.P.
La redazione non restituisce il materiale utilizzato

PRIMO PIANO LASER CHIRURGICI	5	prestazioni - LINE.up ed eco.LINE - XDent
A CONFRONTO Tabelle di comparazione	6	- NATURAL CERAMIC SYSTEM - Gelness
APPROFONDIMENTI - Laser a diodi KaVo GENTLEray 980 Classic Plus - Claros PICO - Laser ed Alta Frequenza (HF)	10	IN VETRINA 39 Prodotti in offerta proposti dagli operatori
AGENDA Settembre/Ottobre - Congressi e Fiere in Italia e all'estero - Calendario dei Corsi	12	ANNUNCI ECONOMICI 40 Annunci gratuiti di offerta e ricerca collaborazione, attrezzatura e attività
PRIMO PIANO COMPOSITI ESTETICI	19	INSERZIONISTI • Abacus pag. 37 • Anes pag. 26 • B2B pag. 42 • BeC – Promunidi pag. Il Cop. • BeC pag. 39 • Bicon Italia pag. I Cop. • Biomec pag. 34 • Caes Software pag. 17 • Centri Odontoiatrici Specialistici pag. 15 • Dental Claire pag. 33 • Dental Equipment pag. 15 • Dental Shine pag. 40 • Durr Dental pag. 30 • EMS Italia pag. 14 • Eurodent pag. III Cop. • Fe.Ma. Dermal Institute pag. 16 • Fodent pag. 31 • Ivoclar Vivadent pagg. 19/25 • KaVo Italia pagg. 5/10 • Larident pag. 10 • Manfredi pag. 32 • Mariotti pagg. 35/39 • Metal Store pag. I Cop. • Micerium pagg. 19/25/IV Cop. • N&C – Vitaldent pag. 4 • Odontoline pag. 12 • Ombi pag. 38 • Ortho System Roma pag. 13 • Physioline pag. 41 • Rident pagg. 5/10 • Roland pag. 39 • Rossi pag. 32 • Sirona pag. 11 • Tekne Dental pag. 36 • Tombellini Laboratorio Odontotecnico pag. 12 • Tressis Italia pagg. 27/30 • Zenith pag. 18
CONFRONTO Tabelle di comparazione	20	
APPROFONDIMENTI - IPS Empress Direct - Enamel Plus HR	25	
PRIMO PIANO FACCETTE ESTETICHE IN CERAMICA	27	
A CONFRONTO Tabelle di comparazione	28	
APPROFONDIMENTI - Natural Live Effect System	30	
VIDEONEWS - Video Novità	31	
DALLE AZIENDE - Roland DWX-50 - Tri Auto mini - Unico test di ammissione per Medicina e Odontoiatria - Galileo: piccola saldatrice laser con grandi	32	

Informativa ai lettori – Questa rivista Le è stata inviata tramite abbonamento, l'indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per l'invio della rivista, per l'invio di altre riviste, per l'invio di proposte di abbonamento, per l'invio di informazioni tecniche e commerciali, nonché per la divulgazione di eventi formativi e promozionali e per la cessione degli stessi a terze aziende per le medesime finalità. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Qualora venisse esercitato il diritto alla cancellazione lo stesso comporterebbe il mancato invio della presente rivista. Il titolare del trattamento è BeC srl con sede in Viterbo, Strada Teverina Km 3,600, nella persona del suo legale rappresentante.

elenco completo
dei confronti 2011 sul sito
WWW.INFOIDENT.IT
sezione confronti




SCONTI DAL 50% AL 70% REGISTRATI



VII PREMIO

ALLA RICERCA IN

ODONTOSTOMATOLOGIA

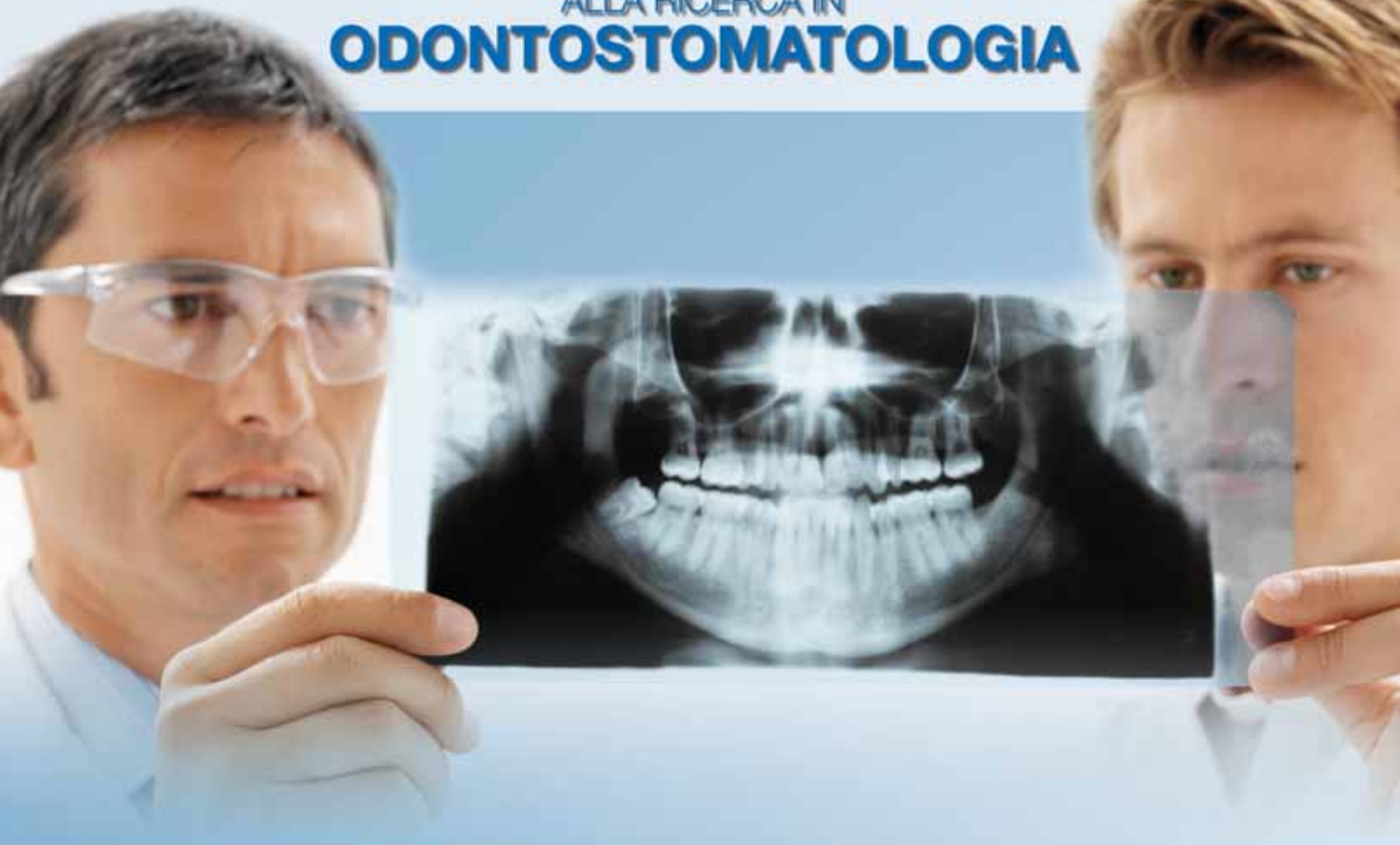

40.000 €: MIGLIOR LAVORO DI RICERCA DI BASE

35.000 €: MIGLIOR LAVORO DI RICERCA CLINICA

10.000 €: MIGLIOR REVISIONE BIBLIOGRAFICA SISTEMATICA

Diamo valore alla ricerca

FONDAZIONE
VITALDENT

L'obiettivo primario del VII Premio è la promozione di lavori di ricerca che rappresentino un'evoluzione per lo sviluppo della professione odontoiatrica. Per info e regolamento è possibile scaricare il materiale da www.vitaldent.com o richiedere informazioni all'indirizzo fondazione@vitaldent.com. Il termine ultimo per la ricezione dei lavori è il 31/08/2011.



1

KAVO

2

ELEXXION

Laser chirurgici a confronto

1

KAVO

GENTLERAY 980 CLASSIC PLUS

Gradevole per i pazienti, produttivo per voi. KaVo GENTLERay 980 Classic Plus è un laser a diodi estremamente indicato per la piccola chirurgia dei tessuti molli, la decontaminazione in parodontologia ed endodonzia e per il bleaching. Questo laser si distingue per il software particolarmente semplice e per la sua estrema versatilità e sicurezza.



2

ELEXXION

CLAROS PICO

Claros PICO di elexxion è un laser con la tecnologia brevettata "DPL" che offre il giusto rapporto tra periodo di esposizione e periodo di pausa, rispettando al massimo il tessuto trattato. PICO pre-programmato, esegue moltissimi trattamenti in endodonzia, in parodontologia e in chirurgia. PICO inoltre, propone 25 indicazioni per "Soft Laser Therapy" pratica avvalorata da numerose pubblicazioni scientifiche.



Legenda: **P** primo piano **I** a confronto **+** approfondimento **€** in offerta

► Laser chirurgici

Denominazione del prodotto	BIOPIXEL	CHEESE	CLAROS	CLAROS NANO	CLAROS PICO P+	COMBI DIODE
Produttore	Bios - Dental Medical Innovation	Wuhan Gigaa Optonics Technology co. Ltd	Elexxion AG	Elexxion AG	Elexxion AG	Quanta - Dental Medical Innovation
Classe medicale	IIB	B	IIB	IIB	IIB	IIB
Classe laser	IV	IV	IV	IV	IV	IV
Sorgente laser	Co2	Diodo	Diodo	Diodo	Diodo	Diodo
Peso (Kg)	40	< 1,8	22	3,7	0,590	14
Dimensioni (cm) (LxPxH)	34x46x96	20x12x65	42x50x85	20x18x34	2,8x9x11,5	39x33x25
Lunghezza d'onda (nm)	10.600	810 o 980	810	810	810	808-980
Potenza massima (W)	30	7-10	10 mW-50 W	0-15	5	25+25
Durata dell'impulso (µs)	500	100 s ~ 999 s o continuo	9	16	26/CW	Fino a 10 sec
Energia max dell'impulso (J)	Variabile	•	•	•	•	Variabile
Modo di emissione impulso	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno
Alimentazione ausiliaria	No	Si	No	No	Si	No
Frequenza impulso (Hz)	400	0.5 Hz ~ 1 kHz	Da CW a 20.000 DPL	CW-20.000	DLP 20.000	2.000
Lunghezza fibra (cm)	•	300	150	15 autoclavabili	15	250-300
Diametri fibre disponibili (µm)	•	200-400	200-300-400-600	200-300-400-600	200-300-400-600	200-320-600
Raggio pilota (nm/mw)	Stato solido rosso fino 3 mW	635 +/- 10 nm < 4 mw max	635/1	635/1	635/1	Stato solido rosso fino 3 mW
Alimentazione (V)	230 VAC	220	220-230	220 da rete	Batteria litio 220	240 VAC
Corrente assorbita (A)	•	Input dc 5V/10A	•	•	•	500 VA
Frequenza di alimentazione (Hz)	50-60	50-60	50	50	50	50-60
Altre caratteristiche	Completo di dispositivo Fraxel	Possibilità utilizzo 10 programmi pre-impostati	Programma pre impostati modificabili, brevetto Elexxion DLP	Brevetto DLP Elexxion, programmi personalizzabili, utilizzabile in chirurgia e lasera terapia	Compatto, ridotto all'essenziale, facilità e praticità d'uso, sistema tips intercambiabili autoclavabili, fibre autoclavabili	•
Prezzo di listino *	Euro 20.000,00	Euro 6.000,00	Euro 25.000,00	Euro 14.450,00	Euro 7.460,00	Euro 24.000,00

GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SUI LASER CHIRURGICI

A2G srl - 06.83960390

Bios - Dental Medical Innovation –

02.90056111 -

www.dental-medical-innovation.it

DMT Dental Medical Technologies –

039.481123 - www.dmt.biz

Doctor Smile By Lambda spa –

800.690333 -

www.doctor-smile.com -

www.lambdaspa.com

D.S.E - Daeshin Enterprise (Importatore e distributore DL Medica spa

- 02.762751 - www.dlmedica.it)

Elexxion AG (Importatore

Rident – www.rident.it)

Ferrari Odontoiatrica (Importatore e distributore Metal Store

081.5854492)

Hager & Werken (Dati forniti da

Larident - www.larident.it)

KaVo Dental GmbH - 010.83321 -

www.kavo.it

Orotig.Med srl -

045.6402455/045.6400865 -

* I prezzi si intendono al netto di IVA

DELOS	DENLASE	DM 980SE	DM MED	DM200PLUS	DM4	DOCTOR SMILE D 30	DOCTOR SMILE PLUSER
Elexxion	Ferrari Odontoiatrica	DMT Dental Medical Technologies	DMT Dental Medical Technologies	DMT Dental Medical Technologies	DMT Dental Medical Technologies	Doctor Smile by Lambda	Doctor Smile by Lambda
IIB	•	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB
IV	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV
Er-Yag+diodo	Diodo	Diodo	Diodo	Nd:Yag	Diodo	Diodo	Erbio
60	1,1	4	6	40	1,5	5	35
50x60x90	10x10x16	20x23x19	35x23x14	56x75x24	20x23x12	26x23x8	40x80x90
2.940+810	810	808-980	808-980-1.064	1.064	808-980	810-980	2.940
50 diodo+12 Er-Yag	7	6	30	10	4	30	8
9	5	0,1	0,1	50-20	0,1	0,5	75-500
•	•	Variabile	Variabile	140	Variabile	•	400 mJ
Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Ripetizione
No	No	No	No	No	No	•	Si
20.000 diodo +20 Er-Yag	•	1.000	1.000	200	1.000	10.000	10-50
15	300	250	250	250	250	300	200
200-300-400-600-800	200-400-600	200-320-400-600	200-320-400-600	200-320-400-600	200-320-400-600	200-300-400-600	•
635/1	Rosso 5 mW	645 nm	645 nm/14.000 mcd	645/3	645 nm/14.000 mcd	5 mW	650
220	5	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	220	Ac 220
•	4,5	•	•	•	•	•	5,2
50	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Versatilità con la combinazione laser erbio e diodo	Manuale per sbiancamento e dermatologico	Procedure cliniche videoguidate	Procedure cliniche videoguidate	Per trattamenti odontoiatrici ed estetici	Software semplificato	Trattamenti prememorizzati dentale/estetica	Applicazioni dermatologiche, scanner dermatologico frazionato disponibile
Euro 64.000,00	Euro 7.490,00	Non fornito	Non fornito	Euro 5.900,00	Euro 5.900,00	Euro 18.000,00	Euro 34.000,00

www.orotigmed.com/
www.orotig.com
Sirona Dental Systems GmbH -
045.8281811 -
www.sirona.it/.com
Sweden & Martina spa -
049.9124300 -
www.sweden-martina.com




Quanta - Dental Medical
Innovation - 02.90056111 -
www.dental-medical-innovation.it
Wuhan Gigaa Optronics Tech-
nology Co.Ltd (Importatore e
distributore DTF Technology -
02.84893641 -
www.dtftechnology.it)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE -

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  primo piano  a confronto  approfondimento  in offerta

► Laser chirurgici

Denominazione del prodotto	DOCTOR SMILE SIMPLER	DOCTOR SMILE WISER	ENJOY 5	GENTLERAY 980 CLASSIC PLUS  	LASER HF 	LOKKI ND:YAP
Produttore	Doctor Smile by Lambda	Doctor Smile by Lambda	Sweden & Martina spa	KaVo Dental GmbH	Hager & Werken	Lokki Dt
Classe medicale	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	I
Classe laser	IV	IV	IV	IV	IV	IV
Sorgente laser	Diodo	Diodo	Diodo	Diodo	Diodo	Nd:YAP
Peso (Kg)	1,2 ca	1 ca	5	3,5 ca	3,5 ca	55
Dimensioni (cm) (LxPxH)	15x20x12	9,7x13,5x18	27x23x11,5	18x26x17	30x25x12	46x53,5x80
Lunghezza d'onda (nm)	980	980-810	808±10	980±10	975+660	1.340
Potenza massima (W)	8-12	7-5	5	0,4-6	6+2 mW	10
Durata dell'impulso (µs)	20	20	Selezionabile da 500 µs a CW con passo variabile	Macro 25-100 s/ micro 25	5-50	150
Energia max dell'impulso (J)	•	•	Variabile	12 W	•	•
Modo di emissione impulso	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Ripetizione	Singolo, ripetizione, treno	Ripetizione	Singolo, ripetizione, treno
Alimentazione ausiliaria	Si	No	No	No	No	No
Frequenza impulso (Hz)	25.000	25 kHz	47-63	2-20.000	•	5-10-30
Lunghezza fibra (cm)	300	Plug&Play TIP	200-300	300	250	•
Diametri fibre disponibili (µm)	200-300-400-600	200-300-400 TIP	200-300-400-600	200-300-320	200+320	200-320
Raggio pilota (nm/mw)	635	635	635-650	635	650/2	655
Alimentazione (V)	220	100-270	100-240 VAC	100-240	230	230
Corrente assorbita (A)	•	•	0,5	•	1,5	6
Frequenza di alimentazione (Hz)	50-60	50-60	47-63	50-60	50-60	•
Altre caratteristiche	Connessione USB, applicazioni extra disponibili, configurazione Tissue Optimized Pulsing	Ricarica completa in 60 sec, completa autonomia senza fili, comando a manopolo, Plug&Play tips	•	Descrizione della procedura dei protocolli per un facile apprendimento	Combinazione laser + bisturi alta frequenza 4 manipoli laser - LLT, bisturi HF, coagulazione + possibilità bipolare	Tre modalità d'azione prerogolate (gengiva, dentina, canale) in unico laser
Prezzo di listino *	Euro 4.700,00	Euro 9.500,00	Euro 13.600,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito

* I prezzi si intendono al netto di IVA

POCKET LASER	POLYSURGE 1470	SIROLASER ADVANCE	SIROLASER XTEND	STOMATOLOGY 6	SURGERY 35	SURGERY 60	ULTRA DREAM PULSE LASER MX 7000 MICROCROCEL
Orotig.Med srl	Quanta - Dental Medical Innovation	Sirona Dental Systems GmbH	Sirona Dental Systems GmbH	A2G srl	A2G srl	A2G srl	D.S.E - Daeshin Enterprise
IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB
IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
Diodo	Diodo IR Er:Glass	Diodo	Diodo	Diodo	Diodo	Diodo	CO ₂
0,7	28	1.3	1	3,6	4,5	5	45
10,1x16,7x6,9	30,5x45x98,5	19,7x18,2x18,9	19,7x18,2x18,9	21x24x19	21x24x19	21x24x19	40x45x120
915	1.470	970±15	970±15	970	800	800	10.600
6 (uscita fibra)	130/60	7-14 PP	5-10 PP	6	35 cW	60 cW	1-40
•	Fino a 10 sec	Chopped 10 s-0,99 s PP 23 s fixed	Chopped 10 s-0,99 s PP 23 s fixed	T-on 0,5/60 s / T-off 0,5-5 s	T-on 0,5/1- T-off 0,5/1	T-on 0,5/1 s - T-off 0,5/1 s	90-900
•	Variabile	6,93	4,95	5.997	34,98	34,98	•
Ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Ripetizione	Ripetizione	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione, treno	Singolo, ripetizione	Singolo, ripetizione, treno
Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No
15.000	2.000	1 Hz-10 KHz (800 Hz-32 kHz PP)	1 Hz - 1 kHz	1/1 kHz	1-4 kHz	1-4 kHz	1-500
200	300-500	15	15	300	300	300	Braccio articolato
200-300-400-600	400-600	320-200	320-200	0,2-0,8	Tutte quelle disponibili sul mercato	200-800	•
650/3	Stato solido rosso fino 3 mW	635 o 650	635 o 650	635-650	650, 1 mW modulabile	650, 1 mW modulabile	655/15
100-240	240 VAC	100-240	100-240	100-240 VAC	100-240	100-240	220
0,4	•	1,25-0,5	1,25-0,5	1,25	3,4	3,4	•
50-60	•	50-60	50-60	47-63	47-63	47-63	50-60
Touch-screen a colori, batteria pol y-Li ricaricabile, pedale wireless (a batteria), kit completo di accessori e ricarica-batterie	•	Touch screen, 6 utilizzatori, trattamenti preimpostati, 50 memorizzabili, 12 preferiti, pedale wireless optional	Touch screen, 2 utilizzatori, trattamenti preimpostati, upgradabile Sirolaser Advance	Power meter integrato nell'accoppiamento sorgente-fibra ottica per visualizzare potenza effettiva a display. Sorgente garantita 10.000 ore lavorative	Manipolo zoom dermatologico per trattamento tessuti periorali. Sorgente garantita 10.000 ore lavorative. Power meeter integrato a display. Sorgente raffreddata e termostata	Grafica a colori touch screen. Power meeter accoppiato sorgente-fibra ottica. Visualiz. tempo reale della potenza effettiva su display. Sorgente garantita 10.000 ore lavorative. Raffreddato e termostato elettronicamente	Manipolo odontoiatrico, manipoli chirurgici, scanner frazionato ultrapsato, software dedicato
Euro 7.000,00 ExW	Euro 58.000,00	Non fornito	Non fornito	Euro 9.500,00	Euro 18.500,00	Euro 24.500,00 (esclusa dotazione ORL)	Euro 36.000,00

PI Laser a diodi KaVo GENTLEray 980 Classic Plus

Gradevole per i pazienti, produttivo per voi



Il laser a diodi GENTLEray 980 lavora con una luce laser dalla lunghezza di 980nm che offre un minimo assorbimento da parte dell'acqua e un elevato assorbimento da parte di emoglobina e melanina. Campi di applicazione del GENTLEray 980 Classic Plus laser KaVo sono pertanto: chirurgia dei tessuti molli (ottimo effetto di coagulazione), disinfezione dei tessuti tramite trattamento delle infezioni batteriologiche, sterilizzazione dei solchi e bleaching.

Il GENTLEray 980 Classic Plus offre una potenza alla fibra di 6 Watt in continuo che salgono fino a 12W di picco nella modalità a microimpulsi, per consentire tagli ancora più efficaci. La frequenza di tali microimpulsi può essere regolata fino a 20.000 Hz (burst mode), al fine di consentire procedure più veloci e tempi di esposizione ai raggi laser più brevi.

Il piccolo e leggero laser a diodi KaVo GENTLEray 980, dotato di 30 specifiche applicazioni già preconfigurate nel sistema, può essere

attivato in maniera semplicissima tramite il display touch-screen. Il software dispone, inoltre, di una funzione di aiuto con le indicazioni legate alle applicazioni, di grande ausilio per il dentista. La dotazione prevede un inserto da 300µm, 3 paia di occhiali protettivi per laser, display touch-screen a colori, pedaliera.

KaVo propone anche uno speciale pacchetto per sbiancamento dentale, che include anche un ulteriore inserto da 200µm, un secondo manipolo, specifico per sbiancamento e 5 confezioni "starter kit" con gel sbiancante. In conclusione, paragonata alle terapie convenzionali, quella laser con il GENTLEray 980 offre ridotti sanguinamenti, ridotti gonfiori e, nel corso del tempo, minori disagi post-operatori. Tutto ciò si traduce in una terapia senza stress e dolore per il paziente e in una maggiore produttività per l'odontoiatra ed il suo team.

Per informazioni:
www.kavo.it

PI Claros PICO

Elexxion AG, azienda tedesca leader mondiale in apparecchiature laser odontoiatriche, dopo un lungo e accurato lavoro di sviluppo, ha lanciato il primo laser dentale autoalimentato con tecnologia agli ioni di litio che pesa solo 590 grammi. Laser claros PICO di elexxion, coniuga professionalità assoluta, flessibilità e qualità... tre fattori indispensabili nella pratica odontoiatrica.

Claros PICO è un laser a diodi con lunghezza d'onda di 810 nm; con la tecnologia brevettata "DPL" unita ad una frequenza di 20.000 Hz, offre il giusto rapporto tra periodo di esposizione e periodo di pausa, rispettando al massimo il tessuto trattato, riducendo i danni termici (carbonizzazione).

Il laser Claros PICO è pre-programmato e con soli 5 tasti, permette di eseguire un gran numero di trattamenti in endodonzia, in parodontologia e in chirurgia "low-med-high" (ad esempio: incappucciamento diretto della polpa, riduzione dei batteri nelle tasche, sbiancamento laser, decontaminazione impianti, perimplantite chirurgica, curettage, afte, herpes labiale, gengivectomia prima dell'impronta, preparazione del solco, apertura di ascesso, emostasi, frenectomia, esposizione dell'impianto, biopsie per prelievo campioni, cisti da ritenzione, esposizione dei denti ritenuti...).

Inoltre, claros PICO propone 25 indicazioni per "Soft Laser" scientificamente garantite, praticamente con Claros PICO avete due laser in un solo apparecchio.



Claros PICO è fornito completo di 3 occhiali di protezione, 1 applicatore defocalizzante di vetro da 6 mm, 7 fibre, 1 supporto da tavolo, 1 caricabatterie, 1 batteria ricaricabile agli ioni di litio... tutto l'occorrente per lavorare immediatamente!

Claros PICO è ideale per tutti i medici che danno importanza alla praticità, alla facilità d'installazione e alla rapidità d'uso; infatti, bastano poche ore per essere perfettamente in grado di utilizzare il laser in maniera professionale.

Claros PICO è perfetto per completare la gamma delle offerte del vostro studio, poiché i pazienti noteranno presto che, rispetto alle terapie tradizionali, la terapia laser è più veloce, meno dolorosa, più efficace e meno invasiva.

Per informazioni:
Rident
Via Pacinotti, 17
Verona
Tel. 045.8550746
Fax 045.8567425
info@rident.it
www.rident.it

LD Laser ed Alta Frequenza (HF)

Laser e chirurgia ad alta frequenza (HF) sono entrambe tecnologie importanti. Nel campo del taglio e della coagulazione l'alta frequenza permette vantaggi rispetto ai laser. In altri campi, come ad esempio endodonzia, periodontologia e implantologia, così come in settori nuovi tipo LLLT e Apdt, soltanto il laser permette nuove ed affascinanti opportunità. Hager & Werken offre in una sola apparecchiatura uno strumento completo da utiliz-

zare per molte applicazioni.

Per informazioni:
Larident srl

Via G. da Verrazzano, 145
16165 Genova
www.larident.it

Per tutte le applicazioni:	Laser	HF	LaserHF
Chirurgia Orale	●	●	●
Periodontologia	●	●	●
Implantologia	●	●	●
Endodonzia	●	●	●
Sbiancamento	●	●	●
Effetto antimicrobico (aPDT)	●	●	●
Afte e Herpes (LLLT)	●	●	●





Rimarrete a bocca aperta.



Per ricevere la Preview Card del valore di 1.000 € e partecipare ad un evento esclusivo scrivete a: sinius@sirona.it

SINIUS. La nuova dimensione dell'efficienza.

Lasciatevi sorprendere!

Congressi e Fiere in Italia

■ SETTEMBRE

14-17 Roma - RM

ESE Rome 2011 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology SIE (Italian Society of Endodontics)

Secretariat: Ms. Lorenza Dall'Oglio, Ms. Gaia Garlaschè Via Pietro Custodi, 3 20136 Milan - Italy Tel: +39 028376799 info@eserome2011.com www.eserome2011.com

16 Milano - MI

Lo Stato di salute economica dello studio odontoiatrico e della consulenza: dalla diagnosi alla terapia

AIM GROUP INTERNATIONAL - AIM Congress
Tel. 02.566011 -
odontoiatria2011@aimgroup.eu
www.aimgroup.it/2011/odontoiatria/

16-17 Salerno - SA

Percorso formativo pratico in tecnica ortodontica di laboratorio: "Apparecchiature ortodontiche rimovibili"

Ortec - Tel. 075.5055033, ortec@ortec.it

23-24 Milano - MI

21° Congresso Nazionale AIDI
www.aiditalia.it

29-30 Montecatini Terme - PT

19° Congresso Nazionale AIE - "La gestione odontoiatrica del paziente traumatizzato: indicazioni cliniche"

Segreteria AIE - Dr. Massimo Mariani, Via Milano 34, 22100 Como, Tel./Fax 031.269671, info@accademiaitalianaendodontia.it www.accademiaitalianaendodontia.it

■ OTTOBRE

01-02 Desenzano del Garda - BS

Congresso Forestadental di tecnica linguale diretta

Foresta Dental srl, Via Bellini 17, 22070 Rovello Porro (CO), N. Verde 800.829004, Fax 02.96752045, info@forestadental.com

SICOI: "Consensus conference sul trattamento dei siti atrofici: come, quando e perché utilizzare una tecnica chirurgica"

Medicina Viva - Tel. 0521.290191
Fax 0521.291314, sicoi@mvcongressi.it - www.mvcongressi.it

30-01 Bologna - BO

V Simposio Internazionale CAD/CAM

Gymnasium Interdisciplinare CAD CAM c/o Nove Archi s.r.l. Via Imerio 41 40126 Bologna gicc@novearchi.it www.gicc.it

30-01 Paola - CS

16° Congresso Nazionale SIOH: "Lo stato dell'arte in odontoiatria speciale ricerca e clinica"

Medical Team srl
Tel. 06.5813375
www.congressiosioh2011.it - www.sioh.it

06-08 Roma - RM

International 39° Expodental

Promunidi - Viale Forlanini 23, 20134 Milano, Tel. 02/7006121 Fax 02/70006546, expodental@expodental.it, - www.expodental.it

14 Milano - MI

Lo Stato di salute economica dello studio odontoiatrico e della consulenza: dalla diagnosi alla terapia

AIM GROUP INTERNATIONAL - AIM Congress -
Tel. 02.566011 -
odontoiatria2011@aimgroup.eu
www.aimgroup.it/2011/odontoiatria/

07-08 Milano - MI

20° Congresso Internazionale

AVVERTENZE PER IL LETTORE:

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.

Valplast®, primi da sempre

valplast
Primi da sempre

I LABORATORI CERTIFICATI INTECH - VALPLAST

Tirreno snc M. Cortellesa ★★★

Via Amba Aradam, 5/b
00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766.370055-328.9853206

Laboratorio Giorgio Tombellini ★★★

Via dei Quintili 54/a
00175 Roma
Tel. 06.76961824-06.76983678

A. Sorgi in associazione con E. Siemonte ★★★

Via Cassinelli, 2 scala C
67051 Avezzano (AQ)
Tel. 380.6484557-380.1856538

G. Falcioni in associazione con P. Ianne ★★★

Via Mare Rosso, 36/a
00040 Pomezia (RM)
Tel. 338.7709078-339.7475307



Incontro ODONTOLINE per un'Odontoiatria migliore

Il 29 gennaio gli utenti di Odontoline.it hanno dato vita ad un incontro trasversale circa il futuro dell'odontoiatria.

In una modalità pratica ed aperta al confronto, senza ingessature istituzionali o sindacali, alcuni fra i più informati esponenti delle associazioni e della Cao (Prof. Carlo Guastamacchia, Gerhard Konrad Seeberger, Salvatore Rampulla, Nick Sandro Miranda e Giovanni Del Fra) si sono confrontati con gli utenti delineando le criticità,

esponendo la realtà nuda dei fatti e proponendo soluzioni informate per le criticità della libera professione e del paziente. Dall'incontro è nato un articolo che riassume i punti più importanti affrontati durante i lavori (previa registrazione gratuita sul sito ODONTOLINE.it è possibile scaricare l'articolo e i filmati delle Relazioni).



Congressi e Fiere all'estero

■ SETTEMBRE

02-03 Lodz - Polonia

Dentexpo Lodz 2011

Zarząd Targow Warszawskich S.A.
02-566 Warszawa, ul. Pulawska 12a
Tel: +22 849 6006 Fax: +22 849 3584
ztw@ztw.pl www.dentexpo.pl

13-15 Baku - Azerbaijan

BIHE & Stomatology Azerbaijan 2011 17th Azerbaijan International Healthcare Exhibition

ITE Group / GiMA GmbH Project
Manager: Cornelia Limbach Tel: +49
40 23524335 Fax: +49 40 23524410
limbach@gima.de - www.bihe.az

13-16 Chisinau - Moldavia

MoldMEDIZIN - MoldDENT 2011

IEC "MOLDEXPO" SA 1, Ghiocelstr.
Chisinau, MD-2008, Moldova
Tel: +373 22 810407 // 810416 //
810462 Fax: +373 22 747420
E-mail: info@moldexpo.md
Web: www.moldexpo.md

14-17 Mexico City - Messico

FDI Annual World Dental Con- gress Mexico City 2011

FDI World Dental Federation Tour de
Cointrin Avenue Louis Casai 84 Case
Postale 3 1216 Cointrin - Genève Swit-
zerland Tel. +41 22 560 81 50 Fax +41
22 560 81 40 congress@fdiworldental.
org - www.fdiworldental.org

16-17 Leipzig - Germania

Fachdental Leipzig 2011

Landesmesse Stuttgart GmbH Am
Kochenhof 16 70192 Stuttgart Germany
Tel: +49 0711 25 89 0 Fax: +49 0711
25 89 440 info@messe-stuttgart.
de - www.messe-stuttgart.de - www.
fachdental-leipzig.de

16-17 Melbourne - Australia

ADX 2011 Australian Dental Expo

Contact: Duncan Campbell Ph: + 61 2
9319 5631 Fax: +61 2 9319 5381 adia@
adia.org.au - adx.melbourne@adia.org.
au - www.adia.org.au

22-24 Bratislava - Ungheria

Slovak Dental Days 2011

Incheba, P.I.c. Viedenska cesta 3-7 851
01 Bratislava Tel: +421 2 6727 1111
Fax: +421 2 6241 1838
E-mail: incheba@incheba.sk
Website: www.incheba.sk

22-24 Poznan - Polonia

CEDE 2011 - 21st Central European Dental Exhibition

Exactus sp.j. Al. Kosciuszki 17 lp. 90-418
Lodz Poland Tel: +48 42 632 28 66
Fax: +48 42 632 28 59 E-mail: info@
exactus.pl // cede@cede.pl // info@
cede.pl Referents: Mr. Dariusz Sobczak
and Mr. Marek Wiktorowski Website:
www.cede.pl // www.exactus.pl

23-25 Mumbai - India

World Dental Show 2011

Organizer: Indian Dental Association
2nd Floor, Bombay Mutual Terrace
534 Sandhurst Bridge, Opera House
Mumbai - 400 007 India Tel: + 91 22
43434545 Fax: +91 22 2368 5613
info@wds.org.in - www.wds.org.in

23-26 Nanjing - Cina

Global Congress of Chinese Dentists

Reed Exhibitions China Head Office
Unit 01-03,05, 15th Floor, Tower A
Ping An International Finance Center
No.1-3, Xinyuan South Road, Chaoyang
District Beijing 100027 China Tel: +86
10 5933 9000 Fax: +86 10 5933 9333
Website: www.reedexpo.com.cn

26-29 Mosca - Russia

Dental-Expo 2011 30th International Dental Forum - International Exhibition

Ms. Savchenkova Maria
E-mail: international@dental-expo.com
Website: www.dental-expo.com

27-30 Odessa - Ucraina

DentExpo 15th International Special Exhibition

Of. MEDVIN 12E Heroyiv Stalingrada
ave. 04205, Kiev Ukraine
Tel /Fax: +38 044 501 0344 // 0342
// 0366 E-mail: mail@medvin.kiev.ua
Website: www.medvin.kiev.ua

■ OTTOBRE

9-01 Kiev - Ucraina

4th Dent Life Exhibition and Congress

"Tree Expo" company 1a, Svyatoshynska-
ya str., Kiev, 03115, Ukraine Tel: + 38 44
423 30 95 // 423 30 89 Fax: +38 44
423 30 97 E-mail: info@treex.com.ua
Website: www.treex.com.ua

29-02 Sofia - Bulgaria

Sofia Dental Meeting 2011

Vilem Ltd. "Krum Popov" 62 Sofia
1421 - Bulgaria Tel: +359 888 222 480
// 888 258 210 E-mail: sofiadentalmee-
ting@dir.bg Website: www.sofiadental-
meeting.com

30-01 Duesseldorf - Germania

Infotage Dental Fachhandel West CCC Creative Communications

Concepte Gesellschaft für Marketing
& Werbung mbH Postfach 25 03 40
50678 Köln Tel: +49 (0)221 931813-0
Fax: +49 (0)221 931813-90 E-mail:
idd@ccc-werbeagentur.de Website:
www.ccc-werbeagentur.de

ORTHO

MILANO

ROMA

TORINO

SYSTEM


LABORATORI SPECIALIZZATI IN ORTODONZIA

L'allineamento dentale con le mascherine invisibili è divenuto, ultimamente, un importante elemento nei trattamenti ortodontici, specialmente negli adulti. OrthoSystemRoma partner di Ormco, propone Simpli5, 5 allineatori trasparenti per risolvere casi di moderato affollamento anteriore, diastemi o piccole recidive. Non ci sono tecnologie sofisticate ma la competente ed eccellente manualità tecnico ortodontica di sempre. Garantito.

Stefano Della Vecchia

La scelta giusta per
Piccole Correzioni e
Casi di Recidiva

Simpli5
EXPRESS ALIGNER SYSTEM

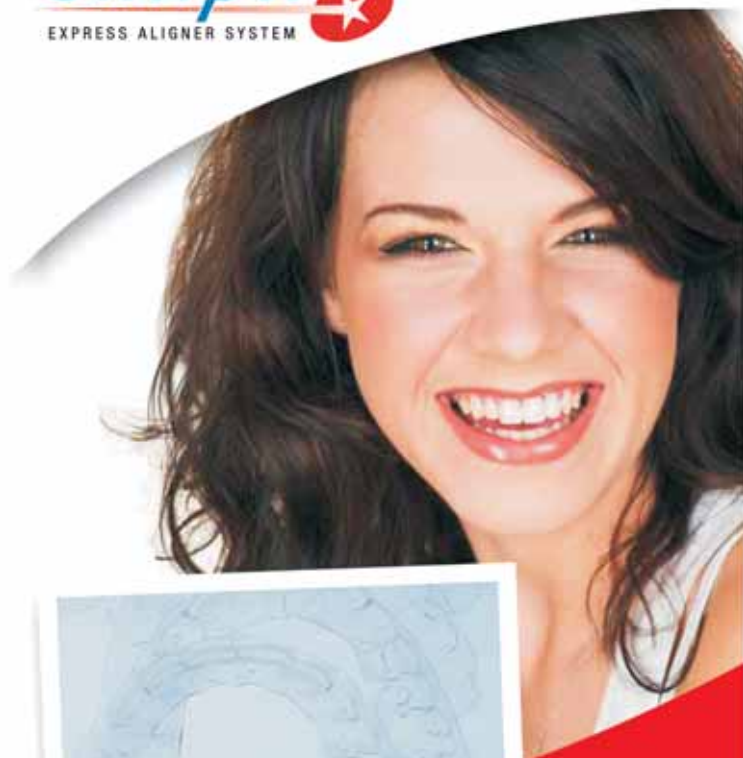

Ormco

00137 Roma
Via Andrea Checchi, 35
Tel. 06 86898994 - Fax 06 86898631
stefanodellavecchia@libero.it

DENTISTI

■ SETTEMBRE

ARGOMENTI VARI

Firenze - FI 09-10

Nobel Biocare Italiana Srl - A. Simonelli
Tel. 039/6836271 - www.nobelbiocare.com
Corso Digital Smile Design con dr. Ricci e dr. Yoschinaga

CHIRURGIA

Biella MI - 16

Nobel Biocare Italiana Srl - A. Simonelli
Tel. 039/6836271 - www.nobelbiocare.com
Chirurgia minimamente invasiva

COLORE

Sutri - VT 23

Centro sul colore di G. Spina
Tel. 0761.600396 - www.feniiiix.com
Spina G.
Corso introduttivo alla teoria del colore

ENDODONZIA

Casoria - NA 09

Dental Futura Group - Tel. 081.7576713
Pollastro Dr. G.
Corso annuale teorico-pratico di endodonzia clinica e chirurgica
50 crediti ECM

Due Carrare - PD 09

Sweden & Martina N. verde
800.010789 - www.sweden-martina.it
Marcoli Dr. P.A.

Corso teorico pratico di endodonzia

Due Carrare - PD 09

Sweden & Martina N. verde
800.010789 - www.sweden-martina.it
Marcoli Dr. P.A.

Corso teorico pratico di endodonzia - inizio corso

Milano MI - 17

Cenacolo Odontostomatologico Italiano
Tel. 02.201488 - www.cenacolo.org
La ricostruzione post endodontica

ESTETICA

Milano - MI 24

Sweden & Martina N. verde
800.010789 - www.sweden-martina.it
Gobbi Dr.ssa R.M.
Corso estetica livello base (filler)

Pesaro - PE 26

Nobel Biocare Italiana Srl - A. Simonelli
Tel. 039/6836271 - www.nobelbiocare.com
Estetica e nuovi materiali su denti e impianti

IMAGING

Milano - MI 19

Bioteck Tel. 0444.289366
Motroni Dr. A.

Dalla diagnosi alla chirurgia: applicazioni avanzate del medical imaging in campo odontoiatrico

LASER

Zola Predosa - BO 30

Sweden & Martina
N. verde 800.010789
www.sweden-martina.it
Iaria Dr. G.

Corso sul corretto utilizzo del laser a diodi in odontoiatria

MIOFUNZIONALE

San Benedetto del Tronto - AP 22-24

Tel. 0735.781520
Fax 0735.781521
iapnor@iapnor.org - www.iapnor.org
La terapia miofunzionale e la dinamica neuro mio fasciale

OCCLUSIONE

Firenze - FI 10

Cenacolo Odontostomatologico Italiano
Tel. 02.201488 - www.cenacolo.org
Le preparazioni protesiche verticali

ORTODONZIA

Genova - GE 09

Foresta Dental N. Verde 800.829004,
info@forestadental.com

Scribante Dr. A.
Corso teorico-pratico "Forze superleggere e attacchi autoleganti interattivi"
Crediti ECM

Torino - TO 15

Cenacolo Odontostomatologico Torinese
Tel. 011.734388 - www.cenacolo.org
Ortodonzia laser assistita-aspetti biofisici,clinici ed ergonomici della seconda fase implantare eseguita con la tecnica laser assistita.Valutazione in vivo e di laboratorio

Milano - MI 17

Foresta Dental N. Verde 800.829004,
info@forestadental.com
Vanni Dr. D.
Corso teorico "Ortodonzia intercettiva con dispositivi miofunzionali preformati"
Crediti ECM

Nocera Superiore - SA 17

Gto Tel. 081.474403,

EMS-SWISSQUALITY .CH

AIR-FLOW MASTER PIEZON®

→ PROFILASSI COMPLETA



NOVITÀ
DALL'INVENTORE
DEI SISTEMI
ORIGINALI
AIR-FLOW®/PIEZON®

PIEZON
NO
PAIN

METODO ORIGINALE PIEZON®

> Superfici incredibilmente lisce - azione oscillante perfettamente allineata con la superficie dei denti grazie agli strumenti EMS Swiss Instruments®.
Tecnologia i.Piezon® intelligente - massima protezione delle gengive, trattamento praticamente indolore, massimo comfort per il paziente.

METODO AIR-FLOW® ORIGINALE

> Lucidatura ad aria efficace; affidabile, veloce ed efficiente per lo studio, senza stress e confortevole per il paziente (nessuna curette - nessun rumore!).
Applicazione delicata di energia biocinetica - nessun danno all'epitelio o al tessuto connettivo, nessun graffio sulla superficie dentale.

METODO AIR-FLOW® PERIO ORIGINALE

> Rimozione efficace del biofilm fino nelle tasche periodontali più profonde, elevata riduzione dei batteri - previene la perdita dei denti (periodontite!) o degli impianti (perimplantite!). Vortice uniforme della miscela aria-polvere-acqua grazie al diffusore PERIO-FLOW brevettato - previene l'infiammazione dei tessuti molli.

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

EMS Italia S.p.A - Via Faravelli, 3/5 - IT-20149 Milano

Tel. +39 02 34 53 81 11 - Fax +39 02 34 53 27 78 - www.emsdent.com - E-mail: dental@ems-italia.it

www.gto-ortodonzia.it

Apparecchi funzionali a confronto

Firenze - FI 23-24
e20 srl Tel. 010.5960362 - www.e20srl.com
Cordasco Prof. G., Martina Prof. R.,
Bolla Dr. E., Manzo Dr. P.
**Straight Wire attraverso la tecnica
low-friction: l'evoluzione dell'ortodonzia moderna**

Monfalcone - GO 23-25
BeC srl Tel. 0761.393327 - eventi@bec.it
Martini Dr. M., Galassini Dr. G.
**Diagnosi e terapia della sindrome
algica disfunzionale delle articolazioni
temporomandibolari**

PARODONTOLOGIA

Pavia - PV 22
Cenacolo Odontostomatologico Pavese
Tel. 0382.529501 - www.cenacolo.org
**Trattamento topico delle tasche
parodontali - terapia antibiotica
50 crediti ECM**

Milano - MI 23
Cenacolo Odontostomatologico Italiano
Tel. 02.201488 - www.cenacolo.org
**Corso annuale parodontologia le
patologie parodontali non placca
correlate. Ortodonzia e malattia
parodontale**

POSTUROLOGIA

San Benedetto del Tronto - AP 16-17
Tel. 0735.781520
Fax 0735.781521
iapnor@iapnor.org - www.iapnor.org

**Semeiotica posturale in ambito
odontoiatrico****PROTESI**

Monza - MI 08
Sweden & Martina N. verde 800.01078
www.sweden-martina.it
Fichera Dr. G.
**Corso teorico-pratico di protesi
fissa e protesi estetico-adesiva -
inizio corso**

Albenga - SV 17
BeC srl Tel. 0761.393327 - eventi@bec.it
Conserva Prof. E.
**Utilizzo di materiali fotopolimerizzabili
nella pratica quotidiana del
team protesico
11,5 crediti ECM**

Rende - CS 24
Cenacolo Odontostomatologico Calabrese
Tel. 0982.91727 - www.cenacolo.org
**La protesi amovibile: varie soluzioni
terapeutiche.**

PROTESI FISSA

Bagni di Tivoli - RM 16-17
Tel. 0774.379166, 339.5419371
Cecere A.
**Corso base di modellazione naturale
in cera con la tecnica AFG**

TRAUMATOLOGIA DENTALE

Firenze - FI 24
Cenacolo Odontostomatologico Italiano
Tel. 02.201488 - www.cenacolo.org
**La sostituzione di un elemento
singolo frontale**

OTTOBRE**CERAMICA**

Firenze - FI 08
Cenacolo Odontostomatologico Italiano
Tel. 02.201488 - www.cenacolo.org
**Update sull'utilizzo della zirconia
nella pratica quotidiana**

CHIRURGIA

Koszeg - Ungheria 16-22
Dentalica Tel. 02.895981
Famà Dr. G.M.
**Corso teorico-pratico "Corso
clinico chirurgico di implantologia
con interventi su pazienti"**

Verona - VR 21
Nobel Biocare Italiana Srl - A. Simonelli
Tel. 039/6836271
www.nobelbiocare.com
Chirurgia minimamente invasiva

Milano - MI 24
Bioteck - Tel. 0444.289366
Labanca Prof. M., Rodella Prof. L.
Anatomico e clinico a confronto: le

**basi anatomiche per una corretta
chirurgia orale**

Vimercate - MB 28
Nobel Biocare Italiana Srl - A. Simonelli
Tel. 039/6836271 - www.nobelbiocare.com
Trattamento delle gravi atrofie

COLORE

Sutri - VT 29
Centro sul colore di G. Spina
Tel. 0761.600396 - www.feniiiix.com
Spina G.
Corso introduttivo alla teoria del colore


ENDODONZIA

Torino - TO 06
Cen. Odon. Torinese Tel. 011.734388
**Endodonzia legale: aspetti clinici -
endodonzia legale: aspetti giuridici**

Casoria - NA 07-08
Dental Futura Group - Tel. 081.7576713
Pollastro Dr. G.
Corso annuale teorico-pratico di

AVVERTENZE PER IL LETTORE:

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.

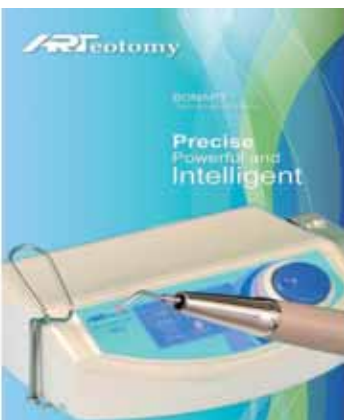**INTERFACCIA UMANIZZATA E PEDALE WIRELESS**

- Funzione facilitata con icone e touch screen
- Funzioni potenza & efficienza del taglio osseo con tocco icone o pedale
- La prevenzione della cristallizzazione dei sali con la funzione "Flush"
- La regolazione della portata del flusso di fisiologica avviene con deflussori universali
- Affidabile & stabile il controllo con pedale senza fili Bluetooth



Via Bari 167 70022 Altamura BA
Via E. Ferrari 12 40138 Bologna BO
Tel +390803114749
Fax +390803114749
Cell 3473353346
info@dentalequipmentpalumbo.com
www.dentalequipmentpalumbo.com

CORSO BASE TEORICO-PRATICO-CLINICO DI ORTODONZIA**Date Incontri:**

I Incontro 11-12 Febbraio 2012
II Incontro 9-10 Marzo 2012
III Incontro 13-14 Aprile 2012
IV Incontro 11-12 Maggio 2012
V Incontro 8-9 Giugno 2012
VI Incontro 21-22 Settembre 2012
VII Incontro 26-27 Ottobre 2012
VIII Incontro 23-24 Novembre 2012

Relatore Dr. Nunzio Cirilli



Sede del Corso: Centri Odontoiatrici Specialistiche Piazza Europa, 11 Bari.

I posti a disposizione sono 15 e le domande verranno accettate in ordine di arrivo.

Non esitare a chiedere informazioni, programma dettagliato, costi, crediti ECM a:

centriodontoiatrici@libero.it

Obiettivi del Corso: In questo momento di grandi cambiamenti in Ortodonzia un Corso base deve partire dai concetti storici discutendone la validità, stimolare la partecipazione attiva dei corsisti nella discussione e nella impostazione del piano terapeutico dei casi presentati dal relatore. Inoltre si deve dare importanza alla parte pratica su typodont e su paziente per impadronirsi delle procedure manuali necessarie al raggiungimento del risultato.



DERMAL
MEDICAL DIVISION

**Conquistare
nuovi clienti**

**Fidelizzare
i pazienti tradizionali**

**Aumentare la redditività
dello studio medico**

Questa è l'opportunità che Dermal Medical Division, partner di ANDI, mette a disposizione di dentisti e odontoiatri, affinché possano associare la cura del sorriso a quella degli inestetismi legati alle patologie dei tessuti molli del viso utilizzando le tecnologie che l'azienda produce ed esporta.

Intuendo le potenzialità del mercato dell'estetica, sono già 600 gli studi dentistici che hanno accolto con profitto questa possibilità, assicurandosi un guadagno in termini di competenze e, quindi, un indiscusso valore aggiunto a vantaggio della propria professionalità.

CHIAMA IL NUMERO VERDE
PER UNA PROVA DIMOSTRATIVA
GRATUITA PRESSO IL TUO STUDIO

Numero Verde
800.66.24.23

partner
ANDI



www.dermalmedical.it

endodonzia clinica e chirurgica
50 crediti ECM

Todi - PG 21
Sweden & Martina N. verde 800.010789
Gesi Dr. A.
Corso teorico pratico di endodonzia

ESTETICA

Milano - MI 29
Sweden & Martina N. verde 800.010789
Gobbi Dr.ssa R.M.
Corso estetica primo livello (peeling)

IMPLANTOLOGIA

Parigi - 20-22
Sweden & Martina N. verde 800.010789
Gabriele S.
Anatomia chirurgica applicata all'im-
plantologia orale e prelievi ossei

Pisa - PI 22

Sweden & Martina N. verde 800.010789
Fioretti Dr. P.

**Un moderno approccio alla terapia
implantare a carico immediato**

Torino - TO 22

Cenacolo Odontostomatologico Torinese
Tel. 011.734388 - www.cenacolo.org

**Prospettive sul carico immediato:
estetica e gestione dei tessuti
perimplantari**

Torino - TO 25

Cenacolo Odontostomatologico Torinese
Tel. 011.734388 - www.cenacolo.org

**Odontoiatria e ortodontista:
potenzialità della collaborazione e
idee per la clinica**

Torino - TO 27

Cenacolo Odontostomatologico Torinese
Tel. 011.734388 - www.cenacolo.org

**Nuovi orizzonti in implantologia
- le nuove frontiere dell'implan-
tologia osteointegrata - l'impiego
dei modelli stereolitografici in
implantologia: la chirurgia guidata
analogica (1° di 2 incontri)**

LASER

Parma - PR 28-29
Sweden & Martina N. verde 800.010789
Lancieri Dr. L.

**Nuove procedure in rigenerazione
ossea laser assistite**

Palermo - PA 30-01

Sweden & Martina N. verde 800.010789
Lancieri Dr. L.

**Nuove procedure in rigenerazione
ossea laser assistite**

ODONTOIATRIA

Vimercate - MB 07
Nobel Biocare Italiana Srl - A. Simonelli
Tel. 039/6836271 - www.nobelbiocare.com
Trattamento dei casi complessi

ORTODONZIA

Milano - MI 21-22
Foresta Dental N. Verde 800.829004,
info@forestadental.com
Bruno Dr. F.

**Corso teorico-pratico "Ortodonzia
invisibile con attacchi linguali 2D"
Crediti ECM**

PARODONTOLOGIA

Milano - MI 21-22
SidP Tel. 055.2009154 - www.sidp.it
**Corso di aggiornamento: "Il recu-
pero della funzione e dell'estetica
nei pazienti con grave compromis-
sioneparodontale"**

Milano - MI 28

Cenacolo Odontostomatologico Italiano
Tel. 02.201488 - www.cenacolo.org
**Corso di parodontologia. Trauma
occlusale e molaggio selettivo**

Milano - MI 29

Cenacolo Odontostomatologico Italiano
Tel. 02.201488 - www.cenacolo.org
**Corso avanzato ringiovanimento
dei tessuti periorali**

Rende - CS 29

Cenacolo Odontostomatologico

Calabrese Tel. 0982.91727

**La ricerca del nuovo equilibrio
occlusale con apparecchiature
low- friction**

POSTUROLOGIA

San Benedetto del Tronto - AP 28-29
Tel. 0735.781520 Fax 0735.781521
iapnor@iapnor.org - www.iapnor.org
**Semeiotica posturale in ambito
odontoiatrico**

PROTESI

Albenga - SV 01
BeC srl Tel. 0761.393327
eventi@bec.it
Conserva Prof. E.
**Utilizzo di materiali fotopolimeriz-
zabili nella pratica quotidiana del
team protesico**
11,5 crediti ECM

Torino - TO 20

Cenacolo Odontostomatologico
Torinese Tel. 011.734388

**Alternative terapeutiche nella
gestione delle atrofie mascellari
- protesi metal-free: esperienze
cliniche sul disilicato di litio
(1° di 2 incontri)**

PROTESI FISSA

Torino - TO 06
Cenacolo Odontostomatologico
Torinese Tel. 011.734388

**Corso teorico di protesi fissa: dalle
preparazioni alla cementazione**

Bagni di Tivoli - RM 14-15

Tel. 0774.379166, 339.5419371
Cecere A.

**Corso base di modellazione natu-
rale in cera con la tecnica AFG**

SEDAZIONE

Torino - TO 01
Cenacolo Odontostomatologico
Torinese Tel. 011.734388

**L'utilizzo del protossido d'azoto in
odontoiatria**

ODONTOTECNICI

▶ SETTEMBRE

CERAMICA

Brescia - BS 15-17
Siced
Tel./Fax 030.2092960
Dell'Aira A.
Full immersion in ceramica pressata

COLORE

Sutri - VT 17
Centro sul colore di G. Spina
Tel. 0761.600396
www.feniix.com
Spina G.
**Corso sul colore e forma in protesi
totale (teorico-pratico)**

Sutri - VT 23

Centro sul colore di G. Spina
Tel. 0761.600396
www.feniix.com
Spina G.
**Corso introduttivo alla teoria
del colore**

FACCETTE

Brescia - BS 02-03
Siced
Tel./Fax 030.2092960
Magne M.
**La realizzazione estetica delle
faccette in ceramica**

IMPLANTOPROTESI

Brescia - BS 23-24
Siced
Tel./Fax 030.2092960
Balbo E.
**Full immersion in implantoprotesi
(1° di 2 incontri)**

MODELLAZIONE

Brescia - BS 09-10
Tel. 335.5431320
segreteria.afg@lab@gmail.com
Carulli D.
**Corso base di modellazione con la
tecnica AFG**

PROTESI*Brescia - BS 05-06*Siced
Tel./Fax 030.2092960*Magne M.***Morfologia, ceratura e provvisori***Bergamo - BG 09*

Di.Bi. snc - Tel/Fax 030 732576

*Brunato E.***Corso base teorico/pratico protesi****OTTOBRE****COLORE***Sutri - VT 14-15*

Centro sul colore di G. Spina

Tel. 0761.600396

www.feniiiix.com

*Spina G.***Corso master sul colore (pratico)***Sutri - VT 29*

Centro sul colore di G. Spina

Tel. 0761.600396

www.feniiiix.com

*Spina G.***Corso introduttivo alla teoria del colore****FUSIONE***Brescia - BS 13-15***mobile e fissa***Rende - CS 24*

Cenacolo Odontostomatologico

Calabrese

Tel. 0982.91727

**La protesi amovibile:
varie soluzioni terapeutiche****PROTESI FISSA***Bagni di Tivoli - RM 16-17*

Tel. 0774.379166, 339.5419371

Tel. 335.5431320

dan_cla@libero.it

*Carulli D.***Master in precisione****KINESIOGRAFIA***San Benedetto del Tronto - AP 29-01*

Tel. 0735.781520

Fax 0735.781521

iapnor@iapnor.org

www.iapnor.org

Placca di Cervera**PROTESI***Brescia - BS 06-07*

Siced

Tel./Fax 030.2092960

*Cecere A.***Corso base di modellazione
naturale in cera con
la tecnica AFG****PROTESI TOTALE***Brescia - BS 22-24*

Siced - Tel./Fax 030.2092960

*Zollo A.***Full immersion in
protesi totale**

www.siced.info

*Rondoni D.***Protesi rimovibili in composito:
progettazione e realizzazione
con l'uso di muffole trasparenti****PROTESI FISSA***Bagni di Tivoli - RM 14-15*

Tel. 0774.379166, 339.5419371

www.afgtab.it

*Cecere A.***Corso base di modellazione
naturale in cera con
la tecnica AFG**

IGIENISTI, ASSISTENTI E PERSONALE AUSILIARIO

SETTEMBRE**ENDODONZIA***Rende - CS 24*

Cenacolo Odontostomatologico

Calabrese Tel. 0982.91727

**Il ripristino dell'equilibrio
dell'ecosistema del cavo
orale: aspetti microbiologici ed
accorgimenti pratici.****FOTOGRAFIA***Pavia - PV 17*

segreteria@unid.it www.unid.it

*Rocca G.***Fotografia odontoiatrica digitale,
catalogazione, gestione avanzata
immagini e creazione dossier
clinici***6 crediti ECM***PARODONTOLOGIA***Palermo - PA 24*

segreteria@unid.it www.unid.it

*Zucchinelli Dr. L., Marino Dr.ssa L.A.***Parodontologia contemporanea
5 crediti ECM***Roma - RM 26*

segreteria@unid.it www.unid.it

*Lastella Dr.ssa P.***Conservativa e Parodontologia***5 crediti ECM***OTTOBRE****PARODONTOLOGIA***Milano - MI 22*

SidP Tel. 055.2009154 - www.sidp.it

Corso di aggiornamento*Rende - CS 29*

Cenacolo Odontostomatologico Calabrese

Tel. 0982.91727

www.cenacolo.org

**Seduta teorico-pratica. Affilatura
degli strumenti parodontali non
chirurgici. terapia di supporto post
trattamento implantare. Novità
nell'uso degli ultrasuoni.***In fase di accreditamento***PEDODONZIA***Genova - GE 01*

segreteria@unid.it www.unid.it

*Lastella Dr.ssa P., Trinchieri Dr. V.***La gestione del paziente pedo-
dontico***Palermo - PA 29*

segreteria@unid.it www.unid.it

*Lastella Dr.ssa P., Trinchieri Dr. V.***La gestione del paziente pedo-
dontico****SBIANCAMENTO***Como - CO 15*

segreteria@unid.it www.unid.it

*Laveglia L., Massara G.***Pratica clinica nello sbiancamento***Padova - PD 22*

segreteria@unid.it www.unid.it

*Koellensperger P.***Corso Sbiancamento dentale:****Realtà o illusione?**

AVVERTENZE PER IL LETTORE:

Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si consiglia di consultare l'organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.

Horizon Sql Volo

Horizon Sql Volo è disponibile
in abbonamento annuale, che
ti garantisce assistenza ed
aggiornamenti
per sempre.

Cartella clinica



Preventivo con analisi costi fissi, costi
variabili e utile



Agenda multipoltrona



nuovo pacchetto gas e luce

Rugolo per eni

relax superSemplice per il business



se hai la **partita iva** con il pacchetto **relax superSemplice** di eni puoi gestire senza pensieri le spese energetiche per la tua attività grazie a:

- solo **3 voci di costo in bolletta** per monitorare meglio le spese di gas e luce:
 - piccolo contributo fisso mensile di 6,99 euro per il gas e 20,99 euro per la luce
 - corrispettivo su metricubi e chilowattora consumati
 - sconto sul corrispettivo a consumo del 25% per il gas e del 15% per la luce per i consumi annui che non eccedono quelli di un cliente tipo, pari a 1400 Smc/anno e 10.000 kWh/anno
- **prezzi di gas e luce bloccati per due anni**, comprensivi di tutte le voci di costo a esclusione delle imposte
- **stesso prezzo della luce** sia di giorno sia di notte

eni gas e luce la soluzione più semplice

chiamaci al 800 900 700 o vai su eni.com



eni



1

MICERIUM

2

IVOCLAR VIVADENT

Compositi estetici a confronto

1

MICERIUM

ENAMEL PLUS HRI

È un sistema composito innovativo che consente di risolvere l'effetto "vetro" dei restauri in composito. Il nuovo smalto universale Enamel plus HRI, realizzato con lo stesso indice di rifrazione dello smalto naturale ($n = 1,62$) consente di ottenere restauri altamente estetici con margini invisibili ed effetti opalescenti naturali con una tecnica semplice e riproducibile: uno smalto ed una o due dentine sono sufficienti per la maggior parte degli elementi da ricostruire.



2

IVOCLAR VIVADENT

IPS EMPRESS DIRECT

IPS Empress Direct è il materiale composito nano-ibrido indicato per la terapia restaurativa diretta che permette di soddisfare i massimi requisiti di estetica. Grazie all'opacità naturale, la fluorescenza e l'opalescenza del materiale lucidabile a specchio, si possono realizzare restauri estetici naturali.



Legenda: primo piano a confronto approfondimento in offerta

► Compositi estetici

Denominazione del prodotto	ADONIS	ARTISTE NANOCOMPOSITE	BEAUTIFIL FLOW PLUS	BEAUTIFIL II
Produttore	Sweden&Martina	Pentron Clinical	Shofu Inc.	Shofu Inc.
Categoria	Estetico nanoriempito	Nanocomposito	Microibrido iniettabile	Giomer nanoibrido
Indicazioni	Universale, fotopolimerizzabile, radiopaco, per restauri di elementi anteriori e posteriori a base di resina Bis-GMA e particelle inorganiche di riempitivo	Restauri di tutte le classi di cavità	Tutte le ricostruzioni, base, liner, riparazioni. Adatto alle superfici occlusali ed ai margini	Tutte le ricostruzioni, riparazioni, faccette, bordi incisali, monconi
Composizione (%)	Resina a base di BisGMA, riempitivi in vetro radiopaco, silicio, catalizzatore a base di polvere polimerica, stabilizzatori, pigmenti. Contenuto totale di riempitivo 81 in peso, 63 in volume	Miscela di PC Bis-GMA, UDMA, HDDMA, Bis-GMA	Riempitivo vetroso multifunzionale e riempitivo S-PRG a base di vetro aluminofluoro-borosilicato 67,3, matrice resina Bis-GMA/TEGDMA	Riempitivo vetroso multifunzionale e riempitivo S-PRG a base di vetro aluminofluoro-borosilicato, nanoriempitivo, 68,3 volume e 83,3 in peso, matrice Resina Bis-GMA/TEGDMA 16,7 peso
Dimensione particelle (µm)	0,05-0,9	0,02-0,7	0,01-4	0,01-4
Tempi di lavorazione alla luce (min)	> 2	•	•	70 sec
Descrizione prodotto	Suddiviso in masse Dentina (alta opacità e croma crescente), smalti (opacità e dominanti di colori variabili) ed Extreme (opacità estrema per caratterizzazioni)	Restauri altamente estetici nano progettato con sistema semplificato	Antiplacca, carica e rilascia fluoro, non appiccicoso 2 tipi, zero flow F00 non cede e flow 03, si autolivella	Antiplacca, carica e rilascia fluoro, non appiccicoso, colore stabile
Usura volumetrica	•	3,8	0,68 peso % spazzolamento	0,52 peso % spazzolamento
Radiopacità	>350%	Radiopaco	2,3 Al:mm	3,4 Al:mm
Fluorescente naturale	•	Si	Si	Si
Opalescente	Si	Si	Si	Si
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	40 colori chiari, 60 colori scuri	20	10 LED / 20 alogena	10 LED / 20 alogena
Indice di rifrazione smalto	Variabile a seconda delle colorazioni	•	•	•
Durezza Vickers (MpA)	•	•	42-43	62
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	<0,9	0,6	•	•
Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	•	2,2-2,3	4 ca.	2,6 ca.
Resistenza alla compressione (MPa)	320	160	352	330
Modulo di Young (GPa)	10.000	13,3	8,6	14
Confezionamento	Kit: 11 sir. da 3,5 gr e 2 sir. da 1 ml	Siringa 4 gr e compule 0,25 gr	Siringhe singole da 2,2 gr	Siringhe singole da 2,2 gr
Scala colori	2 folder con cunei polimerizzati di ciascuna massa	Vita Classic e Vita 3D Master	Vita	Beautiful II
N° di colori disponibili	13	16 Vita + 4 cosmetici	14	14
Utilizzabile anche in laboratorio	Si	Si	•	•
Adesivo consigliato	All-Bond3	Bond-1 SF-Pentron	BeautiBond, FL Bond, ML Primer o Porcelain Primer in base all'uso	BeautiBond, FL Bond, ML Primer o Porcelain Primer in base all'uso
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 220,00 (Kit 3 dentine+2 smalti)	Euro 36,5 (siringa 2,2 gr)	Euro 57,00 (Set e siringhe singole 4,5 gr)

* I prezzi si intendono al netto di IVA

CERAM X MONO+ E DUO	DEI CLEVER REPLY	DEI EXPERIENCE	DEI REPLY BIO	ENAMEL PLUS HFO
Dentsply De Trey	DEI Italia srl	DEI Italia srl	DEI Italia srl	Micerium spa
Nanoceramico	Ibrido	Ibrido	Ibrido con fluorapatite	Microibrido, radiopaco, fotopolimerizzabile
Restauri diretti anteriori e posteriori	Per tutti i tipi di restauri estetici	Per restauri estetici universali, faccette, intarsi, ponti e corone	Restauri estetici universali con azione rigenerante del tessuto dentinale	Ricostruzioni estetiche dirette e indirette settori anteriori e lateroposteriori
Riempitivo 57 volume. Polisilossano modificato con metacrilato, resina di metacrilato, pigmento fluorescente, stabilizzatore UV, stabilizzatore, canforochinone, Etil-4 (dimetilamino) benzoato, vetro di bario-alluminio-borosilicato, altri	Resine su base Bis-GMA, silicio e resina prepolymerizzata, vetro trattato al bario, catalizzatori, stabilizzatori, pigmenti	Resine su base Bis-GMA, vetro, additivi, pigmenti, catalizzatori	Resine Bis-GMA, riempitivi, polvere di polimeri, fluorapatite, additivi, catalizzatori, pigmenti, stabilizzanti	Riempitivo vetroso 75, resina Bis-GMA 25, butandioldimetacrilato 1,4
1,1-1,5 riempitivi vetrosi	0,05-1	0,02-1,5	0,02-1	Smalti e dentine: particelle del riempitivo, dimensione media 0,7, biossido di silicio ad alta dispersione: dimensione media delle particelle 0,04; Glass Connector, Flow: biossido di silicio ad alta dispersione: dimensione media delle particelle 0,012
•	≥ 90 sec	Max 60 sec	>120 sec	3
Materiale da restauro nano ceramico con innovativo sistema tinte	Ampia gamma di tinte e prestazioni estetiche. Resistenza, lavorabilità, stabilità di colore e dimensionale	Resistenza ed elasticità	Come il dente naturale questo composito si ricarica di fluoro permettendo la ricostituzione e il rinforzo delle strutture naturali contigue	Composito estetico fluorescente con dentine universali, smalti generici e opalescenti
0,04 mm ³ (Leinfelder a 400.000 cicli)	22 µm 200.000 cicli a 15 N	22 µm 200.000 cicli a 15 N	22 µm 200.000 cicli a 15 N	0,62% fattore d'usura, differenza dallo standard 0,05% Università di Ratisbona (ACTA Wear machine)
2 Al:mm	200% Al	200% Al	200% Al	Si
•	Si	Si	Si	Si
•	Si	Si	Si	Si
20	40 / 2 mm	Max 40 / 2 mm	40 / 2 mm	40
•	•	•	•	•
•	•	•	•	660-350
•	0,9	•	0,9	•
2,3	2	2	2	•
320	350	350	420	450-490
•	•	•	•	6.100 MPa
CompuLe 0,25 gr, siringhe 3 gr	Kit introduttivo con 11 siringhe e/o conf. da una siringa 4,5 gr	Kit con 10 siringhe e/o refill da 1 siringa da 4,5 gr	Kit introduttivo con 11 siringhe e/o conf. da una siringa 4,5 gr	Kit e ricambi in siringhe e tips monouso
Dentina e smalto con classificazione propria ma con chiaro riferimento a scala Vita	A2, A3, A35, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, grigio scuro, giallo scuro, T, blu, W=trasparente, opaco 90%	6 cervicali, 16 dentine, 6 smalti, 1 impact, 1 rosa, 2 incisali, 2 opachi	A1, A2, A3, A35, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3 + 3 tinte abbinabili del DEI Clever Reply: T, W, Opaco 90%	In composito a forma di cuneo
7 per Mono, 8 per Duo	16	33	14	7 dentine, 3 smalti generici, 4 smalti opalescenti, 2 smalti bianchi intensivi
•	No	Si	No	Si
A base di metacrilato	DEI Extrabond/DEI Fillbond	DEI Extra Bond/ DEI Fillbond	DEI ExtraBond/ DEI Fillbond	Enabond Micerium, utilizzabili anche altri adesivi
Euro 46,40 (1 siringa da 3 gr) Euro 77,40 (20 compuLe da 0,25 gr cad)	Euro 39,00-32,50 (1 siringa)	Euro 47,50-39,50 (1 siringa 4,5 gr)	Euro 58,00-48,00 (1 siringa 4,5 gr)	Da euro 199,00 (kit con accessori)

Legenda: **P** primo piano **I** a confronto **+** approfondimento **€** in offerta

► Compositi estetici

Denominazione del prodotto	ENAMEL PLUS HRI P+ I+	ESTELITE FLOW QUICK	ESTELITE FLOW QUICK HIGH FLOW	ESTELITE POSTERIOR QUICK	ESTHET X HD HIGH DEFINITION MICRO MATRIX RESTORATIVE
Produttore	Micerium spa/GDF	Tokuyama Dental Corporation	Tokuyama Dental Corporation	Tokuyama Dental Corporation	Dentsply Caulk
Categoria	Nanoibrido con smalto ad alto indice di rifrazione (1,62)	Fluido (media fluidità) supra-nano	Fluido ad alta fluidità supra-nano	Supranano riempito	Microibrido
Indicazioni	Ricostruzioni estetiche dirette e indirette settori anteriori e lateroposteriori	Per restauri diretti anteriori, posteriori e nelle tecniche MI (II classi escluse)	Indicato nei restauri diretti anteriori e posteriori come liner in cavità di I e II classe, nelle tecniche MI e riparazione di ceramica e composito.	Restauri diretti e indiretti nei settori posteriori	Universale per restauri estetici diretti ed indiretti
Composizione (%)	Dentine: riempitivo vetroso 5, resina 25: Bis-GMA 1,4 Butandioldimetacrilato, altri. Riempitivo 80 in peso di cui nano ossidi di zirconio (12 in peso), nuovo tipo di riempitivo vetroso (68 in peso)	Riempitivo di zirconia/silica e materiale composito 71, Bis-GMA e TEGDMA 29	Riempitivo di zirconia/silica e materiale composito 68, Bis-GMA e TEGDMA 32	Riempitivo di zirconia/silica e materiale composito 84, Bis-GMA e TEGDMA 16	Riempitivo 60 volume. Matrice derivato di Bis-GMA, un derivato di Bis-EMA e trietilene glicole dimetacrilato, canforochinone (CQ), fotoiniziatore, stabilizzante, pigmenti
Dimensione particelle (µm)	1	0,07-0,4	0,07-0,4	0,02-3	0,04-0,6
Tempi di lavorazione alla luce (min)	A seconda della lampada	1,5 mn	1,5	50	•
Descrizione prodotto	Stesso indice di rifrazione dello smalto naturale, consente restauri invisibili utilizzando gli spessori anatomici	Estetica naturale, mimetico grazie alla composizione submicronica	Estetica naturale, mimetico grazie alla composizione submicronica	Estetica naturale, mimetico grazie alla composizione submicronica	Materiale da restauro universale estetico indicato per il restauro di cavità su denti decidui e permanenti dei settori anteriori e posteriori
Usura volumetrica	0,62% fattore d'usura, differenza dallo standard 0,05% Università di Ratisbona (ACTA Wear machine)	0,0032 rapporto composito/smalto natulare	0,0019 rapporto composito/smalto natulare	0,0667 rapporto composito/smalto natulare	0,03 mm ³ (Leinfelder a 400.000 cicli)
Radiopacità	600% Al	185% Al	180 Al%	290 Al%	3 mm Al
Fluorescente naturale	Si	Si	Si	Si	•
Opalescente	Si	Si	Si	Si	•
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	20-40	10	10 min	10	20
Indice di rifrazione smalto	1,62	•	•	•	•
Durezza Vickers (MpA)	> 700	•	•	85	•
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	•	2,4	3	1,5	•
Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	2,3	•	•	•	2,7
Resistenza alla compressione (MPa)	>450	391	458	443	373,9±31,6
Modulo di Young (GPa)	14.500 MPa	8,5	9,6	20,2	•
Confezionamento	Kit e ricambi in siringhe e tips monouso	Kit intro da 3 siringhe o siringa singola da 1,8 gr	Siringhe 3,6 gr	Siringhe 4,2 gr	CompuLe 0,25 gr, siringhe 3 gr
Scala colori	In composito a forma di cuneo	Vita classical	Vita classical	Vita classical	TruMatch con indicazione abbinamenti opacità
N° di colori disponibili	9 dentine, 3 smalti universali, 3 smalti bianchi intensivi	17	4	4	31
Utilizzabile anche in laboratorio	Si	•	•	Si	•
Adesivo consigliato	Enabond Micerium: utilizzabili anche altri adesivi	Bond Force Tokuyama	Bond Force Tokuyama	Bond Force	A base di metacrilato
Prezzo di listino*	Euro 99,00 (kit)	Euro 25,00 (siringa da 1,8 gr)	Euro 38,00 (siringa da 3,6 gr)	Euro 42,00 (siringa da 4,2 gr)	Euro 48,90 (1 siringa da 3 gr) Euro 92,50 (20 compuLe da 0,25 gr cad)

* I prezzi si intendono al netto di IVA

GAENIAL	GRADIA DIRECT	IPS EMPRESS DIRECT ^{(P) (+)}	KALORE	OPALLIS	SURGI ESTETICH
GC Corporation	GC Corporation	Ivoclar Vivadent srl	GC Corporation	FGM	MC Italia srl
Microibrido HDR	Microibrido	Estetico nanoibrido	Nanoibrido HDR	Microibrido	Nanoibrido
Universale	Universale	Restauri anteriori, latero-posteriori, cervicali, correzioni di forma, faccette dirette	Universale, posteriori	Restauri estetici	Tutte le classi di Black
Monomeri + silice + HDR	Monomeri + riempitivi	Monomero: dimetacrilati. Riempitivi: vetro di bario, trifluoruro di itterbio, ossido misto, biossido di silicio e copolimero	Monomeri + silice + HDR	Riempitivo 80, resine 20	Riempitivo 80 volume, resina 20
Varie	Varie	0,04-3	Varie	3	0,02-0,7
6	4-5	>4	2,10	Standard ADA	1,30
•	•	Materiale da ricostruzione nanoibrido universale per restauri diretti estetici	•	Microibrido	Nanoriempito per tutte le classi di Black a massa unica
•	•	120.000 cicli a 50 N, scorrimento di 0,7 mm: perdita verticale 170-200 µm	•	50 µm test 400.000 masticazioni	•
142%	51%	350% Al dentina, 200% Al smalto	258%	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	No
Si	Si	Si	Si	Si	Si
10	10	10	10	20-40	20
•	•	1,54	•	Buona	•
•	•	HV 0,5/30 600	•	•	100
•	•	•	•	1,4	<0,09
2,4	2,6	2,06-2,47	1,7	3	<0,27
•	•	•	•	350	290
6,4	6,4	10	8,6	ADA 27	•
Siringhe, tips	Siringhe	Siringhe da 3 gr, cavilli da 0,2 gr	Siringhe	Siringa singola	Siringhe da 4 gr
Si	Si	In ceramica autoclavabili	Si	•	Vita
22	22	32 colori in 5 gradi di traslucenza	26	33	8
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Qualunque	Qualunque	Syntac, Excite con mordenzatura, AdheSE automordenzante	Qualunque	Tech Bond	Surgi ADI (monocomponente fotopolimerizzabile di V generazione)
Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 24,00 (2 gr) 44,00 (4 gr)	Non fornito

Legenda: primo piano a confronto approfondimento in offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Compositi estetici

Denominazione del prodotto	VENUS BULK FILL	VENUS DIAMOND	VENUS DIAMOND FLOW
Produttore	Heraeus GmbH	Heraeus Kulzer GmbH	Heraeus Kulzer GmbH
Categoria	Nanoibrido fluido	Nanoibrido a bassa contrazione	Flow nanoibrido
Indicazioni	Riempimento di Classi I e II, liner di cavità	Per tutte le classi di restauro	Sigillatura solchi, liner, V classe, splintaggi, I II classe minim. invasive
Composizione (%)	Vetro fluoruro di alluminio di bario silicato e Fluoruro di itterbio 65 in peso 41 volume, matrice resinosa EBADMA + UDMA	Vetro fluoruro di alluminio di bario 64 in volume + TCD e uretano dendritico	Vetro fluoruro di alluminio di bario 40,06 in volume + HEMA-TMDI e EBADMA
Dimensione particelle (µm)	0,02-0,5	0,05-20	0,02 - 20
Tempi di lavorazione alla luce (min)	80 sec	80 sec	80 sec
Descrizione prodotto	Composito fluido per ricostruzioni in blocchi da 4 mm di spessore a bassa contrazione ed alta radiopacità	Nanoibrido, bassa contrazione e stress da polimerizzazione, privo di Bis-GMA	Nanoibrido, bassa contrazione e stress da polimerizzazione, tissotropico
Usura volumetrica	32 µm (3 body wear resistance, ACTA method, poppy seed, 300.000 cycles)	Acta 300.000 cicli 19 µm, COCOM 1,5 Mio 120 µm	Acta 300.000 cicli 33 µm
Radiopacità	250%	325 Al %	295 Al %
Fluorescente naturale	No	Si	Si
Opalescente	No	Si	No
Tempo di polimerizzazione per spessore massimo di 2,5 mm (sec)	20	20-40	20-40
Indice di rifrazione smalto	•	•	•
Durezza Vickers (MpA)	•	578	•
Contrazione da polimerizzazione lineare (%)	•	•	•
Contrazione da polimerizzazione volumetrica (%)	•	1,5 %	3,4
Resistenza alla compressione (MPa)	331	•	331
Modulo di Young (GPa)	5	12,6	5
Confezionamento	Siringhe da 1,8 ml	Siringhe da 4 gr, PLT da 0,25 gr	Siringhe da 1,8 gr
Scala colori	Colore universale	In materiale composito stratificato	In materiale composito
N° di colori disponibili	1	27	14
Utilizzabile anche in laboratorio	No	Si	Si
Adesivo consigliato	iBond Total etch, iBond Self Etch	iBond Total Etch, iBond Self Etch	iBond Total Etch, iBond Self Etch
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito

GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SUI COMPOSITI ESTETICI

DEI Italia srl - www.deiitalia.it
Dentsply De Trey - Dentsply Caulk
 800.921107 - www.dentsply.it
FGM - www.fgm.ind.br
(Dati forniti da Isasan - www.isasan.com)
GC Corporation - 02.98282068 - www.gcitalia.it
Heraeus Kulzer srl - www.heraeusdental.com
Ivoclar Vivadent srl - 051.6113555 - www.ivoclarvivadent.com
MC Italia srl - 02.93570411 - www.mccitaliasrl.com
Micerium spa - 0185.7887870 - www.micerium.it
Pentron Clinical
(Dati forniti da Sigma MD - 800.866128 - www.sigmadentale.it)
Shofu Inc. *(Importatore e distributore Ilic Dr. Riccardo spa - 02.55016500 - www.ilic.it)*
Sweden & Martina spa - 049.9124300 - www.sweden-martina.com
Tokuyama Dental Italy - 0445.334545 - www.tokuyama.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE -

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

PI IPS Empress Direct



L'estetica della ceramica con i vantaggi dell'utilizzo di un composito: IPS Empress Direct è l'unico composito diretto con qualità paragonabili alla ceramica integrale IPS Empress.

Da quasi 20 anni IPS Empress è sinonimo di massima estetica nella ricostruzione delle caratteristiche dei denti naturali. Con oltre 37 milioni di restauri, il sistema IPS Empress è garanzia di colori fedeli alla natura nel tempo, di successo persistente e di elevato standard qualitativo.

L'affermato sistema è stato sviluppato ulteriormente, raggiungendo traguardi importanti di estetica, funzionalità e lavorabilità. I riempitivi di IPS Empress Direct dal punto di vista chimico sono costituiti dalle stesse componenti principali della ceramica IPS Empress. Pertanto IPS Empress Direct è il perfetto complemento del sistema IPS Empress, in quanto con questo materiale si possono realizzare restauri ad alta estetica. È il materiale composito nano-ibrido indicato per la terapia restaurativa diretta che permette di soddisfare i massimi requisiti di estetica. Grazie all'opacità naturale, la fluorescenza e l'opalescenza del materiale lucidabile a specchio, si possono realizzare restauri estetici naturali.

IPS Empress Direct consente una lavorazione precisa a condizioni di luce ottimali: l'elevata insensibilità alla luce ambientale ed alla luce scialitica, consente un tempo di lavorabilità lungo, affinché il restauro possa essere realizzato seguendo la naturale anatomia, così da raggiungere la massima estetica.

L'elevata radiopacità, inoltre, facilita il controllo della carie secondaria. La viscosità più plastica del materiale, consente la realizzazione di lavori precisi in strati profondi.


La pluriennale esperienza e le conoscenze da parte di scienziati ed esperti del colore sono convogliate nello sviluppo del sistema cromatico con masse calibrate fra loro: ne derivano 32 diversi colori in 5 differenti gradazioni di traslucenza. Due scale colori autoclavabili facilitano la scelta cromatica: le piastri sono costituite da ceramica di elevato standard qualitativo. In tal modo si assicura una stabilità ottimale e pertanto una determinazione cromatica affidabile e duratura. Sono a disposizione 13 masse dentina, 16 masse smalto e 3 masse traslucenti, che si distinguono per le loro caratteristiche ottiche.

Le differenti masse consentono di utilizzare diverse tecniche di stratificazione lasciando ampio spazio creativo così da agevolare le diverse modalità di lavorazione, soddisfacendo le possibili esigenze e conseguentemente arricchendo le varie esperienze.

Per informazioni:
Ivoclar Vivadent srl
Via Gustav Flora, 32
39025 Naturno (BZ)
Tel. 0473.670111
Fax 0473.667780
www.ivoclarvivadent.it

PI Enamel Plus HRI

L'unico composito con lo stesso indice di rifrazione del dente naturale

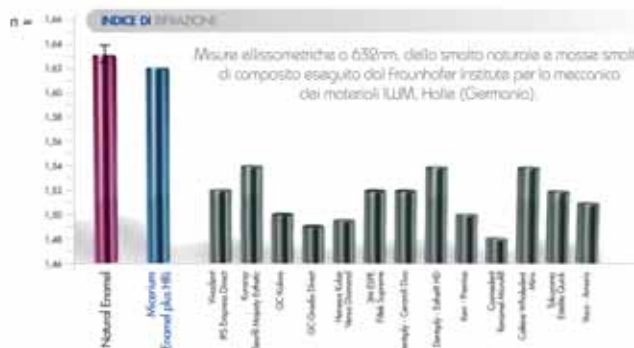

IL PROBLEMA



EFFETTO VETRO NELLE RICOSTRUZIONI IN COMPOSITO CON ALONE GRIGIO SUL MARGINE

LA SOLUZIONE



MARGINI INVISIBILI, RIPRODUCENDO CON HRI LO STESSO SPESSORE DELLO SMALTO NATURALE

I professionisti che utilizzano Enamel Plus HRI sanno che $n=1.62$ è il valore dell'indice di rifrazione dello smalto naturale.

I materiali dentali (compositi e ceramiche) sul mercato hanno un indice di rifrazione molto più basso dello smalto naturale, questo crea una deviazione della luce nel restauro e di conseguenza il problema della linea grigia sul margine della preparazione.

Enamel Plus HRI è l'unico materiale composito con lo stesso indice di rifrazione del dente naturale per cui la luce passa attraverso due corpi (smalto naturale e smalto HRI) con la stessa velocità e direzione e i margini del restauro risultano invisibili.

Nel sistema HRI le Dentine Universali hanno una fluorescenza e traslucenza calibrata sulla dentina naturale mentre tre Smalti Universali a diverso valore (basso, medio e alto) riproducono fedelmente lo smalto naturale e creano un effetto di opalescenza incisale.

Con Enamel Plus HRI la stratificazione è semplificata: con la tecnica

basic è sufficiente usare solo 1 massa smalto e 1 o 2 dentine per ottenere un risultato estetico ideale, mentre con la tecnica just enamel è possibile eseguire piccoli restauri, chiusure di diastemi e correzioni dei bordi incisali utilizzando solo lo smalto. Per gli operatori più esigenti, le masse aggiuntive di smalti opalescenti e intensivi con la tecnica master consentono di riprodurre le 5 dimensioni del colore del dente naturale secondo Lorenzo Vanini.

Enamel Plus HRI è la soluzione ideale sia per l'odontoiatria conservativa quotidiana che per restauri complessi eseguiti con tecnica diretta o indiretta, non solo nei settori anteriori ma anche in quelli posteriori.

Per informazioni:
Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (GE)
www.micerium.it
micerium@micerium.it

GRANDE

IDEA.

LA

RENDERÒ

ANCORA

PIÙ

GRANDE


Io sono la comunicazione su carta. Non esiste un altro mezzo pubblicitario così: da toccare, sfogliare, riguardare, conservare e rileggere. Ecco perché con la forza concreta ma emozionale della pubblicità stampata, puoi rendere le tue campagne ancora più forti. Scopri i miei punti di forza su: www.printpower.eu



Per saperne di più scarica il software dal sito www.upcode.fi e scatta una foto del codice con il tuo telefono cellulare.

 **PRINT
POWER**

ADD PRINT, ADD POWER

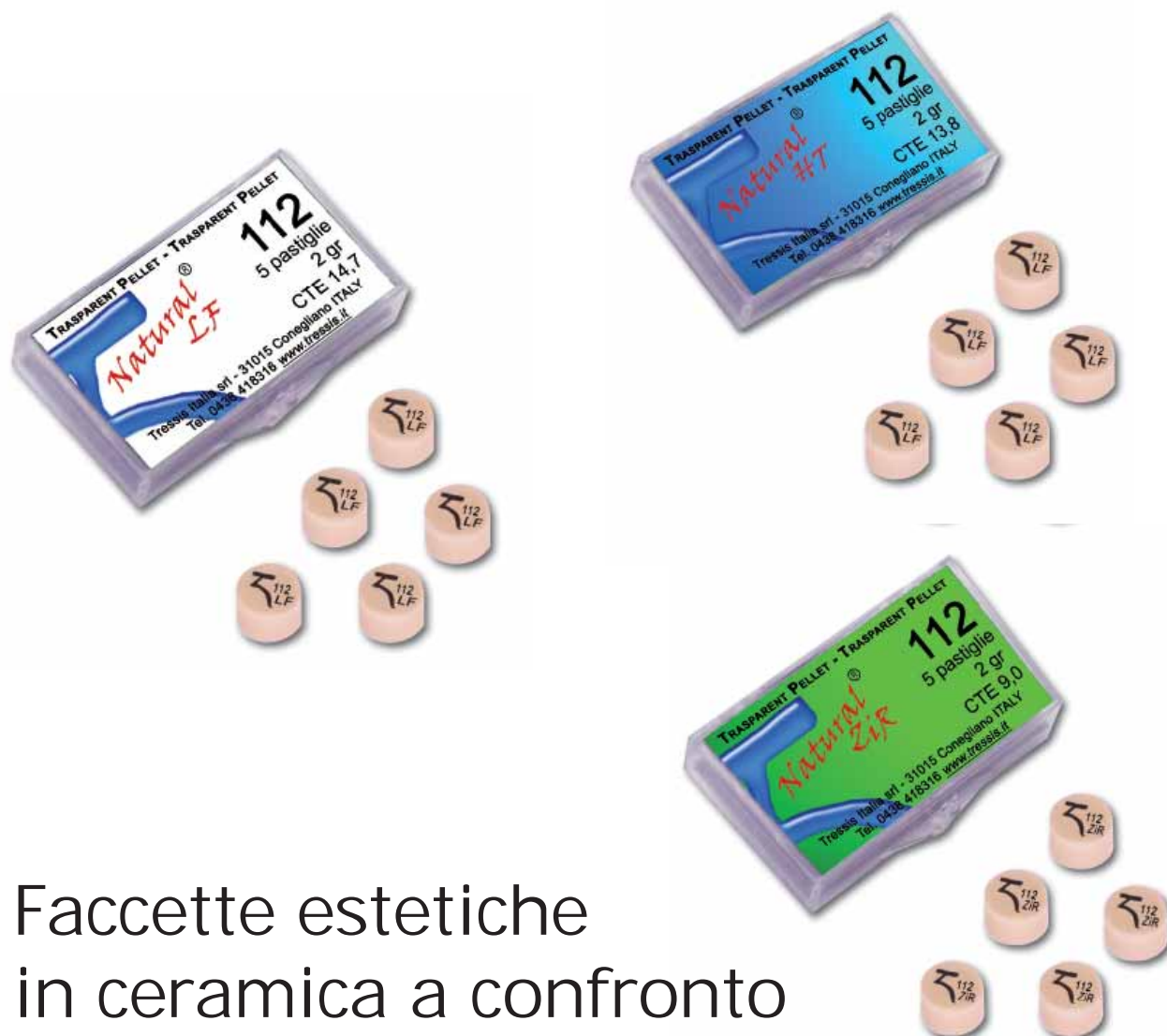

Faccette estetiche in ceramica a confronto

TRESSIS ITALIA

NATURAL LIVE EFFECT SYSTEM

Sistema integrato per Medico e Tecnico per faccette in ceramica. Tressis Italia presenta il sistema Natural Live Effect System, un sistema integrato che sviluppa una sinergia tra medico e tecnico per la realizzazione di faccette in ceramica. Niente più difficoltà nella realizzazione di faccette in ceramica: grazie al sistema Natural Live Effect il risultato altamente estetico è una realtà.

Legenda: **P** primo piano **O** a confronto **+** approfondimento **€** in offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Faccette estetiche in ceramica

Denominazione del prodotto	CERAMCO IC PTM/ALL-CERAMICS INGOT	HERACERAM PRESS	IPS IN LINE	LAMINA	LUMINESSE II LF
Produttore	Dentsply Prosthetics	Heraeus Kulzer	Ivoclar Vivadent	Shofu Inc.	Talladium Inc.
Categoria	Ceramica leucitica	Feldspatica	Feldspatica con cristalli di leucite	Feldspatica rinforzata con leucite	Ceramica vetrosa allumino silicato
Metodo di fabbricazione	Pressata, stratificata su refrattario, tecnica di pittura	Leucite stabilizzata SIS grazie alla bilanciatura dei cristalli di leucite in fase di realizzazione, prevengono un aumento incontrollato del CET e la sostanziale predisposizione alle scheggiature	Cottura su rivestimento refrattario	Cottura	Pressatura
Materiale: composizione %	80-100 sodium potassium alluminiumsilicate, Tin oxide 0-5	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , K ₂ O, Na ₂ O, Li ₂ O, CaO, B ₂ O ₃ F, CeO ₂ , SnO ₂	Ossido di alluminio 13-18, ossido di Ba 2,5, ossido di Ca 3, ossido di Na 4-8, ossido di Si 5,5- 65,5, pigmenti 2 valori in peso	SiO ₂ 57-62, AL ₂ O ₃ 14-17, K ₂ O 9-11, Na ₂ O 5 -7, pigmenti 2-4	•
Descrizione del prodotto	Sistema ceramico integrato per tecnica di stratificazione, pressatura integrale e su metallo con un unico materiale	Ceramica a pressione per ricostruzioni dentali in ceramica, faccette, intarsi, onlays, corone	Ceramiche da rivestimento estetico a base di leucite, indicate per la realizzazione di restauri in metallo ceramica con tecnica di stratificazione o di termopressatura e per realizzazione di faccette su rivest. refrattario	Ceramica per faccette e intarsi con effetto coprente e ottime caratteristiche estetiche e fisiche. Ottima anche per denti discromici	Ceramica pressabile per faccette e intarsi adatta anche alla pressatura su metallo
Sistema cromatico	Vita Classic	Vita	Chromasco e Vita Classic	Vintage Shofu	Vita
N° tinte	16	A1-D4 16 colori	20 Chromascop e 16 Vita Classic	6	20
Preparazione necessaria	•	No	Si deve possibilmente avvenire nello smalto. Non apportare i limiti incisali della preparazione nell'area delle superfici di abrasione e delle superfici di abrasione	A discrezione dell'odontoiatra	A discrezione dell'odontoiatra
Minimo spessore (mm)	0,8	0,8	0,2-0,3/0,6-1/0,8-1,2	•	0,4
Tecnica di cementazione	Adesiva	Adesiva	Con cemento composito estetico tipo VarioLink Veneer fotopolimerizzante oppure con cemento Composito fotopolimerizz. duale tipo Multilink Automix	Adesiva, cementi resinosi	Adesiva, cementi resinosi
Resistenza alla compressione (MPa)	•	•	•	•	•
Resistenza alla flessione (ISO 6872) (MPa)	90-135	120	80 ±10 N/mm ²	>85	•
Necessità di provvisorio	•	No	Si possibilmente meglio Telio Lab	A discrezione dell'odontoiatra	A discrezione dell'odontoiatra
Prezzo di listino*	Non fornito	Euro 70,40 (5 pezzi) 139,00 (10 pezzi)	Non fornito	Euro 295,00 Full set	Non fornito

GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SULLE FACLETTE ESTETICHE IN CERAMICA

Davis Schottlander LTD -
www.schottlander.com
(Importatore Yen Co -
043.8842440 - www.yenco.it)

Dentsply Prosthetics -
www.dentsply.com
Heraeus Kulzer - 02.2100941 -
www.heraeus-dental.it /

www.heraeus-heraceram.com
Ivoclar Vivadent srl -
051.6113555 -
www.ivoclarvivadent.it

Nobil Mermal spa - 0141.933811
- www.nobilmetal.it
Pentron Ceramics -
www.pentronceramics.com

Legenda: **P** primo piano **I** a confronto **+** approfondimento **€** in offerta

* I prezzi si intendono al netto di IVA

► Faccette estetiche in ceramica

Denominazione del prodotto	MATCHMAKER PRESS	NATURAL CERAMIC SYSTEM P +	PERFORMANCE PRESS ALL CERAMICS INGOTS	PRESS TIGE	VINTAGE MP
Produttore	Davis Schottlander Ltd	Tressis Italia srl	Nobil Meral spa	Pentron Ceramics	Shofu Inc.
Categoria	Matrice vetro e leucite	Vetroceramica bifasica	Ceramica sintetica leucitica	Feldspatica	Feldspatica rinforzata con leucite
Metodo di fabbricazione	Pressatura, stratificazione, lucidatura	Stampaggio e stratificazione	Pressata, possibilità di stratificazione e pittura	Pressatura	Cottura
Materiale: composizione %	Biossido di silicio 55-65, ossido d'alluminio 10-15, ossido di potassio 10-15, triossido di boro 0-2	SiO ₂ , K ₂ O, Na ₂ O, CaO, B ₂ O ₃ , BaO, CeO, TiO ₂ , Al ₂ O ₃	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , K ₂ O, Na ₂ O, CaO, B ₂ O ₃ , CeO ₂ , TiO ₂ , BaO 97-99,9, pigmenti 0,1-3	.	SiO ₂ 55-60, Al ₂ O ₃ 10-16, K ₂ O 5-11, Na ₂ O 2-16, CaO 1-2, B ₂ O ₃ 0-5, Sb ₂ O ₃ 0,1-0,2, altro 0-5
Descrizione del prodotto	Ridotti cicli di pittura	Sistema di ceramica ad alta fusione, a bassa fusione e per zirconia, utilizzabile per faccette sia con la tecnica di pressatura sia con la tecnica di stratificazione e cottura diretta su refrattario. Utilizzabile anche tecnica monomassa The One	Ceramica dentale a bassa punto fusione e alta espansione. Lingotti fluorescenti per corone integrali e faccette. Possibilità di stratificazione con la ceramica Performance oppure colorati	Ideale per la tecnica additional. Il restauro può essere ultimato per pittura. Disponibili anche 6 masse da stratificazione e 8 color Spacer in tinta	Microceramica cromaticamente stabile per ripetute cotture e indici di rifrazione analoghi a dentina e smalto naturali
Sistema cromatico	Vita	Vario	Vita	Pellet con cromaticità e trasparenze a scelta	Vita Classical
N° tinte	Tutte	Colorazione classica A-D + AO- B0 e 10 colorazioni speciali	16	4	21
Preparazione necessaria	No	Si la valutazione clinica del tipo di preparazione viene effettuata dall'odontoiatra a seconda del caso	.	No	A discrezione dell'odontoiatra
Minimo spessore (mm)	0,8	0,5	0,8	0,4	.
Tecnica di cementazione	Cementi vetroionomerici, auto e foto polimerizzabili	Adesiva, consigliato sistema di cementazione LUTE IT	Adesiva	Adesiva	Adesiva, cementi resinosi
Resistenza alla compressione (MPa)	.	148	.	.	.
Resistenza alla flessione (ISO 6872) (MPa)	115	120	85-120	165	>85
Necessità di provvisorio	No	Si valutazione clinica del tipo di provvisorio effettuata dall'odontoiatra a seconda del caso	.	.	A discrezione dell'odontoiatra
Prezzo di listino*	Euro 58,65 (5 pellet da 2 gr cad)	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito

(Importatore Sigma MD - 800.866128/06.30363699 - www.sigmadentale.it)

Shofu Inc. (Importatore e distributore Ilic Dr. Riccardo spa - 02.55016500 - www.ilic.it)

Talladium Inc. (Importatore e distributore Ilic Dr. Riccardo spa - 02.55016500 - www.ilic.it)

Tressis Italia srl - 043.8418316 - www.tressis.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE - I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

PI Natural Live Effect System

Sistema integrato per Medico e Tecnico per la realizzazione di faccette in ceramica



TRESSIS ITALIA è l'azienda che ha rivoluzionato il panorama delle ceramiche dentali in Italia e all'estero con l'innovativa monomassa THE ONE, nelle versioni LF, HT e ZIR. Ora Tressis Italia propone Natural Live Effect System, un sistema completo ed integrato che coinvolge Medico e Tecnico e crea una sinergia nella realizzazione delle faccette

in ceramica. Il sistema supporta gli operatori step by step in tutte le fasi: progettazione, realizzazione e cementazione in studio.

Natural Live Effect System per il medico dentista

Al medico dentista, chiamato sempre più ad essere anche "professionista

dell'estetica" Tressis offre:

- **Kit di frese** espressamente studiato per una preparazione precisa, sicura ed efficace delle faccette in ceramica.
- **Kit di cementazione** sistema composito che comprende otto cementi idrosolubili per previsualizzare il risultato finale e otto cementi fotopolimerizzabili per la cementazione definitiva.

Natural Live Effect System per il tecnico

Al tecnico di laboratorio Tressis offre:

- **Ceramiche Natural** realizzate solo con materie prime di altissima qualità.

Nella composizione della ceramica sono presenti dei microprismi capaci di rifrangere la luce e di dif-

fonderla all'interno del manufatto donando al restauro un effetto del tutto simile al dente naturale.

Natural Live Effect System, inoltre, mette a disposizione del medico e dell'odontotecnico protocolli di lavoro collaudati e testati, oltre alla possibilità, attraverso il **Natural Ceram Club**, di accedere ad un'ampia gamma di informazioni scientifiche e consulenze tecniche per risolvere anche i casi più complessi.

*Per informazioni:
Tressis Italia srl
Tel. 0438.418316
Assistenza tecnica:
347.9442860
www.tressis.it
info@tressis.it*

Perché VistaScan

- Perché accontentarsi di 14,3 lp/mm ... quando si possono avere 22 lp/mm?!
- Perché accontentarsi di 16.384 scale di grigi... quando si possono avere 65.536 scale di grigi?!
- Perché accontentarsi di una tecnologia comune a molti... quando si può avere una tecnologia "unica"?!
- Perché accontentarsi di sviluppare solo 4 formati di pellicole... quando si possono sviluppare tutti i 5 formati disponibili in odontoiatria?!
- Perché accontentarsi di sviluppare una pellicola alla volta... quando si può sviluppare uno status a 16 in una sola volta?!
- Perché accontentarsi... quando si può avere VistaScan?!



ARIA COMPRESSA
ASPIRAZIONE
SISTEMI IMMAGINE
CONSERVATIVA
IGIENE

Richiedete una dimostrazione, senza nessun impegno, c/o il Vostro studio e parleremo anche di igiene ed ergonomia del sistema.

Dürr Dental Italia srl
Tel. 0395970300 Fax 0395970303
info@durr.it



Video Novità

Scopri prodotti e informazioni dal canale Youtube Infodent



DENTSPLY - RECIPROC

Dentsply Italia – www.dentsply.it

Il videoredazionale che illustra il sistema Reciproc, che permette di sagomare completamente il canale radicolare con un solo strumento in nichel titanio.

goo.gl/QCsLM



Per vedere subito il video, inquadra e fotografa il codice QR con l'obiettivo del tuo cellulare.



PASTELLI A IDS 2011

PASTELLI – www.pastelli.com

Tutte le novità e i vari modelli Pastelli, attraverso una galleria di quanto presentato all'IDS di Colonia 2011.

goo.gl/Ev1dj



Per vedere subito il video, inquadra e fotografa il codice QR con l'obiettivo del tuo cellulare.



INFODENT - AMICI DI BRUGG 2011 - KERR KAVO

Kerr - www.kerrdental.it
KaVo Italia Srl - www.kavo.it

Presentazione ad Amici di Brugg 2011 di SonicFill, nato dalla sinergia tra KaVo e Kerr.

goo.gl/zn1aq



Per vedere subito il video, inquadra e fotografa il codice QR con l'obiettivo del tuo cellulare.



INFODENT - AMICI DI BRUGG 2011 - RIDENT

Rident – www.rident.it

I laser elexxion presentati da Rident ad Amici di Brugg 2011.

goo.gl/jCb3Q



Per vedere subito il video, inquadra e fotografa il codice QR con l'obiettivo del tuo cellulare.



OVUNQUE SIA IL VOSTRO STUDIO

**AUTOCLAVE 12 litri
classe B
con stampante
€ 1.650 + iva**



FODENT sas

Via Del Trullo 411, 00148 Roma
T 06.65793058
info@fodent.it
www.fodent.it

senza strumenti

€ 3.900 + iva

accessoriato

€ 5.400 + iva

2 turbine cieche
1 micromotore ad aria
ablatore con punte
lampada per composito a LED

Roland DWX-50

Il successo di un sistema completo ed aperto

La fresatrice Roland DWX-50 è una delle periferiche più innovative nel settore dentale. I fattori di questo successo sono principalmente tre: la completezza delle funzioni, la facilità d'uso e il fatto di essere una periferica a sistema aperto, collegabile cioè ai più diffusi sistemi CAD/CAM dentali.

Parlando di funzionalità, Roland DWX-50 permette all'operatore di utilizzare fino a cinque frese differenti. Grazie al cambio automatico delle frese, l'operatore può far eseguire alla fresatrice tutte le operazioni della lavorazione. DWX-50 può alloggiare frese per le varie lavorazioni: sgrossatura, finitura, sottosquadri e abutment e lavorare sui più comuni materiali in uso nei laboratori. DWX-50 calcola poi l'usura della fresa correggendola in automatico.

Altra funzione importante integrata in DWX-50 è che la macchina

lavora su cinque assi in maniera simultanea, per fresare piani e sottosquadri senza problemi. Il vantaggio di avere cinque assi in simultanea consente all'odontotecnico di lavorare nell'ambito protesico ma anche in quello dell'implantologia e dell'ortodonzia, realizzando la produzione di corone, ponti, arcate, abutment, Toronto bridge, implant bridge e scheletrati.

La facilità d'uso, una delle caratteristiche di tutti i prodotti Roland, permette al tecnico di laboratorio di essere operativo ed autonomo in tempi brevi. In questo modo, la produzione inizia in maniera rapida con un veloce ritorno dell'investimento. DWX-50 è poi caratterizzata da un costo di gestione molto basso ed un rapporto qualità/prezzo unico nel suo genere.

DWX-50 ha come altro punto vin-



cente il fatto di essere una fresatrice a sistema aperto, compatibile con formati STL ed altri e collegabile a diversi sistemi CAD/CAM. Proprio ad Amici di Brugg ad esempio, DWX-50 è stata presentata in due soluzioni di lavoro differenti. La prima prevedeva uno scanner 3Shape collegato ad un sistema CAM 3Shape™ CAMbridge™ fino alla fresatura su Roland DWX-50. La seconda soluzione invece era composta da uno scanner e CAD Dental Wings™, collegato ad un CAM SUM3D™ per fresare poi

sempre su una DWX-50 di Roland. Tutte e due le postazioni, gestite da due odontotecnici, hanno fresato sui materiali più comuni utilizzati dal laboratorio odontotecnico. ■

Roland DG Mid Europe s.r.l.

Via L. Da Vinci 1b, Zona Industriale
63030 Acquaviva Picena (AP)

Area Commerciale -
call center: 0735.586558
e-mail: dgsales@

rolanddme.com

Area Tecnica - call
center: 0735.586565

e-mail: dgservice@

rolanddme.com

Fax: 0735.576176

Sul web - Sito ufficiale:
http://www.rolanddg.it

I tempi cambiano non essere l'ultimo a seguirli



Uno sguardo più aperto verso il FUTURO

Vendita e Assistenza - Attrezzatura odontoiatrica - Materiale di consumo
Ristrutturazione e Restyling - Implantologia con Alphabio

Studio completo € 16.000 info: 06.51964623

Rossi S.r.l. Via P. Frattini, 92 - 00149 Roma

Tel. 06.51964623 - Fax 06.51956041 - info@rossi-pm.com - www.rossi-pm.com



sirona
Partner Sirona



MANFREDI

GALEO

MADE IN ITALY



Manfredi S.r.l. Via ValPellice 72 - 10060 San Secondo di Pinerolo (TO) Italy
Ph + 39 0121 501561 - Fax +39 0121 500456 - manfredi@manfredi-saed.it

www.manfredi-saed.it

Tri Auto mini

Il nuovo micromotore endodontico della Morita



Il Tri Auto mini, motore-endodontico ad elevata prestazione, eccelle per il suo elevato livello di flessibilità.

Con le sue dimensioni compatte e peso ridotto, si adatta perfettamente alla mano ed offre un grado di libertà mai visto come duttilità di impiego potendo lavorare con pile ricaricabili, senza cavi.

È possibile regolare la velocità di rotazione del file, i valori di torque e impostare varie funzioni di sicurezza premendo un pulsante, aumentando così la sicurezza del paziente. I parametri individuali di impostazione possono essere salvati per una gestione ancora più agevole. In combinazione con il localizzatore d'apice Root ZX mini, si può ottenere un unico strumento di altissima qualità per la misura ed il trattamento del canale.

I vantaggi del Tri Auto mini possono essere così sintetizzati:

- Funzioni nuove ed innovative.
- Operativo con batteria ricaricabile e senza cavi.
- Velocità variabile tra 50 - 1,000 rpm.
- 6 memorie per fissare i parametri di trattamento.
- Possibilità di connessione modulare con Root Zx mini.
- Utilizzabile con qualsiasi lima NiTi.

Queste, più nello specifico, le caratteristiche del Tri Auto mini:

- Trattamento confortevole**
- Manipolo maneggevole con testi-

na molto piccola (19mm) per un elevato comfort del paziente.

- Display LC a colori, chiaro, a risparmio energetico.
- Scelta dei toni dei segnali.
- Velocità di rotazione dei file variabili.
- Valori di torque variabili.
- 6 posizioni di salvataggio dei parametri di trattamento.

Flessibilità

- Utilizzabile con tutti i tipi di file NiTi.
- Manipolo orientabile (250°) per una visibilità ottimale in ogni quadrante.
- Range di velocità tra 50 - 1,000 rpm.
- Adatto sia per destrorsi che per mancini.
- Funzionante a batteria (ricaricabile) e senza cavi.

Sistema Modulare

- Collegabile con Root ZX mini, localizzatore apicale, mediante cavetto USB.
- Funzioni aggiuntive per un lavoro canalare ottimale.
- Misura della Lunghezza.
- Avvio e Stop automatico.
- Stop automatico all'apice.
- Inversione automatica di rotazione all'apice.
- Rallentamento automatico all'apice.

Sicurezza & Funzioni Innovative

- Auto Torque Reverse.
- Auto Torque Slow Down.

- Riduzione della velocità di rotazione al raggiungimento del limite di torque.
- Indicazione visiva sul display della posizione del file*.
- Cambio di colore del display avvicinandosi all'apex*.

In merito, Dental Claire organizza, in collaborazione con Morita Italia, 2 corsi gratuiti sull'utilizzo delle nuove tecniche per endodonzia, dove verranno utilizzati Dentaport Zx Set, il nuovo Tri Auto Mini con integrato il Root Zx Mini, Lime Endowave e si avrà l'opportunità di provare concretamente tutti i prodotti Morita.

Date: Milano, **3 maggio** - ore 10.00-13.00 in Via de Amicis 2 - Bresso (sede Morita).

La spiegazione sarà tenuta dal Dr. Boari. Roma, **12 maggio** - ore 10.00-13.00 in via Tito 17 (Studio Associato Stasi).

La spiegazione sarà tenuta dal Dr. Silvestri. I partecipanti potranno usufruire di particolari sconti sul listino Morita. ■

*in combinazione con Root ZX mini

Dental Claire
Di Porcelli Cinzia
Via Vittorio Veneto, 125
20091 Bresso (MI)
Cell. 347.3405785
Dentalclaire@hotmail.it



L'endodonzia nel palmo di una mano

Tri Auto Mini



Trattamento confortevole

- Manipolo maneggevole con testina molto piccola (19mm)
- Display LCD a colori, a risparmio energetico
- Scelta dei toni dei segnali
- Velocità di rotazione dei file variabili
- Valori di torque variabili
- 6 posizioni di salvataggio dei parametri di trattamento

Flessibilità

- Utilizzabile con tutti i tipi di file NiTi
- Testina girevole (250°)
- Range di velocità tra 50 - 1,000 rpm
- Adatto per destrorsi che per mancini
- Funzionante a batteria (ricaricabile) e ...senza cavi

Scrivi a :
dentalclaire@hotmail.it

Ti invieremo gratuitamente il preventivo ed una brochure del prodotto.

Solo il micromotore

€ 999

Rilevatore + Micromotore

€ 1750



Dental Claire
dentalclaire@hotmail.it

Unico test di ammissione per Medicina e Odontoiatria

Come prepararsi

Una novità importante interessa quest'anno gli aspiranti medici e odontoiatri: il test d'ammissione sarà unico e si terrà in tutte le università statali il **5 settembre**. In base al punteggio realizzato al test, sarà possibile figurare in graduatoria sia per Medicina sia per Odontoiatria, in base alla preferenza del candidato. Per ciò che riguarda le materie è atteso un aumento delle domande di Biologia, Fisica, Chimica, Matematica e Ragionamento logico, a spese di quelle di cultura generale.

Per superare la selezione segnaliamo le **proposte di Alpha Test**, da 25 anni leader nella preparazione ai test con corsi e libri specifici. I corsi estivi più completi si svolgono dal 18 luglio al 29 luglio (prima parte) e dal 17 al 29 agosto (seconda

parte) per un totale di 70 ore di lezione in 20 incontri e prevedono un ripasso mirato di tutta la teoria, numerose esercitazioni e prove simulate di test. Corsi più brevi si svolgono dal 16 al 29 agosto o dal 22 agosto al 3 settembre per un totale di 48 ore di lezione in 12 incontri. Le sedi dei corsi sono: Milano, Roma, Torino, Napoli, Padova, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Bari, Pisa, Pescara, Cagliari, Trieste, Palermo e Novara. Per gli studenti di tutta Italia, segnaliamo la vacanza-studio presso Il Ciocco, dal 14 al 27 agosto nel cuore della Garfagnana, per un programma intensivo di lezioni ed esercitazioni alternato a momenti di sport e divertimento.

Gli studenti iscritti ai corsi benefi-



ciano dell'esperienza dei docenti Alpha Test, di materiale didattico a loro riservato e ricevono, compresi nella quota di partecipazione, 3 libri: il manuale di Teoria (Teoritest) e gli eserciziari (Esercitest e Veritest). Tra i libri Alpha Test segnaliamo anche il nuovo volume 2500 quiz di ragionamento logico, dedicato alle numerose domande di logica presenti in tutti i test dell'area medica. Altri due nuovi



volumi sono dedicati ai test delle università Cattolica di Roma e San Raffaele di Milano. ■

Per informazioni, iscrizioni ai corsi e acquisto dei libri sono disponibili il numero verde 800.017326 e il sito www.alphatest.it.



oxyimplant.com

CREATING BEAUTIFUL SMILES

L'affidabilità dei risultati

Innovazione, Tecnologia ed Esperienza trentennale, racchiusi in una linea implantare pensata per essere l'alleata ideale per professionisti e la soluzione definitiva per i pazienti.



REGOLAZIONE ed. IT



implant line

OXY
implant
DENTAL SYSTEM

www.oxyimplant.com - info@oxyimplant.com
Via Nazionale Nord, 21/A - 23823 Colico (Lc)
Tel. +39 0341 930166 - Fax +39 0341 930201
by BIOMECC S.r.l.

Galileo: piccola saldatrice laser con grandi prestazioni

Piccolo, ma i suoi **70 joule** effettivi di potenza permettono di poter saldare qualsiasi struttura metallica (Titanio incluso) con la massima precisione e senza scomode interruzioni. Il circuito di raffreddamento è ad acqua, adatto al carico di lavoro del laboratorio odontotecnico.

Installazione "plug & play": semplice e rapida non richiede l'intervento da parte di un tecnico installatore.

Galileo è adatto anche ai neofiti della saldatura; l'ampio display a colori permette con facilità di calibrare i parametri e di salvarli rapidamente personalizzando il programma. Il laser consente di memorizzare ben 50 programmi di saldatura variabili a seconda del tipo di lega.

Pulse shaping è il software che permette all'odontotecnico di poter costruire la forma d'onda desiderata per migliorare ulteriormente la qualità della saldatura. Grazie a questo nuovo sistema di controllo si ha la possibilità di ottenere risultati estetici ottimi con punti di saldatura con

diametri regolabili fino ad un minimo di diametro pari a 0.2 mm ed un massimo di 2 mm. Questa funzione permette di saldare senza dover smontare parti in resina o compositi.

Sleep mode è il sistema che consente al laser di risparmiare energia evitando inutili sprechi di corrente e di aumentare al massimo la vita dei componenti macchina.

L'illuminazione è composta da ben tre piastre a led (luce fredda) per un totale di 114 punti led, che permette di lavorare con una luce uniforme e intensa senza stancare gli occhi dell'operatore e senza zone d'ombra.

Aggiornamento del software possibile tramite porta USB.

Stereomicroscopio con binoculari 10 x, consente di poter saldare con estrema precisione. Protezione ottica per raggi UV e radiazioni laser tutelano l'operatore.

Saldatura con gas inerte ancora più facile grazie all'erogatore di argon regolabile in intensità e coassiale.



Laser pin è il puntatore che consente di saldare con facilità anche nei punti più critici vicini a ceramiche e resine sovente danneggiate da altre sistematiche di saldatura.

La versatilità del macchinario ed il suo basso costo permettono all'odontotecnico di giustificare la presenza all'interno del laboratorio che andrà a ridurre tempi e costi di saldatura, offrendo al mercato una più alta qualità estetica del manufatto. ■

Manfredi Srl
Tel. 0121.501561
manfredi@manfredi-saed.it
www.manfredi-saed.it

LINE.up ed eco.LINE

Ergonomia ed efficienza al centro dello studio odontoiatrico

LINEA DIRETTA lavora per realizzare studi ergonomici, invertendo la tendenza comune a tecnologizzare eccessivamente le attrezzature presenti nello studio dentistico, soprattutto quando si vanno a complicare troppo macchinari nati con un'anima semplice.

Un esempio pratico di tale processo, direzionato verso una maggiore semplificazione delle componenti elettroniche, lo si può ritrovare nei riuniti LINE.up ed eco.LINE.

Questi, infatti, sfruttano un sistema di pneumo-valvole al posto delle elettro-valvole (l'apertura delle valvole avviene tramite un impulso pneumatico anziché elettrico): tale espediente permette di ridurre l'uso di fili elettrici e schede che possono creare più facilmente problemi, senza dimenticare i frequenti costi di assistenza per la

sostituzione di parti elettriche. Un altro esempio è l'utilizzo di magneti per l'apertura dei carter, in modo da agevolare l'ispezione, la pulizia e l'igienizzazione giornaliera.

Lo sviluppo di questi riuniti è basato sul principio di ergonomia: eco.LINE e Line up sono attrezzature affidabili, funzionali ed accessoriate in modo completo.

L'assistenza è garantita in tutta Italia ed i pezzi di ricambio sono immediatamente disponibili a magazzino. La loro progettazione è concordata da Linea Diretta con la casa madre, la produzione viene costantemente seguita, il controllo di qualità è eseguito rigorosamente su ogni singolo pezzo. Vengono inoltre forniti servizi come la progettazione di studi dentistici funzionali ed eleganti, studiati per soddi-



sfare le esigenze dell'odontoiatra, nel rispetto delle normative.

È possibile prendere visione di tutte le attrezzature - presso lo showroom a Leffe (Bergamo), aperto anche sabato e domenica su appuntamento (tel. 030.9383411) - visitando il sito internet www.lineadirettamed.com, dove sono presenti i prodotti con i relativi prezzi e le descrizioni, a testimonianza della trasparenza con cui questa società si muove sul mercato. ■

Linea Diretta
Leffe (BG)
Tel. 030.9383411
www.lineadirettamed.com



MARIOTTI

Mini Endos
motore per endodonzia



- Alta tecnologia
- Massima affidabilità
- Grandi performance
- Facilità d'uso

mini **UNIKO**
Motore per implantologia



MARIOTTI & C. srl
Via Seganti 73
47100 Forlì - Italy
T +39 0543 474105
F +39 0543 781811
info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com

BRAVIA® L

la nuovissima
turbina con
prestazioni
superiori



SIMPLIFYING DENTAL MOTION

Via del Pescinale, 77- 50041 Calenzano - ITALY
+39 055 8825741 - +39 055 8825764
info@teknedental.com www.teknedental.com



INFODENT 6-7/2011 - 36

DALLE AZIENDE

XDent

Il meglio della tecnologia software per lo studio dentistico



Presentata al 54° Congresso Amici di Brugg 2011 la versione 5 di XDent, il software gestionale più evoluto per l'automazione dello studio dentistico disponibile in forma nativa per computer Apple Mac, per PC con Windows o Linux e per dispositivi mobili iPad e iPhone,

XDent è l'unico software sul mercato italiano disponibile in tre distinte versioni per MacOSX, Windows e Linux, ognuna in grado di sfruttare caratteristiche ed efficienza dei diversi sistemi senza usare software di virtualizzazione. Può essere usato anche in studi dove coesistono computer Mac e computer Windows o Linux, ed è la scelta ottimale se si sta pianificando una migrazione alla piattaforma Apple perché consente di cambiare i PC gradualmente. Con XDent iPhone edition e XDent iPad edition si utilizzano iPhone e iPad per operare sui planning appuntamenti, sulle anagrafiche pazienti e sui piani di cura da qualsiasi luogo. Su iPad, si possono inoltre visualizzare le immagini diagnostiche. Il tutto mantenendo i dati aggiornati in tempo reale con le postazioni di studio.

La versione 5 racchiude tante novità che rendono l'esperienza d'uso di XDent sempre più unica. Tra queste:

- Nuovi strumenti di Editing e di Misura sulle immagini diagnostiche;
- Un nuovo modo di vedere la gestione dei dati ortodontici;
- Scheda impiantare;
- Nuovo esame obiettivo;

maggior flessibilità con l'archivio delle Prestazioni e degli Stati rilevati;

- **Odontogramma e piani di trattamento:** nuova grafica delle prestazioni e nuove funzioni con gestione di migrazioni mesiali e distali;
- **Gestione delle fasi di lavorazione delle prestazioni;**
- Nuova gestione dei dati anamnestici pienamente integrata con le soluzioni iPad;
- Comunicazioni VoIP con riconoscimento del paziente chiamante.

XDent integra soluzioni VoIP, e-Print ed invio SMS per inviare i richiami e gestire le comunicazioni con i pazienti. È un prodotto esclusivo, la soluzione per semplificare l'attività dell'odontoiatra e dei suoi assistenti, per migliorare la qualità dei servizi offerti e per ridurre i costi gestionali. ■

TEKNE informatica & comunicazione
Via Cupoletti, 1
97100 Ragusa
Area Centro Sud Italia
0932.681600
Area Nord Italia
0444.371352
commerciale@xdent.it
www.xdent.it



Per vedere subito il video, inquadra e fotografa il codice QR con l'obiettivo del tuo cellulare.

NATURAL CERAMIC SYSTEM

Il sistema italiano più completo di ceramiche dentali



Il sistema ceramico Natural THE ONE:
Natural HT vaso blu, Natural LF vaso bianco, Natural ZiR vaso verde.

TRESSIS ITALIA si distingue per essere l'unica azienda italiana presente sul mercato con 3 linee di ceramica proprie.

NATURAL CERAMIC SYSTEM, con la sua completezza, è capace di soddisfare pienamente le richieste dei tecnici più esigenti.

Tutte le ceramiche NATURAL SYSTEM sono estremamente camaleontiche e si integrano perfettamente nel cavo orale trasformando un buon risultato estetico nella totale soddisfazione del paziente.

NATURAL HT linea di ceramica tradizionale WAK 13.1 (per stratifica e stampaggio).

NATURAL LF linea di ceramica a bassa fusione WAK 14.7 (per stratifica e stampaggio).

NATURAL ZiR linea di ceramica per zirconia WAK 9.0 (per stratifica e stampaggio).

Monomassa Natural The One: Tressis Italia per prima ha realizzato la monomassa che ha rivoluzionato il panorama delle ceramiche dentali in Italia e non solo.

Natural THE ONE, con sole 3 masse, copre l'intera gamma delle scale colori tradizionali e permette al tecnico di realizzare corone altamente estetiche (fig. 1, fig. 3 e fig. 4).

Natural THE ONE è una risposta attuale e moderna alle esigenze del mercato:

- facile approccio,
- investimento minimo,
- resa elevata grazie alla bassa retrazione,
- ottima resistenza alle cotture,
- nessuna giacenza in laboratorio di colori poco usati.

Natural Universal Stains:

- in polvere e in pasta, universali

per tutte le linee Natural Ceramic System,

- facile stesura, consistenza ottimale che non genera macchie di colore,
- trasparenza e fluorescenza che donano al dente profondità naturale e tridimensionalità,
- colori di pittura applicabili sia esternamente che internamente,
- alta resistenza alle cotture con ampio range da 750° a 920°.

Natural Universal Glaze FX:

- glasura in pasta già pronta per ceramiche tradizionali, a bassa fusione e per zirconio,
- utilizzabile con un range di temperature da 750° a 920°,
- applicabile anche direttamente sullo zirconio.

Natural Liner 3D:

Natural ZiR Liner colorati di nuova generazione capaci di donare profondità e tridimensionalità agli elementi in zirconio.

I Liner 3D sono in grado di cromatizzare perfettamente lo zirconio bianco (fig. 2) senza opacizzare le strutture.

I Natural Liner 3D sono altamente fluorescenti e vivacizzano la struttura in zirconio.

Con i Liner 3D è facile rimediare a piccoli errori di fresaggio o di occlusione perché possono ricostruire particolari della sottostruttura, innalzare cuspidi, restituendo un'adeguata morfologia alla cappetta. ■

Contattaci:

- richiedi informazioni a info@tressis.it
- visita il nostro sito www.tressis.it
- testa il materiale partecipando ai nostri seminari NATURAL DAY

TRESSIS ITALIA SRL
Viale Italia, 194



fig. 1: Molare in Natural THE ONE ZiR, caratterizzato con: Chroma A colletto Bianco 113 sulle cuspidi Meteorite 12 zona occlusale



fig. 2: Sistema Natural Liner 3D su sottostruttura in zirconia bianca:
Liner 3D Arancio cuspidale SX
Liner 3D Lune incisale centrale
Liner 3D Chroma A colletto centrale
Liner 3D Chroma A elemento DX



fig. 3: Ponte in Natural THE ONE HT, caratterizzato con: Chroma A colletto Bianco 113 zona incisale Azzurro 119 zona incisale



fig. 4: Molare in Natural THE ONE LF

31015 Conegliano (TV)
Tel. (+39) 0438.418316
Fax (+39) 0438.426450
Service-on-line (+39) 347.9442860
info@tressis.it
www.tressis.it



diventa anche tu...
odontotecnologico

www.cadcamdentale.abacus.it
telefono 0523 590640



SISTEMA CAD CAM

APERTO
VELOCE
FACILE
PRECISO
ECONOMICO

richiedi
il tuo
preventivo
adesso!

formazione personalizzata
finanziamenti
TASSO ZERO

Gelness

Eurodent rivoluziona la poltrona odontoiatrica



Una nuova poltrona è nata in casa Eurodent: **Gelness**.

Con un forte impatto estetico e rivoluzionaria nei contenuti, Gelness è vestita da una tappezzeria anatomica, soffice e gradevole al tatto, definita da una speciale schiuma ad alta qualità, capace di adattarsi alla personale struttura morfologica del corpo, ed in grado di ritornare nella forma originaria in modo lento e controllato. Gelness diventa però unica nel suo genere, se si considerano gli inserti in gel tecnico presente nella imbottitura

dello schienale e della base, ed in posizione di appoggio anatomico del corpo. Il gel tecnico utilizzato da un **brevetto Bayer**, è un materiale poliuretano totalmente atossico, privo di plastificanti e di altre sostanze volatili che non indurisce e non invecchia, mantenendo a lungo le proprietà elastomeccaniche; ciò garantisce una durata sensibilmente maggiore della efficacia della imbottitura della poltrona Gelness.

Il gel tecnico possiede inoltre una **alta capacità di distribuzio-**

ne della pressione corporea; i comuni materiali utilizzati normalmente nelle imbottiture, tendono a creare una concentrazione di pressione nei punti di appoggio, e generano così calore localizzato e senso di fastidio. Al contrario, il gel tecnico presente nella poltrona Gelness, è stato studiato in modo da modellarsi sulla conformazione fisica dell'utilizzatore e distribuire la pressione corporea sull'intera area di appoggio. Pertanto i vantaggi più evidenti della seduta sulla poltrona Gelness sono **un miglioramento della circolazione sanguigna, e la capacità di mantenere una postura corretta** senza "assettamenti" e ricerca di posizioni innaturali necessari ad alleviare il disagio derivante dalla concentrazione della pressione.

Un'altra caratteristica della poltrona Gelness è che gli inserti in gel tecnico presenti nella tappezzeria, hanno una **bassa conducibilità termica**; questo si traduce in una stabilità della temperatura dell'inserto, al di sotto di quella corporea.

In tal modo, **l'imbottitura della poltrona Gelness favorisce**

la circolazione sanguigna e l'ossigenazione dei tessuti cutanei e sottocutanei, oltre a generare una piacevole sensazione di freschezza e comodità.

Superlativo poi il poggiatesta, completamente in gel tecnico trasparente ed elettromeccanico, per un comfort irraggiungibile. ■

www.eurodent.it



Per vedere subito il video, inquadra e fotografa il codice QR con l'obiettivo del tuo cellulare.

Milling Center

PRODOTTI

Cappette
Ponti
Abutment
Milled-Bar
Implant-Bridge

MATERIALI

Cromo-Cobalto
Titanio
Zirconio
PMMA

OFFERTA a partire da
€440
MilledBar +VITITM



OMBI srl • Strada per Carrone, 30 • 10019 STRAMBINO (TO) Italy
+39 0125 639370 • infodental@ombi.it • www.ombi.it

OFFERTE DALLE AZIENDE

Le promozioni degli operatori commerciali
Una rubrica utile che evidenzia gli "affari"
periodicamente proposti dagli operatori.



IL NUOVO MANUALE DI FOTOGRAFIA DIGITALE ODONTOIATRICA

Guida completa ed utile nella pratica quotidiana dello studio odontoiatrico e del laboratorio odontotecnico. Edizione 2005.

PREZZO TAGLIATO ≈ **EURO 58,00** iva e spedizione inclusi

BEC SRL Numero Verde: 800.238.779 - www.infodent.it



LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IN ODONTOIATRICA

Robert Cavezian, Gérard Pasquet - edizione italiana a cura di Antonio Leccisotti.

Il manuale che mira a far conoscere le novità sullo sviluppo tecnologico della diagnostica per immagini.

PREZZO TAGLIATO ≈ **EURO 52,00** iva e spedizione inclusi

BEC SRL Numero Verde: 800.238.779 - www.infodent.it



NUOVO CUCCILO CC3

Fresatore nuova serie CC3, completo di micromotore 30.000 rpm, mandrino posa-attacchi, aria, luce e base porta-modelli.

PREZZO TAGLIATO ≈ **EURO 1.814,00 + iva**

MARIOTTI&C srl
Via Seganti 73, 47100 Forlì
Tel 0543.474105 - Fax 0543.781811
e-mail: info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com



NUOVO MICROMOTORE X9 MARIOTTI

X9 con reostato pedale 1.000-35.000 rpm, massima duttilità e robustezza per tutti i lavori in laboratorio, la garanzia di un Made in Italy di qualità.

PREZZO LANCIO ≈ **EURO 460,00 + iva**

MARIOTTI&C srl
Via Seganti 73, 47100 Forlì - Tel 0543.474105 - Fax 0543.781811
e-mail: info@mariotti-italy.com - www.mariotti-italy.com

Legenda: **ⓘ** = scheda informativa
Ⓐ = approfondimenti

I beni offerti in questa sezione si intendono destinati all'utilizzatore professionale. Le apparecchiature soggette alla regolamentazione di cui alla Legge 175/92 possono essere cedute solamente agli iscritti all'Albo dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri. Per ogni informazione sulle offerte qui elencate il lettore interessato è invitato a rivolgersi direttamente all'inserzionista.

Fresatrice dentale Roland DWX-50. Dedicata al tuo laboratorio odontotecnico.

Finalmente puoi lavorare in tutta libertà. Con Roland DWX-50. La fresatrice a cinque assi in movimento continuo per realizzare applicazioni dentali in modo autonomo. Ad un prezzo accessibile a tutti.

- Ideale per creare arcate, abutment, ponti, cappette e corone.
- Lavora su zirconia, cere, resine calcinabili e PMMA.
- Supporta fino a 5 utensili con cambio automatico.
- Compatibile con i più diffusi scanner 3D e software CAD/CAM.
- Intuitivo pannello grafico VPanel per gestire ogni fase del lavoro.
- Sistema di aspirazione per le polveri di lavorazione.
- Garanzia e supporto tecnico professionale Roland DG Care.



Roland DG Mid Europe S.R.L.
via L. Da Vinci, 1/b Zona Industriale
63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALIA
Tel. (+39) 0735 586558
Fax (+39) 0735 576176
dgsales@rolanddme.com

www.rolanddg.it | www.rolandeasyshape.com

**EASY
SHAPE**
Roland
DENTAL SOLUTION

ANNUNCI ECONOMICI

OFFRO COLLABORAZIONE

• 25 anni di esperienza in implantologia a tua disposizione! Vuoi realizzare per il tuo paziente un ottimo prodotto ma non ti senti ancora sicuro? Chiama: impianto (compresa fixture) euro 500,00. Impianto protesizzato (compresa fixture, abutment - capsula) euro 1.000,00. Servizio per Roma e provincia. Telefonare al 348.3836006.

• 44enne, bella presenza, esperienza 12ale, referenziata, determinata, dinamica, puntuale, buone capacità relazionali, minima conoscenza del Pc, cerca serio impiego part-time

in studi dentistici come segretaria e assistente alla poltrona. Zone di lavoro Roma sud, Montagnola, Eur, Torrino-Mostacciano. Telefonare al 334.7069736 cortesemente mattina o sera dopo le ore 20,00.

• Assistente - segretaria, esperienza ventennale, con capacità relazionale, cerca impiego part-time con qualsiasi tipo di contratto di lavoro. Zona Roma sud e provincia. Telefonare al 06.9343111.

• Assistente alla poltrona con mansioni di segreteria esperta, assicura e richiede massima serietà, cerca lavoro presso studio dentistico full time. Telefonare allo 06.3053408, o al 334.8575800.

• Assistente alla poltrona, con espe-

rienza pluriennale, bella presenza, cerca serio impiego presso studio odontoiatrico, con orario part-time, verticale o orizzontale. Zona Roma nord, Setteville, Guidonia, Settecamini. Massima serietà. Telefonare al 338.3715916.

• Assistente alla poltrona, esperta, cerca studio dentistico full o part-time. Zona Roma, Viterbo, Terni o relative province. Telefonare al 392.3242314.

• Assistente-segretaria-igienista laureata, esperienza trentennale nella conduzione di studi medici dentistici, diploma di scuola media superiore, referenziata, capacità relazionale, disponibilità part-time oppure orario continuato. Telefonare

al 347.5809617.

• Dottoressa laureata nel 2000, perfezionata in pedodonzia con 10 anni di esperienza in strutture pubbliche e private in ortodonzia, cerca consulenza di ortodonzia in studi siti in Cassino, Isernia, Piedimonte Matese, Roma. Per informazioni telefonare al 347. 8020245.

• Esperta di assistenza alla poltrona, con mansioni di segretaria, 44 anni, cerca impiego preferibilmente la mattina. Zona Eur, Torrino-Mostacciano, Roma sud, Montagnola. Telefonare allo 06.51980355 mattina o sera dopo le 20,00.

• Igienista dentale laureata con partita iva offre consulenza uno o due giorni a settimana in studi dentistici

COLLEGATI ALL'INDIRIZZO INTERNET WWW.INFOIDENT.IT ED INSERISCI ANCHE ON-LINE IL TESTO DEL TUO ANNUNCIO. I testi degli annunci di interesse odontoiatrico sono visionati preventivamente dall'A.N.D.I. - Dipartimento Regionale Lazio

ANNUNCI GRATUITI
 VARIAZIONE DATI



Indirizzo: Strada Teverina Km. 3,600 • 01100 VITERBO • Tel. 0761.393.204 • Fax 0761.393.222

Nome Cognome

Tipo di attività Specializzazione

Via Numero CAP

Città Prov. Tel.

E-mail PIVA Cell.

(Per annunci a pagamento è obbligatoria la partita iva e il codice fiscale)

OFFRO O CERCO COLLABORAZIONE ATTREZZATURE ATTIVITA'

Spazio per l'annuncio (scrivere a macchina o stampatello) MAX 30 PAROLE • Sarà pubblicato solo il testo sottostante*

.....

.....

.....

*IMPORTANTE

Gli annunci riguardanti la ricerca di collaborazioni (ricerca personale, collaboratori ecc.) devono essere pubblicati corredati delle generalità del richiedente, in ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, attuazione della legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge 14 febbraio 2003 n. 30, cosiddetta "legge Biagi"). In relazione a quanto sopra, in base a quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/03 che regola il trattamento dei dati personali, si autorizza la pubblicazione delle generalità suindicate.

data

Nome e Cognome (in stampatello)

.....

.....

firma

Per la comunicazione telefonica degli annunci economici è attiva negli orari di ufficio una segreteria telefonica al numero 0761.393.204 dal lunedì al venerdì. **ATTENZIONE** SARANNO PUBBLICATI SOLO GLI ANNUNCI COMPLETI DI TUTTI I DATI RICHIESTI: NOME, COGNOME, INDIRIZZO, CAP, CITTÀ, TELEFONO, PREFISSO E PROFESSIONE. **Gli annunci si ricevono fino al 5 di ogni mese precedente l'uscita** e saranno pubblicati una sola volta. Per vedere pubblicato nuovamente il proprio annuncio, occorre spedire il coupon per una nuova richiesta oppure comunicare telefonicamente la ricorrenza. Se si desidera pubblicare in evidenza è necessario effettuare un bonifico bancario di Euro 20,00 IVA compresa intestato a BeC srl - IBAN: IT48089311450200002090206, allegando copia al presente codolino. Il pagamento dà diritto a 2 uscite. INFODENT offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti sulle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile della veridicità delle inserzioni. Si procederà a norma di legge contro chiunque si servirà di questa rivista per scopi illeciti e di disturbo. Le inserzioni gratuite sono riservate ai privati. Gli operatori commerciali, per le inserzioni che riguardano l'attività svolta, devono servirsi degli annunci a pagamento o degli spazi pubblicitari. *Si sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati avverrà mediante supporti*

telematici che cartacei, entrambi eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la pubblicazione dell'annuncio o per il ricevimento della rivista. La mancata comunicazione, ovvero l'accertata errore dei dati richiesti legittimeranno la nostra società a rifiutare l'esecuzione del rapporto, ovvero ad interrompere l'esecuzione stessa. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo della nostra Società, nonché a tutti gli Organismi sociali ed ai soci i medesimi dati potranno essere inoltre comunicati agli omologhi soggetti di società da noi controllate o collegate, ovvero di società che controllano l'attività della nostra Società. I dati relativi all'indirizzo saranno utilizzati per l'invio di riviste e attività commerciali. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D.lgs. 196/03 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica e l'integrazione dei vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Il titolare del trattamento è BeC srl con sede in Viterbo Strada Teverina km 3.600 nella persona del suo legale rappresentante. Qualsiasi comunicazione o atto ufficiale potrà essere inviato dall'inserzionista presso la redazione di infodent con sede in Viterbo Strada Teverina km 3.600.



Dental Shine

Laboratorio & Milling Center - Roma Nord

Autorizzato Wieland

www.dentalshine.it 06. 3081 6021

Progetti CAD Dental Wings, Rhinoceros, Dental Shaper

Fresatore 5 assi robotizzato Wieland T1

Corone, ponti ed overdenture integrali in zirconia

Materiali originali Wieland garantiti 10 anni





a Roma. Esperienza e massima serietà. Per informazioni telefonare al 335.8277093.

- Igienista dentale laureata, con esperienza pluriennale, offre collaborazione a studio odontoiatrico in Roma. Telefonare al 338.9165431.
- Igienista dentale, con esperienza, offre collaborazione presso studi odontoiatrici, anche 1-2 giorni settimanali. Telefonare al 340.5941190.
- Igienista dentale, laureata, esperienza pluriennale, referenze, capacità comunicative, presenza, max serietà, offre collaborazione presso studi odontoiatrici in Roma. Telefonare al 339.4429053.
- Implantologo, titolare di studio, esperienza pluriennale, disponibile con propria attrezzatura e strumentario, offre consulenze o collaborazioni anche per chirurgia orale e parodontale a studi odontoiatrici del Lazio. Eventuale direzione sanitaria. Massima serietà. Telefonare al 340.3749265.
- Laboratorio odontotecnico altamente specializzato in protesi fissa mobile offre collaborazione a studi odontoiatrici. Listino prezzi interessante. Telefonare al 338.5444300.
- Medico chirurgo odontoiatra offre propria collaborazione presso studi dentistici del Lazio. Telefonare al 334.9747788 o.p.
- Medico chirurgo odontoiatra, con buona esperienza in medicina biologica (omotossicologia, fitoterapia ecc.), offre consulenze in studi odontoiatrici e medici. Telefonare allo 06.78344345 o.p.
- Medico dentista offre collaborazione presso studi odontoiatrici. Telefonare al 339.7125724 o allo 06.9625723.
- Medico-dentista, esperienza pluriennale, offre collaborazione a

studio odontoiatrico, zona Montecitorio (RM) e limitrofe. Massima serietà. Telefonare al 339.7553989.

- Medico-ortodontista, esperienza ventennale come consulente ortodontico in vari studi di Roma, offre propria collaborazione. Telefonare al 339.4580962 o inviare e-mail: claudio1123@virgilio.it.
- Odontoiatra medico chirurgo, esperienza ventennale, offre collaborazione presso studi Roma e dintorni. Telefonare allo 06.78344345 ore 13.30 circa.
- Odontoiatra, con esperienza, offre collaborazione in altrui studio. Max serietà. Telefonare al 347.9439751.
- Odontoiatra, esperienza conservativa, endodonzia, parodontologia e ortodonzia, offre collaborazione presso altrui studi. Telefonare al 347.1349385.
- Odontoiatra, laureata nel 2001, con partita Iva, non titolare di studio, offre collaborazione per l'endodonzia (tecnica MTWO - Schilder a caldo), ricostruzioni post-endodontiche e conservativa, a Roma e Latina. Telefonare al 338.9515694.
- Odontoiatra, master in chirurgia orale, ventennale esperienza, numerose esperienze Asl a Roma, offre collaborazione in protesi, endodonzia, chirurgia a Roma e provincia. Telefonare al 349.8119680 pomeriggio.
- Odontoiatra, titolare di studio, esperto e qualificato, perfezionato in implantologia, parodontologia, chirurgia orale ecc., offre collaborazione o consulenze, con propria attrezzatura, presso studi dentistici di Roma e del Lazio. Telefonare al 349.6045286.
- Odontotecnico con esperienza decennale, partita Iva propria, offre collaborazione a laboratori odontotecnici, con pagamenti a percentua-

le. Telefonare al 338.5444300.

- Odontotecnico, con proprio laboratorio in Frascati (RM) specializzato in protesi fissa, mobile tradizionale e su impianti, offre propria collaborazione a studi odontoiatrici di Roma e provincia. Listino interessante. Telefonare al 347.5956915.
 - Offresi collaborazione presso studio medico dentistico in Roma, zona Centocelle e limitrofe, nei giorni di martedì e giovedì mattina. Assistenza e mansioni varie all'interno dello studio. Esperienza quasi ventennale. Cortesemente no perditempo. Telefonare al 339.6643867.
 - Ortodontista specialista in, si offre per consulenze presso studi di Roma e dintorni. Ortodonzia vestibolare, linguale, intercettiva, prechirurgica e Invisalign. Estesa documentazione fotografica. Telefonare al 329.5478180 o.s.
 - Ortodontista, con esperienza pluriennale in terapia fissa, funzionale ed ortopedica, offre collaborazione presso studi dentistici in Roma e regione Lazio. Telefonare al 339.8621289.
 - Parodontologia: esperta in parodontologia, titolare di studio, sarebbe disponibile per collaborazione 2 o 3 mattine a settimana. Telefonare allo 06.5913003 oppure al 335.435658.
 - Ragazza 44enne, assistente alla poltrona con esperienza, cerca part-time disponibilità tutte le mattine escluso il venerdì. Eventualmente venerdì pomeriggio e martedì anche giorno intero. Preferibilmente zona Monteverde (RM) e limitrofe. No sostituzioni maternità. Telefonare allo 06.5349249 o al 338.3078711.
- OFFRO ATTREZZATURA
- Banchi in metallo da laborato-

GIORGIA
ONLUS
2009

L'associazione di volontariato "Giorgia 2009" onlus, chiede a odontoiatri ed odontotecnici la disponibilità a prestare la propria opera professionale per un periodo di 10 gg. presso l'Ospedale Pediatrico di Kimbondo - Kinsahasa (RDC)

per info:

www.giorgia2009onlus.org

rio, marca Caws, a 1-2 posti, con cassettiere, nuovi, inusati, privato vende a ottimo prezzo. Telefonare al 328.3361913.

- Laboratorio odontotecnico vende: 1 mobile color verde con piano in acciaio completo di decantatore e lavandino per squadramodelli con porta - rifiuti 220x65, 1 mobile color verde con piano in acciaio con lavandino e decantatore completo di cappa per pullimentatrice o porta - rifiuti 326x65, 1 mobile color verde con piano in acciaio con lavandino e dacantatore completo di lavandino per squadramodelli 110x65, 1 mobile color verde con piano in acciaio porta macchinari completo di aspirazione per rapide 108x65, 1 mobile color verde con piano in acciaio con aspirazione completo di lavandino e lavabo per squadramodelli 310 x 65, 3 mobili color verde con piano in acciaio con 2 cassetti + 2 ante 310x65, 4 banchi di lavoro color verde con piano in acciaio 184x80 completi di lampade, aspirazione e rubinetti del gas, 90 articolatori seminuovi usati solo per dimostrazioni e fiere, completi di box per la posa su articolatori, 30 poltrone verdi per sala conferenze.

Facilità di esecuzione, minima invasività chirurgica, risultati certi.

Per il rialzo del seno mascellare.

synus lifting
SYSTEM

€ 789,00 +IVA

TECNICA A FRATTURA MINIMA CONTROLLATA

I singoli componenti del kit permettono di ottenere nella massima sicurezza il sollevamento mirato della membrana dal seno mascellare indipendentemente dal livello osseo residuo. L'utilizzo semplice della strumentazione in dotazione consente la facile ripetitività e predicibilità della tecnica con risultati certi.

visita il sito www.physioline.it

l'originale



Per i tuoi acquisti scegli **PHYSIOSHOP ON-LINE.**

PHYSIOLINE
BIOMEDICAL TECHNOLOGY

Via Garibaldi, 17 - 21100 Varese
Tel. 0332.284612 - Fax 0332.319620

Telefonare allo 06.8104750 o al 335.446223.

- Laboratorio vende attrezzature a prezzi sottocosto per cessata attività. Apparecchio per microsaldatura e fusioni dotato di: carrello porta bombole per ossigeno e gpl; miscelatore sottovuoto The Continental Whip Mix; sabbiatrice base 3 Dry Oxide; Dentalfarm; vaporizzatrice Vapor Klein VK3 Ivoclar; Ivomat IP3 apparecchio idropneumatico per la polimerizzazione e pressione; aspiratore minibox da banco; foragessi Stato Euclide; banco da lavoro per 2 posti Dental Art; mobile in metallo misura cm 165x200x74 con centrifuga elettronica inserita (marca Degussa), compresi cannelli per saldare. Telefonare al 389.9714113.

- Lampada Demetron LC della Kerr; lampada Visilux 2 della 3M, manipolo Endosonic Micromega, localizzatore apicale Foramatron IV, Kavoklave e Tau-Steril. In blocco o separatamente. Telefonare allo 06.78344345 ore 13,30 circa.

- Macchina galvanico Agc-Speed; fresatore Artiglio A6, ancora imballato, euro 6.000,00. Telefonare allo 06.2147217 o al 328.3833164. Riunito odontoiatrico marca Idem, faretra strumenti, completo poltrona multifunzione, nuovo, mai

usato, ancora imballato, ottimo prezzo, privato vende. Telefonare al 334.5035712.

- Riunito odontoiatrico nuovo mai usato Colibri / Idem, poltrona Ritter pelle, privato vende. Telefonare allo 06.44245364.

- Vendesi forno per ceramica Programat P300, 1 anno di vita, per errato acquisto. 60 ore di lavoro, 1.000,00 euro meno del nuovo. Telefonare al 333.8712266 o inviare mail a antpapo@tin.it.

- Vendesi sopra cappa Jolly Dental senza aspirazione.

Vendo aspiratore chirurgico carenato insonorizzato Durr, usato poco. Ottime condizioni, € 400,00. Per informazioni telefonare al 335.6752589.

- Vendo banchi da lavoro mod. Saratoga (L1m - P50 - H83) in metallo rosso, piano bianco, 2 cassetti con sportello vetro con attacchi micro-motore, turbina e siringa mod. Faro, euro 1.000,00 cadauno trattabili. Telefonare allo 06.5910679 ore pomeridiane dal lunedì al venerdì.

■ OFFRO ATTIVITÀ

- A colleghi medici odontoiatri si affittano unità operative odontoiatriche complete, in

studio prestigioso sito in Roma in viale Parioli. Lo studio è comprensivo del servizio di segreteria e di ogni attrezzatura necessaria anche all'implantologia. Telefonare al 339.2313983.

- Affittasi postazione lavorativa in laboratorio odontotecnico a collega, zona ex Fiera di Roma, a collega/i con proprio clientela. Telefonare al 328.3277320.

- Affittasi stanza adatta ad odontoiatra con propria clientela zona Fonte Nuova - Roma. Prezzo interessantissimo. Telefonare al 348.3401564.

- Affittasi studio odontoiatrico, con 2 unità operative attrezzate. Anche con segretaria. Zona Parioli (RM). Telefonare al 347.5809617.

- Affittasi unità lavorativa a collega, orari e giorni da stabilire, zona Auditorium (RM). Telefonare al 338.1537794.

- Affitto studio odontoiatrico, provincia di Perugia, a collega o igienista con p. Iva; possibilità di collaborazione. Lo studio è situato in elegante centro commerciale nel centro di Foligno (PG). Telefonare al 338.3457480 o allo 0742.353159.

- Affitto unità operativa completa, in studio odontoiatrico zona Salario-Parioli (RM). Telefonare allo

06.8415680 ore 9,00-12,30 dal lun al ven.

- Causa trasferimento vincita concorso, svendo studio odontoiatrico. Per informazioni telefonare al 331.2438222.

- Cedesi studio odontoiatrico, comprese mura, Ascoli centro, venticinquennale attività, 4 riuniti, 3 radiografici, 2 bagni, laboratorio, unità sterile, tutto a norma. Telefonare al 339.7895939.

- Offro a odontotecnico, con propria attrezzatura, anche minima, la possibilità di lavorare nel mio laboratorio, autorizzato, dividendo costi di gestione. Possibilità di collaborazione. Telefonare al 348.3401564.

- Studio dentistico, completamente attrezzato, con 2 unità operative, affitta a odontoiatri con propria clientela 1-2 giorni la settimana. Zona Montesacro (RM). Telefonare al 328.9685750 o allo 06.8189641.

- Studio dentistico, funzionale, situato in Anzio centro (RM), affitta unità operativa a odontoiatra con propria clientela. Giorni da concordare. O vendesi. Telefonare al 389.9714113.

- Tivoli (RM) affittasi studio odontoiatrico, centralissimo, completamente attrezzato (2 riuniti), più 2 stanze non arredate. Telefonare al 339.8018316.

www.expodiatunno.it



25-26 novembre 2011 - Milano



UNIVERSITÀ DEL NORD IN COLLABORAZIONE CON IL COLLEGIO DEI DOCENTI DI ODONTOIATRIA

25-26 novembre 2011
Ata Hotel Quark - Via Lampedusa 11/A - MILANO

5° EXPODIAUTUNNO

VALORE E SOSTENIBILITÀ
DELLA QUALITÀ IN ODONTOIATRIA

Presidenti del Congresso
Antonella Polimeni
Antonino Salvato

Direttori Scientifici
Franco Santoro
Roberto Weinstein

Presidenti del Comitato Organizzatore
Giampietro Farronato
Enrico Felice Gherlone

Presidente del Comitato Promotore
Laura Strohmenger

Presidenti Comitato Ricerca
Antonio Carrassi
Riccardo Ciancaglini



B2B Consulting srl - Via Nurallao, 15 - 00050 Aranova ROMA
Tel.: 06-6678138 - Fax: 06-61709413
b2b@b2bconsultingari.com - www.infob2bconsultingari.com
Provider E.C.M. n. 1392

INGRESSO GRATUITO

curati e coccolati!



INS-TT-13-04-10-GELNESS

gelness

La nuova poltrona con inserti
in gel tecnico medicale

Da 50 anni vi siete presi cura di milioni di pazienti utilizzando i nostri prodotti. Da oggi potrete anche **coccolarli** con **Gelness**, la nuova poltrona con inserti in gel tecnico di uso medicale; i pazienti oggi potranno percepire un livello di comfort sino ad ora sconosciuto, grazie al gel tecnico brevettato da **Bayer** ed utilizzato nella **poltrona Gelness**, alla imbottitura soffice ed avvolgente, ed al nuovissimo design morbido e moderno.

EURODENT
Treat yourself!

www.eurodent.it



IL PROBLEMA



**EFFETTO VETRO NELLE RICOSTRUZIONI
IN COMPOSITO CON ALONE
GRIGIO SUL MARGINE**

LA SOLUZIONE



**MARGINI INVISIBILI, RIPRODUCENDO
CON HRi LO STESSO SPESSORE
DELLO SMALTO NATURALE**



Restaurò eseguito dal Dr. L. Vanini con dentine e smalto Enamel plus HRi

OFFERTA SPECIALE KIT CHR4



Kit HRi 4 colori x 2,5g

3 Dentine: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4)
1 Smalto Universale UE2

o soli
99 € + iva
valore 150 € + iva

estetica
M
GRUPPO
MICERIUM

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83 -
16036 Pievegno (GE)
Tel. 0185 7887 870
Fax 0185 7887 970
www.micerium.it
micarium@micarium.it

Compila il coupon e lo spedisca a: Micerium S.p.A. Via Marconi, 83 - 16036 Pievegno (GE) o per fax al numero 0185 7887 970

Desidero ricevere: Trial Kit Enamel Plus HRi • Ref. CHR4 99 € + iva

Dr. _____ Tel. _____

Via _____ Cap _____

Città _____

Data Firma _____

Il presente coupon è valido fino al 31/12/2011. Sono escluse le partecipazioni e le vendite dirette. Sono escluse le partecipazioni e le vendite dirette. Sono escluse le partecipazioni e le vendite dirette.